



Plafondliften



Voordelen van een plafondlift

- ✓ Een groot voordeel van plafondtilliften is hun continue beschikbaarheid en een tijdswinst van 60-120 sec. per transfer.
- ✓ Minder fysieke belasting voor zorgverleners
- ✓ Meestal is er één mobiele tillift per afdeling beschikbaar, die op verschillende kamers wordt ingezet. Een plafondtillift bespaart tijd en middelen, omdat alles wat u nodig heeft voor een transfer altijd bij de hand is.
- ✓ Door gebruik te maken van plafondtilliften is er minder ruimte nodig voor stalling van tilhulpmiddelen.
- ✓ Op kamers waar de tilcassette niet nodig is, vormen onze GH1F & GH1Q omwille van hun flexibel karakter geen 'storend' element in de kamer.
- ✓ Plafondtilliften nemen geen vloeroppervlak in beslag, waardoor de liften ook goed te gebruiken zijn in kleinere ruimtes.
- ✓ De mobiele tilcassette is eenvoudig aan te koppelen en los te koppelen van de beweegbare rail. Door alleen tilcassettes toe te passen waar dat nodig is, kan bespaard worden op de kosten.

“Een plafondliftsysteem is gebruiksvriendelijk,
bevordert ergonomisch tillen en is altijd klaar
voor gebruik.”



Guldmann is wereldwijd marktleider op het gebied van plafondtilliften. Hierdoor kunnen wij onze klanten garanderen dat zij gebruik maken van plafondtilliften van de hoogste kwaliteit. De tilliften van Guldmann hebben een gegarandeerde levensduur van 15 jaar; de accu's hebben een levensduur van ten minste 20.000 tilhandelingen.

BEKA Hospitec adviseert en begeleidt haar klanten intensief bij het samenstellen van tilliften en accessoires, om de transfer van bewoners zo comfortabel mogelijk te maken.



GH1

Vaste plafondlift GH1: Compact en discreet

- Opladen via handset en muurlader
- Vierpunts kapstokjuk met snelkoppeling
- Digitale klasse III weegunit met snelkoppeling optioneel beschikbaar

De GH1 is een zeer compacte en gebruiksvriendelijke vaste tillift voor dagelijks gebruik. De tillift is te gebruiken in combinatie met verscheidene accessoires en in diverse railsystemen. Het tilsysteem wordt standaard voorzien van twee verschillende soorten side covers, waardoor u de kleur van de tillift zo kunt aanpassen dat de tillift zo min mogelijk op valt.



GH1 F



Flexibele Plafondlift GH1F: Een tilcassette voor meerdere kamers

- Doordat de cassette zichzelf automatisch tot in de rail optrekt, wordt de belasting van het verzorgend personeel vermeden.
- Doordat bij de transfer van de bewoner alleen het juk naar beneden komt is de GH1 F te gebruiken in combinatie met meerdere accessoires (weegunit, frame liggend tillen, obese-juk)
- Opladen via muurlader en/of via de transportwagen

De GH1F tilcassette is een plafondlift die ingezet kan worden in meerdere kamers. De bediening van deze flexibele plafondlift is eenvoudig, ergonomisch en kan door de zorgverlener worden uitgevoerd. De tilcassette wordt tussen de ruimtes verplaatst in een transportwagen. Het is een ideale oplossing voor zorginstellingen waar niet permanent in elke ruimte een tilcassette aanwezig hoeft te zijn.



GH1 Q



Flexibele plafondlift GH1 Q - Eenvoudig koppelen en ontkoppelen

- Eenvoudig koppelen en ontkoppelen
- Makkelijk te verplaatsen tussen verschillende ruimtes.
- Opladen via handset en muurlader





GH3

Vaste plafondlift GH3 - Betrouwbare tilcassette, altijd klaar voor gebruik

- Altijd klaar voor gebruik dankzij continu opladen via de rail
- Te gebruiken in combinatie met meerdere accessoires (vierpunts kapstokjuk, kanteljuk, externe weegunit, frame liggend tillen, obese-juk)
- Mogelijkheden voor geïntegreerde weegunit, af te lezen op handbediening en Care Lift Management-systeem via kabel of Wifi.

De GH3 tilcassette is een plafondlift die zich permanent in de rails bevindt en altijd klaar is voor gebruik. Overal in het railsysteem wordt de tilcassette opgeladen. Omdat de tilcassette altijd binnen bereik is, gaat de transfer beduidend sneller dan met een mobiele tillift.



Accessoires



Kapstokjuk met 4 aanhechtingspunten



Elektrisch kanteljuk



Kruisjuk



Horizontaal juk



Externe weegunit



Tilbeugel

Revalidatie





Trainer Module

- De dynamische gewichtsondersteuning van de GH3+ zorgt ervoor dat de zorgvrager ondersteund wordt tot het niveau wat voor hem/haar wenselijk is. Ideaal voor vroege mobilisatie en revalidatie.

Traverse- en Lift slot: Eén systeem - veel opties

- Door de vergrendelingen in de parallelle rails te activeren, kunt u de zijwaartse beweging van de dwarsrail blokkeren. Dit betekent dat de dwarsrail zich nu gedraagt als een enkele vaste rail. De module kan nog steeds naar voren bewegen in de dwarsrail voor bijvoorbeeld staprevalidatie.
- Door alleen de vergrendeling te activeren die op de hefmodule is aangesloten, kunt u de dwarsrail verplaatsen zonder zijdelingse verplaatsing van de module.
- Door de drie vergrendelingen te activeren, kunt u de module in een bepaalde positie volledig blokkeren, bijvoorbeeld voor revalidatieoefeningen in bed.

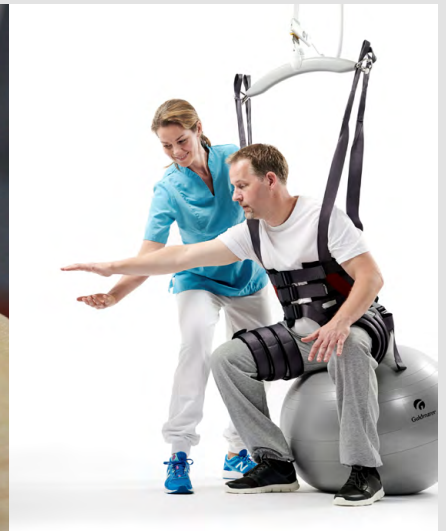

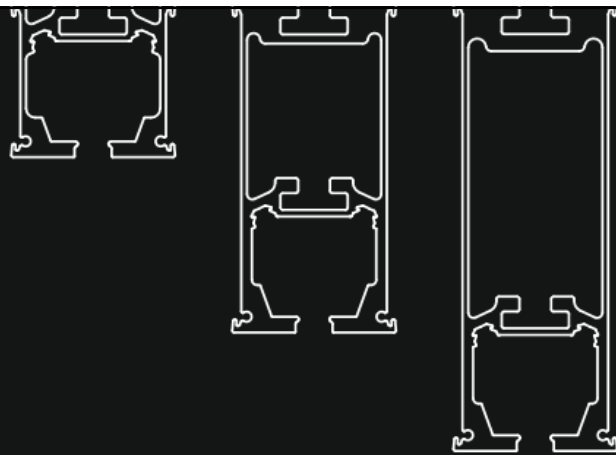

Rails

Ons streven is om de plafondtilliften naar wens van de klant te monteren. Daar gaan we heel ver in. We bieden diverse oplossingen, waarmee de railsystemen volledig in het plafond geïntegreerd worden. Dit alles met één doel: een tilsysteem aanbieden dat een integraal onderdeel is van uw gebouw.

Het modulaire ontwerp van de rails maakt het mogelijk om de verschillende railsystemen naar wens te combineren, aan te passen en uit te breiden door gebruik te maken van wissels, draaitafels of een combi-lock.

Alle rails zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium, dat extreem goed bestand is tegen corrosie. De rails zijn daarom ideaal voor gebruik in natte en vochtige ruimtes. De rails zijn ook verkrijgbaar in het wit (RAL 9016).



Monorail

De tillift in een monorail kan door de zorgverlener verplaatst worden van links naar rechts. De monorail wordt gebruikt als los systeem of als onderdeel van een gekoppeld railsysteem.



Ontworpen om discreet te zijn

Om ervoor te zorgen dat de vaste monorails zo min mogelijk zichtbaar zijn, kunnen deze helemaal ingewerkt worden in het valse plafond. Het valse plafond kan op deze manier rusten op de profielen die aan de rail worden voorzien.

Om zichtbare rails zo min mogelijk te laten opvallen kunnen deze worden gekleurd in bijvoorbeeld dezelfde kleur als het plafond.



XY Plafondsysteem

Het XY-systeem is een systeem met twee vaste monorails, waar een beweegbare rail tussen wordt geplaatst. Met deze oplossing kan de plafondtiltlift naar links, naar rechts, voren en naar achteren worden verplaatst. Dit zorgt ervoor dat elke hoek van de ruimte bereikbaar wordt. Dit zorgt voor een maximale flexibiliteit.

- Complete bewegingsvrijheid
- Systeem past zich aan de gebruiker
- Weinig ruimte nodig voor transfer




Wandrail

De wandrail werkt op dezelfde wijze als het XY plafondsysteem, maar kan op elke type wand gemonteerd worden. Hierdoor worden ingrijpende bouwkundige aanpassingen overbodig.

Bij de ontwikkeling van de wandrail is er rekening mee gehouden dat hulpmiddelen zo min mogelijk opvallen. Zo wordt de tilmotor, indien gewenst, geplaatst in een opbergkast, sluit de traverserail de opening tussen plafond en de wand af en kunnen er schilderijhaakjes geplaatst worden. De wandrail wordt hierdoor multifunctioneel.



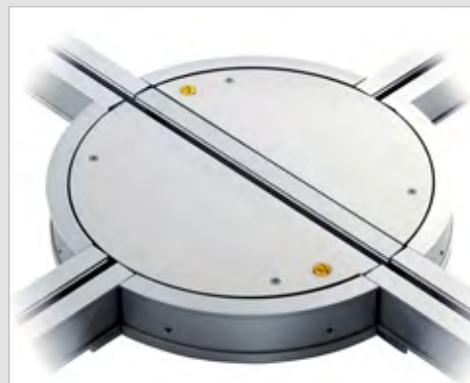

Draaiplateau & wissel

Met wissels en draaiplateau verbindt u op een gebruiksvriendelijke manier meerdere rails met elkaar en vergroot u de bewegingsvrijheid van de zorgvrager.



Combi-lock

Het combi-lock stelt de zorgvrager in staat om het ene rail systeem op een veilige manier met de ander te verbinden. Op deze manier schakelt u een monorail eenvoudig aan een XY-systeem.


Flexibiliteit

Onze railsystemen zijn zó ontworpen dat de tilcassettes zo eenvoudig mogelijk hun weg vinden binnen uw gebouwen. Er wordt gebruik gemaakt van bochten, combi-locks, wissels en rotondes om de reikwijdte van de plafondtillift zo groot mogelijk te maken. Door deze slimme oplossingen, is zelfs het kruisen van deurdoorgangen en gordijnrails geen enkel probleem. Onze railsystemen zorgen voor flexibiliteit en comfortabele transfers, zowel voor cliënt als verzorgende.




Voorbeelden


XY systeem in de centrale badkamer

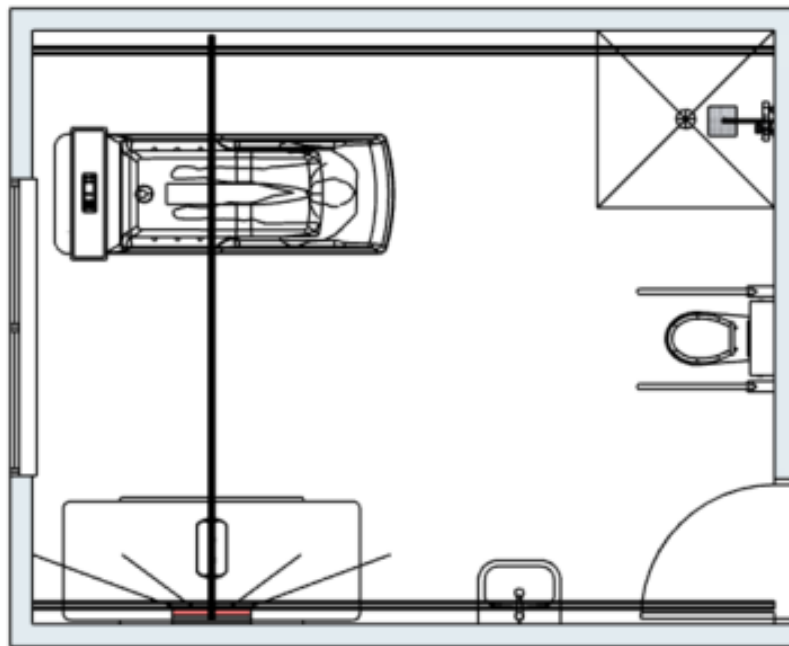


Monorail in kamer

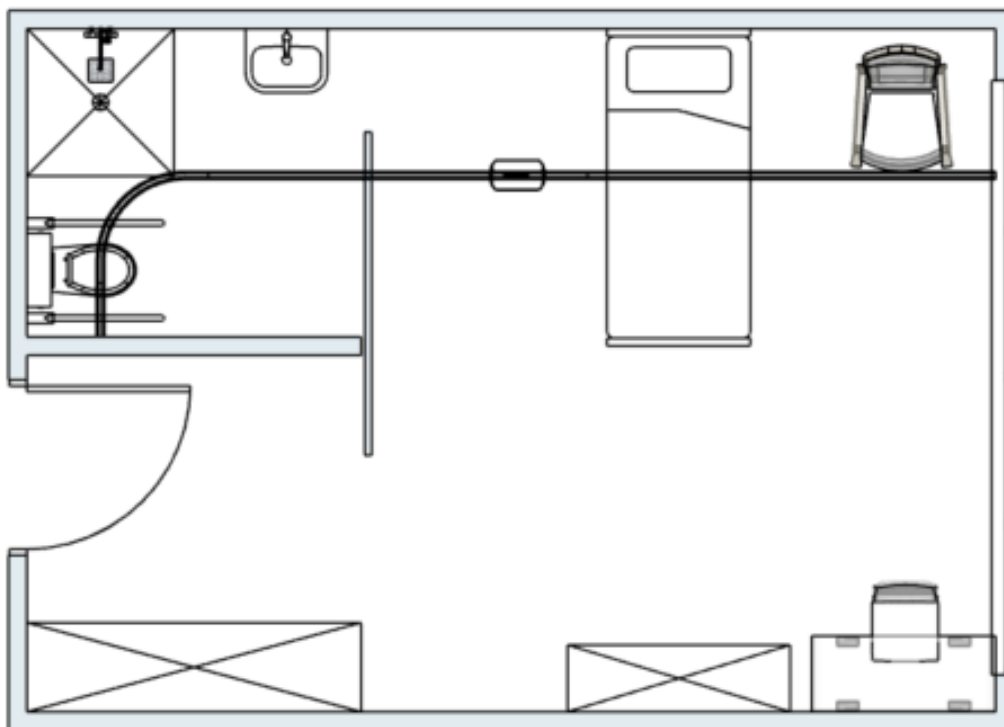


Technische gegevens

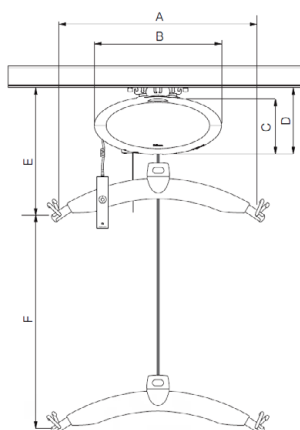


Capaciteit	175kg, 205kg, 255kg
A	580mm
B	350mm (diepte 194mm)
C	156mm
D	184mm
E, min	415mm
F	2500mm
Onderkant rail-onderkant billen	1.385mm
Gewicht	8kg
Weegunit	Klasse III, extern
Tiljuk	2 puntsjuk
Laden	Via handset en muurlader

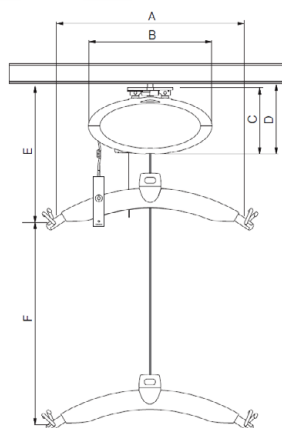

Capaciteit	175kg, 205kg, 255kg
A	580mm
B	350mm (diepte 194mm)
C	187mm
D	196mm
E, min	427mm
F	2500mm
Onderkant rail-onderkant billen	1.397mm
Gewicht	8kg
Weegunit	Klasse III, extern
Tiljuk	2 puntsjuk
Laden	Via handset en muurlader

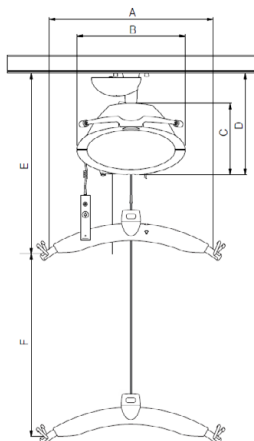

Capaciteit	175kg, 205kg, 255kg
A	580mm
B	350mm (diepte 194mm)
C	230mm
D	330mm
E, min	580mm
F	2500mm
Onderkant rail-onderkant billen	1.550mm
Gewicht	11kg
Weegunit	Klasse III, extern
Tiljuk	2 puntsjuk
Laden	Via handset en muurlader of transportwagen

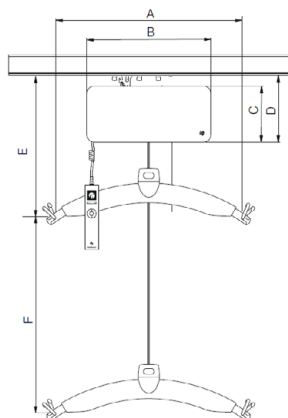

Capaciteit	200kg, 250kg, 375kg
A	580mm
B	345mm (diepte 205mm)
C	156mm
D	184mm
E, min	425mm
F	500mm
Onderkant rail-onderkant billen	1.395mm (kanteljuk: 1.333mm)
Gewicht	9,6kg
Weegunit	Klasse III, intern of extern
Tiljuk	2 puntsjuk of kanteljuk
Laden	Continue lading via de rail of via handset en muurlader

Stroomvoorziening	100-240V AC, 47-63Hz
Beveiliging	Noodstop en nooddaling

GH1
175kg, 205kg, 255kg
580mm
350mm (diepte 194mm)
156mm
184mm
415mm
2500mm
1.385mm
8kg
Klasse III, extern
2 puntsjuk
Via handset en muurlader

GH1 Q	
175kg, 205kg, 255kg	
580mm	
350mm (diepte 194mm)	
187mm	
196mm	
427mm	
2500mm	
1.397mm	
8kg	
Klasse III, extern	
2 puntsjuk	
Via handset en muurlader	

GH1 F
175kg, 205kg, 255kg
580mm
350mm (diepte 194mm)
230mm
330mm
580mm
2500mm
1.550mm
11kg
Klasse III, extern
2 puntsjuk
Via handset en muurlader of transportwagen

GH3	
	200kg, 250kg, 375kg
	580mm
	345mm (diepte 205mm)
	156mm
	184mm
	425mm
	500mm
	1.395mm (kanteljuk: 1.333mm)
	9,6kg
	Klasse III, intern of extern
	2 puntsjuk of kanteljuk
	Continue lading via de rail of via handset en muurlader

Stroomvoorziening	100-240V AC, 47-63Hz
Beveiliging	Noodstop en nooddaling



BEKA Hospitec bv is de Belgische vestiging van de Duitse fabrikant van technische hulpmiddelen voor zorginstellingen. Onze producten worden gekenmerkt door een modern en verfijnd ontwerp en de hoogste afwerkingskwaliteit. Met onze meer dan 50 jaar ervaring ondersteunen we planners, architecten en besluitvormers bij de inkoop van hoog-laag baden en verschillende soorten tilliften. Onze klanten waarderen onze brede expertise en knowhow, onze kwaliteit en betrouwbaarheid.



Made in Germany

Gebruik van hoogwaardige materialen en "made and designed in Germany" waarborgen een hoog kwaliteitsniveau.



Comfort

Het comfort en gebruiksgemak voor zowel de bewoner als de zorgverlener staan centraal bij het ontwikkelen van elk product.



Design

Bij het ontwerpen van elke zorginstelling staat "huiselijkheid en een strak design" hoog op de prioriteitenlijst, bij ons is dat niet anders!



Veiligheid

Zowel op het gebied van hygiëne als ergonomie is de veiligheid van de bewoner en zorgverlener de prioriteit.

BEKA Hospitec bv

Oude Baan 46

B-2550 Kontich

0473/93 02 35

info@beka-hospitec.be

www.beka-hospitec.be