

ORCAM Read 3

Draagbaar voorleestoestel

- Teksten direct laten voorlezen
- Interactieve AI-assistent
- Inzetbaar als beeldschermloep
- Intuïtief, klein en licht
- Draagbaar
- Bluetooth verbinding mogelijk
- Merk : OrCam

De OrCam Read 3 is een revolutionair apparaat met drie hoofdfuncties: je gebruikt hem als draagbaar of als vast voorleesapparaat, maar hij werkt ook als een geavanceerde vergroter, waarmee je kunt inzoomen op afbeeldingen, wiskundige formules en verschillende soorten tekst, ook handgeschreven. Zo biedt de OrCam Read 3 een complete en flexibele oplossing voor het verrijken van jouw leeservaring.

Met behulp van hoogwaardige OCR-technologie (optische tekenherkenning) legt OrCam Read 3 gedrukte en digitale tekst vast en leest deze met hoge nauwkeurigheid, ongeacht het medium. Als gebruiker kan je ervoor kiezen om in je eigen tempo te lezen of je te laten bijstaan door het apparaat, dat de inhoud hardop kan voorlezen.

1e functie: een draagbaar leesapparaat

De OrCam Read 3 onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid en is in staat om alle soorten tekst te lezen, zowel gedrukte, handgeschreven als digitale teksten.

Net als zijn voorganger, de originele OrCam Read, kan dit apparaat onmiddellijk tekst lezen op elk oppervlak, of je nu thuis bent of onderweg. Het heeft ook een intelligente leesfunctie, ideaal om snel specifieke woorden in een document te vinden.



- Slim lezen
- Gebruik zonder internet
- Volledige pagina-opname


2e functie: een compacte beeldschermloep

Wanneer de OrCam Read 3 op de standaard (meegeleverd) wordt geïnstalleerd en verbonden is met een scherm (niet meegeleverd), transformeert hij zichzelf in een moderne, krachtige beeldschermloep.

Door hem aan te sluiten op je computer of tablet via WiFi, kun je elk scherm omtoveren in een vlot aanpasbaar digitaal vergrotingsloep met behulp van je OrCam account. Met het apparaat kun je inzoomen op allerlei inhoud, zoals tekst, afbeeldingen en andere visuele elementen. Hij biedt ook aanpassingsopties, zoals het veranderen van kleuren en achtergronden, om te zorgen voor een comfortabele leeservaring op maat van jouw behoeften.

- In- en uitzoomen
- Contrast aanpassen
- Kopiëren/plakken, opslaan
- Tekst hardop lezen

Opmerking: het lezen van handgeschreven tekst is alleen mogelijk wanneer de OrCam

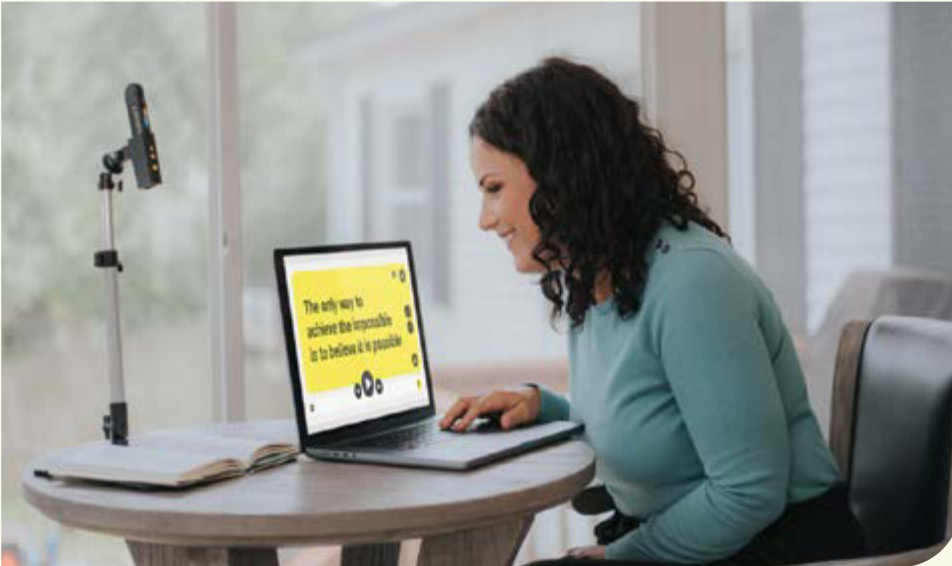

Read 3 via WiFi is verbonden met een computer. In dat geval wordt de handgeschreven tekst verwerkt en gelezen via een OrCam-toepassing die toegankelijk is via een webbrowser.

3e functie: een handenvrij voorleesapparaat

Voor moeiteloos lezen kan de OrCam Read 3 worden gebruikt in handenvrije modus. Plaats het apparaat op de meegeleverde standaard, maak het jezelf gemakkelijk en geniet van het voorlezen van jouw gedrukte of digitale tekst door het apparaat.

Deze modus is ideaal voor gebruik thuis. OrCam Read 3 wordt een autonome leesgezel, geactiveerd door stemcommando's of eenvoudige gebaren. Dankzij deze functie kun je genieten van een soepele en ontspannen leeservaring, zonder dat je iets hoeft te manipuleren.

- Spraakopdrachten
- Activering door eenvoudige gebaren

Schermen die compatibel zijn met OrCam Read 3

OrCam Read 3 heeft geen eigen scherm, maar kan worden aangesloten op verschillende soorten schermen, zoals een computer, laptop of tablet. Deze schermen moeten een internetverbinding en een browser hebben voor optimale compatibiliteit.

Opmerking: Telefoons zijn niet compatibel met OrCam Read 3 omdat hun scherm te klein is om effectief als vergroter te worden gebruikt.

Geleverd met

- OrCam 3 apparaat
- Schoonmaakdoekje
- Kabel
- USB-kabel
- Bedrade hoofdtelefoon
- Oplader
- Luidspreker
- OrCam Standaard

Technische kenmerken

Afmetingen
Gewicht
Taal

7,6 x 2,1 x 1,4 cm
22,5 gr
Frans, Engels, Duits

Batterij

Gebruikstijd: 4 uur

Verbinding

Wifi en Bluetooth alleen via computer en tablet

Compatibiliteit

Televisie, PC-scherm, Tablets

Contact

Sensotec HQ
Vlamingveld 8
B-8490 Jabbeke

Sensotec Antwerpen
Kempstraat 100
B-2030 Antwerpen

Consulenten
+32 50 39 49 49 | sales@sensotec.be

Service & Support
+32 50 40 47 47 | support@sensotec.be | www.sensotec.be