



Tilbanden

Voor elke situatie een passende oplossing

Natuurlijk in beweging

United Care richt zich op het innovatief ontwikkelen van transferhulpmiddelen voor zorg- en welzijnsorganisaties. Tevens zoeken wij naar passende oplossingen die gericht zijn op het behoud van zelfstandig leven, wonen en werken voor mensen met verminderde mobiliteit. Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden van onze klanten en niet hun beperkingen.

Kwaliteit en efficient

Bij alle diensten die wij leveren, gaan wij uit van onze eigen filosofie: 'Natuurlijk in beweging'. Ons streven is de mobiliteit van de zorgvrager zo optimaal mogelijk te behouden. Maar ook de fysieke belasting van de zorgverlener en de kwaliteit van de geleverde zorg hebben bij United Care hoge prioriteit. Daarbij dragen onze oplossingen bij aan de efficiëntie van de zorgprocessen, om zo de kwalitatieve hoogwaardige zorg voor de toekomst veilig te stellen.

Eigen naaiatelier

Van ontwerp, materiaalkeuze tot clip, alles wordt in eigen huis bepaald. Dankzij de jarenlange ervaring van onze medewerkers zijn onze tilbanden ontwikkeld met het oog op veiligheid en maximaal comfort voor de cliënt en gebruiksgemak voor de zorgverlener. Als innovatief bedrijf zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe ontwikkelingen in stoffen en andere materialen voor het vervaardigen van onze tilbanden.

Inhoudsopgave

De kunst van het kiezen	3
STAP 1: Verschillende modellen voor verschillende situaties	4
STAP 2: De juiste maat is alles!	7
STAP 3: Vier functionele materialen	8
STAP 4: Passende bevestiging	9
Tilbanden overzicht	10
STAP 1: Actieve tilbanden	14
STAP 2: Selecteer de juiste maat	15



De kunst van het kiezen

Verschillende factoren dragen op een aantal manieren bij tot het bepalen van de juiste tilband in elk individueel geval.

Uitgaande van de zorgvrager, zijn mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte, maar ook afhankelijk van het soort verplaatsing dat moet worden uitgevoerd, wordt eerst het model gekozen, dan de maat en daarna het materiaal van de tilband. Tenslotte worden de passende bevestiging, het tiljuk en alle toebehoren die nodig kunnen zijn voor een optimale tilbeweging gekozen.

Het doel is natuurlijk de veiligheid en het comfort te maximaliseren, maar door het juiste model te kiezen kunnen we de zorgvrager ook activeren, zelfs in verschillende tilsituaties.

In deze brochure helpen wij u stap voor stap de juiste tilband voor uw specifieke situatie te selecteren.

Zorgvrager/situatie



Model




Maat



Materiaal



Passende bevestiging
en tiljuk

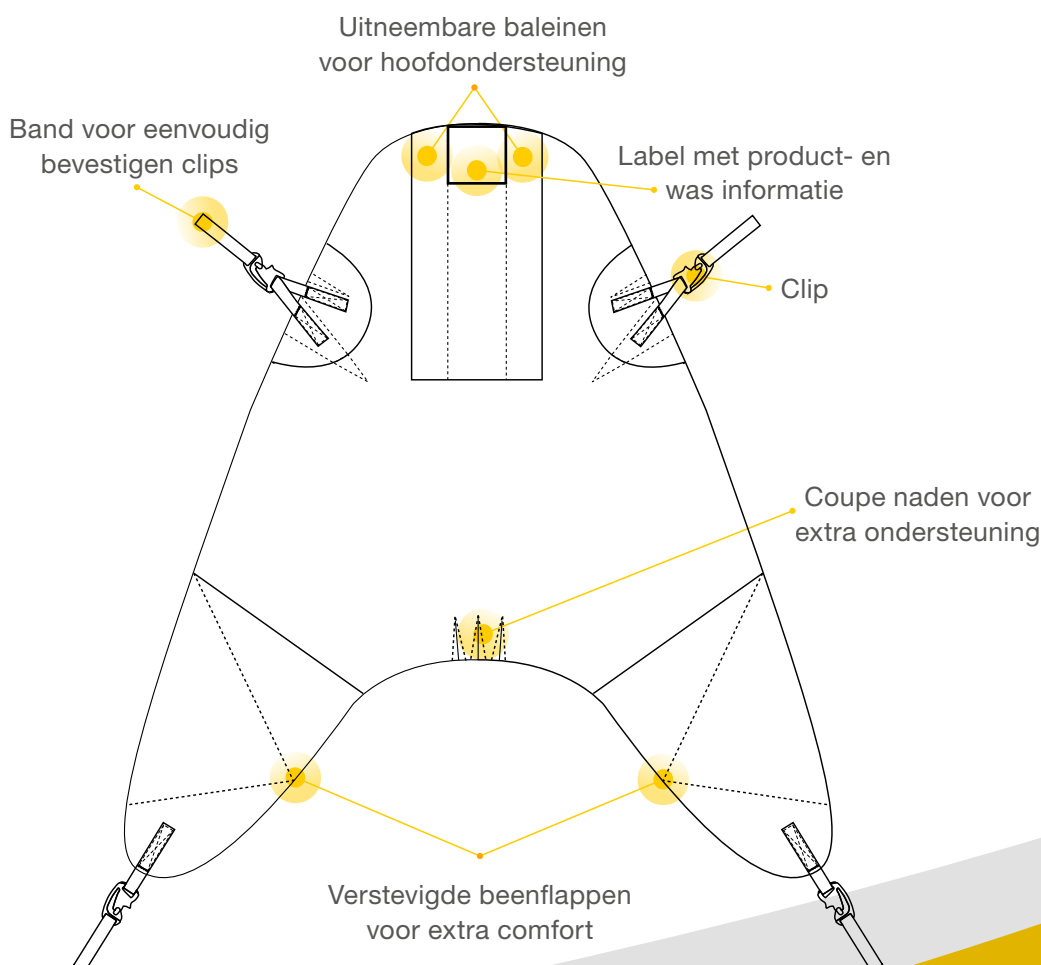

Verschillende modellen voor verschillende situaties

Standaard tilband



De standaard tilband is te gebruiken in combinatie met een passieve lift. De band is geschikt voor korte transfers tussen bijvoorbeeld bed, stoel en rolstoel of om een zorgvrager van de vloer te tillen.

- Comfortabel door groot ondersteuningsvlak van knieholte tot de kruin
- Omsluiting van het zitvlak door coupe-vorm voor meer comfort en veilig gevoel
- Hoofdondersteuning met versteviging door uitneembare baleinen
- Beenflappen verstevigd voor gelijkmatige drukverdeling
- Tilband dient verwijderd te worden na de transfer



Polyester



XXS XS S M L XL XXL

Verblijfsband



De verblijfsband is een comfortabele tilband waarop de zorgvrager langere tijd kan zitten. Deze tilband hoeft niet na elke transfer te worden verwijderd.

- Speciale comfort coupe waardoor tilband in de stoel kan blijven na transfer
- Meer omsluiting van de billen dan de standaard coupe, waardoor billen meer in de tilband ondersteund worden
- Bespaart handelingen en fysieke belasting van de zorg
- Minder risico op het ontstaan van decubitus bij de stuit als client op de tilband blijft zitten
- Ideaal wanneer aanbrengen en weghalen tilband pijnlijk/lastig is
- Kan alleen in liggende positie aangebracht worden



3D stof



Bamboe

XXS XS S M L XL XXL

Anti-spasme tilband



De ervaring leert dat door zo'n veilig, omsloten gevoel strekspasmen zelfs sterk kunnen verminderen.

De zorgvrager kan daarbij ook de kin meer naar de borst brengen.

- Voor cliënten met strekspasmes
- Voor cliënten die extreme bewegelijk zijn
- Voor cliënten met stoornis in spierspanning (dystonie)
- Is altijd een verblijfsband
- Voorzien van extra hoofdsteenbandjes, buikfixatie en extra lussen bij de beenslips
- Complete omsluiting geeft een comfortabel, veilig en rustig gevoel



Netstof



3D stof



Bamboe



XXS



XS



S



M



L



XL



XXL

Longseat tilband



De longseat tilband is een tilband die speciaal is ontwikkeld voor alle transfers van zorgvragers met een enkele of dubbele bovenbeenamputatie die geen druk op de stomp kunnen verdragen.

- Rechthoekige band zonder beenslips
- Vormt zich naar het lichaam van de gebruiker
- Te gebruiken met verbredingsstang voor meer ruimte tussen de benen
- Been clips of lussen worden via buitenzijde bovenbenen bevestigd aan het juk
- Longseat tilband kan alleen in liggende positie worden aangebracht/verwijderd



Netstof



3D stof



M



L



XL

Verschillende modellen voor verschillende situaties

Amputatie tilband



De amputatie-tilband is een tilband die speciaal is ontwikkeld voor alle transfers van zorgvragers met een enkele of dubbele bovenbeenamputatie.

- Comfortabele pasvorm met goede hoofdondersteuning
- Tilband loopt ver onder de stuit door voor extra ondersteuning voor zorgvrager zonder kniefunctie
- Voorzien van korte beenslips voor het omsluiten van de stomp
- Vereist dat zorgvrager druk op de stomp kan verdragen



Netstof



3D stof



Bamboe



M



L



XL



XXL

Bariatrische tilband



De bariatrische tilband heeft meerdere clips voor optimale ondersteuning van mensen met obesitas. Deze tilband is enkel te gebruiken in combinatie met een bariatrisch juk.

- Alleen te gebruiken in combinatie met bariatrisch juk
- Afzonderlijk tillen van de benen door een dubbele clipophang zorgt voor comfortabele drukverdeling op de benen
- Speciale pasvorm voor zorgvragers met ernstige obesitas
- 8 punts ophanging
- Geschikt tot 350 kg
- De Bariatrische tilband kan alleen in liggende positie worden aangebracht/verwijderd



Netstof

1 maat beschikbaar

Stap 1

Toiletband DeLuxe



Toiletband DeLuxe is specifiek ontworpen voor directe transfers van niet-mobiele zorgvragers naar het toilet. De band is voorzien van een hoofdsteen.

- De toiletband laat de billen vrij. Zo kan de zorgverlener de onderkleding naar beneden schuiven, waarna de zorgvrager kan plaatsnemen op het toilet
- Gemaakt van zacht en duurzaam polyester met een stevige beenpolstering
- Voor het gebruik van de toiletband is een goede schouderfunctie een vereiste
- Gebruik van toiletband DeLuxe voorkomt een extra transfer via het bed



Polyester

S M L XL XXL


Stap 2

De juiste maat is alles!

Om een transfer met een plafond- of mobiele tillift zo veilig en comfortabel mogelijk te laten verlopen, is het van groot belang dat de tilband de juiste maat heeft en dat het model geschikt is voor de specifieke zorgvrager en de tilsituatie. Om te bepalen welk model, welke maat en welk materiaal het meest geschikt zijn voor de individuele zorgvrager, is het **altijd nodig om individueel te passen**.

Meet voor een indicatie van de juiste maatvoering voor een passieve tilband de kruin-stuit hoogte op en voor een tilvest de buikomvang. Maak eventueel gebruik van ons Easy Fit meetlint om dit nog makkelijker op te meten (zie pagina 15).

Op pagina 10 is een overzicht te vinden van de beschikbare maten per model tilband. De exacte maatvoering dient altijd bepaald te worden door de tilband te passen bij de zorgvrager.

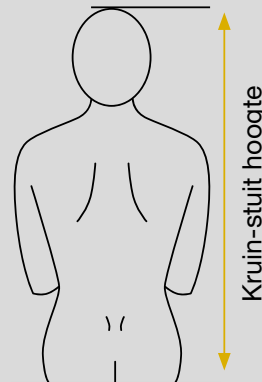

Maat	Kruin-stuit hoogte
XXS	45 - 60 cm
XS	60 - 80 cm
S	80 - 87 cm
M	85 - 90 cm
L	90 - 97 cm
XL	95 - 102 cm
XXL	102 - 106 cm

De tilband is te groot:

- Als het zitvlak van de zorgvrager te ver naar buiten schuift door de onderste opening
- Als de beenslips zich te veel in de knieholtes van de zorgvrager bevinden
- Als de hoofdsteen ver boven het hoofd uitsteekt

De tilband is te klein:

- Als het gezicht van de zorgvrager zich te dicht bij het tiljuk bevindt
- Als de beenslips schuren in de lies
- Als de tilband er te strak uitziet of te strak aanvoelt
- Als het hoofd (tot en met de kruin) niet voldoende ondersteund wordt


Vier functionele materialen

Polyester - Duurzaam voor kortdurend gebruik




Polyester is een geweven, sterk en glad materiaal. De stof is geschikt voor korte transfers. Een polyester tilband is gemakkelijk aan te brengen. Door de juiste structuur heeft dit wel de gewenste stroefheid bij het uitvoeren van de transfer. Mede door de weving en het gebruikte garen is de stof erg duurzaam en ontstaan er geen ladders in de stof. Polyester droogt zeer snel. Na het centrifugeren is het vrijwel droog en bijna direct opnieuw te gebruiken.

Netstof - Voor baden, douchen en standaard transfer

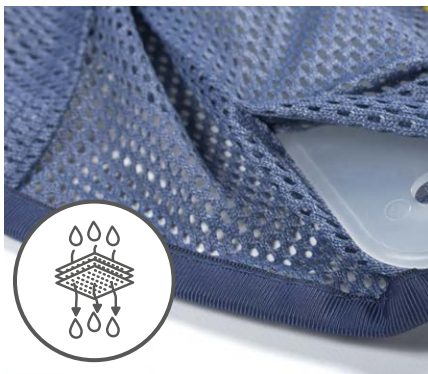

De waterdoorlatende netstof is ideaal voor een tilband die wordt gebruikt voor douchen of baden. De netstof is gemaakt van polyester, een geweven, sterk en glad materiaal. De stof is geschikt voor korte transfers. Een polyester tilband is gemakkelijk aan te brengen. Door de juiste structuur heeft dit wel de gewenste stroefheid bij het uitvoeren van de transfer. Mede door de weving en het gebruikte garen is de stof erg duurzaam en ontstaan er geen ladders in de stof. Polyester droogt zeer snel. Na het centrifugeren is het vrijwel droog en is het bijna direct opnieuw te gebruiken.

3D stof - Optimale vocht- en warmteafvoer, geschikt voor verblijfsband

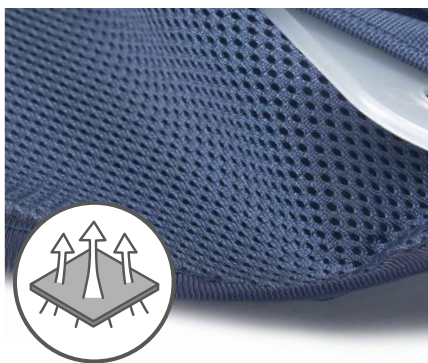

Onze 3D stof is een polyester met een zeer open structuur, waarbij de lagen materiaal op afstand van elkaar worden gehouden. Vocht- en warmteafvoer zijn optimaal doordat er aan de achterkant grotere gaatjes zitten dan aan de kant waarop de zorgvrager zit. Het materiaal neemt nauwelijks vocht op en stimuleert optimale transpiratie. Dit alles zorgt voor hetzelfde vocht- en warmte-afdrijvende effect als bij moderne sportshirts. Na het wassen en centrifugeren komt deze band al bijna droog uit de wasmachine en is deze alweer bijna klaar voor gebruik. Bijkomend voordeel van dit materiaal is dat het een dempende werking heeft bij het zitten.

Bamboe - Comfortabele stretch en warmteregulatie, ideaal voor verblijfsband



Bamboe is een gebreid textiel dat bestaat uit een combinatie van plantaardige, natuurlijke vezel (rayon) en een polyester garen en is daarnaast anti-bacterieel. Bamboe kenmerkt zich door de zachte structuur die fijn aanvoelt. Dit gebreide textiel heeft een comfortabele stretch-eigenschap waardoor de band zich vormt naar het lichaam tijdens het tillen. Door de breitechniek ontstaan microlusjes in het materiaal die de band een open structuur geven. Dit stimuleert het reguleren van de warmte. De natuurvezel van bamboe neemt vocht op. Daarom moet deze tilband wel even drogen voor hergebruik na het wassen.

Passende bevestiging

Wij bieden de keus uit 3 verschillende bevestigingstypes van de tilband aan de tillift.

Dit betreffen 2 type clips en 1 lus bevestiging passend bij het type tiljuk op de tillift.

De lussen passen uitsluitend op een tillift met een ophanging van lustilbanden en clip tilbanden uitsluitend op tilliften met zogenaamde padestoel ophanging.

Ontdek hier de verschillende bevestigingstypes:

De vertrouwde UCP-clip

De vertrouwde UCP-clip is eenvoudig te bevestigen aan het juk en zorgt voor een veilige transfer. Door de vormgeving makkelijk aan het juk te bevestigen. De nylon uiteinden maken het makkelijk om de clip vast en los te maken.



De IQ Clip, vast is zeker

Ongewenst losraken van de tilband is onmogelijk dankzij de dubbele beveiliging. Dat betreft in de eerste plaats de borging van de sluiting door een veer in de iQ-clip. Ten tweede maakt trekkracht aan de band door het gewicht van de cliënt het – dankzij de innovatieve vormgeving – onmogelijk dat de band losschiet. Ook als bijvoorbeeld een cliënt met spasmen de clip raakt, blijft deze gegarandeerd vastzitten.



Lussen: Gemak in eenvoud

De tilband met lussen is voorzien van meerdere lussen, zodat de hoek waarin de zorgvrager in wordt getild aangepast kan worden aan de situatie. Deze tilbanden kunnen uitsluitend worden gebruikt op jukken die geschikt zijn voor tilbanden met lussen. Alleen van toepassing op verblijfs- en de antispasme tilbanden.



Jukken



Tweepunts tiljuk

De standaard oplossing voor tilbanden met lussen. Verkrijgbaar in verschillende breedte maten.



Spin tiljuk

Geeft de grotere/zwaardere zorgvrager meer ruimte en een lichte kanteling achterover. Voor tilbanden met lussen.



Balans tiljuk

De zorgvrager kan handmatig in zittende of liggende positie worden gekanteld. Het tiljuk zorgt dat de positie in evenwicht blijft. Voor tilbanden met clips.



Elektrisch tiljuk

Elektrisch kantelbaar tiljuk waar de zorgvrager naar zittende of liggende positie gekanteld kan worden. Voor tilbanden met clips.



Bariatrische tiljuk

Geven zorgvragers tot 400 kg extra ruimte en comfort. Geschikt voor tilbanden met clips.

Tilbanden overzicht

Stap 1		Stap 2		Stap 3		Stap 4					
Model		Maatvoering		Bevestiging	Polyester	Netstof	3D stof	Bamboe			
Standaard		45 - 60 cm	XXS	UCP-Clip							
		60 - 80 cm	XS								
		80 - 87 cm	S								
		85 - 60 cm	M	IQ-Clip							
		90 - 97 cm	L								
		95 - 102 cm	XL								
		102 - 106 cm	XXL								
Verblijfsband		45 - 60 cm	XXS	UCP-Clip							
		60 - 80 cm	XS								
		80 - 87 cm	S	IQ-Clip							
		85 - 60 cm	M					Lussen			
		90 - 97 cm	L								
		95 - 102 cm	XL								
		102 - 106 cm	XXL								
Anti-spasme		45 - 60 cm	XXS	UCP-Clip							
		60 - 80 cm	XS								
		80 - 87 cm	S	IQ-Clip							
		85 - 60 cm	M					Lussen			
		90 - 97 cm	L								
		95 - 102 cm	XL								
		102 - 106 cm	XXL								
Longseat		85 - 60 cm	M	UCP-Clip							
		90 - 97 cm	L								
		95 - 102 cm	XL	IQ-Clip							
Amputatie		85 - 60 cm	M	UCP-Clip							
		90 - 97 cm	L								
		95 - 102 cm	XL	IQ-Clip							
		102 - 106 cm	XXL								
Bariatrisch		1 maat	UCP-Clip								
			IQ-Clip								
Toiletband DeLuxe		80 - 87 cm	S	UCP-Clip							
		85 - 60 cm	M								
		90 - 97 cm	L	IQ-Clip							
		95 - 102 cm	XL								
		102 - 106 cm	XXL								

Standaard Tilband




UCP-clips


iQ-clips

Omschrijving	Artikelnr.	Artikelnr.
Tilband Standaard, polyester XXS	30109050C	30109050Q
Tilband Standaard, polyester XS	30109051C	30109051Q
Tilband Standaard, polyester S	30109052C	30109052Q
Tilband Standaard, polyester M	30109053C	30109053Q
Tilband Standaard, polyester L	30109054C	30109054Q
Tilband Standaard, polyester XL	30109055C	30109055Q
Tilband Standaard, polyester XXL	30109056C	30109056Q
Tilband Standaard, netstof XXS	30109040C	30109040Q
Tilband Standaard, netstof XS	30109041C	30109041Q
Tilband Standaard, netstof S	30109042C	30109042Q
Tilband Standaard, netstof M	30109043C	30109043Q
Tilband Standaard, netstof L	30109044C	30109044Q
Tilband Standaard, netstof XL	30109045C	30109045Q
Tilband Standaard, netstof XXL	30109046C	30109046Q



Verblijfsband Tilband




UCP-clips


iQ-clips


Lussen

Omschrijving	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
Verblijfsband 3D stof XXS	30109110C	30109110Q	30109110P
Verblijfsband 3D stof XS	30109111C	30109111Q	30109111P
Verblijfsband 3D stof S	30109112C	30109112Q	30109112P
Verblijfsband 3D stof M	30109113C	30109113Q	30109113P
Verblijfsband 3D stof L	30109114C	30109114Q	30109114P
Verblijfsband 3D stof XL	30109115C	30109115Q	30109115P
Verblijfsband 3D stof XXL	30109116C	30109116Q	30109116P
Verblijfsband bamboe stof XXS	30101880C	30101880Q	30101880P
Verblijfsband bamboe stof XS	30101881C	30101881Q	30101881P
Verblijfsband bamboe stof S	30101882C	30101882Q	30101882P
Verblijfsband bamboe stof M	30101883C	30101883Q	30101883P
Verblijfsband bamboe stof L	30101884C	30101884Q	30101884P
Verblijfsband bamboe stof XL	30101885C	30101885Q	30101885P
Verblijfsband bamboe stof XXL	30101886C	30101886Q	30101886P

Anti-Spasme Tilband



UCP-clips



iQ-clips



Lussen

Omschrijving	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
Anti-spasme Tilband, netstof XXS	30101930C	30101930Q	30101930P
Anti-spasme Tilband, netstof XS	30101931C	30101931Q	30101931P
Anti-spasme Tilband, netstof S	30101932C	30101932Q	30101932P
Anti-spasme Tilband, netstof M	30101933C	30101933Q	30101933P
Anti-spasme Tilband, netstof L	30101934C	30101934Q	30101934P
Anti-spasme Tilband, netstof XL	30101935C	30101935Q	30101935P
Anti-spasme Tilband, netstof XXL	30101936C	30101936Q	30101936P
Anti-spasme Tilband, 3D stof XXS	30109120C	30109120Q	30109120P
Anti-spasme Tilband, 3D stof XS	30109121C	30109121Q	30109121P
Anti-spasme Tilband, 3D stof S	30109122C	30109122Q	30109122P
Anti-spasme Tilband, 3D stof M	30109123C	30109123Q	30109123P
Anti-spasme Tilband, 3D stof L	30109124C	30109124Q	30109124P
Anti-spasme Tilband, 3D stof XL	30109125C	30109125Q	30109125P
Anti-spasme Tilband, 3D stof XXL	30109126C	30109126Q	30109126P
Anti-spasme Tilband, bamboo XXS	30109030C	30109030Q	30109030P
Anti-spasme Tilband, bamboo XS	30109031C	30109031Q	30109031P
Anti-spasme Tilband, bamboo S	30109032C	30109032Q	30109032P
Anti-spasme Tilband, bamboo M	30109033C	30109033Q	30109033P
Anti-spasme Tilband, bamboo L	30109034C	30109034Q	30109034P
Anti-spasme Tilband, bamboo XL	30109035C	30109035Q	30109035P
Anti-spasme Tilband, bamboo XXL	30109036C	30109036Q	30109036P

Longseat Tilband



UCP-clips



iQ-clips

Omschrijving	Artikelnr.	Artikelnr.
Longseat, netstof M	30109343C	30109343Q
Longseat, netstof L	30109344C	30109344Q
Longseat, netstof XL	30109345C	30109345Q
Longseat, 3D stof M	30109313C	30109313Q
Longseat, 3D stof L	30109314C	30109314Q
Longseat, 3D stof XL	30109315C	30109315Q

Amputatie Tilband



UCP-clips



iQ-clips

Omschrijving	Artikelnr.	Artikelnr.
Amputatie Tilband, netstof M	30101543C	30101543Q
Amputatie Tilband, netstof L	30101544C	30101544Q
Amputatie Tilband, netstof XL	30101545C	30101545Q
Amputatie Tilband, netstof XXL	30101546C	30101546Q
Amputatie Tilband, 3D stof M	30101583C	30101583Q
Amputatie Tilband, 3D stof L	30101584C	30101584Q
Amputatie Tilband, 3D stof XL	30101585C	30101585Q
Amputatie Tilband, 3D stof XXL	30101586C	30101586Q
Amputatie Tilband, bamboe M	30101553C	30101553Q
Amputatie Tilband, bamboe L	30101554C	30101554Q
Amputatie Tilband, bamboe XL	30101555C	30101555Q
Amputatie Tilband, bamboe XXL	30101556C	30101556Q

Bariatrische Tilband



UCP-clips



iQ-clips

Omschrijving	Artikelnr.	Artikelnr.
Bariatrische Tilband	30101200C	30101200Q

Toiletband Deluxe



UCP-clips



iQ-clips

Omschrijving	Artikelnr.	Artikelnr.
Toiletband Deluxe S	30109602C	30109602Q
Toiletband Deluxe M	30109603C	30109603Q
Toiletband Deluxe L	30109604C	30109604Q
Toiletband Deluxe XL	30109605C	30109605Q
Toiletband Deluxe XXL	30109606C	30109606Q

Opties Tilbanden

Omschrijving	Artikelnr.
Extra UCP-clips, per stuk	32109922
Extra coupenaden	32109920
Plaatsen borstfixatie	30100370
Plaatsen hoofdsteunbandjes	32109923
Plaatsen beenlus	32109928

Omschrijving	Artikelnr.
Verlengde beenslips (10 cm)	32109929
Vulstof 3D stof i.p.v. PE schuim (soft leg)	32109947
Been clip verbreder (amputatiebeugel 20 cm)	32400110
Lussen aan cliphaak	32400200

Actieve tilbanden

Lowzone tilband



De lowzone tilband geeft goede rugondersteuning bij gebruik van een actieve lift. Dit geeft de zorgvrager nét dat extra stukje ondersteuning bij het opstaan.

- Gemaakt van polyurethaan schuim. Dit zorgt voor optimale drukverdeling bij het opstaan.
- Het polyurethaan schuim heeft een vochtregulerende werking.
- Voorzien van comfortabel en makkelijk uitwasbare zachte fleecy hoes
- Plaatsing laag in de onderrug
- Gemakkelijk aan te brengen

Tilvest DeLuxe



De Tilvest DeLuxe is een rugband die zorgvragers extra veel ondersteuning biedt bij het gaan staan in een actieve lift.

- Voorzien van buikband voor extra veel ondersteuning in de rug bij gebruik van een sta-op-lift.
- Klittenband en fixatiegordel met klikgesp
- Comfortabele okselrollen van schuimrubber voor optimale drukverdeling
- Extra stabiliteit voor mensen die een arm- of beenfunctie missen
- Brede rugband voor comfortabele plaatsing tegen de onderrug




Polyester

● ● ● ● ●
 S M L XL XXL

Stap 2

Selecteer de juiste maat

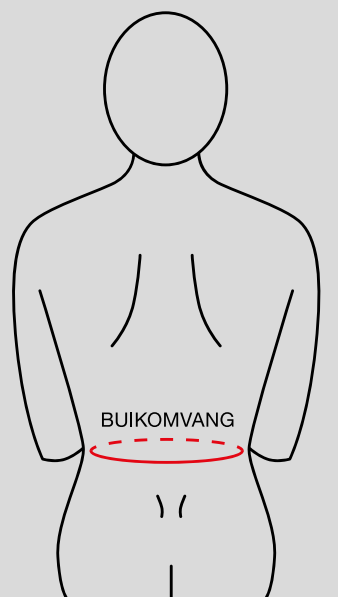

Maat	Buikomvang t.b.v. tilvest
● S	58 - 79 cm
● M	75 - 109 cm
● L	106 - 143 cm
● XL	132 - 149 cm
● XXL	139 - 159 cm

Easy Fit

**Meet met gemak,
til met vertrouwen**

Met het Easy Fit meetlint is het heel eenvoudig om de juiste maat tilband te selecteren. Het meetlint geeft namelijk direct aan welke maat tilband passend is voor de opgemeten maatoering bij de zorgvrager. Scan de QR-code om te zien hoe eenvoudig de Easy Fit meetlint werkt.



Lowzone Band



UCP-clips



iQ-clips

Omschrijving	Artikelnr.	Artikelnr.
Lowzone Band (106 cm)	10109034C	10109034Q

Controleer altijd de geselecteerde maatvoering door de tilband te passen alvorens deze in gebruik te nemen.

Tilvest Deluxe



UCP-clips



iQ-clips

Omschrijving	Artikelnr.	Artikelnr.
Tilvest Deluxe S	30100352C	30100352Q
Tilvest Deluxe M	30100353C	30100353Q
Tilvest Deluxe L	30100354C	30100354Q
Tilvest Deluxe XL	30100355C	30100355Q
Tilvest Deluxe XXL	30100356C	30100356Q





GEFABRICEERD DOOR:



UniQare Quality Slings B.V.

Bremenweg 5
9723 TC Groningen, Nederland
Tel: +31 (0) 50 - 30 50 980
www.uniqare.nl
info@uniqare.nl

GEDISTRIBUEERD DOOR:



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

United Care BV

Bremenweg 5
9723 TC Groningen, Nederland
Tel: +31 (0) 50 - 30 50 900
www.unitedcare.nl
info.unitedcare@directhealthcaregroup.com