


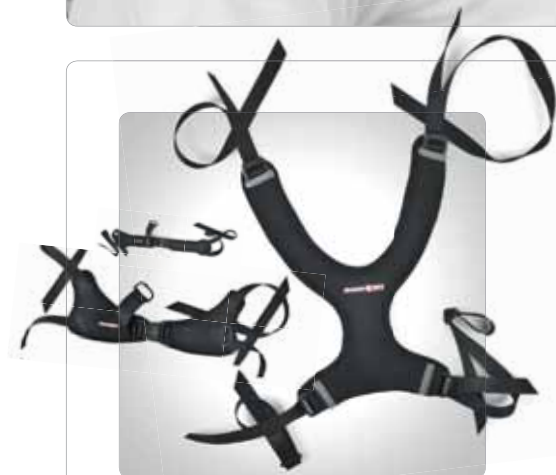

Fixaties

Sinds begin jaren '90 produceert Anatomic SITT een eigen lijn fixaties. Dit heeft ons veel kennis opgeleverd m.b.t. diverse uitdagingen bij positioneringsproblemen. Met trots presenteren wij u dan ook de Soft Pro serie. Tijdens de ontwikkeling is gebruik gemaakt van de waardevolle inbreng van onze cliënten.

De nieuwe fixaties en gordels zijn gemaakt van sterker materiaal, bieden meer mogelijkheden en zijn verkrijgbaar met verschillende sluitingen.



Art no. 7022 & 3719

Houder tussen de duwhandvatten

De houder tussen de duwhandvatten wordt rond de rugbuizen/duwhandvatten van de rolstoel gemonteerd. Ze passen rond rugbuizen die variëren tussen de 20- en 30mm. Een insteek voor de hoofdsteun is inbegrepen en, indien gewenst, kunt u tevens een verhogingssetje voor rompfixaties bijbestellen.

Op de afbeelding links ziet u de universele accessoirehouder (Art.nr. 7022) en verhogingsset (Art.nr. 3719).



Uitwasbaar op 60°

Al onze rompfixaties en heupgordels kunnen op 60° gewassen worden. Alle materialen zijn water- en vuil afstotend en gemakkelijk af te nemen.



Rompfixaties

Het **rompfixatievest** en het **rompfixatievest met rits** bieden op een comfortabele manier steun/druk op het borstbeen. **H-fixatie**: De gebogen vorm van de gepolsterde schouderbanden biedt extra steun bij het controleren van extreme schouder rotatie. Kan ook gebruikt worden om unilaterale rotatie van de romp te controleren.



Handig demonstratie en testmateriaal



Heupgordels

Een heupgordel is minstens zo belangrijk als een anti-decubitus kussen. Met 2 montagepunten aan iedere kant, stabiliseert de heupgordel het bekken en dijbeen in de correcte positie. Het vermindert consequent schuifkrachten en onnodige druk op de stuit en zitbeenderen.




Handig demonstratie en testmateriaal



Enkelfixatie

De enkelfixatie zorgt ervoor dat de voeten op de juiste plaats op de voetenplaat blijven staan. De enkelfixatie kan op iedere voetenplaat gemonteerd worden door de bevestigingsbandjes op de voetenplaat vast te schroeven.

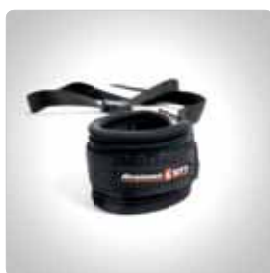

Armfixatie (beperkt protractie)

De armfixatie wordt diagonaal bevestigd om overstrekken te voorkomen. Verkrijgbaar in Exclusive & Soft.

Voor maten, zie pagina 76.



Fixatie handschoen

Een perfect hulpmiddel voor mensen die moeite hebben met het vasthouden van handvatten, sturen etc. Verkrijgbaar in Exclusive.

Voor maten, zie pagina 76.

Kies het juiste type rompfixatie

Kies het juiste type rompfixatie

We hebben drie verschillende typen rompfixatie. Het rompfixatievest, het rompfixatievest met rits en H-fixatie. Beide typen rompfixaties bieden steun op de borst. De H-fixatie biedt steun aan beide schouders en romp. Het wordt gebruikt tegen rotatie en bij cliënten die extra stimulans nodig hebben om romp en schouders op te strekken. Het is ook zeer bruikbaar voor cliënten met een PEG-sonde.




Wanneer kies je voor een rompfixatievest

- Concentreert druk op het borstbeen
- Voorkomt voorwaarts inzakken van de romp



Wanneer kies je voor een rompfixatievest met ritssluiting

- Concentreert druk op het borstbeen
- Voorkomt voorwaarts inzakken van de romp

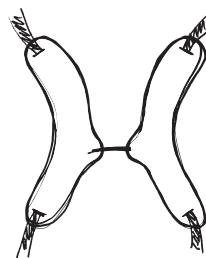

Wanneer kies je voor H-fixatie

- Voorkomt rotatie effectief
- Inzetbaar voor cliënten met een PEG-sonde

Kies de juiste maat

De verschillende typen rompfixaties onderscheiden zich van elkaar in basisvorm, maatvoering en de manier van openen/sluiten. Om de juiste maat te selecteren voor iedere gebruiker meet je van schouder naar schouder. Onderstaande maten/verhoudingen zijn afgenomen bij een doorsnee gebruiker.

Welke maat heb ik nodig?

Schouderbreedte van 20–25 cm, maat XS
Schouderbreedte van 25–30 cm, maat S
Schouderbreedte van 30–35 cm, maat M
Schouderbreedte van 35–45 cm, maat L



Meet van schouder naar schouder om de totale schouderbreedte te verkrijgen.

We hebben 3 verschillende basismaterialen om te kiezen.

- **Exclusive** is zacht imitatieleer en gemakkelijk af te nemen met een doekje.
- **Soft** is een soort elastisch neopreen.
- **Soft Pro*** is ook elastisch neopreen.



* Het verschil tussen Soft en Soft Pro is dat Soft Pro een moderner design heeft waarbij de sluitingen netjes verborgen zijn/mooi weggewerkt.

Hoe monteert je de rompfixatie op de juiste manier


- Haal de onderste bevestigingsbandjes van de rompfixatie door het onderste bevestigingspunt op het profiel van de rugleuning en fixeert het bandje vervolgens door het terug te steken door de passant.
- Haal de bovenste bevestigingsbandjes van de rompfixatie door de sleufjes van het bovenste bevestigingspunt op het profiel van de rugleuning en fixeert deze met de clipjes.

Trek richting

De trek richting van de bovenste bevestigingspunten moet net boven de schouders uitkomen om te voorkomen dat de schouders naar beneden worden getrokken. Wanneer nodig zijn er verschillende verhogingssetjes verkrijgbaar als accessoire.



Goed

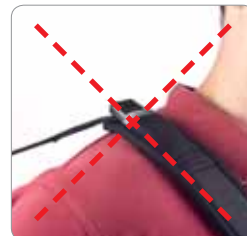

Fout

Accessoirehouder tussen de duwbeugels

De accessoirehouder tussen de duwbeugels (Art.nr. 7022) is een universele bevestigingsset om rompfixatie en hoofdsteun op te monteren. De houder past tussen de duwhandvatten/rugbuizen. De insteek voor de hoofdsteun is inbegrepen.

De houder kan tevens gebruikt worden om de juiste trekrichting te bewerkstelligen bij de positionering van de rompfixatie.




- Universele accessoirehouder tussen de duwbeugels (Art.nr. 7022)
- Bevestigingsset voor rompfixatie (Art.nr. 3719)

Kies de juiste heupgordel

Kies de juiste maat

Er zijn vier verschillende maten heupgordels verkrijgbaar. De heupgordels onderscheiden zich van elkaar in bandbreedte, basislengte en lengte van polstering. Om de juiste maat te bepalen voor iedere gebruiker meet je de heupbreedte van de desbetreffende persoon. Zie onderstaande tabel.

- **Heupgordel maat XS** beschikt over een bandbreedte van 25 mm en een basislengte van 12 cm.
- **Heupgordel maat S** beschikt over een bandbreedte van 25 mm en een basislengte van 15 cm.
- **Heupgordel maat M** beschikt over een bandbreedte van 25mm en een basislengte van 19 cm.
- **Heupgordel maat L** beschikt over een bandbreedte van 40 mm en een basislengte van 22 cm.

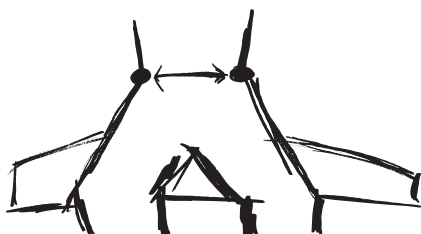

Opmeten van heupbreedte

Heupbreedte tussen 15–25 cm, kies heupgordel maat XS

Heupbreedte tussen 25–32 cm, kies heupgordel maat S

Heupbreedte tussen 32–37 cm, kies heupgordel maat M

Heupbreedte tussen 34–45 cm, kies heupgordel maat L

Twee of vier fixatiepunten?

We hebben twee verschillende modellen heupgordels, de tweepunts- en de vierpunts- heupgordel. Het verschil tussen beide gordels is het aantal fixatiepunten aan iedere zijde. De tweepunts- heupgordel is ontwikkeld voor de actieve rolstoelgebruiker die geen specifieke fixatie van het bekken heeft, maar wel graag een gevoel van veiligheid ervaart. De vierpunts- heupgordel is speciaal ontwikkeld voor de gebruiker met een achterover gekanteld bekken. De vierpunts- heupgordel wordt ingezet voor een optimale positionering en fixatie van het bekken.



2-punts gordel
Één fixatiepunt




4-punts gordel
2 fixatiepunten aan
iedere zijde



Hipgrip
2 fixatiepunten aan
iedere zijde

We hebben drie verschillende basismaterialen om uit te kiezen.


- **Exklusive** is zacht imitatieleer en gemakkelijk af te nemen met een doekje.
- **Soft** is een soort elastisch neopreen.
- **Soft Pro*** is ook elastisch neopreen.

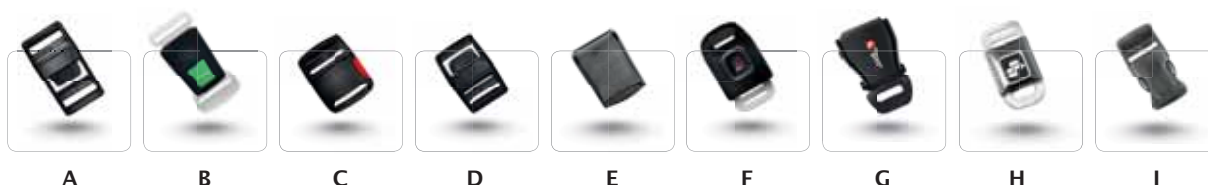


- | | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|--|
| A. Sluiting 742 | Dubbele trekrichting (meest gekozen) | F. Veiligheidssluiting | Voorkomt het ongewenst opengaan van de sluiting (Leverbaar met auto-sluiting en chomeline) |
| B. Autosluiting | Stevige metalen sluiting | G. Vliegtuigsluiting | Stevige constructie |
| C. Sluiting S40 | Sterker dan 742, sluiting aan de zijkant | H. Chromeline | Kleine metalen sluiting |
| D. Sluiting 740 | Fixlock, standaard op de heupgordel | I. DWSR | Dubbele trekrichting |
| E. Sluiting 340 | Stevige afsluitbare sluiting | | |

Voor meer sluitingen, zie pag. 78

Hoe bevestig je de heupgordel

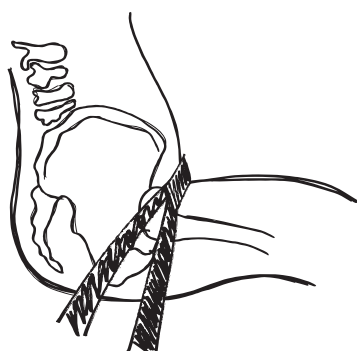

Juist

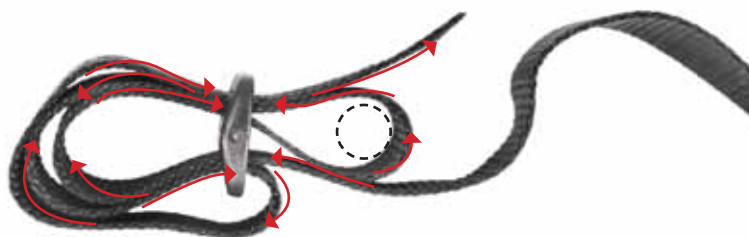

Bevestigen door middel van de 3-lus methode