

GlassOuse

Hoofdmuis

GlassOuse PRO is een draadloze muis op maat waarmee mensen met een beperking of beperkte mobiliteit computers, mobiele telefoons en tablets kunnen bedienen. Dankzij een ingebouwd geavanceerd 9-assig gyroscoopsysteem in de compacte, lichtgewicht behuizing, volgt de PRO hoofdbewegingen tot op de pixel nauwkeurig. Hij maakt eenvoudig verbinding met apparaten via Bluetooth.

GlassOuse PRO kan verbinding maken met 3 apparaten en stelt gebruikers in staat deze tegelijkertijd te bedienen via een hulpschakelaar. Gebruikers kunnen ook verbinding maken met 8 hulpschakelaars en naar behoefte verschillende functies aan elk apparaat toewijzen.

Muismodus:

Bedien apparaten met de muiscursor door middel van hoofdbewegingen.

Schakelmodus:

Bedien apparaten zonder hoofdbewegingen, met behulp van de scanfunctie van de toegankelijkheidsschakelaar van het apparaat (Apple OS en Android) en externe schakelaars.

Joystickmodus:

Pas de gamecontroller aan met een hoofdmuis en adaptieve schakelaars. Beleef de authentieke, meeslepende game-ervaring met je GlassOuse.

Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende G-Wear accessoires om de GlassOuse PRO aan verschillende lichaamsdelen te bevestigen. Met de GlassOuse APP kunnen gebruikers verschillende functies toewijzen aan de aangesloten hulpschakelaars en de gevoeligheid voor elke modus regelen.

Aanvullende knoppen/switches voor persoonlijke bedieningsopties:


Muscle Switch:

Maak kennis met de GlassOuse Muscle Switch, een baanbrekende, schakelaar die digitale interactie revolutioneert met moeiteloze spierbewegingen. De Muscle Switch is voorzien van geavanceerde sensoren die moeiteloos spierbewegingen detecteren en deze vertalen naar naadloze klikken op je digitale apparaten. Compact, maar toch zeer gevoelig, biedt hij ongeëvenaarde precisie bij het navigeren door de digitale wereld. Dankzij de veelzijdige connectiviteitsopties, waaronder drie verschillende bandlengtes, kan de Muscle Switch eenvoudig worden geplaatst op plekken met veel spierbewegingen, zoals de pols, handpalm, onderarm, bovenarm, enkel, kuit, enz. De Muscle Switch beschikt over instelbare gevoeligheidsinstellingen om zich aan te passen aan de intensiteit van je spierbewegingen.



Cheek Switch:


Maak kennis met de Cheek Switch, een schakelaar waarmee je kan klikken met alleen de beweging van hun wangspieren. De Cheek Switch is ontworpen met gemak en veelzijdigheid in gedachten. Aan het uiteinde van de draad bevindt zich een nabijheidssensor ter grootte van een muntje die de beweging van je wangspieren detecteert wanneer je je wangen opblaast, en dit omzet in een simpele klik. Uitgerust met een verstelbare draad, biedt het flexibiliteit en gebruiksgemak. Twee 3,5mm-aansluitkabels van verschillende lengtes worden meegeleverd, zodat u het apparaat zowel links als rechts op uw gezicht kunt plaatsen.

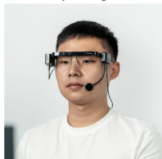

Blink Switch: Maak kennis met de GlassOuse Blink Switch, een handige assistent schakelaar waarmee met simpele oog knipperingen kan klikken. De Blink Switch is voorzien van een oogsensor die onopzettelijke oog knipperingen nauwkeurig detecteert en zo een nauwkeurige klik genereert. De Blink Switch is in te stellen op knippergevoeligheid.



Bite Switch: Met een eenvoudig maar effectief mechanisme is klikken net zo eenvoudig als zachtjes bijten op de flexibele siliconen punt. De 360 Bite Switch zet een nieuwe standaard voor duurzaamheid met zijn IP68-classificatie. Hij beschikt over een flexibele maar stevige kabel, waarmee gebruikers de positie kunnen aanpassen voor comfortabel klikken. De siliconen punt is gemakkelijk schoon te maken. Dompel hem gewoon in warm water en veeg hem schoon met een zachte doek of tissue.

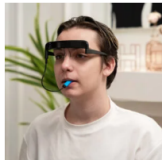


Puff Switch: In tegenstelling tot de reguliere zuig- en treksystemen, maakt Puff Switch gebruik van een elektronisch systeem, waarmee je klikbewegingen kunt maken door simpel te blazen. De ingebouwde microfoon heeft een blaastrigger die de frequenties automatisch omzet in signalen om de klikgeluiden te maken. De gebruiker kan de gevoeligheid instellen voor een comfortabel gebruik. Puff Switch werkt op een batterij ter grootte van een muntstuk. Het slimme batterijsysteem van Puff Switch schakelt het apparaat na een uur uit als het niet gebruikt wordt. De schakelaar kan ook handmatig worden uitgeschakeld door op de kleine knop op de module te drukken.

Puff Switch: In tegenstelling tot de reguliere zuig- en treksystemen, maakt Puff Switch gebruik van een elektronisch systeem, waarmee je klikbewegingen kunt maken door simpel te blazen. De ingebouwde microfoon heeft een blaastrigger die de frequenties automatisch omzet in signalen om de klikgeluiden te maken. De gebruiker kan de gevoeligheid instellen voor een comfortabel gebruik. Puff Switch werkt op een batterij ter grootte van een muntstuk. Het slimme batterijsysteem van Puff Switch schakelt het apparaat na een uur uit als het niet gebruikt wordt. De schakelaar kan ook handmatig worden uitgeschakeld door op de kleine knop op de module te drukken.



Finger Switch: De ingebouwde drukknop detecteert de geringste drukbewegingen en zelfs hoge druk. Door de lange kabel kunt u de positie van de schakelaar aanpassen aan uw behoeften. Dankzij de klevende onderkant kan de Finger Switch op stoffen oppervlakken worden geplaatst en kan hij functioneren als een gewone knop. Als alternatief kunt u uw Finger Switch eenvoudig aan klittenbandjes bevestigen, zodat u de schakelaar in verschillende posities en met verschillende lichaamsdelen kunt gebruiken.

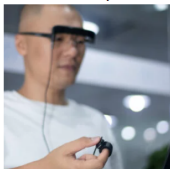

Foot Switch: De Foot Switch is ontworpen om met uw voet te worden gebruikt. Hij kan verschillende drukvolumes detecteren. De lange kabel zorgt ervoor dat je de positie van de schakelaar naar jouw behoeften kunt aanpassen. Dankzij de antislip onderkant wordt de voetschakelaar stevig op oppervlakken bevestigd om te voorkomen dat hij verschuift tijdens het indrukken. Je kunt er simpelweg op drukken om te klikken met zowel half harde als harde druk. De aangepaste schakelaar stelt gebruikers in staat om hun voeten te laten rusten wanneer ze de schakelaar niet gebruiken en voorkomt overmatig klikken.



De GlassOuse PRO en de bijbehorende schakelaars zijn ontworpen zodat mensen met een motorische beperking hun apparaten nog beter kunnen bedienen. Hieronder vind je de afbeeldingen van verschillende bevestigingsmogelijkheden.

G-Framewer:

Het montuur kan als een bril gedragen worden, met de GlassOuse PRO aan de zijkant bevestigd.

G-Headband:

Je kunt de hoofdband als een headset dragen en de GlassOuse PRO aan de zijkant bevestigen.

G-Cap:

De pet kan gedragen worden om de GlassOuse PRO aan vast te zetten.

G-Beanie hat:

De gebreide muts kan gedragen worden om de GlassOuse PRO aan vast te zetten.

G-Strap (small):

Je kunt de klein bandje om je arm dragen.

G-Strap (big):

Je kunt de grote band om je arm dragen.

