

## Anti-decubitus kussen Polyair, 61 x 50 x 6 cm (L x D x H)



### Bi-compartiment luchtcel kussen

Indicatie categorie: 3

Preventiekussen voor patiënten met een HOOG tot ZEER HOOG RISICO op het ontwikkelen van doorligwonden (volgens klinische beoordeling en schalen) en/of specifieke risico's op doorligwonden in het zitbeen.

### EFFICIËNTIE, ERGONOMIE EN COMFORT

#### WERKINGSPRINCIPE

Dankzij een depressie in de cellen van de uitsteeksels van het heiligbeen wordt het contactoppervlak tussen de patiënt en het kussen geoptimaliseerd, waardoor de waarden van de transcutane druk zeer sterk kunnen worden verlaagd

van de hele bil, zonder tegendruk.

Respecteert en past zich aan alle anatomieën aan, met name dankzij het systeem van interne ventilatiekanalen, waardoor het kussen op elk moment snel aan de morfologie van de patiënt kan worden aangepast. Biedt een aangepast antwoord op de preventie van decubitus met een hoog risico en zorgt voor doeltreffende resultaten op het gebied van de genezing van decubitus die zich reeds heeft gevormd.

Bestrijdt doeltreffend de effecten van maceratie, wrijving en afschuiving door :

- betere beluchting van de risicogebieden,
- een vermindering van weefsel vervorming,
- meer stabiliteit dankzij het honingraatpatroon.

### HONINGRAATPATROON

Maximaliseert het aantal cellen (dichtheid) en daardoor het contactoppervlak tussen kussen en patiënt, voor een beter evenwicht tussen de steunpunten en een vermindering van de transcutane druk.

### SPECIAAL ONTWERPEN HOES

Waterdicht-ademend (waterdicht en doorlatend voor transpiratie):

- aangepast aan incontinentie
- vermindert de effecten van maceratie door de ademhaling van de huid te vergemakkelijken

Gemaakt van volledig niet-allergisch textiel

Antislip oppervlak: helpt de positie van het kussen op de stoel te behouden.

De gaten aan de zijkanten maken de doorgang van de ventielen tijdens de opblaasfasen mogelijk en vergemakkelijken de luchtuitwisseling tussen de binnen- en de buitenkant van het deksel om het effect van maceratie te verminderen.

- VSB: 220536 110103000305
- Irsicare: 410553 110103000305
- AVIQ: 110555 110103000305