

QUICK START



Deze **QUICK START** helpt je op weg met het gebruik van de M90 in het dagelijks leven.
Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie de gebruikershandleiding.



SUNRISE MEDICAL GEEFT OM JOUW VEILIGHEID
Lees daarom altijd de gebruikershandleiding voor de
veiligheidsinstructies en onderhoudsrichtlijnen.

IN- EN UITSCHAKELLEN

Wanneer de accu's geplaatst zijn, schakelen de aandrijfwielen automatisch in. Ze maken vervolgens via een Bluetooth-verbinding draadloos contact met de joystick.

OPMERKING

De knoppen op de M90-aandrijfwielen worden gebruikt als indicatoren en voor het oplossen van storingen, niet om de aandrijfwielen aan of uit te zetten.



JOYSTICK BEDIENING

De M90 biedt twee verschillende rijmodi.



JOYSTICK

Zowel sturen als snelheidsregeling.



SPEED CONTROLLER MET HOEPEL STUURFUNCTIE

Alleen snelheidsregeling (sturen via de hoepels)

DE JOYSTICK ACTIVEREN

- › Druk één keer op de aan/uit-knop van de joystick.
- › De **stroomindicator LED (2)** knippert wit tijdens het verbinden (dit kan tot 5 seconden duren).
- › Zodra de verbinding met de aandrijfwielen tot stand is gebracht, hoor je een pieptoon en wordt de **stroomindicator LED (2)** constant groen.
- › Wanneer de aandrijfwielen zijn ingeschakeld, houd de joystick naar voren om de rijmodus te activeren. Beide aandrijfwielen vergrendelen hoorbaar met een klik en het **statuslampje LED (3)** wordt groen zodra alles gereed is voor gebruik.

JOYSTICKFUNCTIES

AAN/UIT-KNOP

Kort indrukken om te vergrendelen of te ontgrendelen.

LICHTSENSOR

3

2

CLAXON

4

1

JOYSTICKHOUDER

RIJ-INSTELLINGEN

Kort indrukken om van **rij-profiel** te wisselen. Ingedrukt houden om van **rijmodus** te wisselen.

JOYSTICK

1 ACCU-INDICATOR AANDRIJFWIEL



KLEURBETEKENIS LED-LAMPJES

2 STROOMINDICATOR	3 STATUSINDICATOR	4 RIJMODUSINDICATOR
 VERBONDEN, VERGRENDELD Knippert = wacht op verbinding	 VERBONDEN	 JOYSTICK Continu = Indoor rijprofiel
 BEDIENINGSEENHEID ACTIEF Opladen = >15%	 NIET VERBONDEN Knippert = cruise control ingeschakeld	
	 THERMISCHE BESCHERMING 1 Vergrendeling voor outdoor rijprofiel	 SPEED CONTROLLER MET HOEPEL STUURFUNCTIE Continu = Indoor rijprofiel Knippert = Outdoor rijprodiel
 OPLADEN <15% Knippert = Opladen <5%	 THERMISCHE BESCHERMING 2 Joystick vergrendeld Actieve rem gedurende 5 seconden	
 LAAG ACCUVERMOGEN Kan niet worden gebruikt	 THERMISCHE BESCHERMING 3 Systeemvergrendeling	
 VOLLEDIG GELADEN Knippert = Laden	 VOLLEDIG GELADEN Knippert = Laden	

FUNCTIONALITEIT BEDIENING

RIJMODUS	JOYSTICK	SPEED CONTROLLER MET HOEPEL STUURFUNCTIE
START / STOP	Duw de joystick naar voren om te starten. Laat de joystick los om te stoppen. De hoepels hebben geen invloed op de snelheid.	Duw de joystick naar voren om te starten. Trek de joystick naar achteren of gebruik de hoepels om geleidelijk te stoppen.
SNELHEID REGELEN	Duw de joystick naar voren of achteren om proportioneel te versnellen of te vertragen.	Beweeg de joystick naar voren of naar achteren om de snelheid te verhogen of te verlagen. Stap voor stap, tot 5 niveaus in beide rijprofielen.
STUREN	Beweeg de joystick in de gewenste rijrichting.	Stuur handmatig door de hoepels te gebruiken.
CRUISE CONTROL	Wanneer de gewenste snelheid is bereikt, druk je de joystick omlaag om te activeren. Sturen doe je met de joystick. Stoppen kan door de joystick te bewegen of opnieuw omlaag te drukken.	Duw de joystick naar voren om de snelheid te verhogen, of naar achteren om te verlagen. Stuur handmatig door de hoepels vast te pakken. Stoppen kan op drie manieren: > door de joystick in te drukken > door deze naar achteren te trekken tot de snelheid 0 is > door de hoepels vast te pakken en vast te houden
HANDMATIGE HOEPELONDER- STEUNING	Niet van toepassing.	Zachte boost na stilstand. Via de hoepels activeert een lichte ondersteuning automatisch na het stoppen, waardoor je jezelf gemakkelijk kunt herpositioneren zonder extra inspanning.
RIJPROFIEL Indoor/Outdoor	Selecteer het indoor of outdoor rijprofiel via de M90-app of joystick.	Selecteer het indoor of outdoor rijprofiel via de M90-app of joystick.
RIJSTIJL	Kies de rijstijl (Eco - Standaard - Max) via de M90-app.	Kies de rijstijl (Eco - Standaard - Max) via de M90-app.

VEILIG RIJDEN - TIPS

Begin langzaam. We adviseren anti-tipwielmpjes te gebruiken bij het rijden met de M90.

Start met het "indoor" rijprofiel en oefen in een veilige, open omgeving.


Oefen met gericht stoppen, draaien vanuit stilstand en draaien tijdens het rijden.

HELLINGEN

Begin op een kleine helling met een geleidelijke afloop en voldoende uitrolruimte – vermijd bochten direct na de afdaling. De M90 biedt snelheidscontrole bij afdalingen.

Pas je lichaamspositie aan om het evenwicht te bewaren en kantelen te voorkomen:

- > leun voorover bij het omhoogrijden
- > leun achterover bij het afdalen
- > zorg dat je romp goed wordt ondersteund, indien nodig.

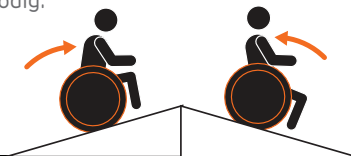

Scan de code met de camera van je smartphone om de instructievideo's te bekijken.