

uDirect 3-handleiding



unitron™ Hearing matters

Hartelijk dank

Hartelijk dank dat u voor de Unitron uDirect™ 3 hebt gekozen.

Bij Unitron zetten wij ons in voor mensen met gehoorverlies. Wij werken nauw samen met hoorspecialisten om geavanceerde, doelgerichte oplossingen voor iedereen te ontwikkelen. Omdat een goed gehoor belangrijk is.

Het beoogde gebruik van de uDirect 3 is om audio van verschillende Bluetooth® apparaten draadloos naar uw hoortoestellen te streamen. Bijvoorbeeld audio van mobiele telefoons, MP3-spelers, enz.

U kunt ook andere audioapparaten rechtstreeks streamen m.b.v. een kabel en/of stekker. Bijvoorbeeld computers, FM- en Roger ontvangers.

U kunt de uDirect 3 ook gebruiken als afstandsbediening om uw hoortoestellen aan te passen aan verschillende luistersituaties.

 **Let op: uw hoorspecialist moet uw uDirect 3 configureren voordat u deze als afstandsbediening kunt gebruiken voor uw hoortoestellen.**

Uw uDirect 3

Uw audicien: _____

Telefoonnummer: _____

Serienummer van de uDirect 3: _____

Garantie: _____



Datum van aanschaf: _____

De uControl™ app kan worden gedownload in de App Store en in Google Play. Zoek naar Unitron en selecteer uControl.




Bedieningsinstructies

De uDirect 3 opladen Aan/Uit

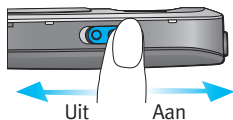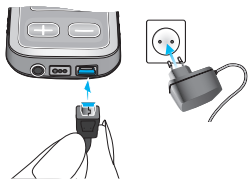


De uDirect 3 dragen

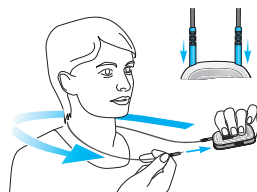

Power-lampje

- Lampje continu rood - bezig met laden
- Lampje continu groen - volledig opgeladen
- Lampje knippert rood - accu bijna leeg
- Lampje brandt niet - accu leeg

Koppelen met Bluetooth

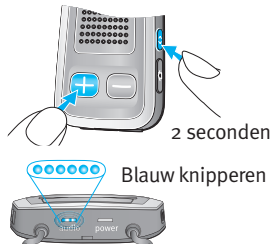

Audio-lampje

- Continu oranje - Kabel of FM input
- Continu violet - demogeluid
- Continu blauw - Bluetooth streaming
- Lampje knippert kort blauw - 1 apparaat gekoppeld
- Lampje knippert twee keer kort blauw - 2 apparaten gekoppeld
- Lampje knippert zeer snel blauw - bezig met koppelen

Inhoudsopgave

Uw uDirect 3 in het kort	2
De adapter in elkaar zetten	4
De uDirect opladen 3.....	5
De uDirect 3 in- en uitschakelen	6
Overzicht van lampjes.....	7
De uDirect 3 op de juiste manier dragen.....	10
Gebruiksafstand	11
Knopvergrendelingsfunctie	11
Geluid testen via de uDirect 3	12
Functie van de Multi Knop.....	14
Gesproken meldingen	15
uControl-app	16
De uDirect 3 gebruiken als afstandsbediening voor uw hoortoestel.....	17
De uDirect 3 gebruiken in combinatie met een mobiele telefoon.....	20
Geavanceerde telefoonopties.....	31
De externe microfoon gebruiken	35
De uDirect gebruiken in combinatie met de uTV 3	36
De uDirect 3 gebruiken in combinatie met de uMic	40
De uDirect 3 gebruiken in combinatie met een audioapparaat met Bluetooth.....	42
De uDirect 3 gebruiken in combinatie met een audioapparaat met koptelefoonuitgang.....	45
De FM-ontvanger instellen.....	46
Meerdere gekoppelde audiobronnen beheren op de uDirect 3	49
Uw uDirect opnieuw instellen 3	52
Gekoppelde Bluetooth-apparaten verwijderen	53
Gids voor probleemoplossing	54
Waarschuwingen.....	64
Informatie over en uitleg van symbolen.....	71
Informatie over naleving	73

Uw uDirect 3 in het kort

Knoppen

- 1 Multi Knop (A)
- 2 Volume Knoppen (+ -)
- 3 Home Knop (huis)
- 4 Koppel Knop (< >)
- 5 Aan/Uit-schakelaar (I/O)

Poorten

- 6 Microfoonopeningen
- 7 Audio-ingang (3,5mm stekker)
- 8 FM-ingang (eurostekker)
- 9 Oplaadpoort (mini-USB)


Lampjes

- 10 Audio-lampje
- 11 Power-lampje (stroom)

Neklus


- 12 Nekluspoorten
- 13 Neklus (met antenne)
- 14 Neklusstekkers

*Kan worden geconfigureerd door uw hoorspecialist.

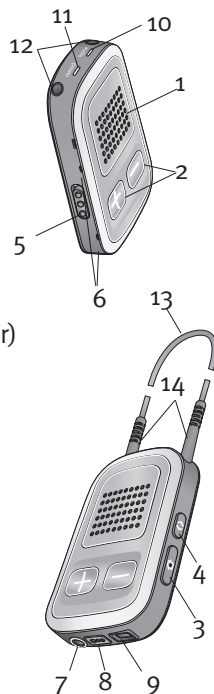

Accessoires

- 15, 16 Universele adapter met mini-USB-stekker
- 17-20 Adapter voor de VS, EU, het Verenigd Koninkrijk en Australië

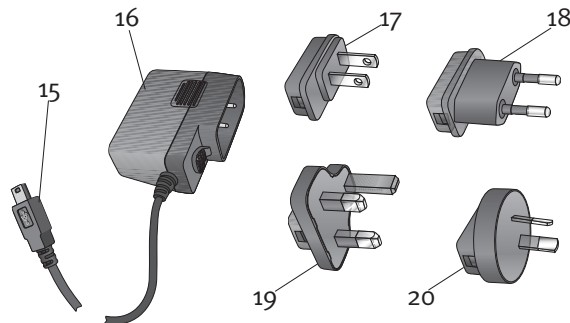

Andere optionele accessoires

Externe reversmicrofoon 'MC1'

Korte nekclus (51 cm)

Unitron uTV 3 (Bluetooth-zender voor gebruik in combinatie met de televisie)

Audiokabel, 1,5 m

USB-kabel, 3 m

(De bijgeleverde adapters kunnen per land verschillen.)

De adapter in elkaar zetten

1. Kies de adapter voor uw land.



VS



EU




Verenigd Koninkrijk



Australië


2. Steek het ronde uiteinde van de adapter in de ronde opening van de universele adapter totdat deze er volledig in zit.

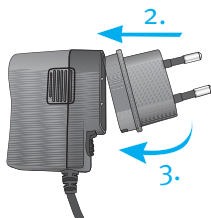

3. Druk vervolgens het andere einde in de adapter om deze te vergrendelen. Controleer of de adapter stevig vastzit.

De adapter verwijderen:

1. Trek het lipje op de universele adapter omlaag en houd deze vast in die positie.
2. Trek de adapter voorzichtig omhoog om deze uit de houder te verwijderen.
3. Begin daarna evt. opnieuw bij stap 1 (hierboven).

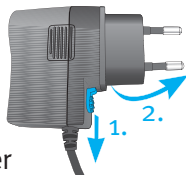


De uDirect opladen 3

Uw uDirect heeft een niet-verwijderbare accu.

Het opladen:

1. Steek de mini-USB-stekker in de mini-USB-poort van uw uDirect 3.

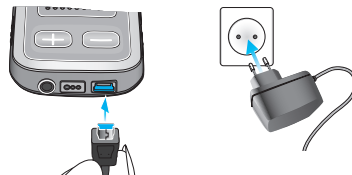

2. Steek de adapter in een stopcontact. Tijdens het opladen brandt het Power-lampje continu rood. Het opladen duurt meestal 90 minuten.

Als de accu volledig is opgeladen, gaat het Power-lampje continu groen branden.

Het is veilig om de uDirect 3 's nachts aan de oplader te laten zitten.


 **Laad de uDirect 3 de eerste keer minimaal drie uur op, zelfs als het Power-lampje niet brandt of al eerder groen wordt.**

 Een nieuwe accu bereikt zijn volledige capaciteit pas nadat deze drie keer volledig is opgeladen en ontladen.

 U kunt ook de uTV™ 3 als laadstation voor de uDirect 3 gebruiken.

De uDirect 3 in- en uitschakelen

Verschuif de Aan/Uit-schakelaar (I/O) zoals afgebeeld om de uDirect 3 in of uit te schakelen.

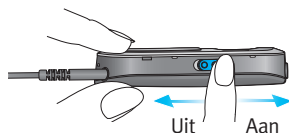

Schakel de uDirect 3 uit als u deze opslaat of niet gebruikt, en tijdens transport.

Schakel de uDirect 3 in als u deze wilt gebruiken.

Overzicht van lampjes

De lampjes geven u als volgt nuttige informatie:

Power-lampje

Opladen	Lampje continu rood	
Accu volledig opgeladen	Lampje continu groen	
Inschakelen	2 seconden groen	
Uitschakelen	Lampje knippert rood en brandt vervolgens 2 seconden continu rood*	
Accu voor meer dan 10% vol, normale werking	Lampje knippert langzaam groen **	
Accu voor minder dan 10% vol, opladen vereist (ten minste 2 uur)	Lampje knippert kort rood**	
Accu leeg, opladen vereist (ten minste 2 uur)	Geen licht na inschakelen	
Vergrendeling in-/uitschakelen	Lampje knippert kort rood (vergrendelen) of kort groen (ontgrendeld)	

* Als u de uDirect 3 uitschakelt, knippert het Power-lampje mogelijk eerst rood terwijl de uDirect 3 op de juiste manier de verbinding met alle Bluetooth-apparaten verbreekt.

- ** Als de neklus niet met de uDirect 3 is verbonden, wordt het accuniveau alleen weergegeven tijdens het opstarten, opladen en als er op een knop wordt gedrukt.

 Nadat de neklus is losgekoppeld, schakelt de uDirect 3 na twee minuten over op een laag energieverbruik en gaat het Power-lampje uit. Als de neklus is losgekoppeld, kunt u alleen de afstandsbedieningsfuncties gebruiken.

Accu-status

De kleur van het Power-lampje geeft u informatie over de accu-status van de uDirect 3.

Het groene Power-lampje geeft aan dat de accu voor meer dan 10% vol is.

Het rode Power-lampje geeft aan dat de accu voor minder dan 10% vol is. U kunt nog maximaal anderhalf uur streamen en de accu moet ten minste 2 uur worden opgeladen.

Audio-lampje

De neklus moet zijn ingeplugd als u wilt streamen.

Kabel of FM-input	Lampje brandt continu oranje	
Bluetooth telefoon of muziek streaming	Lampje continu blauw	
Eén Bluetooth-apparaat gekoppeld	Kort blauw knipperen	
Twee Bluetooth-apparaten gekoppeld	Twee keer blauw knipperen	
Koppelen met Bluetooth	Lampje knippert zeer snel blauw	
Demogeluid wordt afgespeeld	Lampje continu violet	


 De Bluetooth-koppellampjes branden ook als de neklus is losgekoppeld.

 Tijdens streaming via een kabel of FM blijft het audiolampje oranje branden, onafhankelijk van de status van de Bluetooth-verbinding.

De uDirect 3 op de juiste manier dragen

Voordat u een telefoon, muziek of televisie kunt streamen, moet de uDirect 3 zijn ingeschakeld en op de juiste manier worden gedragen, zoals hieronder weergegeven:

1. Hang de nekus om uw nek (dit doet u eenvoudig door één nekusstekker los te trekken).
2. Zorg ervoor dat beide stekkers van de nekus stevig in de daarvoor bestemde poorten zitten.
3. Schakel de uDirect 3 in.

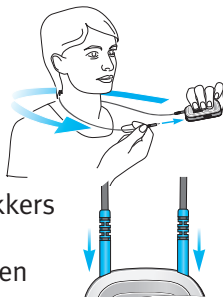

 De nekus moet altijd zijn ingeplugd als u wilt streamen. Als de uDirect 3 is losgekoppeld, schakelt deze na twee minuten over op de slaapstand. De Power- en Audio-lampjes stoppen met knipperen en alle actieve Bluetooth-verbindingen worden verbroken om energie te besparen. Steek de stekkers van de nekus opnieuw in om het streamen te activeren.

Gebruiksafstand

Als de uDirect 3 als afstandsbediening wordt gebruikt (zonder nekus):

- Maximale afstand 110 cm
- Houd de uDirect 3 voor uw lichaam zoals weergegeven



Knopvergrendelingsfunctie

U kunt de Multi-Knop (A) op uw uDirect 3 vergrendelen om onbedoeld indrukken te voorkomen. Als u de knop wilt vergrendelen, houdt u de Koppel-Knop (<>) en Home-Knop (🏠) tegelijkertijd ingedrukt. Het Power-lampje knippert drie keer rood om aan te geven dat de knop is vergrendeld.

Houd de Koppel-Knop (<>) en Home-Knop (🏠) opnieuw tegelijkertijd ingedrukt om de knoppen te ontgrendelen.

U kunt nog wel inkomende telefoongesprekken beantwoorden via de Multi Knop (A) terwijl de knoppen zijn vergrendeld.

-  Het Power-lampje blijft branden zolang u op een knop van de uDirect 3 drukt. Groen bevestigt een goede accustatus van de uDirect 3, rood geeft aan dat u de accu van de uDirect 3 moet opladen.
-  Twee minuten nadat u de neklus hebt losgekoppeld, worden beide lampjes uitgeschakeld en verbreekt de uDirect 3 de Bluetooth-verbindingen om energie te besparen.

Geluid testen via de uDirect 3

1. Draag de uDirect 3 op de juiste manier.
2. Houd de Multi Knop  ingedrukt terwijl u het apparaat inschakelt. Laat de toegangsknop los. Het Audio-lampje gaat violet branden.

De hoortoestellen schakelen over op de streamingmodus en u hoort het demogeluid van de uDirect 3.

Gebruik de volumeknoppen   om het volume aan te passen.

Het demogeluid stopt na drie minuten of als u de Multi Knop indrukt. Als u het volume

aanpast tijdens het demogeluid, wordt ook het volumeniveau voor de gesproken uDirect 3-berichten ingesteld.

Als u het demogeluid niet kunt horen:

- zorgt u ervoor dat de hoortoestellen goed in of achter uw oren zitten
- zorgt u ervoor dat beide uiteinden van de neklus van de uDirect 3 op de juiste manier zijn ingestoken en dat u de neklus om uw nek draagt.
- zorgt u ervoor dat de uDirect 3 is opgeladen en ingeschakeld.
- zorgt u ervoor dat u niet met een telefoongesprek bent verbonden via de uDirect 3.

Functie van de Multi Knop

De Multi Knop heeft meerdere functies:

- **Telefoon:** Beheert telefoonfuncties, zoals het beantwoorden en beëindigen van telefoongesprekken. Raadpleeg het gedeelte "De uDirect 3 gebruiken in combinatie met een smartphone of mobiele telefoon" voor meer informatie.
- **Streaming:** Het streamen van een audioapparaat wordt gepauzeerd en hervat.
- **Afstandsbediening:** Kan worden gebruikt om programma's voor het hoortoestel te selecteren.



Gesproken meldingen

U wordt door middel van gesproken meldingen geïnformeerd over de verschillende operationele modi en de status van de uDirect 3 met behulp van tekst-naar-spraak, bijvoorbeeld als de accu bijna leeg is.

Uw hoorspecialist kan de taalinstelling configureren en instellen welke gesproken meldingen u te horen krijgt.

- **Belleridentificatie is onafhankelijk van het niveau waarop de gesproken meldingen zijn ingesteld.**
- **Gesproken meldingen kunnen worden ingeschakeld door uw hoorspecialist.**

uControl-app

uControl is een app voor de smartphone waarmee u snel en eenvoudig het volume en programma's kunt aanpassen.

Deze app biedt ook:

- individuele volumeregeling links en rechts
- aanvullende programmakeuze
- eenvoudig koppelen met Bluetooth





De uDirect 3 gebruiken als afstandsbediening voor uw hoortoestel

 Voordat u de afstandsbedieningsfunctie kunt gebruiken, moet uw hoorspecialist de afstandsbediening inschakelen.

U kunt de uDirect 3 op twee manieren als afstandsbediening gebruiken:

- De nekus is met beide uiteinden ingeplugd, en u draagt de uDirect 3 om uw nek. De afstandsbedieningsfunctie is beschikbaar zolang u geen audio streamt.
- De nekus is volledig losgekoppeld en u bedient de uDirect 3 tot maximaal een armlengte. Er is geen streaming mogelijk in deze configuratie.

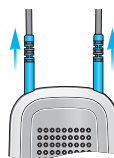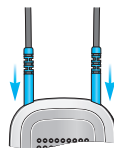

Zorg ervoor dat de uDirect 3 is ingeschakeld.

Volume aanpassen

Druk op de Volume Knop (+/-) op de uDirect 3 om het volume van uw hoortoestellen aan te passen:

- Druk op (+) om het volume te verhogen
- Druk op (-) om het volume te verlagen

Programma wijzigen

Gebruik de Multi Knop (A) om de luisterprogramma's van de hoortoestellen te wijzigen.

U kunt de programma's van uw hoortoestellen alleen wijzigen als er geen streaming actief is.

Houd de Home Knop (huis) langer dan twee seconden ingedrukt om uw favoriete luisterprogramma te selecteren, dat is geconfigureerd door uw hoorspecialist.

Druk (kort) op de Home Knop (huis) om terug te keren naar het oorspronkelijk ingestelde hoortoestelprogramma en de oorspronkelijke volumenniveaus van uw hoortoestellen.

Meer informatie over de afstandsbediening

- Uw hoortoestellen laten mogelijk een pieptoon horen om te bevestigen dat uw selectie is toegepast.
- Beide hoortoestellen worden tegelijkertijd bediend.
- Uw hoorspecialist stelt de beschikbare programma's en volumenniveaus in voor uw hoortoestellen.

De uDirect 3 gebruiken in combinatie met een mobiele telefoon

Als u een mobiele telefoon hebt die is uitgerust met Bluetooth-functionaliteit (bijv. een iPhone of Android-telefoon), dan kunt u de uDirect 3 gebruiken om telefoongesprekken draadloos te streamen naar uw hoortoestellen, zodat u de stem van de beller rechtstreeks in uw hoortoestellen hoort. De uDirect 3 neemt uw stem op via de ingebouwde microfoon en streamt deze naar uw mobiele telefoon.


Tijdens telefoongesprekken kunt u met de Multi Knop (A) een reeks functies inschakelen die u helpen om uw telefoongesprekken te beheren.



Voor een optimale koppeling tussen uw uDirect 3 en uw mobiele telefoon adviseren we u om de uDirect 3 om uw nek te dragen. Tijdens gesprekken kan uw stem alleen worden opgenomen als de uDirect 3 niet door kleding wordt bedekt.

Als u de uDirect 3 onder uw kleding draagt tijdens telefoongesprekken, hebt u de externe

Unitron-microfoon 'MC1' nodig (raadpleeg het gedeelte in deze handleiding over het gebruik van de externe microfoon).

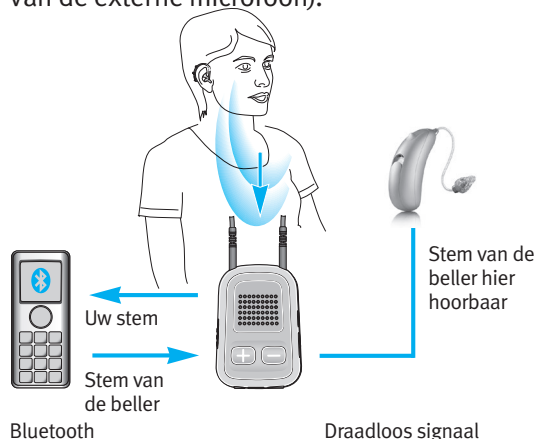

Uw mobiele telefoon koppelen

1. Activeer Bluetooth in het instellingenmenu van uw mobiele telefoon.
2. Zorg ervoor dat de uDirect 3 is ingeschakeld en dat de neklus is ingeplugd en op de juiste manier wordt gedragen. Houd de Koppel Knop (↔) en Volume Knop (+) tegelijkertijd

twee seconden ingedrukt. Het Audio-lampje gaat blauw knipperen om aan te geven dat de koppelmodus van de uDirect 3 actief is.

3. Schakel de Bluetooth-modus voor koppelen op uw mobiele telefoon in, zodat er een nieuw apparaat kan worden toegevoegd. Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor meer informatie. Voer '0000' in als koppelcode als u hierom wordt gevraagd.
4. Accepteer het verzoek om de uDirect 3 toegang te geven tot uw telefoonboek, als u hierom wordt gevraagd. Het telefoonboek wordt gebruikt als u iemand wilt bellen door de naam in te spreken, en voor belleridentificatie.
5. Als het Audio-lampje stopt met blauw knipperen, geeft dit aan dat de uDirect 3 is verbonden. Er kan ook een koptelefoonsymbool (☎) worden weergegeven op het startscherm van uw mobiele telefoon.

Als het koppelen is voltooid, worden uw mobiele telefoon en de uDirect 3 automatisch aan elkaar gekoppeld.

-  **Neem contact op met uw hoorspecialist als u de koppelprocedure niet kunt voltooien door de beschreven stappen te volgen.**
-  **Voor de koppelprocedure hoeft de nekbus niet bevestigd te zijn. Voor streamen en koppelen via Bluetooth is een bevestigde nekbus vereist.**
-  **Uw telefoon moet het Bluetooth-profiel 'Head Set' (HSP) of 'Hands Free' (HFP) ondersteunen om telefoonoproepen te kunnen ontvangen. Als u uw telefoon koppelt, wordt u mogelijk gevraagd welke Bluetooth-service u wilt inschakelen. Selecteer 'Headset' of, indien beschikbaar, 'Stereo Headset'.**
-  **Uw telefoon moet het Phone Book Access Profile (PBAP, profiel voor telefoonboektoegang) ondersteunen om de functies voor belleridentificatie te kunnen gebruiken.**
-  **Als u een mobiele telefoon koppelt, adviseren we u om de toetstones en de sms-geluiden van de telefoon uit te schakelen.**
-  **Als u wilt luisteren naar stereomuziek van uw telefoon, moet uw telefoon het profiel A2DP/'Stereo Headset' ondersteunen.**
-  **Er kunnen maximaal acht apparaten aan de uDirect 3 worden gekoppeld. Een negende**

apparaat dat wordt gekoppeld overschrijft de koppeling van het apparaat dat het langste niet is gebruikt.

-  De uDirect 3 kan twee telefoons tegelijkertijd ondersteunen (verbinden), maar u kunt slechts één telefoongesprek per keer voeren.


Voorbereiden voor telefoongesprekken

Het Bluetooth-bereik (maximale afstand tussen de uDirect 3 en de telefoon) bedraagt 5 tot 10 m.

Buiten dit bereik gaat de verbinding verloren of krijgt u te maken met onderbrekingen tijdens het gesprek.

Als u een telefoongesprek voert, dient u de uDirect 3 normaal te dragen zoals hieronder weergegeven (afbeelding a).

- In erg lawaaiige omgevingen kunt u de uDirect 3 dichterbij uw mond brengen (afbeelding b).
- Voorkom dat de kleine microfoonopeningen aan de zijkant worden bedekt door uw vingers of kleding (afbeelding c), en spreek niet richting de voorzijde van het apparaat (afbeelding d).

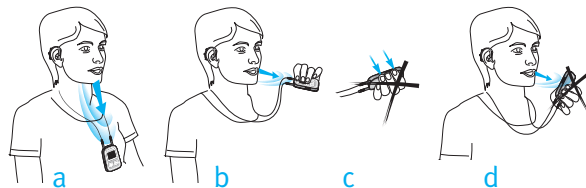

Sommige telefoons zijn ingesteld voor het afspelen van aanraaktonen, sms-meldingen en bevestigingspiepjes via de uDirect 3.

Als dit is ingesteld, hoort u dat de actieve audiostreaming via uw hoortoestellen door deze tonen wordt onderbroken. Uw hoortoestellen schakelen mogelijk kort over op de streamingmodus, wat ongewenst kan zijn.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor informatie over het uitschakelen van deze geluiden.

-  Telefoongesprekken via Bluetooth hebben altijd voorrang op andere audiobronnen op uw uDirect 3.
-  U kunt hoortoestelprogramma's tijdens een telefoongesprek niet wijzigen via de uDirect 3.
-  U hoort de stem van de beller door beide hoortoestellen.

Telefoongesprekken voeren

Gebruik de toetsen op uw telefoon om het nummer in te voeren en druk op de belknop.

Als u bent verbonden, hoort u na ongeveer drie seconden de kiestoon door uw hoortoestellen.

Draadloze telefoons (DECT) of oudere telefoons gebruiken die uitsluitend het koptelefoonprofiel ondersteunen

Als uw telefoon alleen het koptelefoonprofiel (headset profile, HSP) ondersteunt, moet u de verbinding voor uitgaande gesprekken handmatig tot stand brengen. Dit geldt vaak voor draadloze thuistelefoons (DECT-standaard).

 Bij deze telefoons knippert het Audio-lampje mogelijk niet blauw, zelfs niet als de telefoon is gekoppeld.

1. Kies op uw telefoon het nummer dat u wilt bellen of selecteer het in het telefoonboek.
2. Druk kort op de Koppel Knop () en wacht vervolgens vijf seconden.
3. De oproep wordt automatisch gestart en het Audio-lampje gaat continu blauw branden.

Mogelijk hoort u een bevestigingspiep door uw hoortoestellen.

Inkomende oproepen

De uDirect 3 dient te zijn ingeschakeld, aan de telefoon te zijn gekoppeld en op de juiste manier te worden gedragen.

Als er een oproep wordt ontvangen door uw telefoon, gaat het Audio-lampje van de uDirect 3 continu blauw branden en hoort u het beltoonsignaal via uw hoortoestellen.

Inkomende oproepen beantwoorden

Om een inkomend gesprek te beantwoorden, drukt u kort op de Multi Knop () van de uDirect 3 zodra u de beltoon in uw hoortoestellen hoort. Het duurt ongeveer vijf seconden voordat u de beltoon hoort via uw hoortoestellen.



Praat tijdens het gesprek in de uDirect 3, niet in de telefoon.


 Voor uw eigen veiligheid blijven de microfoons van uw hoortoestellen op laag niveau ingeschakeld tijdens telefoongesprekken en audiostreaming.

 U kunt één telefoongesprek per keer voeren. Een tweede rinkelende telefoon wordt genegeerd als er al een ander gesprek is verbonden. U moet het eerste gesprek beëindigen voordat u een tweede oproep kunt beantwoorden.

Een gesprek beëindigen

Druk kort op de Multi Knop (A) om een telefoongesprek via uw uDirect 3 te beëindigen. Het gesprek wordt beëindigd en uw hoortoestellen komen terug in het laatste programma óf de audiobron die hiervoor actief was (bijvoorbeeld een aangesloten audioapparaat).

U kunt een gesprek ook beëindigen door uw telefoon te bedienen in plaats van uw uDirect 3.

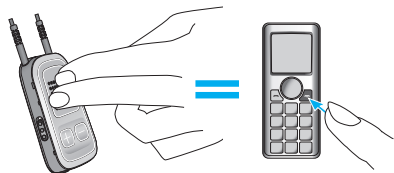

Verschillende beltonen van de uDirect 3

De beltoon van uw telefoon is afhankelijk van de configuratie van de uDirect 3 en de mogelijkheden van uw telefoon.

De beltoon wordt automatisch toegewezen als de telefoon voor het eerst wordt gekoppeld en kan niet worden geconfigureerd.

Als u meer dan één telefoon koppelt, krijgen de tweede en derde gekoppelde telefoon een andere beltoon. Er worden in totaal drie verschillende beltonen automatisch toegewezen.

De uDirect 3 kondigt ook de naam van de beller aan, zoals weergegeven op het beeldscherm van de telefoon (belleridentificatie via tekst-naar-spraak-technologie). De naam wordt overgenomen uit de telefoonlijst van uw telefoon.

 **Let op:** deze functie moet wel worden ondersteund door uw telefoon. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de telefoon of neem contact op met de telefoonleverancier.

 De taal staat op een nieuwe uDirect 3 standaard ingesteld op US English (Amerikaans Engels). Uw hoorspecialist kan de juiste taal voor u instellen, zodat de namen correct worden uitgesproken. Als u dit wenst kan de hoorspecialist de belleridentificatie uitschakelen.

Een oproep weigeren

Als u een inkomende oproep niet wilt beantwoorden, houdt u de Multi Knop (A) op uw uDirect 3 twee seconden ingedrukt totdat de beltoon stopt. Uw telefoon gebruiken om de oproep te weigeren heeft hetzelfde effect.

Als u op de Home Knop (H) drukt, wordt de oproep geweigerd en schakelen de hoortoestellen over op het oorspronkelijke programma.

Geavanceerde telefoonopties

Uw hoorspecialist kan de volgende aanvullende functies configureren op uw uDirect 3. Deze functies worden opgeslagen zodat u ze kunt activeren door lang (twee seconden) op de Multi Knop (A) of de Koppel Knop (<>) te drukken:

 Uw mobiele telefoon moet deze functies ondersteunen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie.

Laatste nummer opnieuw kiezen

Door lang op de Multi Knop (A) te drukken, wordt het laatst gebelde nummer opnieuw gekozen.

Spraakoproep

Als u lang op de Koppel Knop (<>) drukt, wordt de spraakoproep gestart. U kunt nu de naam van de persoon die u wilt bellen inspreken, zodat u niet het nummer hoeft in te voeren.

 Als u twee telefoons tegelijkertijd gebruikt, kunt u alleen de laatst gekoppelde telefoon voor een spraakoproep gebruiken.

Oproep in wachtrij plaatsen

Tijdens een telefoongesprek kunt u het gesprek pauzeren door lang op de Koppel Knop (↔) te drukken. De beller blijft aan de lijn, maar er is geen audio-overdracht en de hoortoestellen schakelen over naar het vorige luisterprogramma. Gebruik deze modus als u tijdens het telefoongesprek een kort gesprek wilt voeren met de persoon naast u, maar niet wilt dat de persoon aan de lijn kan meeluisteren.

Gesprek doorverbinden

Door tijdens een telefoongesprek de Multi Knop (A) lang in te drukken, wordt het gesprek naar de telefoon doorgeschakeld. Dit is handig als u de telefoon aan iemand anders wilt geven. Uw hoortoestellen schakelen terug naar het vorige luisterprogramma.

Als u na het pauzeren of doorschakelen van een gesprek nogmaals lang op de Multi Knop (A) drukt, wordt het gesprek teruggeleid naar de uDirect 3 en kunt u het gesprek via uw hoortoestellen voortzetten.

 Als het gesprek is gepauzeerd of doorgeschakeld, kunt u de Multi Knop (A) gebruiken om de programma's van uw hoortoestellen opnieuw te wijzigen.

Belleridentificatie, gesproken bellernamen

De uDirect 3 kan voor u de naam van de beller uitspreken.

Als uw telefoon Phone Book Access (PBA, telefoonboektoegang) ondersteunt, probeert de uDirect 3 elke keer dat de telefoon rinkelt toegang te krijgen tot gegevens over de beller.

Als de telefoon rinkelt, worden de weergegeven gegevens naar de uDirect 3 geleid en via uw hoortoestellen uitgesproken. De volgende gegevens worden uitgesproken:

- De naam die in het telefoonboek van uw telefoon is opgeslagen. In het voorbeeld hoort u 'Mike Office'
- Het telefoonnummer, als de naam niet bekend is



Uw hoorspecialist kan de taalinstellingen van

uw uDirect 3 configureren om ervoor te zorgen dat de uitspraak correct is.

Het telefoonboek wordt niet gedownload naar de uDirect 3. Zo kan de uDirect 3 ook het gebruik van andere telefoons ondersteunen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon of neem contact op met uw telefoonverkoper om te controleren of deze functie door uw telefoon wordt ondersteund.


 Sommige hoortoestellen bieden geen ondersteuning voor beller identificatie.

 Beller identificatie kan worden ingeschakeld door uw hoorspecialist.

De externe microfoon gebruiken

Gebruik de optionele externe reversmicrofoon 'MC1' als u de uDirect 3 onder uw kleding draagt tijdens een telefoongesprek.


1. Steek de 3,5mm-microfoonstekker in de audio-ingang van de uDirect 3. Hierdoor worden de interne microfoons van de uDirect 3 uitgeschakeld.

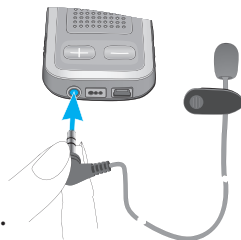

2. Gebruik de clip om de omnidirectionele microfoon zo dicht mogelijk bij uw mond te bevestigen.



3. Hang de neklus om uw nek en schakel de uDirect 3 in.

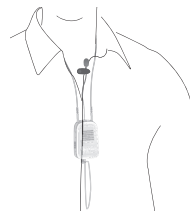


Jasjes en andere kleding hebben geen negatieve invloed op de draadloze verbinding met uw hoortoestellen.

De uDirect gebruiken in combinatie met de uTV 3

Als u een uTV™ 3 hebt, kunt u:

- audio van uw televisie over een afstand van maximaal 30 m naar uw hoortoestellen streamen
- uw uDirect 3 opnieuw opladen in de laadhouder

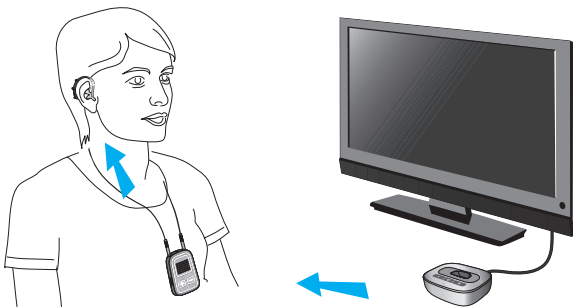

uw uDirect 3 opladen in de laadhouder

1. Zorg ervoor dat de uTV 3 is voorzien van de juiste laadhouder voor de uDirect 3. Raadpleeg de handleiding van de uTV 3 voor meer informatie.

2. Zorg ervoor dat de uTV 3 is ingeschakeld en plaats de uDirect 3 in de laadhouder.
3. Gebruik twee uur om de uDirect 3 met zekerheid volledig op te laden.

De uTV 3 aan de uDirect 3 koppelen

1. Schakel de uDirect 3 in. Houd vervolgens de Koppel Knop (↔) en Volume Knop omhoog (+) tegelijkertijd twee seconden ingedrukt.
2. Schakel de uTV 3 in en druk op de Koppel Knop aan de achterzijde van de uTV 3. Het lampje op de uTV 3 begint snel blauw te knipperen. Zorg ervoor dat de uTV 3 en de uDirect 3 maximaal 1 m van elkaar zijn verwijderd.
3. Als het koppelen is voltooid, stoppen de blauwe audiolampjes op de uDirect 3 en de uTV 3 met knipperen.

Audio van uw televisie afspelen

1. Start het afspelen op uw televisie.
2. Pas het volumeniveau op de uTV 3 aan van gemiddeld naar hoog.

3. Doe kleine aanpassingen in het volume met de Volume Knoppen (+/-) van de uDirect 3.

Afspelen pauzeren

Als u het streamen tijdelijk wilt stoppen om een gesprek te kunnen horen, drukt u op de Multi Knop (A) om het streamen te pauzeren. Druk nogmaals op de Multi Knop (A) om het streamen te hervatten.

Afspelen stoppen

Als u het afspelen op uw apparaat wilt stoppen en wilt terugkeren naar de normale luisterprogramma's, houdt u de Multi Knop (A) twee seconden ingedrukt.

-  Tijdens het streamen kunt u de programma's van de hoortoestellen niet wijzigen.
-  Neem contact op met uw hoorspecialist als u de koppelprocedure niet kunt voltooien door de beschreven stappen te volgen.
-  De uDirect 3 kan met een volledig opgeladen accu maximaal 20 uur streamen.

Het volume aanpassen

Druk op de Volume Knoppen(+/−) van de uDirect 3 om het volume aan te passen.

- Druk op (+) om het volume te verhogen.
- Druk op (−) om het volume te verlagen.

 Het aanpassen van het volume op de uDirect 3 heeft hetzelfde effect als het aanpassen van het volume van de hoortoestellen, en kan omgevingsgeluid ook versterken.

Een ander programma selecteren

U kunt de programma's van uw hoortoestellen alleen wijzigen als er geen streaming actief is.

Druk op de Multi Knop (A) om naar een ander hoortoestelprogramma te schakelen.


Druk op de Home Knop (H) om terug te keren naar het oorspronkelijke programma en volumeniveau van uw hoortoestellen.

De uDirect 3 gebruiken in combinatie met de uMic

Als u een uMic hebt, werkt deze samen met de uDirect 3 om audio van een persoon of apparaat naar uw hoortoestellen te streamen.

drager van een hoortoestel

spreker

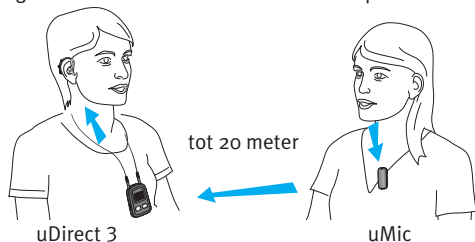

De uMic aan de uDirect 3 koppelen

1. Begin met de uMic in de stand Uit, houd vervolgens de Volume Knop omhoog (+) ingedrukt en schakel de uMic in. Houd de knop Volume omhoog (+) ingedrukt totdat het Audio-lampje blauw begint te knipperen.
2. Schakel de uDirect 3 in. Houd vervolgens de Koppel Knop (<>) en Volume Knop omhoog (+) tegelijkertijd twee seconden ingedrukt.

3. Als het koppelen is voltooid, stoppen de blauwe lampjes op de uDirect 3 en de uMic met knipperen.

Audio van uw uMic afspelen

1. Maak de uMic aan de kleding van een persoon vast of plaats de uMic in de buurt van een geluidsbron zoals een luidspreker of televisie.
2. Pas het geluidsniveau van de uMic aan van gemiddeld naar hoog.
3. Doe kleine aanpassingen in het volume met de Volume Knoppen (+/−) van de uDirect 3.

Afspelen pauzeren

Als u het streamen tijdelijk wilt stoppen, drukt u op de Multi Knop (A) om het streamen te pauzeren. Druk nogmaals op de Multi Knop (A) om het streamen te hervatten.

Afspelen stoppen

Als u het afspelen op uw apparaat wilt stoppen en wilt terugkeren naar de normale luisterprogramma's, houdt u de Multi Knop (A) twee seconden ingedrukt.

-  Tijdens het streamen kunt u de programma's van de hoortoestellen niet wijzigen.
-  Neem contact op met uw hoorspecialist als u de koppelprocedure niet kunt voltooien door de beschreven stappen te volgen.
-  De uDirect 3 kan met een volledig opgeladen accu maximaal 20 uur streamen.

De uDirect 3 gebruiken in combinatie met een audioapparaat met Bluetooth

Als u een audiobron hebt die is uitgerust met Bluetooth-functionaliteit (bijv. een MP3-speler), kunt u draadloos audio streamen naar uw hoortoestellen.

Uw Bluetooth-audioapparaat koppelen:

1. De uDirect 3 dient te zijn ingeschakeld en op de juiste manier te worden gedragen.
2. Houd de Koppel Knop () en Volume Knop omhoog () tegelijkertijd twee seconden ingedrukt totdat het Audio-lampje snel blauw begint te knipperen.

3. Start het koppelproces op het Bluetooth-apparaat binnen één minuut, overeenkomstig de gebruikershandleiding van het apparaat. Gebruik de code '0000' als u hierom wordt gevraagd.
4. Schakel het andere Bluetooth-apparaat in.
5. Bij sommige Bluetooth-apparaten moet u op de knop 'play' (afspelen) op het apparaat drukken.
6. Als de apparaten op de juiste manier zijn gekoppeld en verbonden, start het streamen automatisch en gaat het Audio-lampje continu blauw branden.

Audio van uw apparaat afspelen

1. Start het afspelen op uw apparaat.
2. Pas het volumeniveau op het apparaat aan van gemiddeld naar hoog.
3. Doe kleine aanpassingen in het volume met de Volume Knoppen () () van de uDirect 3.

Afspelen pauzeren

Als u het streamen tijdelijk wilt stoppen om een gesprek te kunnen horen, drukt u op de Multi Knop (A) om het streamen te pauzeren. Druk nogmaals op de Multi Knop (A) om het streamen te hervatten.

Afspelen stoppen

Als u de Bluetooth-streaming volledig wilt stoppen, schakelt u het andere Bluetooth-apparaat uit of schakelt u de Bluetooth-functie ervan uit.

 **Opmerking:** raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat of neem contact op met uw dealer als u de koppelprocedure niet kunt voltooien door de beschreven algemene stappen te volgen.

 **Opmerking:** De uDirect 3 kan met een volledig opgeladen accu meer dan 20 uur streamen.

 **Opmerking:** Tijdens het streamen kunt u de luisterprogramma's niet wijzigen.

De uDirect 3 gebruiken in combinatie met een audioapparaat met koptelefoonuitgang

Voor een optimale werking van de functies van de streamer en afstandsbediening adviseren we u om de uDirect 3 om uw nek te dragen.

Muziek streamen via een kabel

De uDirect 3 dient te zijn ingeschakeld en op de juiste manier om uw nek te worden gedragen.

1. Steek de audiokabel in de koptelefoonuitgang op uw audiospeler en start de speler.
2. Steek het andere uiteinde van de audiokabel in de Audio-ingang op uw uDirect 3. Het streamen van audio wordt automatisch geactiveerd.



Druk kort op de Multi Knop (A) om het streamen te stoppen en opnieuw te starten.

De FM-ontvanger instellen

U kunt de uDirect 3 samen met FM-apparatuur gebruiken.

1. Plaats de FM-zender in de buurt van de geluidsbron en schakel de geluidsbron in.
2. Schakel de FM-ontvanger in, indien vereist.
3. De uDirect 3 dient te zijn ingeschakeld en op de juiste manier te worden gedragen.
4. Bevestig uw FM-ontvanger via de FM-ingang aan de uDirect 3, zoals weergegeven in de afbeelding.



Als er FM-geluid is gedetecteerd, hoort u de FM-meldingstoon voor streaming door uw hoortoestellen. De FM-meldingstoon is vergelijkbaar met een beltoon.

Wat u kunt doen met het FM-sigitaal tijdens de FM-meldingstoon:

- **Accepteren:** Druk kort op de Multi Knop (A).
- **In de wacht zetten:** Houd de Multi Knop (A) twee seconden ingedrukt.
- **De FM-meldingstoon negeren:** Na 20 seconden wordt FM automatisch in de wacht gezet.

Druk kort op de Multi Knop (A) om het FM-sigitaal tijdens streamen te pauzeren.

Het gepauzeerde FM-geluid blijft automatisch op de achtergrond actief en kan opnieuw worden gestart zolang er een FM-sigitaal aanwezig is. Dit doet u door kort op de Multi Knop (A) te drukken.

 **Zolang er een FM-sigitaal wordt gestreamd, kunt u niet naar een ander hoortoestelprogramma schakelen via de Multi Knop (A).**

 **Opmerking:** Na 20 seconden wordt het geluid automatisch in de wacht gezet, als u het niet accepteert.

 Als de uDirect 3 drie minuten geen signaal ontvangt via de Eurostekker, krijgt u een waarschuwingstoon te horen. Deze waarschuwing wordt elke 15 minuten herhaald, totdat u stopt met streamen via de Eurostekker.

Elke keer dat de streaming via FM wordt geactiveerd, speelt de uDirect 3 een bevestigingsgeluid af en gaat het Audio-lampje oranje branden.


Als er tijdens FM-streaming 45 seconden geen FM-signaal is, verzendt de uDirect 3 een kort waarschuwingssignaal, en vervolgens elke 15 minuten daarna.

Als er meer dan 15 minuten geen FM-signaal is, start de meldingstoon opnieuw als het FM-signaal weer is gedetecteerd.

Als u FM volledig wilt deactiveren, trekt u de FM-ontvanger uit de uDirect 3.

Meerdere gekoppelde audiobronnen beheren op de uDirect 3

Als een audiobron via de uDirect 3 is gekoppeld, schakelen uw hoortoestellen automatisch over naar speciale streamingprogramma's.

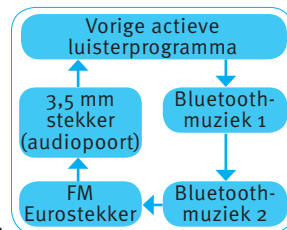

Er kunnen meerdere audiobronnen tegelijkertijd aan de uDirect 3 gekoppeld en actief zijn.

- Twee Bluetooth-apparaten (bijv. een telefoon en de uTV 3)
- Eén apparaat via de Audio-ingang (3,5 mm audiostekker)
- Eén FM-ingang (Eurostekker)

Gesproken statusindicatoren en het Audio-lampje informeren u over de gekoppelde audiobronnen.

Een audiobron wordt beschouwd als 'verbonden' met de uDirect 3 als:

- De audiostekker is ingeplugd (met of zonder audiosignaal)
- Er een FM-ontvanger is ingeplugd en deze een FM-signaal ontvangt
- Er een Bluetooth-muziekbron muziek streamt of is gepauzeerd
- Er een Bluetooth-telefoon is gekoppeld en deze zich binnen bereik bevindt

 Een telefoonoproep krijgt altijd voorrang. U hoort de beltoon, ook als u naar andere audiobronnen luistert via een kabel, Bluetooth of FM. Als u het inkomende gesprek weigert of beëindigt, wordt het streamen van audio hervat.

 U kunt hoortoestelprogramma's niet wijzigen via de Multi Knop (A) als er een audiobron aan de uDirect 3 is gekoppeld.

 Als u naar muziek van uw gekoppelde mobiele telefoon wilt luisteren, moet u de muziek inschakelen via uw telefoon; de muziek kan niet worden ingeschakeld via de uDirect 3.

Kiezen uit meerdere audiobronnen via de uDirect 3

Als u slechts één audiobron hebt gekoppeld (bijv. via een Bluetooth-zender), wordt bij elke druk op de Multi Knop (A) het afspelen van de audiobron gepauzeerd of hervat.

U kunt meerdere geluidsbronnen na elkaar beluisteren door op de Multi Knop (A) te drukken. Telkens als u op de knop drukt, selecteert de uDirect 3 de volgende gekoppelde audiobron in een vaste volgorde.

Als een bron niet is gekoppeld, slaat de uDirect 3 deze over om verder te gaan met de volgende bron.

Elke gekoppelde audiobron heeft een vaste plaats in de rij, zoals weergegeven in het schema.

 Als u op de Home Knop (H) drukt, worden altijd de oorspronkelijke programma's van uw hoortoestellen geselecteerd, onafhankelijk van de volgorde van de audiobronnen.

Uw uDirect opnieuw instellen 3

Als de uDirect 3 om een bepaalde reden niet reageert:

1. Schuift u de Aan/Uit-schakelaar van de uDirect 3 naar de stand Aan.
2. Houd de knoppen (<>), (huis) en (-) tegelijkertijd gedurende twee seconden ingedrukt.
3. Schuif de Aan/Uit-schakelaar van de uDirect 3 naar de stand Uit.
4. Wacht vijf seconden.

De uDirect 3 is nu opnieuw ingesteld en werkt weer normaal als u het apparaat opnieuw inschakelt.

 Nadat de uStream opnieuw is ingesteld, blijven de via Bluetooth gekoppelde apparaten, de configuratiestatus en de groepering voor de hoortoestellen behouden.

Gekoppelde Bluetooth-apparaten verwijderen

Als u problemen ondervindt met een van de gekoppelde apparaten, of als een apparaat geen verbinding meer maakt met uw uDirect 3, kunt u desnoods alle koppelingen van de uDirect 3 verwijderen.

1. Schakel uw uDirect 3 in.
2. Hou de knoppen (<>) en (+) tien seconden ingedrukt totdat het Audio-lampje niet meer snel blauw knippert.
3. Verwijder ook de met de uDirect 3 gekoppelde items van uw mobiele telefoon voordat u opnieuw items koppelt.
4. Herhaal de koppelprocedure.

 Als u gekoppelde Bluetooth-apparaten verwijdert, kunt u geen verbinding meer maken met deze apparaten. U moet de koppelprocedure opnieuw uitvoeren als u opnieuw verbinding wilt maken.



Gids voor probleemoplossing

Oorzaak	Mogelijke oplossing
Tijdens het koppelen via Bluetooth vraagt mijn andere apparaat om een code. Wat moet ik invoeren?	
De koppelcode is vereist als u voor de eerste keer uw uDirect 3 aan uw Bluetooth-apparaat koppelt (paren)	De koppelcode voor uw uDirect 3 is '0000' (vier nullen)
Ik hoor onderbrekingen tijdens het streamen via de uDirect 3	
Het Bluetooth-apparaat is te ver weg, of u draagt deze in uw achterzak (uw lichaam houdt het signaal dan tegen)	Overschrijd de maximale afstand van 5 tot 10 m niet en houd Bluetooth-apparaten voor uw lichaam
uDirect 3 zoekt gedurende twee minuten na inschakeling naar bekende apparaten	Na twee minuten stopt uDirect 3 met zoeken en stopt de onderbreking
Een telefoon die met andere apparaten is verbonden, zoals een pc, kan mogelijk niet continu muziek streamen	Als u uw Bluetooth-telefoon als muziekspeler gebruikt, koppel deze dan los van andere apparaten, zoals pc's

Oorzaak	Mogelijke oplossing
Het volume van de muziek staat te hard of te zacht Het volume tijdens telefoongesprekken is niet prettig (te laag of te hoog)	
Het volume van de audio verschilt per audiobron	Verlaag het volume van het hoortoestel door op de Volume Knop () te drukken. Als het geluidsvolume van de telefoon (of de muziek) te laag is na het uitvoeren van deze handeling, kunt u het volume weer harder zetten met behulp van de volumeknop van de telefoon. Als u het volume van de telefoon of een andere geluidsbron die naar de uDirect 3 wordt gestreamd, wilt wijzigen, past u eerst het volume van het apparaat aan en doet u vervolgens kleine aanpassingen op uw uDirect 3
Ik kan het telefoongesprek moeilijk verstaan in een lawaaiige omgeving	
Het volume van de microfoons van uw hoortoestel is te hoog ingesteld tijdens het gesprek	Verminder het omgevingslawaai door de Volume Knop omlaag twee seconden ingedrukt te houden. Gebruik vervolgens de volumeknop op de telefoon om het volume van de telefoon te verhogen

Oorzaak	Mogelijke oplossing
De beller kan mij horen, maar ik hoor de beller niet	
Het gesprek is doorgeschakeld naar uw telefoon	Zorg ervoor dat het gesprek terug wordt geleid naar de uDirect 3. Dit doet u via het telefoonmenu of door lang op de knop (A) te drukken
De uDirect 3 wordt niet meer herkend door de telefoon of het andere Bluetooth-apparaat waaraan het hiervoor was gekoppeld	
Als de uDirect 3 na twee minuten nog geen apparaat heeft gevonden, stopt deze met zoeken om energie te besparen	Schakel de uDirect 3 uit, wacht totdat het rode lampje uitgaat en schakel het apparaat vervolgens opnieuw in
De apparaten zijn te ver van elkaar verwijderd	Plaats de apparaten binnen één meter van elkaar en probeer het nog eens
De uDirect 3 kan aan maximaal acht verschillende Bluetooth-apparaten worden gekoppeld. Als het interne geheugen vol is, kunnen nieuw gekoppelde apparaten eerder gekoppelde apparaten overschrijven	Herhaal de koppeling tussen de uDirect 3 en het Bluetooth-apparaat dat is overschreven
Het gekoppelde apparaat is verwijderd	Herhaal de koppeling tussen de uDirect 3 en het Bluetooth-apparaat dat is verwijderd

Oorzaak	Mogelijke oplossing
Ik ben niet aan het streamen, maar de hoortoestellen blijven schakelen tussen het Bluetooth-programma en het normale hoortoestelprogramma	
Uw telefoon stuurt geluiden naar de uDirect 3 omdat er sms'jes of mails binnenkomen	Schakel de systeemgeluiden voor herinneringen, alarmen, sms, etc. uit via het menu van uw telefoon
De toetstonen zijn ingeschakeld	Schakel de toetstonen uit via het menu van uw telefoon
Ik hoor de aanraaktonen van mijn telefoon in mijn hoortoestellen	
Mogelijk zijn de aanraaktonen ingeschakeld op uw telefoon	Schakel de aanraak- en bevestigingstonen op uw telefoon uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon
Elke keer dat ik mijn telefoon inschakel, start de muziekspeler	
Voor sommige telefoons is dit normaal en wordt het niet veroorzaakt door de uDirect 3	Sommige telefoons kunt u zó instellen, dat de muziekspeler niet automatisch start. Houd de Multi Knop ingedrukt om het streamen te stoppen. Stop de muziekspeler via het menu van de telefoon nadat u de telefoon hebt gekoppeld

Oorzaak	Mogelijke oplossing
---------	---------------------

Als ik in mijn auto stap, vertoont de uDirect 3-verbinding met mijn telefoon onverwacht gedrag

Het Bluetooth-systeem van uw auto maakt verbinding met uw telefoon	Overweeg om de verbinding tussen het Bluetooth-systeem van uw auto en uw telefoon te verbreken
--	--

Ik heb het inkomende gesprek geaccepteerd, maar ik kan het gesprek niet horen in mijn hoortoestellen

Sommige telefoons schakelen niet door naar de uDirect 3 als u het gesprek via de telefoonknop accepteert	Accepteer het inkomende gesprek altijd door op de Mult Knop (A) van de uDirect 3 te drukken
--	---

Oorzaak	Mogelijke oplossing
---------	---------------------

De telefoon rinkelt maar het audiolampje brandt NIET continu blauw en ik hoor geen rinkelend geluid door de hoortoestellen

Bluetooth is uitgeschakeld op de telefoon	Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld. Volg hiervoor de stappen in de gebruikershandleiding van uw telefoon
---	---

De uDirect 3 en uw telefoon zijn niet met elkaar verbonden	1. Schakel de Bluetooth-functionaliteit op uw telefoon uit en weer in 2. Start de uDirect 3 opnieuw op door het apparaat uit en weer in te schakelen. De Bluetooth-functionaliteit van de uDirect 3 wordt automatisch opnieuw geactiveerd 3. Activeer de uDirect 3 door deze te selecteren in het menu 'Active device' (actief apparaat) van de telefoon 4. Verklein de afstand tussen de uDirect 3 en de telefoon
--	---

De uDirect 3 is niet aan de telefoon gekoppeld	Volg de koppelprocedure in deze handleiding
De afstand tussen de uDirect 3 en de telefoon is te groot	Draag de uDirect 3 om uw nek. Houd maximaal 5 m afstand van de telefoon

Oorzaak	Mogelijke oplossing
---------	---------------------

De telefoon rinkelt en het Audio-lampje brandt continu blauw, maar ik hoor geen rinkelend geluid door de hoortoestellen

De uDirect 3 bevindt zich buiten bereik van de hoortoestellen	Draag de uDirect 3 op de juiste manier om uw nek, met beide neklusstekkers stevig ingestoken
---	--

De telefoon staat ingesteld op de trilfunctie	Schakel de beltoon in op de telefoon
---	--------------------------------------

Als u al met een telefoongesprek bezig bent, kan een tweede oproep niet worden herkend	Hang op en selecteer de tweede oproep
--	---------------------------------------

Mijn telefoon rinkelt, maar de naam van de beller wordt niet uitgesproken door de uDirect 3

De functie voor belleridentificatie is niet beschikbaar of niet ingeschakeld op uw telefoon	Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon om te kijken of uw telefoon over deze functie beschikt
---	---

Er zijn twee telefoons verbonden met uw uDirect 3	Als er twee telefoons zijn verbonden, is belleridentificatie alleen beschikbaar op de telefoon die als laatste aan de uDirect 3 is gekoppeld
---	--

Belleridentificatie is mogelijk uitgeschakeld	Vraag uw hoorspecialist om belleridentificatie in te schakelen op uw uDirect 3
---	--

Oorzaak	Mogelijke oplossing
---------	---------------------

Tijdens een telefoongesprek meldt de persoon aan de andere kant van de lijn dat deze mij niet goed kan verstaan

De microfoonopeningen van de uDirect 3 zijn mogelijk afgedekt	Zorg ervoor dat de microfoonopeningen niet worden afgedekt door delen van uw lichaam, kleding, stof of vuil
---	---

U draagt de uDirect 3 mogelijk niet op de juiste manier	Draai de uDirect 3 niet opzij en zorg ervoor dat de neklusstekkers naar uw mond wijzen als u praat
---	--

De uDirect 3 schuurt mogelijk tegen kleding aan	Beweeg minder terwijl u praat of overweeg om de externe microfoon te gebruiken (optioneel)
---	--

Mogelijk is er te veel omgevingslawaai	Hoewel de uDirect 3 is uitgerust met technologieën voor ruisonderdrukking, kunt u beter lawaaige omgevingen mijden. Vraag uw bellers om het volume van hun telefoon te verhogen of houd de uDirect 3 dichterbij uw mond
--	--

Oorzaak	Mogelijke oplossing
---------	---------------------

De uDirect 3 reageert niet meer of er brandt geen enkel lampje als ik het apparaat inschakel

De accu van de uDirect 3 is mogelijk leeg	Laad uw uDirect 3 minimaal 1 uur op
---	-------------------------------------

Mogelijk duidt dit op een softwareprobleem	Trek alle stekkers uit de uDirect 3. Schakel de uDirect 3 uit en weer in. Overweeg om de uDirect 3 opnieuw in te stellen
--	---

De bedrijfsduur van uw uDirect 3 is duidelijk korter geworden

De accu moet meerdere keren volledig worden opgeladen om optimaal te werken	Laad de uDirect 3 de eerste keer minimaal 3 uur op. Laat een nieuwe uDirect 3 drie keer volledig ontladen
---	---

De audio wordt meerdere keren onderbroken terwijl het streamen bezig is

De uDirect 3 is te ver verwijderd van de hoortoestellen tijdens het streamen	Draag de uDirect 3 door deze aan uw kleding vast te maken, binnen 40 cm afstand van de hoortoestellen.
Het Bluetooth-sigitaal bevindt zich buiten het bereik van de uStream	Houd het Bluetooth-apparaat binnen het operationele bereik

Oorzaak	Mogelijke oplossing
---------	---------------------

Ik hoor geen demogeluid

U draagt de hoortoestellen niet op de juiste manier	Zorg ervoor dat de hoortoestellen goed in of achter uw oren zitten
---	--

U draagt de uDirect 3 niet op de juiste manier, of deze is uitgeschakeld	Draag de uDirect 3 door deze aan uw kleding vast te maken, binnen 40 cm afstand van de hoortoestellen. Zorg ervoor dat de uDirect 3 is opgeladen en ingeschakeld
--	--

Voor problemen die niet in deze gebruikershandleiding voorkomen verwijzen wij u naar uw hoorspecialist.

Waarschuwingen

- 👤 Lees de informatie op de volgende pagina's voordat u uw Unitron uDirect 3 in gebruik neemt.


Waarschuwingen

- ⚠️ Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen onder de 3 jaar en huisdieren.
- ⚠️ Gebruik alleen hoortoestellen die door uw hoorspecialist speciaal voor u zijn geprogrammeerd.
- ⚠️ Veranderingen of aanpassingen aan de apparaten die niet expliciet zijn goedgekeurd door Unitron zijn niet toegestaan.
- ⚠️ Het gebruik van dit apparaat is niet toegestaan voor personen met actieve geïmplanteerde medische apparaten (bijv. pacemakers, defibrillatoren, enz.). Neem contact op met uw hoorspecialist voor meer informatie.
- ⚠️ Draag de uDirect 3 niet om uw nek als deze is verbonden met programmeerapparatuur.

- ⚠️ Zorg ervoor dat u altijd beide neklusstekkers en andere kabels eruit trekt voordat u de uDirect 3 als handafstandsbediening gebruikt.
- ⚠️ Door de uDirect 3 te openen, kan deze beschadigd raken. Neem contact op met uw hoorspecialist als er problemen optreden die niet kunnen worden opgelost door de oplossingsrichtlijnen in het gedeelte Probleemoplossing in deze gebruikershandleiding te volgen.
- ⚠️ Dit product heeft een ingebouwde, niet-vervangbare accu. Probeer niet om het product open te maken of de accu te vervangen, aangezien daardoor letsel of schade aan het product kan ontstaan.
- ⚠️ Gooi elektrische apparatuur weg in overeenstemming met lokale regelgeving.
- ⚠️ Gebruik het apparaat niet in omgevingen met explosiegevaar (mijnen of industriegebieden met explosiegevaar, zuurstofrijke omgevingen of plaatsen waar

met ontvlambare anesthetica wordt gewerkt) of in omgevingen waar het gebruik van elektronische apparatuur is verboden.

- ⚠ Externe apparaten mogen alleen aangesloten worden als ze zijn getest volgens de overeenkomstige IECXXXXX-normen. Gebruik alleen door Unitron goedgekeurde accessoires.
- ⚠ Het gebruik van uw uDirect 3-kabels op een andere manier dan waarvoor deze zijn bedoeld (bijv. door de USB-kabel rond uw nek te dragen), kan letsel veroorzaken.
- ⚠ Zorg ervoor dat als u machines bedient er geen onderdelen in de machine terechtkomen.
- ⚠ De mini-USB-poort dient uitsluitend voor het omschreven doeleinde te worden gebruikt.
- ⚠ Let op: elektrische schokken. Steek de stekker niet rechtstreeks in het stopcontact.

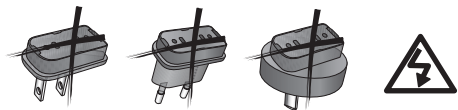

- ⚠ Gebruik om veiligheidsredenen alleen opladers van Unitron of gestabiliseerde opladers die zijn gecertificeerd voor gebruik in combinatie met 5 VDC, min. 500 mA.

Informatie over de productveiligheid

- ⚠ Controleer alle onderdelen van uw hoortoestel samen met uw hoorspecialist.
- ⚠ Bescherm de uDirect 3 tegen overvloedig vocht (baden, zwemmen), hitte (radiator, instrumentenpaneel van uw auto) en direct huidcontact als u zweet (training, fitness, sport).
- ⚠ Bijzonder medisch of tandheelkundig onderzoek waarbij de hieronder beschreven straling wordt gebruikt, kan de correcte werking van uw apparaat nadelig beïnvloeden. Verwijder het apparaat en houd het buiten de onderzoeksruimte/ het onderzoeksgebied voordat u medisch of tandheelkundig onderzoek met röntgenstraling ondergaat (inclusief CT-scans) of medisch onderzoek met MRI/NMRI-scans, waarbij magnetische velden ontstaan.

- ⚠ Laet het apparaat niet vallen. Uw apparaat kan beschadigd raken als het op een hard oppervlak valt.
- ⚠ Bescherm de uDirect 3 tegen hevige schokken en trillingen.
- ⚠ Gebruik geen buitensporige kracht als u uw uDirect 3 met de verschillende kabels verbindt.
- ⚠ Bescherm alle openingen (microfoons, antenne, audio, FM en oplader) tegen stof en vuil.
- ⚠ Maak de uDirect 3 nooit droog met een magnetron of andere verwarmingsapparatuur.
- ⚠ Reinig de uDirect 3 met een vochtige doek. Reinig de uDirect 3 nooit met huishoudelijke schoonmaakproducten (waspoeder, zeep, etc.) of alcohol.
- ⚠ De digitaal gecodeerde, inductieve-transmissietechnologie die in de uDirect 3 wordt gebruikt, is uiterst betrouwbaar en ondervindt vrijwel geen interferentie van andere apparaten.

Er wordt echter wel op gewezen dat wanneer het hoortoestelsysteem in de buurt van computerapparatuur, grotere elektronische installaties of andere sterke elektromagnetische velden wordt gebruikt, het noodzakelijk kan zijn om minimaal 60 cm afstand van de interferentiebron te houden om een goede werking te waarborgen. Houd het apparaat minimaal 10 cm verwijderd van alle soorten magneten.

- ⚠ Trek de neklus niet los als de uDirect 3 signalen naar uw hoortoestellen zendt.
- ⚠ Laad de uDirect 3 om veiligheidsredenen alleen op met opladers van Unitron of USB-gecertificeerde opladers van meer dan 500 mA.
- ⚠ Verbind geen USB- of audiokabel die langer is dan 3 meter aan de uDirect 3.
- ⚠ Als u de uDirect 3 niet gebruikt, dient u deze uit te schakelen en veilig te bewaren.

Andere belangrijke informatie

- ⚠ Elektronische apparaten met een hoog vermogen, grotere elektronische installaties en metalen constructies kunnen het operationele bereik nadelig beïnvloeden en significant verkleinen.
- ⚠ Als uw hoortoestellen door een ongewone veldstoring niet op de uDirect 3 reageren, beweegt u zich weg van het storende veld.
- ⚠ Uw hoortoestellen en uw uDirect 3 krijgen een unieke communicatiecode tijdens het passen. Dit garandeert dat het apparaat de hoortoestellen van anderen niet beïnvloedt.
- ⚠ Als u een FM-zender gebruikt, houd er dan rekening mee dat radiosignalen ook kunnen worden opgevangen en onderschept door andere ontvangers.

Informatie over en uitleg van symbolen



Met het CE-symbool bevestigt Unitron dat dit product van Unitron voldoet aan de eisen van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG en van de Richtlijn Eindapparatuur voor Radio- en Telecommunicatie 1999/5/EEG.



Dit symbool geeft aan dat het voor de gebruiker belangrijk is om de relevante informatie in deze gebruikershandleiding te lezen en te benutten.



Dit symbool geeft aan dat de in deze bedieningsinstructies beschreven producten voldoen aan de eisen voor een applicatiedeel van type B van EN 60601-1.



Belangrijke informatie over de omgang met het product en de productveiligheid.



Australisch conformiteitslabel EMC en Radiocommunicatie.



Aan dit symbool moeten de naam en het adres van de bevoegde vertegenwoordiger binnen de Europese Unie zijn toegevoegd.



Aan dit symbool moeten de naam en het adres van de fabrikant (die het apparaat op de markt brengt) zijn toegevoegd.

Gebruiksomstandigheden:

Dit apparaat is zodanig ontworpen dat het zonder problemen of beperkingen functioneert zoals bedoeld, tenzij anders aangegeven in deze gebruikershandleidingen.

0° tot 45° Celsius en een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 95% (niet-condenserend).

Voorwaarden transport en opslag:

Tijdens transport en opslag dient de temperatuur gedurende een lange periode tussen -20° en 60° Celsius te liggen en de relatieve luchtvochtigheid niet boven de 90%. De luchtdruk dient te liggen tussen 500 en 1100 hPa.



Het symbool van een vuilnisbak met een kruis moet u erop attenderen dat dit apparaat niet mag worden verwijderd als gewoon huishoudelijk afval. Deponeer oude of ongebruikte apparaten op stortplaatsen voor elektronisch afval of overhandig het apparaat aan uw hoorspecialist voor verwijdering. Een juiste manier van verwijderen beschermt het milieu en de gezondheid.



Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Unitron onder licentie gebruikt. Overige handelsmerken en handelsnamen behoren toe aan de betreffende eigenaars.



Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.



Google Play is een handelsmerk van Google Inc.

Informatie over naleving

Conformiteitsverklaring

Unitron verklaart hierbij dat dit Unitron product voldoet aan de belangrijkste vereisten van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC alsook de Richtlijn 1999/5/EC voor Eindapparatuur voor radio- en telecommunicatie. De volledige tekst van de Conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant of de plaatselijke vertegenwoordiger van Unitron. Kijk voor de adressen op www.unitron.com

Kennisgeving 1:

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de norm RSS-210 van Industry Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- 2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Kennisgeving 2:

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Unitron leiden mogelijk tot het vervallen van de FCC-toestemming om dit apparaat te bedienen.

Kennisgeving 3:

Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften en de norm ICES-003 van Industry Canada. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan dit apparaat schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er wordt echter geen garantie geboden dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat hinderlijke interferentie op radio-of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

Richt of verplaats de ontvangstantenne.

Ver groot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten

Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-reparateur.

Australia: Leverancierscode  N15398

New Zealand: Leverancierscode Z1285



Unitron Hearing

20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada



Unitron Hearing GmbH

Max-Eyth-Straße 20, 70736
Fellbach-Oeffingen, Germany

Kijk voor een lijst van
Unitron-distributeurs op
www.unitron.com





Distributeur

unitron.com/nl



14-050 029-5990-07