

Technische fiche



Informaties

Aanstelling Opklapbare steungreep Arsis®, 600 mm, Wit Epoxy Aluminium, Mat verchroomdt bevestigingsrozetten, tube 38 x 25 mm

Referentie 048960

DE PLUSPUNTEN

"Soft close" systeem




Beschrijving

Solider elliptische buis 38 x 25 mm, wit epoxy of verchroomd aluminium. Mat verchroomd bevestigingsrozetten en zijkant plaat. Onzichtbare bevestigingen.

Wall fixings included.

Design coordinated with all ARSIS® Comfort items.

Perfectly suitable for use in the hospitality industry.

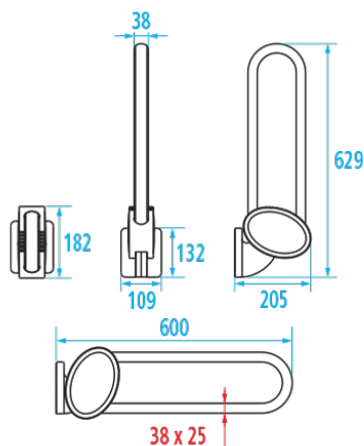

Technische kenmerken

Afmetingen	600 mm
Kleur	Wit
Materiaal	Aluminium
Diameter Ø	38 x 25 mm
Afwerking	Mat verchroomd
Getest in laboratorium aan	225 kg
Verpakking	Kartonnen doos + etiket
Waarborg	5 jaar
CE : toegelaten belasting	150 kg
Gencod	3563390489604
Douanecode	7615200000
Infoblad	A48960812

Onderhoud en installatie gids

Aangeraden hoogte voor de bovenste leuning: 80 cm in het toilet en douche, of op wasbak hoogte. Steungreep toe te voegen veiligheid van de gebruiker wanneer geïnstalleerd volgens de instructies. De kracht die wordt verdragen door de wandbevestiging vraagt een precieze selectie van schroefwerk en pluggen die is afgestemd op het karakter van de wandsteen. De keus voor wandbevestigingen (schroeven en pluggen) die geschikt zijn voor uw wandsteen is de beste garantie voor een lange levensduur van uw accessoire. We raden u aan om inox schroeven te kiezen. In een vochtige omgeving vermijdt u hiermee corrosie (Ø 4 mm). Alvorens de wand te doorboren, houdt u het product tegen de wand en markeert u de plaatsen waar u moet boren. Alle bevestigingspunten moeten strikt worden nageleefd. Gebruik de steungreep niet als opstapje om iets vast te grijpen, ga er niet op zitten en ga er niet aan hangen. Gebruik deze enkel als hulpmiddel. Voor wanden die niet zo stevig zijn, zijn er 3 oplossingen: de bevestigingspoot ref. 048400, de steungreep ref. 048810 of installatie van multiplex achter de wand.

Onderhoud

BELANGRIJK: Om de duurzaamheid van dit product en de veiligheid van de gebruiker te garanderen, raden wij aan het product te reinigen met zachte zeepoplossingen. **OPGELET:** GEBRUIK NOOIT reinigingsmiddelen op basis van: ketonen, koolwaterstoffen, zuren, basen, esters en ethers. Na gebruik van een reinigingsproduct moet u met helder water spoelen.

Faciliteit van gebruik

Functie

Handhaving	★★★☆☆
Ophaling	★★★★
Overdracht	★★★☆☆
Rust	★★★☆☆

Kenmerken

Horizontaal	★★★★
Verticaal	★★★★
Corrosiewerrend	★★★★

Soort gebruik

Douche	★★★★
WC	★★★★
Wastafel	★★★☆☆
Kleedkamer	★★★☆☆

Plaats van gebruik

Medische instellingen	★★★★
ERP/IOP	★★★☆☆
Hotels	★★★★
Prive huizen	★★★☆☆
Wekplaatsen	★★★☆☆