

Technische fiche





Informaties



Aanstelling	Klappbarer Duschsitz Ergosoft, 486 x 595 x 620 mm, Polypropreen, Wit
Referentie	047686

Beschrijving

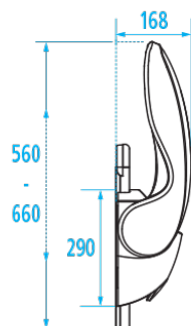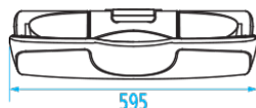

Ergonomische Sitzfläche, Weiße. Verstellbare Höhe 100 mm.

Delivered fully assembled.

The ERGOSOFT seats are designed to support a maximum static vertical load of 150 kg. Each armrest can bear up to 100 Kg.

Technische kenmerken

Kleur	Wit
Materiaal	Polypropreen
Afmetingen	486 x 595 x 620 mm
Verpakking	Kartonnen doos
Getest in laboratorium aan	225 kg
Aanvaardbare last	150
Waarborg	5 jaar
Gencod	3563390476864
Douanecode	392290
Infoblad	S00001833

Ondehoud en installatie gids

We raden u aan om de installatie door een vakman te laten uitvoeren die vooraf zal controleren of de muur over het volledige oppervlak dat door de stoel ingenomen zal worden, perfect vlak is (geen uitstekende voegen of tegels), of de structuur van de muurwand aangepast is en vooral of er geen zwakke punten zijn om de best passende bevestiging te bepalen. De montage van de Ergosoft stoelen wordt sterk afgeraden op muurwanden van het gipsplaat-, baksteentegel-, gipstegeltype. De stoel kan op dit soort wanden gemonteerd worden op voorwaarde dat deze in de volle muur vastgemaakt kan worden of dat er daartoe voorziene versterkingen in aangebracht worden vooraleer de stoel gemonteerd wordt. Dit product wordt gemonteerd geleverd. Om deze stoel correct te installeren, moeten de betrokken onderdelen gedemonteerd worden zoals dit op het montageschema wordt weergegeven. De kracht die wordt verdragen door de wandbevestiging vraagt een precieze selectie van schroefwerk en pluggen die is afgestemd op het karakter van de wandsteun. De keus voor wandbevestigingen (schroeven en pluggen) die geschikt zijn voor uw wandsteun is de beste garantie voor een lange levensduur van uw accessoire. We raden u aan om inox schroeven te kiezen. In een vochtige omgeving vermijdt u hiermee corrosie (Ø 4 mm). Alvorens de wand te doorboren, houdt u het product tegen de wand en markeert u de plaatsen waar u moet boren. Alle bevestigingspunten moeten strikt worden nageleefd. Na de installatie en voor het gebruik, zorg ervoor dat de schroeven goed vast zitten. Het product bevat geen stoffen die de gezondheid kunnen schaden. De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af indien u gewond raakt door een verkeerde installatie of een verkeerd gebruik van deze stoel.

Onderhoud

BELANGRIJK: Om de duurzaamheid van dit product en de veiligheid van de gebruiker te garanderen, raden wij aan het product te reinigen met zachte zeepoplossingen. **OPGELET:** GEBRUIK NOOIT reinigingsmiddelen op basis van: ketonen, koolwaterstoffen, zuren, basen, esters en ethers. Na gebruik van een reinigingsproduct moet u met helder water spoelen.

Faciliteit van gebruik

Functie

Rust ★★★★

Kenmerken

Horizontaal ★★★★

Verticaal ★★★★

Schuin ☆☆☆☆

Corrosiewerrend ★★★★

Soort gebruik

Bad ☆☆☆☆

Douche ★★★★

WC ☆☆☆☆

Wastafel ☆☆☆☆

Kleedkamer ★★★★

Plaats van gebruik

Medische instellingen ★★★★

ERP/IOP ★★★★

Hotels ★★★★☆

Prive huizen ★★★★

Wekplaatsen ★★★★