


## ProMatt anti-decubitus systemen

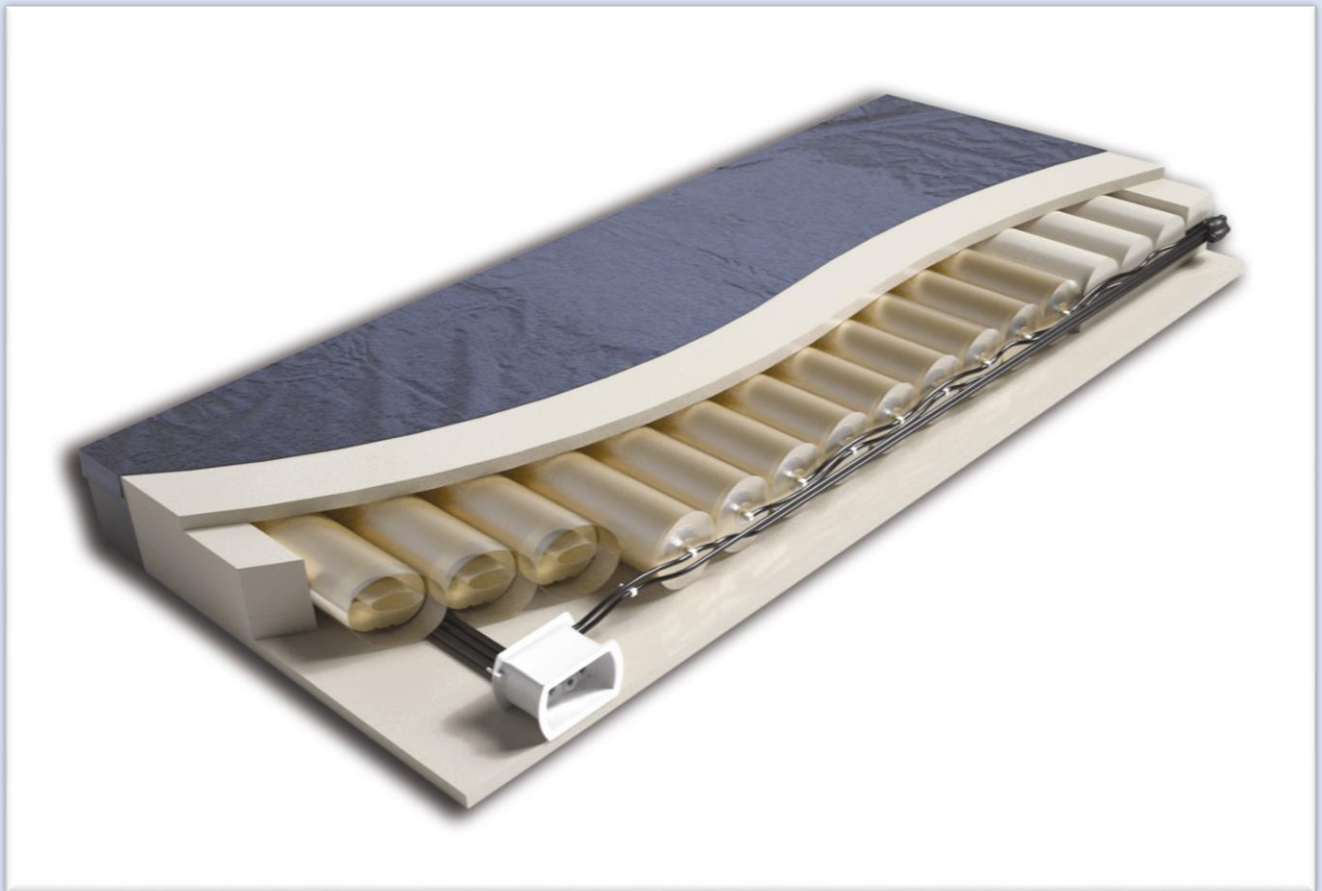

## ProMatt


### Hoge kwaliteit - Comfortabel - Geavanceerd.

ProMatt is een matrasvervangend anti-decubitus luchtsysteem, voorzien van de innovatieve **P.R.O** technologie (Pressure Redistribution Optimization).

Optimale drukverdeling dus. ProMatt is zowel mét als zonder power unit inzetbaar: efficiënte inzet van één systeem ter voorkoming of behandeling van decubitus.

Dankzij de P.R.O. technologie blijven de luchtcellen op druk en geven automatisch de juiste ondersteuning, afgestemd op lichaam, houding en gewicht van de patiënt.

1. Hoofd: statische zone uit schuim met hoge densiteit voor optimale ondersteuning en comfort.
2. } Schouder- romp- en hielzones zijn
3. } opgebouwd uit gecombineerde
4. } luchtcellen. Elke zone past zich automatisch aan om het lichaam van de patiënt optimaal te ondersteunen en drukverdeling te bieden. De hielzone biedt extra drukontlasting.
5. Topper uit visco-elastisch schuim voor optimalisering van comfort.
6. Stevige stabilisatierand rondom voor betere mobilisatie en veiligheid van de patiënt.
7. P.R.O. technische constructie houdt elke zone automatisch op juiste druk bij elke houding van de patiënt.
8. Hoes is speciaal ontwikkeld om optimaal comfort te bieden en de huid van de patiënt te beschermen: vocht- en vlekbestendig, coating met anti-bacteriële werking. Verkrijgbaar: gladde nylon hoes of bi-stretch Dartex uitvoering
9. Stroeve onderkant houdt matras op zijn plaats, dit betekent minder schuiven en minder valgevaar. ProMatt is toepasbaar op ieder gewenst bedframe,

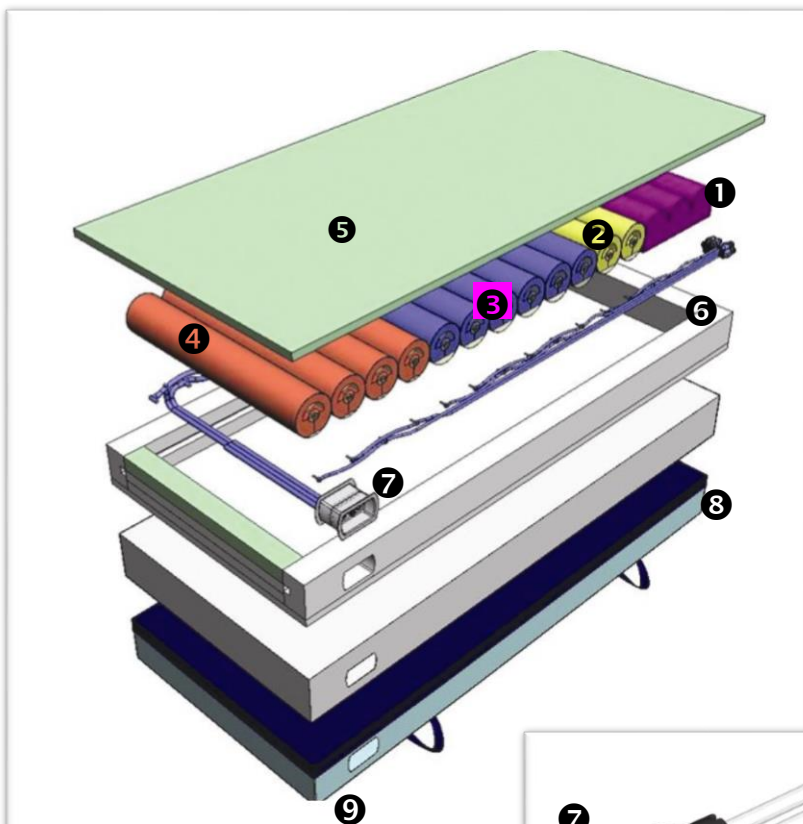

## P.R.O. Technologie – inzet zonder power unit

Aktieve drukontlasting zonder een power unit te gebruiken.

De voordelen:

- geen slangen aan buitenkant matras
- geen stroomverbruik
- geen gewichtinstelling
- geen instelling door verzorgende vereist
- geen storingen of gebruikersfouten



## Gebruiksvriendelijk

Reiniging en reanimatie: procedures gelijk als bij basismatras.

ProMatt vult de cellen automatisch weer op druk in elke luchtzone (schouder, romp, hiel).

Handmatige instelling is niet nodig

- 78,85 of 90 cm breed
- 200 cm lengte – desgewenst overige afmetingen bespreekbaar
- matrashoogte 18 cm
- matrasgewicht 14 kg
- maximale belasting van 227 kg

## Optie: power unit aansluiten.

Aangesloten op een power unit functioneert ProMatt als een wisseldruksysteem.

Belangrijk voordeel: de power unit kan worden aangesloten zonder de patiënt van het ProMatt systeem te halen.


Uitgaande van de beoogde wondbehandeling en financiële doelstellingen kan het gewenste type power unit worden gekozen:

**ES power unit:** deze heeft drie mogelijke instellingen:

-AUTOFIRM – verzorgingsstand. Hierbij worden alle cellen snel tot maximale druk opgepompt. Deze instelling is gewenst bij verzorging of transfer van de patiënt.

-THERAPY – therapiestand. Hier wordt door de power unit immersie effect en daarmee optimale drukverdeling bereikt.

-ALTERNATE – alternerende stand. Bij deze optie biedt ProMatt wisseldruk. Keuze uit drie alternerende cycli van 5, 10 of 15 minuten verschaft steeds de juiste gewenste therapie.

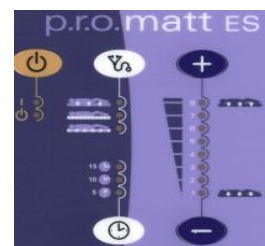


Functiebeveiliging: de toetsen op het display blokkeren na 5 minuten.

**TS508 power unit:** eveneens eenvoudig aan te sluiten op ProMatt.

Ook hier kan wisseldruk worden gegeven met een keuze uit vier cycli: 5, 10, 15 of 20 minuten. Aanvullend kan een statische verzorgingsstand worden gekozen.

De TS508 power unit alarmeert visueel (LED) en auditief in geval van wegvallende druk of stroomstoring.

De power unit is voorzien van functieblokkering en heeft tevens een geheugenfunctie: systeem keert automatisch terug naar de vorige stand.

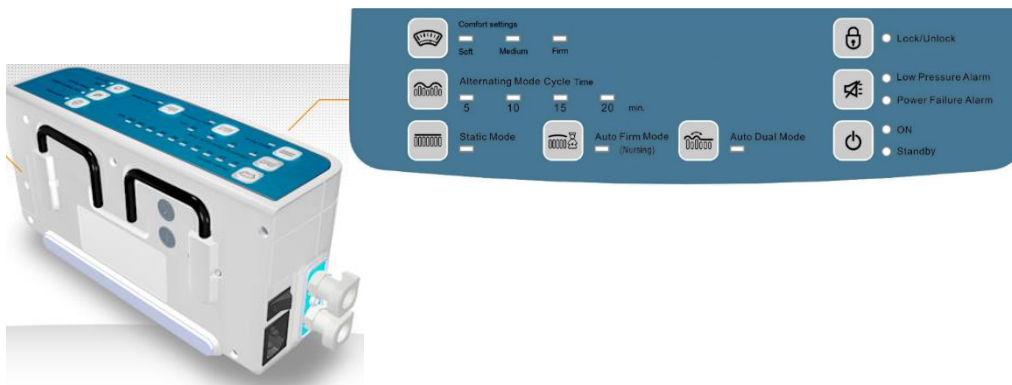

**CBC power unit:**

Deze power unit is eenvoudig traploos instelbaar met een draaiknop.

De wisseldruk cyclus is 10 minuten. Keuze uit 2 standen, statisch of alternerend.



Specificaties	ES power unit	TS508 power unit	CBC power unit
Afmetingen	34x21x23cm	26x8x18cm	28x14x9cm
Gewicht	5.0 kg	1.5 kg	1.9 kg
Cycli	5, 10, 15 minuten	5, 10, 15, 20 minuten	10 minuten
Functies	3: Autofirm, Therapy en Alternate	4: Autofirm, Therapy, Alternate en Dual	2: Alternate en statisch
Comfort instellingen	8	3	10

PEOPLE ○ PASSION ○ PERFORMANCE