

Flexobed Luchtwisselmatras

In dit document wordt beschreven hoe het lw-matras bevestigd moet worden. Re-Actief heeft het Arsos Light luchtwisselmatras aangepast voor bevestiging op het Flexobed.

- De slang die het lw-matras voorziet van lucht is verlengd. Door deze verlengde slang en bevestiging van de slang aan o.a. de bedhekken met tie ribs kan het Flexobed prima blijven uitdraaien van lig, draai naar zit-positie.
- Tevens is er een luchtbaan weggehaald waardoor de lengte van het matras circa 175 cm bedraagt en exact de lengte is van het framegedeelte dat uitdraait van lig, draai naar zit-positie. Het vaste voetenstuk wordt voorzien van een standaard voetenmatras stuk dat geleverd wordt bij het Flexobed.
- Let op dat indien het Flexobed vanuit ligpositie naar links uitdraait, dat de slang bij voorkeur (gezien vanuit een liggende positie op het matras) linksonder aan het matras wordt geplaatst. En indien het Flexobed naar rechts uitdraait dan dus rechtsonder.

In onderstaande foto-serie is de bevestiging van het lw-matras afgebeeld.



➔ Bevestiging van de banden aan het frame (bij rugdeel, middendeel, voeteneind deel)



➔



Bevestiging van de slang aan de beddekken en uitstapbeugel met tie rips

- ➔ Controleer dat bij het uitdraaien de slangen niet knellen en het Flexobed netjes in de zit-positie terecht komt.
- ➔ Controleer ook dat de bedhekken nog steeds hoog-laag kunnen worden gedaan.



Laat de bevestiging van dit speciaal aan het Flexobed aangepaste luchtwisselmatras uitvoeren door een erkend Flexobed monteur. Bel ons voor meer informatie of het maken van een afspraak op 0341-350593 of stuur een email naar info@re-actief.com.