



CANTO_{NXT}
geeft je de ruimte

Canto Nxt geeft je de ruimte

Op maat voor iedereen

Multi-instelbaar & aanpasbaar frame
Groot bereik in maatvoering

Zithoekverkanteling 30°

Zithouding aanpasbaar aan activiteit
Verandering drukverdeling

Sterk & veilig

Voor gebruikers tot 150 kg
CE markering & crashtest safe

Tal van opties

Matrixx zitondersteuningselementen
Diverse remsystemen en wielcombinaties
Framekleuren: Midnight Blue en Ice Blue
Continue rughoekverstelling

Transparant frame

Positioneringsruimte van bekken & benen
Prettig bij trippelen



CANTO
nxt

De Canto Nxt is ideaal voor gebruikers die constant zijn aangewezen op een rolstoel en die bij hun handelingen ondersteuning nodig hebben van een begeleider. De stoel heeft veel instel- en gebruiksmogelijkheden. Letterlijk en figuurlijk veel bewegingsruimte dus: zowel voor de cliënt als voor u. De Canto Nxt is breed (her)inzetbaar en biedt veel comfort. Het multifunctionele kantelframe heeft een groot zithoekbereik en vormt een stabiele basis voor de verschillende aandrijvings- en opbouwvarianten. Door de combinatie met het Matrixx zitsysteem ontstaat er nog meer ruimte voor maatwerk. De stoel kan volledig worden afgestemd op de individuele gebruiker.

Voor uw cliënt betekent dit: altijd een comfortabel zittende rolstoel, die makkelijk rijdt of trippelt en dus veel bewegingsvrijheid biedt!



Continu de ideale zithouding



0 - 30°



Kantelframe


De Canto NXT beschikt over een stabiel en comfortabel kantelmechanisme op basis van twee gasveren.

Hierdoor kan de begeleider van de rolstoel de zithouding van de inzittende voortdurend gecontroleerd aanpassen. Het zithoekbereik is naar keuze verstelbaar van 0 tot 30°. Voor een actievere zit kan het bereik ingesteld worden van -5 tot 25°.

Voordelen

- De zithouding is aan te passen aan de activiteit: trippelen, rijden, zitten, rusten, etc.
- De drukverdeling op het lichaam verandert: dit vergroot het zitcomfort, is goed voor de doorbloeding en vermindert het risico op doorzitten.

De zithoekverkanteling is zowel met als zonder inzittende licht bedienbaar voor de begeleider. Bij kanteling blijven de knieën van de inzittende op ongeveer dezelfde hoogte. Dit voorkomt klemming onder bijvoorbeeld een tafel. Voor de veiligheid worden antiekiepsteunen standaard meegeleverd.

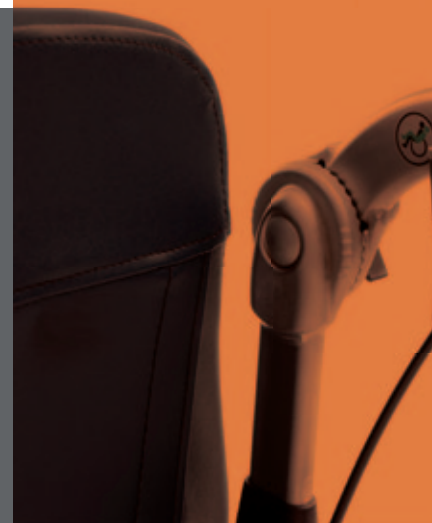

INSPIRED BY LIFE 

Een juiste duwpositie

Indien de stoel in hoek verstelbare duwhandvatten heeft, kan de begeleider de handvathoek aanpassen zodra de Canto NXT verkanteld wordt. Altijd een ideale & ergonomisch verantwoorde duwpositie dus!

Aanpassing zithoek én rughoek

Naast zithoekverkanteling is het mogelijk de Canto NXT uit te breiden met een continue rughoekverstelling. Hiermee kan de zithouding van de inzittende nog verder aangepast worden. Bijvoorbeeld van een actieve trippelhouding bij de zelfrijder tot een relaxte rustpositie bij de duwwagen.



85 - 125°



Alle kanten op met de Canto Nxt

CANTO
nxt



Welk postuur en welke wensen de gebruiker ook heeft: het multi-instelbare en aanpasbare frame van de Canto Nxt kan er perfect op worden afgestemd. Het frame is instelbaar in zitbreedtes van 37/42/47/52 cm. Bovendien kunnen de zijkanten 4 cm naar binnen of naar buiten worden gemonteerd. De zitdiepte is traploos instelbaar door een verschuifbaar rugframe. Door de diverse wielgroottes, de verticale asgatposities en de schuingerichte telescopen kan de zithoogte op elk gewenst niveau ingesteld worden. Hoe de zithoogte en -breedte ook worden ingesteld: borging van de juiste wielbasis en spoorbreedte is gegarandeerd. De modulaire opbouw maakt de Canto Nxt volledig aanpasbaar en herinzetbaar.

*Zitbreedte
- en daarmee de
spoorbreedte -
in stappen van
5 cm instelbaar*



*Zitbreedte
met zijkanten
nauwkeurig
instelbaar*



INSPIRED BY LIFE

Zoveel mensen, zoveel wensen

De Canto Nxt is als zelfrijder of duwwagen verkrijgbaar. De modulaire productopbouw biedt tal van opties. Met diverse wielcombinaties, remsystemen en de individueel aanpasbare zitondersteuningselementen uit het Matrixx zitsysteem is deze stoel volgens de individuele wensen en eisen van de gebruiker samen te stellen.



Op maat voor elke gebruiker

De uitgebreide keuze in zitondersteuningselementen van het Matrixx zitsysteem zorgen ervoor dat u het ondersteuningsniveau en de drukverdeling perfect kunt afstemmen op de individuele gebruiker. Zodat een perfecte zithouding of rij-/trippelhouding aangenomen kan worden en het zitcomfort groot is! Meer informatie hierover vindt u in de Matrixx brochure.

INSPIRED BY LIFE 



ZITTING



RUG



BEEN



ARMLEG



HOOFD



MODULAIR

Snellius en Kelvin zitelement



Dynamische werking door elastische neopreenhoes

snellius

Naast een zelfrijder en duwwagen, kan de Canto Nxt uitgevoerd worden met twee zitelementen uit het Matrixx zitsysteem: Snellius en Kelvin. Deze zijn ontwikkeld voor de zorgbehoevende, bedlegerige doelgroep. Een combinatie van de Canto Nxt met een Snellius of Kelvin zitelement maakt het mogelijk dat deze doelgroep nog mobiel kan zijn.

Snellius zitelement

Deze elastische zitkuip is vrij opgehangen in een statisch frame met rughoekinstelling en voegt zich continu volledig naar de vorm van het lichaam van de gebruiker. Wat resulteert in een stabiele en comfortabele zithouding.

Kelvin zitelement

Dit stabiele frame met rughoekinstelling is voorzien van een geheel vrijhangende hoes. De afritsbare kussens zijn voorzien van korrel-latex vulling die ervoor zorgen dat de hoes zich aanpast aan de basiscontouren van het lichaam van de gebruiker. Zo biedt het Kelvin zitelement altijd maximale ondersteuning en een comfortabele, geborgen zithouding.



Korrel-latex vulling voor een comfortabele en volledige ondersteuning van het lichaam

kelvin

INSPIRED BY LIFE 

De rem erop



De Canto NXT zelfrijder is uitvoerbaar met de Life & Mobility bandrem of wielen met geïntegreerde remnaven & remhendels. De bandrem is eenvoudig te bedienen en heeft een uitstekende rem- en bedienkracht op de banden. Met de licht bedienbare design remhendel, wordt geremd via de centrale - onderhoudsvriendelijke - remnaaf. De achterwielen remmen door de hendel naar voren of achteren te bewegen.

De Canto NXT duwwagen heeft standaard een voetrem met rempook. Deze is optioneel uitvoerbaar met een knijper bij het handvat.

Eenvoudige hanteerbaarheid en veiligheid staan bij ons voorop: eenmaal op de rem gezet, zal de Canto NXT zich niet meer verplaatsen!



INSPIRED BY LIFE 

Kwaliteit & veiligheid

De Canto NXT is geschikt voor gebruikers met een gewicht tot maximaal 150 kg. Dankzij het unieke, sterke en modulaire ovalen frame is de Canto NXT breed (her)inzetbaar!

De Canto NXT is door TÜV Rheinland Nederland met een positief resultaat getest conform de van toepassing zijnde eisen van de Europese rolstoelnorm EN 12182 en EN 12183 en is crashtest safe conform ISO 7176-19. De Canto NXT voldoet daarmee aan de essentiële eisen van de richtlijn voor Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG.

De Canto NXT beschikt over vier taxifixatiepunten, waarmee de rolstoel op de juiste wijze in de taxibus gefixeerd kan worden.



Voldoet aan EN 12182 / EN 12183

Vooruitgang met Life & Mobility

Mobiliteit is een must. Zeker voor mensen met een functiebeperking is mobiliteit belangrijk om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Als professional ziet u elke dag om u heen wat dit betekent voor de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde van uw cliënten.

Life & Mobility is een Nederlandse zelscheppende, innoverende producent van rolstoelen en scootmobielen. Al onze activiteiten zijn erop gericht om mensen met een functiebeperking binnen hun mogelijkheden te laten participeren in het maatschappelijk leven. Voor hen willen we grenzen verleggen.

De markt waarin we ons bewegen ontwikkelt zich voortdurend. Met eigen research en ontwikkeling spelen we daar adequaat op in. Voor de ontwikkeling van onze producten werken we tevens nauw samen met partners in diverse geledingen van de zorgketen.

Als zorgprofessional wilt u uw cliënten de beste oplossing kunnen bieden. Daarom zeggen we: Inspired by Life.





Uw dealer

P.O. Box 304, NL - 7000 AH Doetinchem Logistiekweg 7, Doetinchem

T +31 (0)314-328 000 F +31 (0)314-328 001 E info@life-mobility.com I www.life-mobility.com