

## ETUDE CLINIQUE COMPARATIVE

(...) UNE ÉTUDE COMPARANT L'EFFICACITÉ DE LA POTENCE D'AIDE MALADE ET LA BARRE LATÉRALE DE REDRESSEMENT ALTER ECO SANTÉ, A ÉTÉ MENÉE AUPRÈS D'UNE POPULATION DE PERSONNES ÂGÉES HOSPITALISÉES EN SERVICE DE RÉADAPTATION AU CHU DE NÎMES. (...) 76.5% DES PATIENTS ONT RÉUSSI À S'ASSEOIR AU MOINS D'UN CÔTÉ DU LIT EN UTILISANT LA BARRE LATÉRALE DE REDRESSEMENT, CONTRE 21.5% AVEC LA POTENCE AIDE-MALADE. L'ANALYSE QUALITATIVE DU MOUVEMENT A MONTRÉ DES DÉGRADATIONS DES SCHÉMAS MOTEURS LIÉS À L'UTILISATION DE LA POTENCE AIDE-MALADE, EN PARTICULIER L'APPARITION DE DÉSÉQUILIBRES POSTÉRIEURS AINSI QUE LA DIMINUTION DE LA ROTATION LATÉRALES LIÉE AU MOUVEMENT NATUREL. L'UTILISATION DE LA BARRE LATÉRALE DE REDRESSEMENT A MONTRÉ UNE AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SCHÉMAS MOTEURS, LA POSITION EXCENTRÉE DE LA PRÉHENSION DE L'AIDE TECHNIQUE FAVORISANT LE MOUVEMENT NATUREL DE REDRESSEMENT ROTATION DU TRONC.

(ÉTUDE DISPONIBLE SUR DEMANDE)

## LES PRODUIT

### Transfert autonome actif.

La gamme CANOLI® s'adapte à **tous les types de lits** quelles que soient la largeur et la hauteur du matelas.

Permet au patient de **réactiver son schéma moteur naturel**.

**Soulage l'aidant** d'un effort.

### ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

## BARRE LATÉRALE DE REDRESSEMENT

### RÉFÉRENCES :

DEBARLI90 / DEBARCOUL90 / DEBARCOUL90.02  
 DEBARLI140 / DEBARCOUL140 / DEBARCOUL140.02  
 DEBARLI200 / DEBARCOUL200 / DEBARCOUL200.02  
 DEHAUBAR90 / DEHAUBAR140 / DEHAUBAR200 / DEBARLIDOU  
 DEBARCLIDOU / DECLIBAR90 / DECLIBAR140 / DECLIBAR200 / DEBARSAC

La barre latérale de redressement CANOLI® permet le passage de la position allongée à la position assise au bord du lit, tout en respectant le schéma moteur naturel, sans l'aide d'une tierce personne.

La barre CANOLI® se positionne à droite ou à gauche, sur tous types de lit. Elle cohabite parfaitement avec les barrières de lit et les fonctionnalités d'un relèvement buste.

Elle répond aux exigences réglementaires en assurant la protection des patients les plus fragiles (recommandation ANSM sur l'utilisation des barrières de lit du 31/01/2006) ■



© NFCA Pictures

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


VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



## FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Dimen- sions	Poids	Charge max.	Couleur
DEBARLI90	Barre latérale de redressement CANOLI® pour lit médicalisé. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Blanc
DEBAR-COUL90	Barre latérale de redressement CANOLI® pour lit médicalisé. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Fuchsia
DEBAR-COUL90.02	Barre latérale de redressement CANOLI® pour lit médicalisé. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Bleu
DEBARLI140	Barre latérale de redressement CANOLI® pour lit traditionnel, largeur maxi 140 cm. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Blanc
DEBAR-COUL140	Barre latérale de redressement CANOLI® pour lit traditionnel, largeur maxi 140 cm. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Fuchsia
DEBAR-COUL140.02	Barre latérale de redressement CANOLI® pour lit traditionnel, largeur maxi 140 cm. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Bleu
DEBARLI200	Barre latérale de redressement CANOLI® pour lit traditionnel, largeur maxi 200 cm. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Blanc
DEBAR-COUL200	Barre latérale de redressement CANOLI® pour lit traditionnel, largeur maxi 200 cm. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Fuchsia
DEBAR-COUL200.02	Barre latérale de redressement CANOLI® pour lit traditionnel, largeur maxi 200 cm. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Bleu
DEHAUBAR90	Barre haute CANOLI® pour lit médicalisé avec surmatelas. Système sécurisé.	68 x 42 x 42 cm	2,55 kg	150 kg	Blanc
DEHAU-BAR140	Barre haute CANOLI® pour lit traditionnel avec surmatelas, largeur maxi 140 cm. Système sécurisé.	68 x 42 x 42 cm	2,55 kg	150 kg	Blanc
DEHAU-BAR200	Barre haute CANOLI® pour lit traditionnel avec surmatelas, largeur maxi 200 cm. Système sécurisé.	68 x 42 x 42 cm	2,55 kg	150 kg	Blanc
DEBARLIDOU	Barre double CANOLI® pour lit médicalisé, réglable en largeur de 90 à 120 cm. Système sécurisé.	93 à 123 x 42 x 32 cm	2,55 kg	150 kg	Blanc
DEBARCLI-DOU	Barre double et escamotable CANOLI® pour lit médicalisé. Système sécurisé.	92 x 42 x 32 cm	2,55 kg	150 kg	Blanc
DECLIBAR90	Barre escamotable CANOLI® pour lit médicalisé. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Blanc
DECLIBAR140	Barre escamotable CANOLI® pour lit traditionnel, largeur maxi 140 cm. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Blanc
DECLIBAR200	Barre escamotable CANOLI® pour lit traditionnel, largeur maxi 200 cm. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Blanc
DEBARSAC	Vide poche adaptable sur CANOLI® Composé de deux poches. Fixation par velcro à la barre intermédiaire de sécurité. En coton d'Égypte, lavable à 60°C.	18,5 x 25 cm	Non Appli- cable	Non Appli- cable	Rouge

PRODUIT :	CANOLI®
DESCRIPTION COURTE :	BARRE LATÉRALE DE REDRESSEMENT
DATE DE MISE À JOUR :	17/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (*HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	EN COURS D'OBTENTION
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	4
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET OCCITANIE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

<b>INDICATIONS D'UTILISATION :</b>	Utilisation par un sujet, pour le passage de la position allongée à la position assise au bord du lit, sans l'aide physique d'une tierce personne. L'utilisateur peut être guidé par une tierce personne. Indiquée pour les sujets atteints de régression psychomotrice, hémiplegiques ou atteints de paralysie. La barre doit être solidaire du relèvement buste s'il existe. La barre doit être positionnée sur le tiers supérieur du lit. L'installation des barres de lit s'effectue lorsque le lit est inoccupé.
<b>CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :</b>	<b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b> <b>Ne pas changer les sangles de fixation. Seules les sangles de fixation fournies par Alter Eco Santé sont conformes.</b> <b>La barre latérale doit impérativement être installée à une distance soit inférieure à 60 mm de la tête de lit, soit supérieure à 318 mm de la tête de lit pour éviter tout risque d'étranglement.</b>
<b>HYGIÈNE ET ENTRETIEN :</b>	TOUS LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. <b>Produits prohibés :</b> Solvants, bases acides, eau de javel et produits abrasifs. <b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression. Sangles auto-agrippantes « velours » lavables à 30° ; Sangles tissu lavables à 60°, séchage à 60°.
<b>STOCKAGE :</b>	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
<b>PIÈCES D'USURES :</b>	Système d'accroche.
<b>COMPOSITION :</b>	Acier, nylon.
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	1 sachet contenant 1 barre latérale de redressement CANOLI®, sa fiche technique et sa notice de montage.