



Contourvolgend & ondersteunend

De nieuwe Tracix rugleuning, heeft een hoge mate van **zijwaartse ondersteuning** en **contourvolgendheid**, waarmee de juiste **individuele ondersteuning** geboden kan worden.

Doelgroep

Tijdens het continue proces van objectivering van de kwaliteit van onze Matrixx zitondersteuning, is gebleken dat er behoefte is aan een passende rugleuning voor gebruikers met een **kyfotische deformiteit** of **zithouding** in combinatie met een **beperkte romp-stabiliteit**, zoals de dame hiernaast.



Met haar beperkingen en mogelijkheden, zal zij de volgende functie-eisen aan een rugleuning stellen:

Functie-eisen rugondersteuning	Mate van behoefte (0-4)
Contourvolgendheid	4
Individuele saggitale ondersteuning wervelkolom/bekken	3-4
Zijwaartse ondersteuning	4
Bewegingsvrijheid armen/benen	1-2

Productoplossing

De Tracix rugleuning biedt een hoge mate van **contourvolgendheid** in combinatie met een hoge mate van de **individuele ondersteuning van de wervelkolom en zijwaartse ondersteuning**:

Hoge mate van contourvolgendheid

De Tracix rugleuning bestaat uit 2 zijpanelen waaraan de spanbanden gemonteerd zijn. De vorm van de zijpanelen volgt de standaard rugcontour. De combinatie van **instelbare spanbanden** en **elastisch opgebouwde polstering en bekleding** maakt dat de rugleuning een hoge mate van contourvolgendheid kan bieden.



Individuele voor-achterwaartse ondersteuning

De twee zijpanelen worden door middel van een verbindingsbuis op een vaste plek gefixeerd, en vormen daarmee **een vaste en stabiele basis**. Vanuit deze stabiele basis kan voor iedere gebruiker op de juiste locatie een gewenste ondersteuning van het lichaam geboden worden, zodat de gebruiker met zo weinig mogelijk kracht en inspanning zo functioneel mogelijk kan zitten.

Doordat de rugleuning ten opzichte van de zitting **traploos in hoogte instelbaar** is, kan de ondersteuning altijd exact op de juiste hoogte t.o.v. de rugcontour van de gebruiker gepositioneerd worden.

Zijwaartse ondersteuning

Op de twee zijpanelen zijn twee instelbare diepe zijwangen gemonteerd. Deze kunnen op twee hoogteposities geplaatst

worden. De wangen zijn eenvoudig traploos in **breedte instelbaar** door middel van de Invito scharnieren

Configuraties & artikelnummers

- De Tracix rugleuning is toepasbaar op de Canto Nxt en de Roxx - The NEW Original
- Bij gebruik van een hoofdsteun is altijd een **extra schakel voor de hoofdsteunbeugel** nodig, dit door de diepe positie van de hoofdsteunadapter op de rugleuning.
- Bij gebruik van de Tracix op de Canto Nxt moet een **verdiepsetje** voor het vergroten van de rugdiepte tussen de rugverbindingsbuis geplaatst worden, zie afbeelding rechts.
- De Tracix is **niet leverbaar** in combinatie met de continue rughoekverstelling op de Roxx en de Canto Nxt
- Bij de hoogteregeling van de Tracix i.c.m. het Blocker remsysteem moet rekening gehouden worden met de **standaard benodigde vrije ruimte** tussen zitting en onderzijde rugleuning.



Quick start

De rugleuning wordt voorzien een Quick start, met daarin een instel-instructie:



Art. nr. Omschrijving

80133	Tracix rugleuning ZB 37 cm tbv Roxx
80134	Tracix rugleuning ZB 42 cm tbv Roxx
80135	Tracix rugleuning ZB 47 cm tbv Roxx
80136	Tracix rugleuning ZB 52 cm tbv Roxx
80137	Tracix rugleuning ZB 57 cm tbv Roxx
80138	Tracix rugleuning ZB 37 cm tbv Canto Nxt
80139	Tracix rugleuning ZB 42 cm tbv Canto Nxt
80140	Tracix rugleuning ZB 47 cm tbv Canto Nxt
80141	Tracix rugleuning ZB 52 cm tbv Canto Nxt
80158	Kunststof hoofdsteunadapterset t.b.v. CN
80159	Kunststof hoofdsteunadapterset t.b.v. RX
80162	Verbindingbuis-verdiepsetje t.b.v. Canto Nxt
79772	Extra schakel t.b.v. hoofdsteunbeugel