



Kelvin



Daar zit méér achter!

03/2018 – 1412AJ





kelvin

De nieuwe Kelvin, daar zit méér achter

Het Kelvin zitelement is al geruime tijd een begrip in de revalidatiesector en niet meer weg te denken uit zorg-instellingen. Ook voor mensen die langer thuis blijven wonen kan de Kelvin een oplossing bieden.

De Kelvin is een uitkomst voor mensen die niet meer in een rolstoel kunnen zitten en anders noodzakelijkerwijs in bed komen te liggen. Denk aan gebruikers met veel pijnklachten, vermoeidheid, verhoogde spierspanning of contractuurvorming. De Kelvin geeft inzittenden de mogelijkheid om met anderen aan tafel te zitten of buiten een rondje te maken zonder verlies van comfort en met behoud van de juiste ondersteuning.

Voor iedere gebruiker kan de ondersteuning optimaal ingesteld worden door de verschillende been- arm- en hoofd-ondersteuningsmogelijkheden. Daarnaast is de rugzijde van de canvasbasis nu voorzien van een rits, waarin de nieuwe optionele support kussens op de gewenste plek geplaatst kunnen worden. Hiermee wordt passende individuele ondersteuning gegeven terwijl de cliënt in de stoel zit.

De therapeut kan op deze manier direct observeren wat dit met de zithouding en het gedrag van de cliënt doet en de positie van de supportkussens zonodig eenvoudig bijstellen.

Het Kelvin zitelement is gevuld met veerkrachtige, drukverdelende korrel-latex vulling. Juist bij kleine houdingsveranderingen is het kussen hierdoor in staat om te reageren. De korrels zorgen voor optimale contourvorming en ondersteuning van het lichaam en het latex geeft de gebruiker het zachte en comfortabele gevoel.



Het modulaire Kelvin zitelement is op eenvoudige wijze op het Canto Nxt onderstel te monteren. In combinatie met de kantelbare Canto Nxt wordt het mogelijk de zithouding naar behoefte te variëren. Vooral bij passieve rolstoelgebruikers die onvoldoende 'verzitprikkel' hebben is dit een uitkomst. De regelmatige variatie van zithoudingen levert niet alleen meer zitcomfort op, maar ook een beter functioneren in het dagelijks leven.



Kijk op onze website www.life-mobility.com voor een overzicht van alle beschikbare ondersteuningselementen.

De pluspunten van de nieuwe Kelvin

De **zithoogte** van de Kelvin is verlaagd, zodat de gebruiker beter bij de tafel kan zitten en transfers gemakkelijker uitgevoerd kunnen worden.



De nieuwe Kelvin heeft verschillende optionele **support kussens**, die door een opening aan de rugzijde en een dubbele bodem in de canvasbasis kunnen worden toegevoegd aan het zitelement. Dit maakt het mogelijk om extra individuele ondersteuning te bieden terwijl de gebruiker in de stoel zit.

- a. Zijwaartse ondersteuning over de gehele lengte van de romp met het lange zij-support kussen
- b. Lokale zijwaartse ondersteuning met het korte zij-support kussen
- c. De kunststof zijplaat geeft extra stabiliteit (wordt altijd gebruikt in combinatie met a of b)
- d. Lumbale ondersteuning met het lumbaal-support kussen

Het **rughoekscharnier** kan met een inbussleutel aangepast worden, zonder het canvas open te hoeven ritsen. Dit maakt aanpassingen eenvoudiger instelbaar.



Het nieuwe, optionele **rughoek kussen** kan in de onderste hoek van de canvasbasis geplaatst worden. Dit biedt extra ondersteuning aan gebruikers die in een grotere rughoek ondersteund moeten worden en is in 3 breedtemaatvarianten verkrijgbaar.

De nieuwe Kelvin is in één oogopslag **herkenbaar** aan de ronde rits op de rugzijde van het zitelement, in combinatie met de zilverkleurige bedrukking van de Life & Mobility vogel.

