

Zetelgordel C €

Gordel om te vermijden dat personen onderuit zakken of voorover vallen in stoel of zetel.

Deze zijn uitgewerkt in een aangenaam materiaal en zijn vlot wasbaar.

Kwaliteit 1065 : Ademend, vochtwerend en brandvertragend anti-scheur materiaal.



Md 31920^{TS}

Zetelgordel blauw, verhindert onderuit zakken, één maat, sluiting op de rug van de zetel d.m.v. een gesp die met 2 handen moet geopend worden.



Doel :

- voorkomen dat de patiënt onderuitzakt in de rolstoel of zorgzetel
- steun geven zodat de patiënt een goede zithouding kan aannemen
- verhogen van de veiligheid van de patiënt en voorkomen dat hij valt door het immobiliseren in de rolstoel of zorgzetel.
- Te gebruiken voor mentaal verwarde personen, die niet agressief zijn.

Kwaliteit : 1065, blijvend brandvertragend, ademend materiaal,
Wasbaar op 60°C en droogkastbestendig. Korte droogtijd op lage temperatuur.

Wasvoorschrift van kwaliteit 1010 en 1065 :

1. *Wassen* Separaat wassen op 60°C met weinig wasmiddel.
2. *Spoelen* GEEN WASVERZACHTER gebruiken.
3. *Drogen* Zeer kort op lage temperatuur in de droger of gewoon drogen.
Niet samen drogen met vochtvasthoudend textiel (zoals katoen,...).