



medemagroup

Mini Crosser X2

Mini Crosser X2

Sterk, stabiel, veilig

De nieuwe Mini Crosser X2

- de sterkste, meest ergonomische en verstelbare scootmobiel op de markt.

Mini Crosser X-model is vervaardigd in Scandinavië voor het Scandinavische klimaat en terrein met grote motorsterkte en geweldige rijprestaties. Nieuwe vering aan de achterkant en voorkant zorgt voor een betere schokabsorptie en rijcomfort. Nieuw design en nieuwe LED-lampen die de weg echt voor je verlichten in het donker en positielichten maken je zichtbaar en veilig in het verkeer

Gemakkelijk te begrijpen gebruikerspaneel en 4-vinger operationele gasklep. Optie voor grotere accu's die de rijafstand verlengen.

Hulp voor visueel gehandicapten

Als de kleine letters in de handleiding moeilijk kunt lezen, raden wij aan onze website te raadplegen waar u deze handleiding kunt lezen in PDF-formaat. U kunt de PDF-handleiding vergroten op de monitor van uw pc naargelang uw behoeften en voorkeuren.

De handleidingen voor al onze producten zijn beschikbaar op onze website: www.minicrosser.nl. U kunt ook contact opnemen met RevaMed en dan versturen wij de handleidingen naar u via de post.

Nieuw Ergo-2-zitsysteem met verbeterde functionaliteit.

Het grootste stoelassortiment op de markt. Wij geloven niet in "one size fits all".

Zitbreedte van 35 tot 70 cm die individueel kan worden aangepast aan elke gebruiker.

Onze grote lijst met accessoires biedt de mogelijkheid om uw dagelijkse leven gemakkelijker te maken.



Voor dit product kunt u de volgende documentatie verwachten: gebruikershandleiding, servicehandleiding, reserveonderdelenlijst en deze pre-sell-informatie.

Handmatige of elektrische functies, uw keuze.



Elektrisch- / handmatig verstelbaar



Elektrisch / handmatig vooruit / achteruit



Stoel elektrisch / handmatig draaien



Elektrische / handmatige stoellift

Huidige snelheid
Accu-indicator
Lichtsensoren
Verlichtingscontact
Handrem
Menu/informatie
Aantal gereden km
Alarmverlichting
Snelheidsniveau
Knipperlicht R en L
Gasregeling (viervingerige hendel)
Knipperlicht R en L
Diefstalalarm
Claxon 1&2
Extra knop Kan worden gebruikt voor optionele functies.
Snelheidskiezer +/-
Dagteller
Claxon 1&2

Het X2 bedieningspaneel heeft verschillende functies zoals inbraakalarm, hellingswaarschuwing, snelheidsmeter met dagteller, weergave van temperatuur, datum etc.

Verdere praktische servicemodule - met foutcodes, rijtijd, batterijstatus, voltsterkte, laadproces en meer. Dit geeft een stuk eenvoudigere en efficiëntere service.

Het heeft ook een lichtsensoren omdat u kunt kiezen of de lichten automatisch moeten in- en uitschakelen, verdere mogelijkheid van audiosignaal bij achteruitrijden, gebruik van richtingaanwijzers, enz.

Programmeren

De stoel is uitgerust met S200-elektronica en kan individueel worden geprogrammeerd met een pc-programmeur. Hiervoor moeten geschoolde en bekwame servicemonteurs worden ingezet die door Medema zijn geautoriseerd.



Let op dat het gevaarlijke gevolgen kan hebben om iets in het programma te veranderen als u niet getraind bent.



Onderhoud

De Mini Crosser X2 en ondersteunende producten zijn ontworpen voor minimaal onderhoud.

Als u eten, drinken enz. Op de bedieningseenheid krijgt, moet u deze met een vochtige doek afnemen.



Opmerking!

Gebruik nooit een hogedrukreiniger of slang. Dat kan het elektronische systeem van de rolstoel beschadigen.

Het wordt aanbevolen om om de drie jaar contact op te nemen met uw dealer voor inspectie.

Vlambestendigheid

De vlambestendigheid van de Mini Crosser-zitting is getest in overeenstemming met DS / EN 1021-2: 2014 Meubilair - Beoordeling van de ontvlambaarheid van gestoffeerd meubilair - Deel 2: equivalent van de ontstekingsbron met matchvlam.



Waarschuwing!

De stoel kan erg heet worden als deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht. Evenzo wordt de stoel erg koud als deze wordt blootgesteld aan koude temperaturen, bijvoorbeeld vorst.

Elektromagnetische Compatibiliteit

De Mini Crosser voldoet aan de eisen voor het gebruik van Mini Crossers in een omgeving met elektromagnetische ruis. Er kunnen echter zeldzame situaties zijn waarin elektromagnetische ruis de Mini Crosser kan beïnvloeden. Bronnen van dergelijke ruis zijn onder meer radio- en televisiestations en amateurradiozenders.



De onbezette rolstoel is geschikt voor zowel land- als luchtvervoer.

Indien de Mini Crosser per vliegtuig getransporteerd moet worden, eisen de vliegtuigmaatschappijen het volgende:

- De accu's moeten zijn goedgekeurd voor transport per vliegtuig.
- De lucht moet uit de banden zijn gelaten.
- De accukabels moeten gedemonteerd zijn (niet altijd, maar vaak wel).


Er kan een hoofdschakelaar worden gemonteerd (optioneel).

Een batterijverklaring voor vliegereizen kan worden aangevraagd bij Medema A / S.


Indien nodig voor transport, kan de hoofdsteun eenvoudig worden verwijderd en kan de stoel worden ingeklapt.

Mini Crosser X2 zijn getest voor gebruik van Dahl Engineering riemset.

Dit betekent dat de stoel kan worden gebruikt als passagiersstoel met een Dahl docking-gordelset geïnstalleerd.

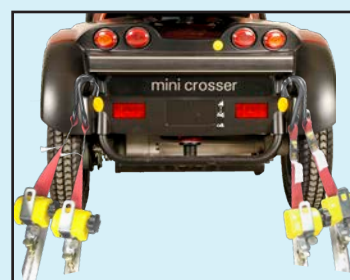

Tevens dient de gebruiker altijd zelfstandig te worden vastgehouden in het eigenlijke motorrijtuig conform de verkeersregels. Neem contact op met uw plaatselijke dealer of Medema A / S voor meer informatie.

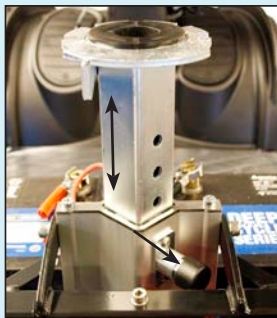

Zithoogte -
ontgrendelingsknop



Stuurhoekverstelling




Hoogte-instelling van het stuur



Ontgrendeling voor stoel draaien. Ontgrendeling voor
stoel vooruit/achteruit.



Elektrische stoellift. Door de knop omhoog te
bewegen, brengt u de stoel omhoog. Door de knop
omlaag te bewegen, brengt u de stoel omlaag.

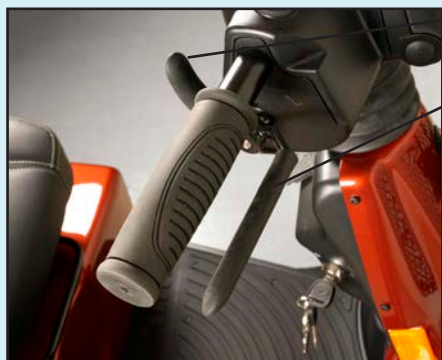

Accelerator achteruit (duimbediening)

Accelerator vooruit (viervingerige bediening)

Het gaspedaal naar voren en naar achteren zijn fysiek met elkaar verbonden, wat betekent dat wanneer de ene of de andere wordt geactiveerd, de andere de andere kant op beweegt.



Waarschuwing!

Wanneer het stuur dicht naar uw lichaam wordt verplaatst, bestaat het risico dat het been per ongeluk het gaspedaal aanraakt. Als je het stuur dicht bij je benen wilt hebben, raden we in plaats daarvan een draaigreepversneller aan.

Beoogde operator, gebruik en omgeving

De beoogde inzittende van de Mini Crosser X is een persoon die moeilijk op eigen krachten kan lopen.

De inzittende moet kunnen zien en horen om de verkeerssignalen en andere weggebruikers te herkennen wanneer hij of zij in het verkeer rijdt.

De inzittende moet het cognitieve vermogen hebben om de werking van een scooter en de knoppen en pictogrammen te begrijpen.

De Mini Crosser kan met één hand worden bestuurd, zowel links als rechts.

Het maximale gewicht van de inzittende is 175 kg.

Het beoogde gebruik van de stoel is om mensen met een handicap de mogelijkheid te geven zich buiten, in winkelcentra, enzovoort te verplaatsen. De rolstoel is een klasse C-product.

Technische gegevens

	X2 3W	X2 4W
Algemene informatie:		
Transporthoogte zonder stoel (stuurkolom neergeklapt)	70 cm	70 cm
Lengte totaal:	135 cm	140 cm
Lengte totaal incl. antiekiewielen	143 cm	148,5 cm
Breedte totaal:	66 cm	66 cm
Totaal gewicht incl.. batterijen en Ergo Std. stoel	151 kg	168 kg
Gewicht zonder stoel (Ergo Standard 45 cm)	133 kg	144 kg
Dynamische stabiliteit, alle richtingen.	13° - 23%	13° - 23%
Stoeprand	11 cm	11 cm
Max. snelheid		
Option 1	10 km/t	10 km/t
Option 2	13 km/t	13 km/t
Option 3	15 km/t	15 km/t
Remweg		
10 km/h	2,0 meter	2,0 meter
13 km/h	2,8 meter	2,8 meter
15 km/h	3,5 meter	3,5 meter
Besturing	S-200	S-200
KW transaxle	0,7 kW	0,7 kW
Draaicirkel, diameter / radius	265 cm / 132,5 cm	330 cm / 165 cm
3-punt draaicirkel / straal	170 cm / 85 cm	190 cm / 95 m
MAX. gebruikers gewicht - standaard	175 kg	175 kg
MAX. gebruikers gewicht w / accessoires HD versie	-----	250 kg
Wielen		
1503-1003 Wiel, model-X, 2,50-3,30-8".compleet met velg en band.	41 psi / 2,8 bar 	41 psi / 2,8 bar 
1503-1114 13x5,00-6" uitw. Ø 325 mm Wiel Norway zwart - Model T, E, Nordic, MaxX, MaxX HD, M en X	59 psi / 4,1 bar 	59 psi / 4,1 bar 
1503-1115 13x5,00-6" uitw. Ø 325 mm Wiel Norway zwart m/spikes - Model T, E, Nordic, MaxX, MaxX HD en M	59 psi / 4,1 bar 	59 psi / 4,1 bar 
1503-1336 13x3,00-8" uitw. Ø 340 mm Wiel zwart - Model T en M	51 psi / 3,5 bar 	51 psi / 3,5 bar 
1503-1273 13x3,00-8" uitw. Ø 340 mm Wiel zwart antilekband - Model T en M	PUR 	PUR 
1503-1012 3,50-8" ext. Ø370 mm Wiel, model X Enkel gebruikt als achterwielen en nooit met 15 km transmissie.	2,8 	2,8 
Classificatie ISO	Klasse C	Klasse C

	X2 3W	X2 4W
Stoelen:		
Effectieve stoelbreedte: Ergo2 kind Ergo2 standard Ergo2 HD Eblo	35 cm 40, 45, 50 cm 60, 70 cm 50 cm	35 cm 40, 45, 50 cm 60, 70 cm 50 cm
Effectieve stoeldiepte: Ergo2 kind Ergo2 standard + HD Eblo	32-52 cm 48 cm 20-30 en 25-40 cm	32-52 cm 48 cm 20-30 en 25-40 cm
Zadelhoek	3°	3°
Rugleuninghoogte Ergo2 kind Ergo2 standard + HD Eblo	44 cm 54 cm 52 cm	44 cm 54 cm 52 cm
Hoogte: voorkant zitting - weg Ergo2 (kind, standard + HD) Eblo	59 - 69 cm 61 - 71 cm	59 - 69 cm 61 - 71 cm
Hoogte: voetplaat tot voorkant zitting Ergo2 (kind, standard + HD) Eblo	42 - 52 cm 44 - 54 cm	42 - 52 cm 44 - 54 cm
Rugleuninghoek. Ergo2 (kind, standard + HD) Eblo	-90° til +48° -54° til +80°	-90° til +48° -54° til +80°
Accu's:		
Classificatie ISO	Klasse C	Klasse C
56 Ah-accu's (Standard)	35 km (*)	35 km (*)
85 Ah-accu's (Optie)	45 km (*)	45 km (*)
Accutype: Standaard: Optie::	2x12V / 56 Ah 2x12V / /85 Ah	2x12V / 56 Ah 2x12V / /85 Ah
Max. accuafmetingen in cm. 56 Ah 85 Ah	26,5 x 17 x 22 28,4 x 26,7 x 23	26,5 x 17 x 22 28,4 x 26,7 x 23
Accugewicht, 2 stuks 56 Ah 85 Ah	21 kg 27 kg	21 kg 27 kg
Energieverbruik in KWh bij opladen vanuit "leeg" 56 Ah 85 Ah	Ca. 1,5 kWh Ca. 1,5 kWh	Ca. 1,5 kWh Ca. 1,5 kWh
Oplader, 24 V DC 56 Ah 85 Ah	6 - 10 A 6 - 10 A	6 - 10 A 6 - 10 A
Gesch. laadtijd bij 20 °C	8 uur	8 uur
Verlichting:		
Koplamp	LED	LED
Achterlicht	LED	LED
Richtingaanwijzers	LED	LED
Standaardkleur	Oranje - metallic	Oranje - metallic
Geluid:		
Geluidsniveau	60db	60db
De Mini Crosser X2 is conform met de volgende normen:		
De Mini Crosser is getest voor de vereisten beschreven in:		EN 12184

(*) Aantal kilometers is afhankelijk van: temperatuur, wind, terrein, bandendruk en gebruiker-gewicht.

