

Mobiliteit bevorderen met Völker bedden

Het Völker Care Concept, waarom Völker Care Bedden meer waard zijn:

Voor een succesvol herstel is het van groot belang dat de patiënt snel van liggen naar staan komt. Met een Völker ziekenhuisbed kunt u het mobilisatie proces vanaf de eerste opnamedag optimaal ondersteunen en uw zorgmedewerkers ontlasten.

Comfortabel liggen en slapen

Völker is reeds jaren bekend om zijn revolutionaire MiS® ligvlakken. De ligvlakken zorgen voor een optimaal comfort en met de komst van de Völker matrassen Comfort 2000 en Visco 4000 heeft u de allerbeste bescherming tegen decubitus!

Het MiS® systeem neemt zelfs de meest minimale bewegingen van de patiënt waar en geeft ze als tactiele prikkels vanaf het ligoppervlak door de matras weer aan het lichaam terug. Dit kunt u direct zien als u druk geeft op een van de “vlinders” te drukken. De vlinder geeft mee en de andere zijde beweegt omhoog. Deze constante terugkoppeling zorgt voor een beter lichaamsbewustzijn, ondersteunt de bewegingen van de patiënt en verbetert de doorbloeding van de huid. Het ligvlak is opgebouwd uit “MiS® vlinders” die per houder over de gehele breedte van het bed zijn geplaatst. Iedere houder heeft zijn eigen stijfheid en zorgt zo voor een optimaal ligvlak. Dit zorgt niet alleen voor een goede nachtrust, waardoor de patiënt uitgerust aan zijn of haar dag kan beginnen, maar ook voor een verminderde kans op onrust of delier. Brengt u dit in combinatie met een van onze vier matrassen, dan kunnen we een antidecubituspreventie en therapie bieden voor alle niveaus!



Veiligheid: Het gepatenteerde bedhekkensystemen van Völker.

Het meebewegende zijbeveiligingssysteem van Völker is compleet anders als u gewend bent van normale bedhekken. De vier elementen worden bij het verstellen van het ligvlak steeds mee bewogen en kunnen in drie standen omhoog worden gezet. Ze bieden allerlei variabele, individuele toepassingsmogelijkheden, altijd aangepast aan de behoefte van bescherming van de patiënt. Dankzij de grote variabiliteit en zeer hoge stabiliteit geven deze bedhekken ondersteuning bij het mobiliseren.



Voordelen van de midden opening

De midden opening biedt optimale ondersteuning bij de verzorging en bij het mobiliseren van de patiënten. Ze zijn uitermate stabiel en bieden de patiënt optimale ondersteuning bij het opstaan. Dit kan de patiënt zelfstandig doen, of met hulp van de zorg. Echter hoeft de zorg dan geen fysieke hulp te bieden, maar slechts het opstaan te begeleiden. Dit voorkomt rugklachten.

Ingeklapt zijn de bedhekken volledig weg te schuiven onder het ligvlak met één handeling. De bedheksystemen laten de onderzijde van het ligvlak volledig vrij. Dit heeft grote voordelen voor ergonomisch werken. Niet alleen zorgt het ervoor dat u ook in de laagste stand van het bed nog steeds met de tillift onder het bed kan komen, maar indien u het ligvlak op de voor u juiste werkhoogte brengt bellemert de bedhekken uw bewegingen niet!

Uw hulp bij mobiliseren

Stap 1: Opzetten van het bedhek en 30 graden verpleging.

Door het opzetten van de bedhekken aan de hoofdzijde van het bed is de patiënt goed beschermt. Het bedhek beweegt met het frame mee en biedt ook in zitstand optimale bescherming.

Doel : Vergoot de zelfstandigheid van de patiënt;

Patiënt kan makkelijk zelf draaien in bed;

Patiënt kan zich eenvoudig herpositioneren in bed;

Patiënt heeft geen papagaai nodig;

Het geeft de randen van het bed aan om uit bed vallen te voorkomen;

Betere long vulling;

Geen beperkende maatregel van toepassing.



Stap 2: Zitten in het bed. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van de fowlerstand.

Doel: Zelfstandigheid en omgevingsbewustzijn;

- De patiënt kan door middel van de anti Trendelenburg knop en de ligvlakverstelling tot een volledige stoelstand in zit komen;
- Geen belasting van de zorg;
- Zelfstandigheid van de patiënt;
- Extra wisselligingsmogelijkheid. De druk wordt van de stuit naar het bovenbeen verplaatst.

Feitje: de rugleuning is zo geconstrueerd dat deze naar achter beweegt om klemmen van de heupen te voorkomen.

Feitje: Völkerbedden hebben de langste rugleuning in de markt. Zo kunnen ook lange mensen goed in bed zitten.



Stap 3: Van zitten op de rand van het bed

Doel: Zelfstandig, of met hulp van de zorg, zitten op de rand van het bed Door gebruik te maken van de bedhekken kan de patiënt op de rand van het bed zitten en daarna zelfstandig uit bed komen.

- In de eerste stap, laten we de rugleuning omhoog komen zodat de patiënt zit komt. De meebewegende bedhekken geven hier steun en zekerheid.
- Stap 2: Bungelen met de benen naast bed en de dagelijkse zorg zelfstandig uitvoeren met behulp van de nachtkast met overbedtafel.



Stap 4: Staan naast bed en zitten op een stoel naast bed

Doel: Zelfstandig staan naast bed en de eerste stappen zetten. Zitten op een stoel naast bed.

- Door gebruik te maken van de hoogteverstelling van het bed en de verstevigde rand in het Völker matras kan de patiënt opstaan. De handrail is zo geconstrueerd dat deze precies in de handpalm past en goede grip geeft. Indien nodig kan de zorg of de patiënt zelf het bedhek in het voeteneind bij de mobilisatie betrekken om zo tot een sta-op-bed te komen.
- De eerste stappen kan de patiënt het beste langs het bed doen. De bedhekken zijn uiterst stabiel en bieden goede houvast. De zorg is erbij om de patiënt te begeleiden, maar hoeft hem niet fysiek te ondersteunen.
- Met behulp van de bedhekken kan de patiënt zich eenvoudig laten zakken in de stoel. Ook hier hoeft de zorg niet fysiek te ondersteunen.



Stap 5: Lopen vanaf bed naar de doucheruimtes

Doel: Zelfstandig lopen langs het bed en door de kamer.

- Als bovenstaande goed gaaten de toestand van de patiënt dit toestaat, kan de patiënt zelfstandig in en uit bed komen met behulp van de bedhekken. Dit zorgt voor zelfstandigheid, veiligheid en ontlasting van de zorg.



Automatische functies

De verpleegbedden van Völker hebben verschillende handige automatische functies. Deze maken het veel makkelijker voor de zorgmedewerkers om te werken. Wat te denken van een knop die automatisch het bed in de juiste werkhoopte brengt voor transport zonder dat u deze steeds ingedrukt moet houden? Of een automatische knop voor transport of voor de zitstand. Al deze knoppen vindt u op de verpleegkundige bediening en laat u door middel van een dubbelklik automatisch het werk doen.

Ergonomisch werken

Door een juiste manier van (zelf)mobilisatie van de patiënten het bed meer het “werk” te laten doen wordt de zorgmedewerk(st)er ontlast in zijn of haar werkzaamheden! Grote lichamelijke inspanningen voor de verpleging is het draaien/positioneren van de patiënt in bed en het transfer van de patiënt uit het bed. Wij laten u graag zien dat de zorgmedewerk(st)er(s) met minimale inspanningen een patiënt kan positioneren en kan transporteren in/uit het bed. Deze training is altijd inclusief bij Völker, zonder extra verborgen kosten. Jaar na jaar na jaar.