

BESLIST BETER



Elvido

lage bedden met digitale ondersteuning



DE BEHOEFTE VAN DE
VERPLEEGHUISLEIDING

We hebben
bedden voor
allerlei wisselende
behoeftes nodig.

Claudia Wagner,
management verpleeghuis



DE STIEGELMEYER-OPLOSSING

Veiligheid en rendabiliteit

- Maximale bescherming door moderne zijhekken
- Kostenbesparing door modulaire ombouw zonder gereedschap
- Duurzame Stiegmeyer-bedden met optimale levering van vervangende onderdelen

De Elvido-familie: bedden op maat

Slimme en modulaire oplossingen voor moderne zorg

De intramurale zorg staat voor grotere uitdagingen dan ooit tevoren. Personeelstekorten, wervingsproblemen en de recentelijke druk door de pandemie hebben in veel verpleeghuizen geleid tot een werkdruk die om nieuwe oplossingen vraagt. De nieuwste generatie van onze Elvido-verpleegbeddenserie streeft met elk detail naar meer ontlasting van het verplegend personeel en een hogere levenskwaliteit voor de bewoners. De focus ligt daarbij op digitale innovaties zoals de nieuwe out-of-bed-systemen en een modulair ontwerp dat van elk afzonderlijk bed een op maat gemaakt droombed maakt.

In de Elvido-familie vindt u ook bedden voor zwaar gebruik, mechanische bedden of bijzonder mobiele modellen die op elke afdeling kunnen worden gebruikt, tot aan psychiatrische afdelingen met de meest veeleisende eisen toe.



Inhoud

Bewonercomfort en -veiligheid

- Verstelfuncties, Werdenfelser Weg, valprofylaxe dankzij een verlaagd bed 4
- Vario-safe-systeem 6
- Easy-Click-systeem 8

Medische opslagmogelijkheden

- Ondersteuning voor herstel en profylaxe 10

Ergonomie en mobilisatie: Werklastverlichting voor de verpleegkracht

- Werkzaamheden aan het verpleegbed die de rug ontzien 12
- Geïntegreerde bedverlenging 14
- Moeiteloos manoeuvreren 15
- Eenvoudig remmen 15

Digitalisering

- Moderne out-of-bed-systemen 16
- Informatie veilig en gemakkelijk overbrengen 18
- Innovatief bedieningsconcept 20
- Leeslampjes 22
- 24 volt-aandrijfsysteem 23

Design

- Hoofdborden en dessins 24
- Bekledingen 25
- Onderstelafdekking 25

Modelvarianten

- Elvido vervo 26
- Elvido movo 27
- Elvido forto 28
- Elvido rega 29

Technische service

- Reserveonderdelen, bedtest, onderhoud 30

Nuttige aanvullingen

- Meubels, tafels en stoelen 31

Uitvoering en opties

32

De Stiegmeyer-groep

34

DE BEHOEFTE VAN DE
BEWONERS

**Ik wil vrij en zelfstandig
van mijn leven
in het verpleeg-
huis genieten.**

Gerda Büttner,
verpleeghuisbewoonster



DE STIEGELMEYER-OPLOSSING

Lage bedden met gedeelde zijhekken

- Optimale balans tussen bescherming en vrijheid
- Mobilisatie van de bewoner
- Comfortabele posities voor slaap en vrije tijd

Meer bescherming en levenskwaliteit voor bewoners

Profylaxe zonder vrijheidsbeperkende maatregelen



Een goede gezondheid en een lange zelfstandigheid van de bewoners dragen op doorslaggevende wijze bij tot het welzijn en de werkontlasting van alle mensen in het verpleeghuis. Het Elvido-assortiment van lage bedden bevordert de veiligheid, de mobilisatie en het comfort zonder de vrijheid in te perken. Vele instellingen hebben zich ingespannen om de toepassing van vrijheidsberovende interventies in de afgelopen tien jaar met meer dan 50% te verminderen. Onze Elvido is hiervoor met zijn vele gezondheidsbevorderende verstelmogelijkheden en slimme gedeelde zijhekken uitermate geschikt voor.

- ▲ Optionele gedeelde zijhekken bieden bescherming en oriëntatie zonder dat ze de bewoner verhinderen het bed te verlaten.



- ▲ Lage positie van ca. 25 cm ter vermijding van valletsel.



- ▲ Verstelbare rugsteun voor comfortabel lezen en tv-kijken.



- ▲ Hoge beenpositie voor ontspanning en versterking van de bloedsomloop.



- ▲ Zithouding voor communicatie op ooghoogte en maaltijden in bed.



Werdenfelser Weg

- In de filosofie van de Werdenfelser Weg wordt ernaar gestreefd vrijheidsberovende maatregelen zoveel mogelijk te vermijden.
- Gedeelde en combineerbare zijhekken bieden standaard bescherming over meer dan 50 % van het ligvlak, zelfs wanneer ze alleen aan het hoofdeinde zijn geplaatst.
- De bewoner kan te allen tijde het bed aan het voeteneinde verlaten.



Profylaxe dankzij een verlaagd bed

- De meeste valpartijen vinden plaats tussen de late avond en de vroege ochtenduren.
- De lage positie van de Elvido van ca. 25 cm vermindert de valsnelheid bij een val en voorkomt verwondingen.
- Het gebruik van het zijhek kan achterwege blijven.
- 's Nachts naar de wc gaan is ongehinderd mogelijk - desgewenst beveiligd door het out-of-bed-systeem.

DE TECHNISCHE BEHOEFTE

Het bed moet zonder enige moeite aan verschillende behoeften kunnen worden aangepast in geval van verandering van bewoners.

Torsten Holtmeier,
medewerker technische dienst



DE STIEGELMEYER-OPLOSSING

Individueel herontwerp zonder gereedschap

- Verwisseling van alle bedombouwelementen met gepatenteerde sluitingen
- Aanzienlijk minder werk voor de technische dienst
- Kostenbesparingen dankzij grote flexibiliteit



Vario Safe – hét systeem voor veranderende behoeften


Modulair ontwerp opent nieuwe mogelijkheden in de dagelijkse praktijk

Het Vario-Safe-systeem is de ideale optie als u uw Elvido-bed met gedeelde zijhekken of zijpanelen wilt uitrusten. Met Vario Safe kunnen alle elementen van de bedombouw zonder gereedschap worden verwijderd en vervangen. Dit wordt mogelijk gemaakt door gepatenteerde sluitingen.

Als een nieuwe bewoner andere bescherming nodig heeft of een andere smaak heeft, kunnen de zijhekken en de hoofd- en voetenborden in de kortst mogelijke tijd worden vervangen. Dit ontlast de technische dienst en bespaart kosten, aangezien het verpleeghuis veel bedden op maat kan uitrusten met een beheersbare voorraad aan ombouwelementen.

Voetenborden naar wens vervangen of verwijderen

- Zonder voetenbord betere toegang tot de bewoner, bijv. voor voetverzorging
- Er zijn ook hoge voetenborden voor een gevoel van veiligheid of lage voetenborden voor een goed zicht verkrijgbaar
- Mooie houtdessins, stof en kunstleer naar keuze

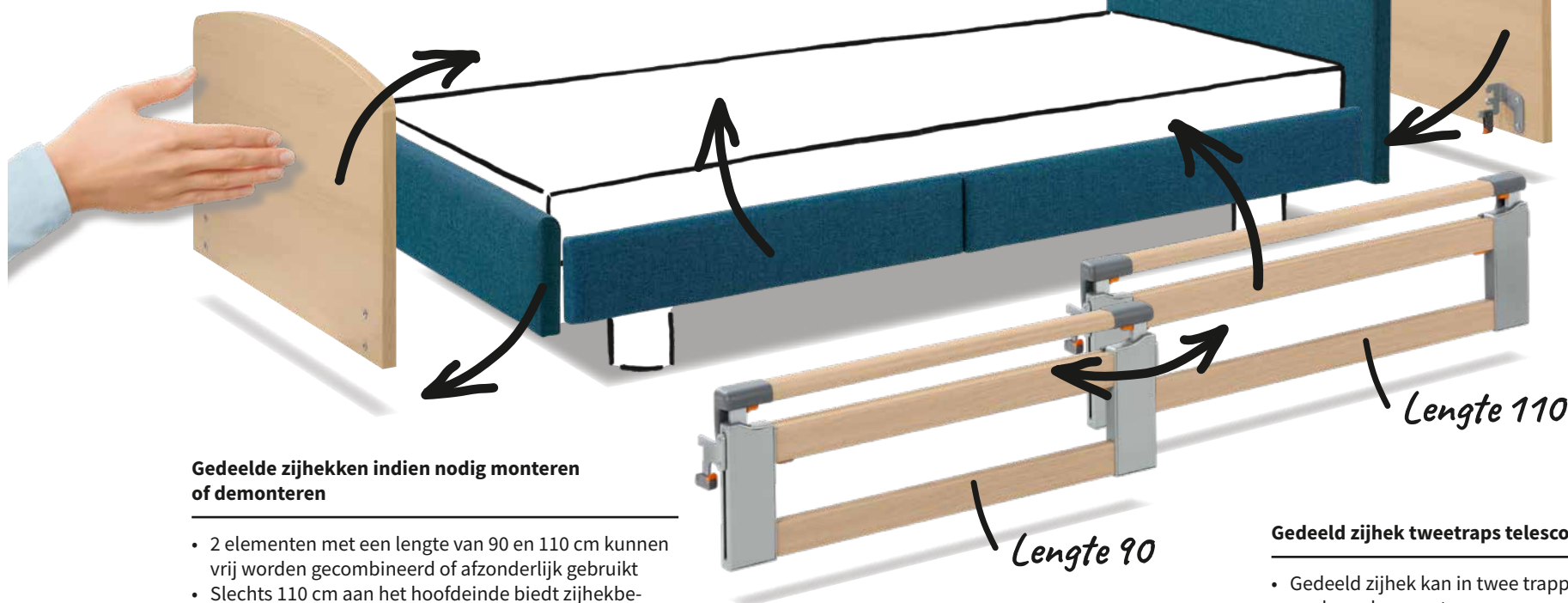

Gedeelde zijhekken indien nodig monteren of demonteren

- 2 elementen met een lengte van 90 en 110 cm kunnen vrij worden gecombineerd of afzonderlijk gebruikt
- Slechts 110 cm aan het hoofdeinde biedt zijhekscherming volgens de normen
- Slechts 90 cm aan het hoofdeinde biedt een gevoel van veiligheid en oriëntatie en veel ruimte bij het in en uit bed stappen

**! Zijhekken vrij combineerbaar:
110/90 of 90/110**

BESLIST BETER

Veiligheid volgens de normen

- Met een ligvlaklengte van 200 cm bestaat het gedeelde zijhek aan beide kanten uit een element van 110 cm en 90 cm lang.
- Deze elementen kunnen met elkaar worden verwisseld aan het hoofd- en voeteneind.
- Als het element van 110 cm aan het hoofdeinde wordt bevestigd, bedekt het meer dan 50% van het ligvlak en is daarom alleen al een veilig zijhek.
- Het element van 90 cm biedt in zijn eentje geen bescherming volgens de normen, maar biedt wel houvast en veel ruimte om in en uit bed te stappen.
- Als de bedverlenging wordt gebruikt, kunnen twee elementen van 110 cm worden bevestigd.

Vario Safe - gereedschaploos gebruik met een hoge mate van veiligheid



▲ Vario-Safe-element in het bedframe steken en met bevestigingsmiddelen vastzetten.



▲ De insteekbeveiliging voorkomt niet-standaard bevestiging van het zijhek.

Hoofdborden indien gewenst in een paar seconden te verwisselen

- Huiselijke designvarianten, met of zonder handgrepen
- Mooie houtdessins, stof en kunstleer naar keuze
- Kleurrijk ontwerp, hoofdborden en zijpanelen kunnen qua kleur verschillen

Gedeeld zijhek tweetraps telescopisch

- Gedeeld zijhek kan in twee trappen naar boven worden geschoven of diagonaal worden gezet
- Maximale bescherming of discrete oriëntatiehulp
- Moeiteloze ontgrendeling met ergonomische knoppen

DE TECHNISCHE BEHOEFTE

**Voor onze bewoners
wil ik individuele
bescherming en een
veilige hygiëne.**

Torsten Holtmeier,
medewerker technische dienst



DE STIEGELMEYER-OPLOSSING

Bedden moeiteloos opbouwen en reinigen

- Montage zonder gereedschap van de doorlopende en gecombineerde zijhekken in luttele seconden
- De verwijderbare balken kunnen bijzonder grondig gereinigd worden
- Maximale bescherming van de bewoner en effectieve mobilisatie door de intelligente combinatie van de twee zijhekken



Easy Click - eenvoudig gebruik en betere hygiëne

**Doorlopende en gecombineerde zijhekken zonder
gereedschap te monteren**

Bewoners met een hoog valrisico hebben maximale bescherming nodig - het klassieke doorlopende zijhek is in dit geval vaak de beste keuze. Indien gewenst kan het gecombineerd worden met het combineerbare gedeelde zijhek aan de andere zijde van het bed, zodat veiligheid en vrijheid in ideale balans zijn. De middensteun van het combineerbare zijhek is ook een robuuste mobilisatiehulp.

De nieuwe generatie van de Elvido-serie wordt standaard geleverd met het intelligente Easy-Click-systeem voor beide zijhekken. De balken kunnen zonder gereedschap op de voormonteerde beugels worden "geklit". Dit maakt het gemakkelijker om het bed te monteren en schoon te maken. De elegante kunststof kappen beschermen de binnenzijde van de balken tegen vuil en vloeistoffen. Het Easy-Click-systeem maakt het ook mogelijk zijhekken op een economische manier tussen verschillende bedden te wisselen.

- ▼ Kunststof doppen beschermen de balken tegen beschadiging en het binnendringen van vuil en vloeistof.



- ◀ Om de balken van de combineerbare zijhekken te laten zakken, drukt u gewoon op de knop op de middenstijl. De stijl zelf kan worden verwijderd wanneer hij niet wordt gebruikt en worden opgeborgen in een houder onder het bed.




**Nieuw
bevestigingssysteem
voor combineerbare
en doorlopende
zijhekken**



- ▲ Als de bedverlenging wordt gebruikt, kunnen langere balken worden bevestigd.



- ▲ Met Easy Click kunnen de balken zonder gereedschap op de voormonteerde houder worden aangebracht.

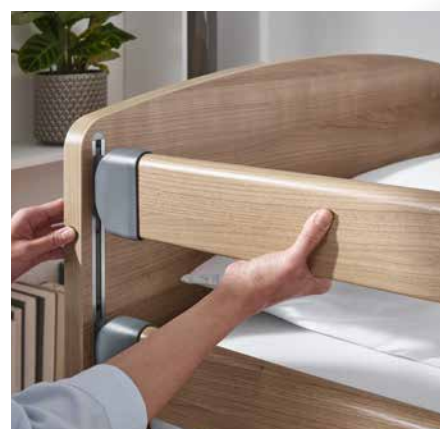

- ▲ Met een eenvoudig te bedienen ontgrendeling aan het hoofd- en voeten-einde kunnen de balken met één hand worden neergelaten.

Medische opslagmogelijkheden

Ondersteuning bij genezing en profylaxe



Met de nieuwe Rastomat van de Elvido is een gestrekt beenpositie mogelijk om e aderen te ontlasten.



▲ De Fowler-positie vergemakkelijkt de ademhaling en verbetert de zuurstofvoorziening.



▲ De Cardiac-Chair-positie ontlast het hart en versterkt de bloedsomloop.

DE VERPLEEGKUNDIGE
BEHOEFTE

Het bed zou moeten
helpen de gezond-
heid van onze bewo-
ners te behouden.

Lea Kim,
verpleegkundig
management



DE STIEGELMEYER-OPLOSSING

Verstelmogelijkheden voor vele indicaties

- 4-delig elektrisch verstelbaar ligvlak
- Nieuwe Rastomat voor een gestrekte instelling van de onderbeensteun
- Draaibaar bedframe voor Trendelenburg- en anti-Trendelenburgpositie
- Ondersteuning van de ademhaling en de bloedsomloop

Zowel bij de langdurige verpleging van de bewoners als in noodgevallen kunnen onze Elvido-bedden het werk van het verplegend personeel op beslissende wijze ondersteunen. Het flexibele ligvlak maakt bijvoorbeeld een anti-Trendelenburgpositie mogelijk voor aspiratie- en longontstekingsproylaxe of om de cardiac chair-positie te gebruiken om het hart te ontlasten. Voor shockbestrijding en ontlasting van de aderen zijn de Trendelenburg-positie en de gestrekte en gehoekte hoge beenpositie beschikbaar.



◀ De Trendelenburg-positie kan de effecten van een shock verzachten. Hij kan worden ingesteld met de gewone handschakelaar.



◀ De zwenkbaarheid van het bedframe maakt een anti-Trendelenburgpositie mogelijk, bijvoorbeeld om het slikken te vergemakkelijken en aspiratie te voorkomen.

DE VERPLEEGKUNDIGE BEHOEFTE

Rugvriendelijk werken
is erg belangrijk voor ons
team, om onze gezond-
heid en motivatie gezond-
heid van onze bewoners
te behouden.

Lea Kim,
verpleegkundig
management



DE STIEGELMEYER-OPLOSSING

Rugproblemen efficiënt voorkomen

- Zeer grote hoogteverstelling van het ligvlak van ca. 25 tot 85 cm, afhankelijk van de modelvarianten
- Gemakkelijke toegang tot de hulpbehoevende persoon
- Ontlasting door zelfstandige mobilisatie van de bewoner

Ergonomie en mobilisatie

Verlichting van de dagelijkse werklust voor het verplegend personeel

Rugpijn is een van de grootste problemen in de verpleging - tot tweederde heeft er volgens enquêtes last van. Des te belangrijker is de mogelijkheid om in veel situaties rugvriendelijk in een rechte houding te kunnen werken. De hoogste positie van de Elvido-bedden tot 85 cm helpt hierbij, net als de gemakkelijke toegang tot de bewoner dankzij de modulaire, afneembare elementen. De vele mobilisatiehulpen in de constructie maken het voor de bewoners ook gemakkelijker om zonder hulp op te staan.

- ▼ De hoogste positie ligt tussen de 80 en 85 cm - ideaal voor rugvriendelijk werken op heuphoogte.



- ◀ Met het Vario-Safe-systeem kunnen hoofd- en voetenbord zonder gereedschap worden verwijderd.
- ◀ Dit maakt voet- of haarverzorging veel aangenamer voor verpleegkrachten en bewoners.



- ▼ Door de afzonderlijke instelling van het ligvlak en de ondersteunende gedeelde zijhekken kunnen bewoners veel gemakkelijker zelfstandig opstaan. Dit bespaart de verpleegkracht de energieverslindende mobilisatie. Op de ideale opstahoogte van 38 cm maakt het bed automatisch een tussenstop.



DE VERPLEEGKUNDIGE BEHOEFTE

**Grote bewoners
moeten zich in ons
huis altijd op hun
gemak voelen en goed
verzorgd worden.**

Lea Kim,
verpleegkundig
management



DE STIEGELMEYER-OPLOSSING

Meer ruimte en comfort door eenvoudig bedienbare bedverlenging

- Mensen worden gemiddeld gezien al een hele tijd langer - verpleeghuizen moeten voorbereid zijn
- De eenvoudige activering van de bedverlenging ontlast het personeel
- Praktische mogelijkheden om het ligvlak te verlengen



- ▲ De verlenging van de onderbeensteun kan zonder gereedschap worden aangebracht. Er is een bijpassend opvulkussen verkrijgbaar.

- ◀ Het opvulkussen beweegt niet mee als het ligvlak wordt versteld.

Bedverlenging

Lange bewoners hebben meer ruimte nodig. De standaard verlenging van het bedframe met 20 cm zorgt voor optimaal comfort en maakt onze Elvido-bedden bijzonder toekomstbestendig. Als de Elvido alleen met een zijhek aan het hoofdeinde of helemaal zonder zijhek worden gebruikt, dan kan de verlenging in principe zonder verdere aanpassingen met een langere matras worden gebruikt.

Met bijpassende zijhekken en panelen is het verlengde bed natuurlijk comfortabeler en veiliger. Afhankelijk van het modulaire systeem zijn er hier veel mogelijkheden op maat. Ook de onderbeensteun kan naar wens worden uitgeschoven (zie rechterzijde).

Bij bedden met het Vario-Safe-systeem kunnen de 90 cm lange zij-elementen zonder gereedschap worden vervangen door 110 cm lange elementen.



- ◀ Bij gebruik van de bedverlenging met het Easy-Click-systeem zijn langere zijhekken en opvulstukken voor de zijpanelen verkrijgbaar.




- ◀ Als alternatief is de Elvido ook verkrijgbaar met telescopische panelen en balken - voor een bijzonder flexibel gebruik.




- ◀ Als het bed over de gehele lengte geen zijhek heeft, kan de geïntegreerde bedverlenging zonder extra accessoires worden gebruikt. De opening in het zijpaneel aan het voeteneinde is normconform. Het kan op verzoek worden afgesloten met opvulstukken.



- ◀ Om het ligvlak te verlengen, bieden we twee opties aan. Aan de ene kant is een verlengstuk met opvulstuk mogelijk, dat aan het voeteneinde altijd stevig op zijn plaats blijft.

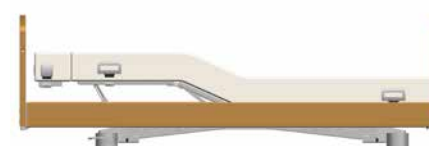

- ◀ Nog comfortabeler is een verlengstuk dat wordt bevestigd aan de onderbeensteun en meebeweegt met alle gezondheidsbevorderende aanpassingen.

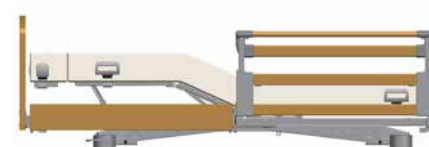

- ◀ Als de bedverlenging samen met het Vario-Safe-systeem wordt gebruikt, kunnen 90 cm lange zijhekken of panelen zonder gereedschap worden vervangen door 110 cm lange versies.

Verplaatsbaarheid


Immobiele bewoners kunnen ook in het verpleegbed aan het sociale leven van de afdeling deelnemen. Het is belangrijk dat het bed gemakkelijk kan worden verplaatst om zonder botsingen de gemeenschappelijke ruimte of het terras te bereiken. De Elvido laat zich nauwkeurig en moeiteloos manoeuvreren - vooral in de mobiele modelvariant Elvido movo (zie p. 27). Met de paarsgewijze of centrale wielvergrendeling kan de verpleegkracht het bed snel en veilig afremmen.




- ◀ De Elvido movo is bijzonder gemakkelijk te verplaatsen met zijn moderne dubbele zwenkwielen.



- ◀ De grote en tegelijk elegante rempedalen zijn vanaf elke positie gemakkelijk toegankelijk.

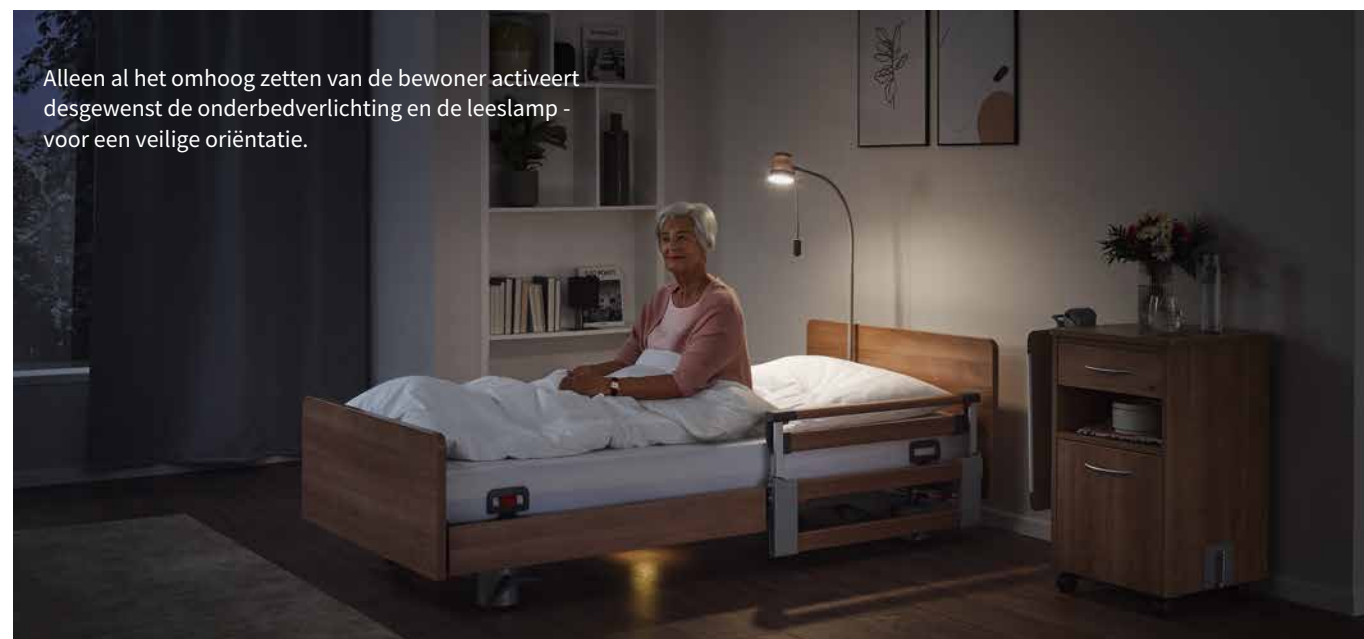

Alleen al het omhoog zetten van de bewoner activeert desgewenst de onderbedverlichting en de leeslamp - voor een veilige oriëntatie.

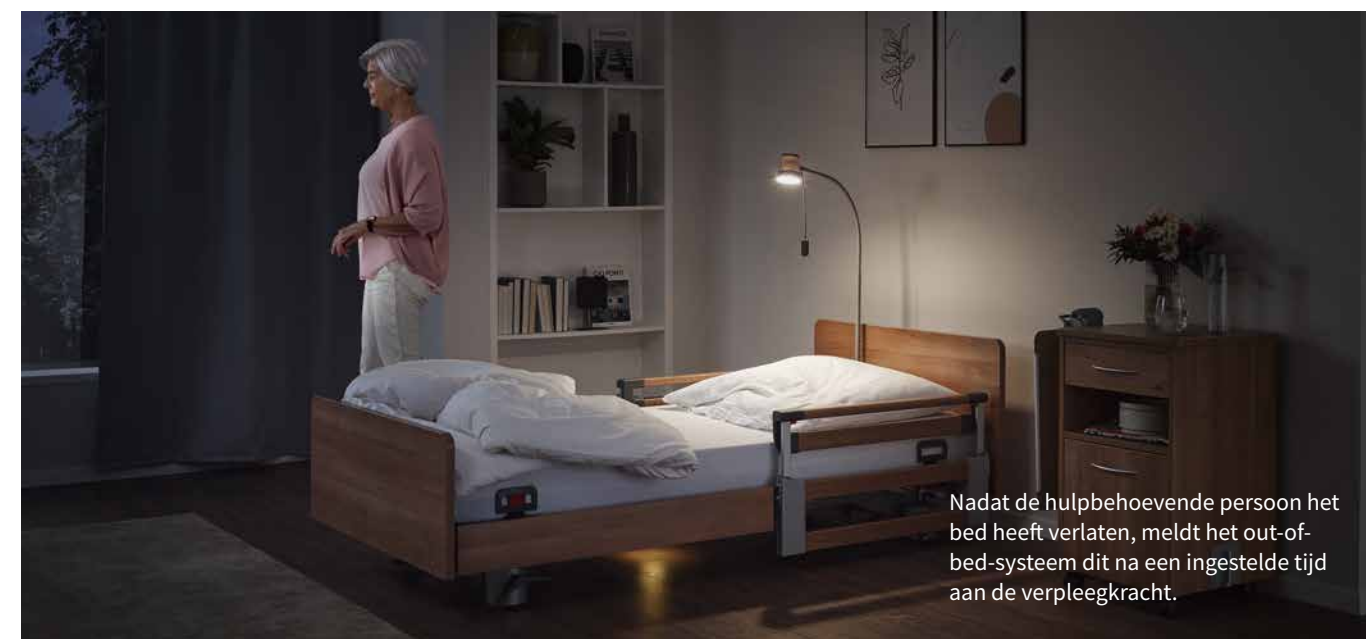


Nadat de hulpbehoevende persoon het bed heeft verlaten, meldt het out-of-bed-systeem dit na een ingestelde tijd aan de verpleegkracht.

BESLIST BETER

Het out-of-bed-systeem

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
- 2 varianten beschikbaar: vast geïnstalleerde OOB Smart of mobiele OOB Flex
- Bescherming voor bewoners met een valrisico die 's nachts het bed verlaten
- Melding aan de verpleegkracht na een vooraf ingestelde tijdsinterval (selectie via handschakelaar) of na een vrij te kiezen tijd (via app)
- Signaal naar oproepsysteem, smartphone of dashboard op pc
- Automatische verlichting met leeslampje en onderbedverlichting
- Hypermoderne sensortechnologie voorkomt valse alarmen



Zichtbaarheid in de verpleegkamer.

Zichtbaarheid op de afdeling.

Er wordt een zichtbare en hoorbare melding in de verpleegkamer geactiveerd.

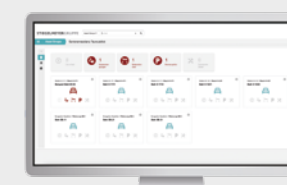

Melding op smartphone of tablet.

Weergave op het dashboard op de pc.

Zodra hij of zij opstaat activeert de bewoner het automatische lichtstelsel.

Pas het verlaten van het bed activeert de melding na het gedefinieerde interval.

Digitalisering

Meer bescherming en verlichting met moderne out-of-bed-systemen

De digitalisering in de zorg gaat gepaard met grote verwachtingen, maar ook met zorgen. Velen verwachten een verlichting van de dagelijkse praktijk, anderen vrezen technische overbelasting. Daarom zorgt Stieglmeyer er altijd voor dat slimme oplossingen eenvoudig in het gebruik zijn en veel voordelen bieden. Ons team in het Connectivity Lab in Herford ontwikkelt alle producten in nauwe samenwerking met de mensen in de zorg.

De nieuwe out-of-bed (OOB) -systemen voor de Elvido tonen dit op indrukwekkende wijze aan. Zij bieden de bewoners 's nachts een veilige bescherming en ontlasten zodoende het personeel in hoge mate. Als een bewoner met een valrisico uit bed opstaat, kan de verpleegkracht via allerlei kanalen worden gewaarschuwd, bijvoorbeeld gewoon via zijn of haar smartphone. Hiervoor is geen digitale infrastructuur in het verpleeghuis nodig. Het instellen van het systeem is eenvoudiger dan ooit met de nieuwe verbeterde OOB-handschakelaar of via een intuïtieve app.

DE VERPLEEGKUNDIGE BEHOEFTE

Out-of-bed-systemen moeten tijdens de zware nachtdienst voor echte verlichting zorgen.

Lea Kim,
verpleegkundig management



DE STIEGELMEYER-OPLOSSING

Veiligheid 's nachts zonder beperking van de mobiliteit

- Het OOB biedt bescherming zonder vrijheidsberovende maatregelen
- De verpleegkracht kan op elk moment ingrijpen zonder constant alle kamers te hoeven controleren
- Geen kostbare infrastructuur en geen tijdrovende instructie in de bediening nodig

Moeiteloos meldingen ontvangen

Het out-of-bed-systeem stuurt berichten rechtstreeks naar de smartphone of tablet van de verpleegkracht, of naar een web-gebaseerd dashboard op de pc in de dienstruimte. De ontvanger kan onmiddellijk reageren en verliest geen tijd in geval van nood.

Connectiviteit - snel en eenvoudig

Het bed maakt gebruik van de Narrow-BandIoT-radiostandaard voor een efficiënte overdracht van kleine hoeveelheden gegevens. Een eigen infrastructuur - bv. WLAN in elke kamer - is niet nodig.

Bluebox

Met de optionele Bluebox onder het ligvlak is uw Elvido "digital-ready". De Bluebox stuurt ook de meldingen van het out-of-bed-systeem

DE BEHOEFTE VAN DE VERPLEEGHUISLEIDING
Digitalisering is de toekomst - maar alleen als het eenvoudig, begrijpbaar en rendabel is.

Claudia Wagner,
management verpleeghuis



DE STIEGELMEYER-OPLOSSING


Zonder problemen met digitalisering starten

- Genetwerkte bedden zonder enige ombouw in het verpleeghuis te gebruiken
- Overtuigt het verplegend personeel door eenvoudige bediening en groot voordeel
- Verbetering van het imago van het verpleeghuis door moderne bescherming en comfort voor de bewoners

BESLIST BETER

De nieuwe out-of-bed-systemen – alle voordelen op een rijtje

- OOB Flex kan op elk moment achteraf worden toegepast, OOB Smart bij een geschikte configuratie van het bed
- Geen ingewikkelde installatie
- Op aanvraag geen extra handschakelaar aan het bed - plaatsonafhankelijke bediening via app of web mogelijk
- Onafhankelijk van de interne huisinfrastructuur, geen verbinding met een oproepsysteem nodig
- Veilig gegevensbeheer via cloud-gebaseerde architectuur
- Pushbericht na individuele gebruiksgedefinieerde tijd wanneer een bewoner het bed heeft verlaten
- Aanvullende statusgegevens van het bed in het dashboard van de app en op het web
- Automatische activering van de OOB op bepaalde tijdstippen mogelijk
- Toekomstbestendige oplossing door voortdurende verdere ontwikkeling

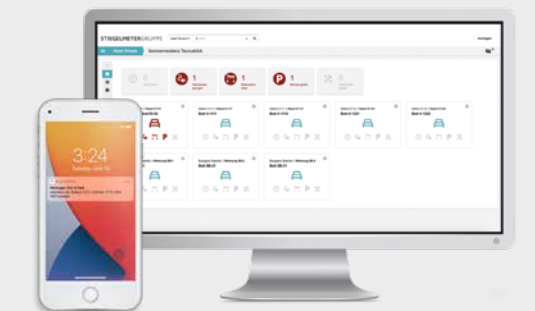

Out of Bed – twee selecteerbare varianten voor de snelle ondersteuning van bewoners met een valrisico

1. OOB Smart – het vast geïnstalleerde systeem

- In bijna elke positie van het ligvlak bruikbaar
- Sensoren kunnen niet wegglijden
- Geen vals alarm door beweging van de bewoner in bed
- Overzichtelijke OOB-handschakelaar voor intuïtieve bediening
- Nauwkeurige instelling van de meldingsintervallen en de activeringsrusttijden via app en dashboard



2. OOB Flex – het mobiele systeem

- Set bestaande uit sensorstrook, verdelerkastje en handschakelaar
- Kan ook achteraf worden ingebouwd in al op de markt zijnde elektrische Elvido's
- Flexibelere en efficiëntere wisseling van bed naar bed mogelijk
- In elke positie van het ligvlak bruikbaar
- Bediening zoals met de OOB Smart





Innovatief bedieningsconcept

Moderne zijhekken naar keuze

De eenvoudige, zichzelf verklarende bediening van het bed met de handschakelaar is een dubbel voordeel. De verpleegkracht moet ook in gespannen situaties overzicht en controle kunnen houden. De bewoner moet in staat zijn om zelf eenvoudige aanpassingen te doen, zelfs met beperkte mogelijkheden, om meer gemak te hebben en de verpleegkracht te ontlasten.

Daarom hebben we de standaardhandschakelaar van de Elvido nog intuïtiever gemaakt. De knoppen zijn nu de klok rond optimaal zichtbaar: overdag door een transparante zwarte rand,

's nachts door een aangename verlichting. De Trendelenburg-functie is geïntegreerd en vereist geen extra handschakelaar. De verpleegkracht kan deze met behulp van een ontgrendelings-magneet in de matrasbeugelgreep activeren. Alle opties voor de bewoner kunnen selectief worden geblokkeerd.

Een LCD-handschakelaar met verlicht display en slechts 3 knoppen is optioneel. De EasyCare-optie biedt hier extra ontlasting: Met behulp daarvan kan de verpleegkracht op korte termijn alle geblokkeerde functies openen en het bed naar behoefte verstellen.



BESLIST BETER

Nieuwe handschakelaar

- 6 knoppenrijen met intuïtieve symbolen
- Trendelenburg- en anti-Trendelenburg geïntegreerd
- Knoppen door omranding gemakkelijk herkenbaar
- Verlichting 's nachts
- Blokkeerstand van elke functie met ledje aangegeven
- Ontgrendeling met magneet op het bed - geen losse onderdelen



- ▲ Comfortabele posities moeiteloos instellen - de innovatieve bedieningsconcepten van de Elvido maken het mogelijk.
- ◀ De optionele LCD-handschakelaar toont de instelfuncties op een groot verlicht display. Met de pijltjesknoppen kunt u gemakkelijk de gewenste optie selecteren en activeren.

DE VERPLEEGKUNDIGE BEHOEFTE

Verpleegkrachten en bewoners moeten het bed te allen tijde gemakkelijk en veilig kunnen bedienen.

Lea Kim,
verpleegkundig
management



DE STIEGELMEYER-OPLOSSING

Intuïtieve bediening van het bed

- 2 moderne, intuïtieve handschakelaars om uit te kiezen
- Alle functies bedienbaar met één handschakelaar
- Selectieve blokkeerfunctie zonder losse onderdelen
- Contrastrijk uiterlijk overdag, verlichting 's nachts

Verlichtingsconcept

Onze lampen bieden de bewoners een aangenaam, gezellig licht - zonder de burens in de kamer overlast te bezorgen. Hun lage warmteontwikkeling zorgt voor extra veiligheid. De modellen Sola, Stella en Sira overtuigen door een elegant design. Ze kunnen in de oprichterhulzen, op de oprichterbuis of op het nachtkastje worden bevestigd.

BESLIST BETER

Aansluiting voor elke behoefte

- De modellen Stella en Sira kunnen worden geïntegreerd in het automatische lichtstelsel van het out-of-bed-systeem, het model Sola niet.
- Met de hand kan de Stella met een schakelaar op de lampkop worden bediend en de Sira met een snoerschakelaar. Bij het Sola-model hebt u de keuze tussen de twee opties.
- Als de lampen alleen met de hand moeten worden bediend, kunnen ze met een korte kabel op de lampaansluiting van de besturing worden aangesloten. Een stroomvoorziening via het stopcontact is niet noodzakelijk, maar desgewenst ook mogelijk met een verlengkabel.
- De verbinding met het out-of-bed-systeem vindt via het verdeelkastje aan het hoofdeinde plaats. In dit geval is aansluiting op een stopcontact niet nodig en ook niet mogelijk.



◀ De Sira-leeslamp met korte kabel voor aansluiting op de bedbesturing (links) en met verlengkabel voor aansluiting op een stopcontact. Het model Sira beschikt altijd over een snoerschakelaar.



◀ Met zijn slanke lampkop oogt het Stella-model bijzonder elegant en modern.



▲ Het verdeelkastje (links op de foto) maakt de interne stroomvoorziening van de leeslampen mogelijk met gelijktijdige koppeling aan het out-of-bed-systeem.



◀ De klassieke Sola-leeslamp is verkrijgbaar met of zonder snoerschakelaar.

DE BEHOEFTE VAN DE BEWONERS
Ik wil een gezellig licht voor een betere oriëntatie.

Gerda Büttner,
verpleeghuisbewoonster



DE STIEGELMEYER-OPLOSSING

Kwaliteit van het leven en bescherming

- Leeslampen stralen een aangenaam licht uit met weinig warmte-ontwikkeling
- Oriëntatie en valpreventie 's nachts
- Optionele koppeling aan het out-of-bed-systeem
- Een veilige stroomvoorziening zonder gedoe

Kostenoptimalisatie door 24-volt-systeem



▲ De voedingstransformator produceert de veilige laagspanning direct bij het stopcontact. De optionele wandafstandhouder op het bed beschermt stopcontacten, muren en armaturen.

Lekstroommeting om de 10 jaar

Hoge beveiliging, aanzienlijk lagere energiekosten en gemakkelijk in het gebruik: het optionele 24-volt-systeem is een aantrekkelijke keuze voor alle Elvido-bedden met elektrische aandrijving.


Direct bij het stopcontact zorgt een transformator voor een veilige laagspanning van 24-volt. Er bevindt zich geen onder spanning staand 230-volt-onderdeel dichtbij de hulpbehoevende persoon, waardoor deze meer veiligheid geniet.

We vergeleken het stroomverbruik van het 24-voltsysteem met dat van een conventionele aandrijving in verschillende belastingsscenario's. In alle gevallen was het 24-voltsysteem aanzienlijk zuiniger - het verbruikte tot 93% minder elektriciteit. Zelfs als de bedden slechts zeer zelden elektrisch worden versteld wordt dit effect zichtbaar, want doorslaggevend daarbij is het lagere verbruik in de standby-modus.

Nog meer kosten en moeite worden bespaard door de aanzienlijke vermindering van de lekstroommetingen. Deze moeten in plaats van jaarlijks nu alleen nog elke 10 jaar op het 24-volt-systeem worden aangesloten.


BESLIST BETER

Sterke voordelen

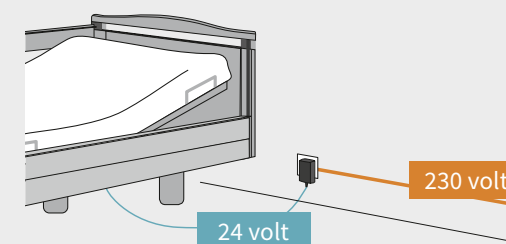

- Veilige laagspanning vanaf de transformator in het stopcontact
- Geen 230-volt-componenten aan het bed
- De optioneel verkrijgbare oplaadbare batterij maakt het verpleegbed onafhankelijk van de netspanning in noodgevallen

Energiebesparing

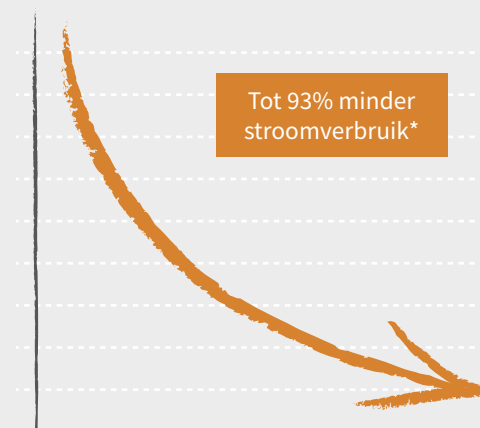

* In vergelijking met 230-volt-systemen bij ca. 5 verstellingen per dag

In één oogopslag

- Tot 93% minder stroomverbruik
- Door TÜV Rheinland getest
- Opnieuw bevestigd door het testinstituut Eurofins in 2020
- Lekstroommeting om de 10 jaar
- Hoge veiligheid voor bewoners
- Minder elektromagnetische vervuiling op het bed

Design

Hoofdborden en dessins

Voor de Elvido-serie is een ruime keuze aan huiselijk aandoende hoofd- en voetenborden met en zonder handgrepen verkrijgbaar. Kies daarbij een van de twaalf actuele houtdessins - van een witte krijttint tot het moderne, grofkorrelige beukenhoutdessin Crenata. Wij helpen u graag.



Kersen Havanna	Bella Noce Schoko
Iep Baron Truffel	Lindberg Eiken
Krijt	Eiken stijl Kaneel
Wilde pereboom Naturel	Edelkers
Magnolia	Beuken Naturel
Esdoorn	Beuken Crenata

Optionele onderstelafdekking

De modelvariant Elvido vervo is standaard al uitgerust met 4 kunststof afdekkappen op de hoeken van het onderstel. Ze omsluiten enkele technische functies en hun zilvergrijze kleur past precies bij de tint van het onderstel. Op verzoek is een nog uitgebreidere afdekking verkrijgbaar. De twee kunststof elementen bedekken het volledige oppervlak van het onderstel en zijn verkrijgbaar in de kleuren van verschillende houtdessins. Dit geeft het bed een bijzonder persoonlijke uitstraling.



▲ De optionele afdekking is aan te passen aan de kleur van het bed.



▲ Standaard omhullen 4 kunststof afdekkingen de uiteinden van de langsliggers.

BESLIST BETER

Aantrekkelijke kleuren om uit te kiezen

	Lindberg Eiken
	Eiken stijl Kaneel
	Kersen Havanna
	Beuken Naturel
	Krijt
	Zilvergrijs

Hoofd- en voeteneinde



Stoffering met capittonering voor de hoofdeinden-serie Nobla

De rechtlijnige hoofdborden van de Nobla-serie kunnen nog huiselijker worden gemaakt met vaste bekledingen van stof of kunstleer. Vooral de twee gecapittoneerde versies maken indruk - het chique ruitmotief met Britse flair en het strakke, moderne tegelmotief.



▲ Het tegelmotief zorgt voor een strakke, moderne look.



▲ Het klassieke ruitmotief creëert een chique sfeer.

Voor de Nobla-hoofdborden en de zijpanelen van het Vario-Safe-systeem zijn aantrekkelijke stoffen en kunstleer verkrijgbaar. Neem contact met ons op.

Neem bij het schoonmaken van de stoffen en het kunstleder op de instructies van de fabrikant in acht.





**Vario
Safe**

Elvido vervo


Het veelzijdige verlaagde bed voor hoge eisen

- Hoogteverstelling van ca. 25 – 80 cm
- Veilig contact met de vloer bij het opstaan voor bewoners van elke lengte; oriëntatie en balans worden versterkt door de voelbare gewaarwording met de voetzolen
- Het standaard OpenBus-aandrijfsysteem maakt het gebruik van het optionele out-of-bed-systeem mogelijk

Laag bed



Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

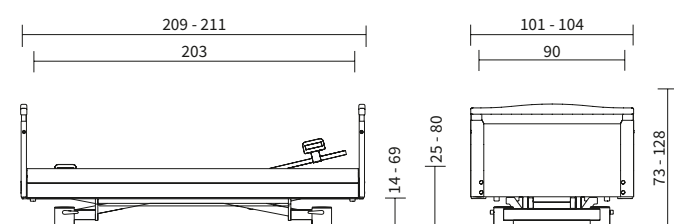

**Vario
Safe**

Elvido movo


Het bijzonder mobiele verlaagde bed

- Grote dubbele zwenkwielen van 100 mm voor eenvoudig manoeuvreren
- Het bed kan gemakkelijk naar een andere kamer worden verplaatst of naar een hygiëneruimte worden gebracht voor reiniging
- Immobiele hulpbehoevende personen kunnen in bed aan het sociale leven deelnemen in gemeenschappelijke ruimtes of op het terras
- Leiwiel voor nog eenvoudiger manoeuvreren

Laag bed



Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

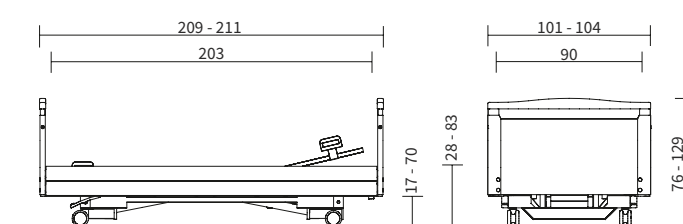




Elvido forto

Meer comfort voor lange en zware bewoners

- 260 kg veilige werklust voor zware bewoners
- Ligvlakbreedte van 100 cm en eenvoudig te gebruiken bedverlenging voor meer ruimte en comfort
- Ergonomische werkhoogte tot 85 cm vereenvoudigt de verzorging
- Grote wielen van 125 mm zorgen voor goede rijeigenschappen, zelfs bij hoge belasting



Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

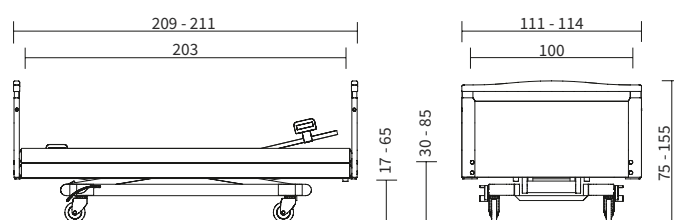

Hoge veilige
werklust
260 kg

24
volt-
systeem

Bedverlenging

:connect

Eenvoudige
bediening
LCD

Anti-
Trendelenburg-
positie

Trendelenburg-
positie



Elvido rega


Het verpleegbed voor psychiatrische instellingen

- Hoogteverstelling van 39 tot 80 cm met een optioneel verwijderbaar pomppedaal
- Stevig metalen ligvlak met gelaste roosterbodem
- Optionele fixeerbeugels aan de leuning en frameprofielen van het ligvlak
- Ideaal voor locaties zonder stroomvoorziening

Mechanisch
bed




Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

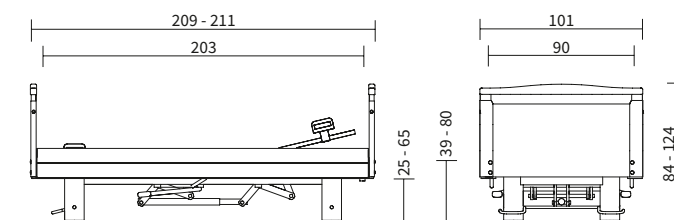

Mechanisch
bed

Anti-
Trendelenburg-
positie

Trendelenburg-
positie

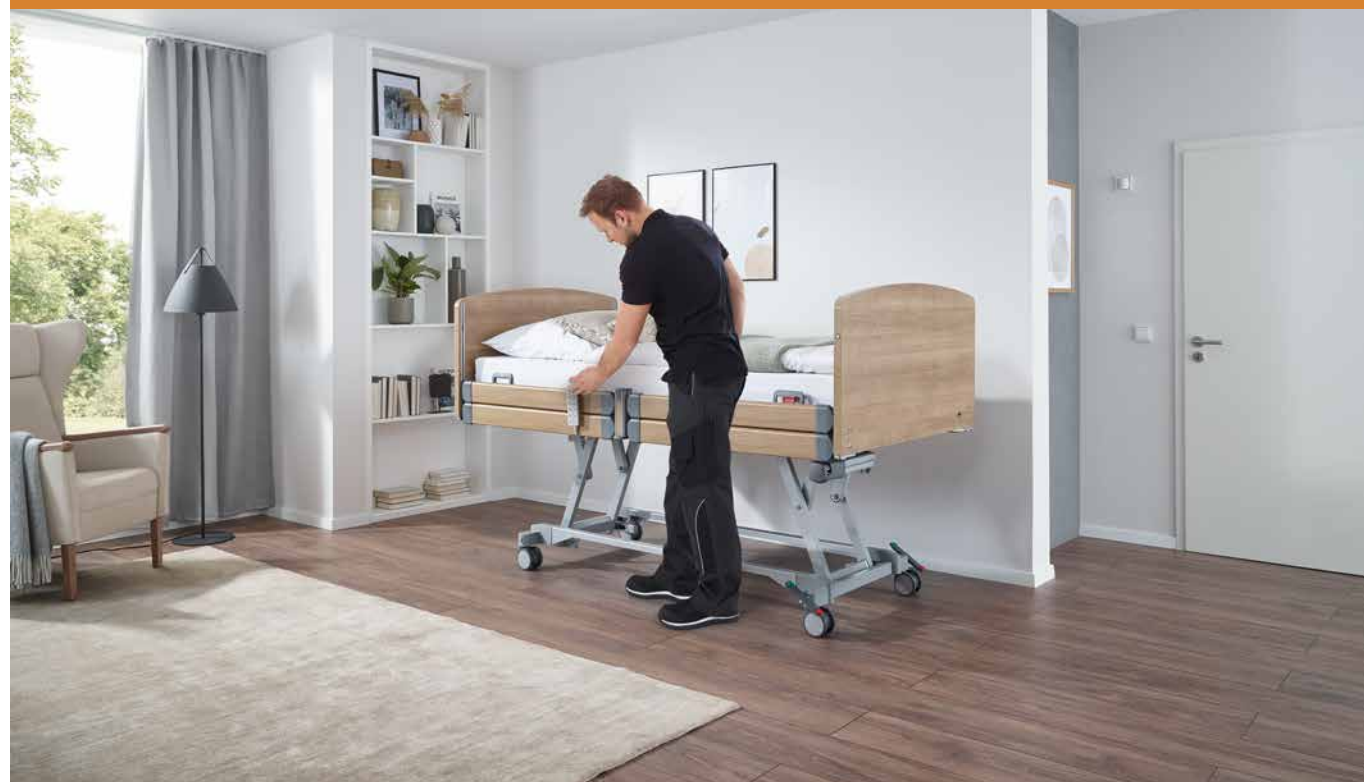

Technische service

Onze diensten - individueel volgens uw wensen en eisen

De hoogwaardige ziekenhuis- en verpleegbedden van de Stieglmeyer-groep worden van een al even hoogwaardige service voorzien. Onze diensten omvatten de kerntaken testen, repareren, trainen en adviseren.

We stemmen alles af op de wensen en eisen van uw organisatie. U kunt op veel verschillende manieren contact met ons opnemen. Persoonlijke contactpersonen aan de telefoon helpen u bij het bestellen van onderdelen en bieden een uitgebreide technische ondersteuning. Meer dan 50 werknemers in de technische buitendienst zorgen op locatie bij de klant voor tests en reparaties.

Onze service ondersteunt alle Stieglmeyer-producten met reserveonderdelen tot 15 jaar na aankoop. Stieglmeyer heeft in Herford een ultramodern servicecentrum met 3000 vierkante meter aan magazijnruimte geopend. In het geautomatiseerde magazijn bevinden zich zo'n 7500 artikelen die meestal binnen korte tijd verzonden kunnen worden. U kunt deze artikelen ook gemakkelijk **online bestellen** via ons **serviceportaal op stieglmeyer.com/de/service**.



+49 (0) 5221 185 - 777

Ma-do van 8:00 tot 16:30 uur
en vr van 8:00 tot 14:00 uur



service@stieglmeyer.com

Reserveonderdelen

Om volledig gebruik te maken van onze expertise in service en reparatie, zijn onze reserveonderdelen en vervangende apparatuur altijd snel beschikbaar. We hebben niet alleen het benodigde personeel, maar we hebben bij de vestiging in Herford ook een uitgebreid magazijn met onderdelen voor ziekenhuis- en verpleegbedden.

Bedtest

De bedtest kan uit inspectie of onderhoud bestaan. Tijdens de inspectie beoordelen we de actuele technische staat van het bed. Uit de inspectie kunnen voor elk bed de juiste maatregelen worden afgeleid. Naast deze diensten omvat het onderhoud ook preventieve onderhoudsmaatregelen, zoals het afstellen van de rem. Onderhoud is het behoud van de beoogde conditie. Inspectie en onderhoud omvatten altijd de elektrische veiligheidstest (volgens DGUV V3) en een serviceraport, dat u ook online kunt opvragen.

Snelle reparatie van het bed

Als fabrikant garanderen wij de nalevering van originele reserveonderdelen binnen de kortst mogelijke tijd. Onze medewerkers herstellen eventuele schade aan uw bedden snel, vakkundig en tegen een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Speciale reparaties, verbouwingen of complete restauraties worden uitgevoerd in ons servicecentrum in Herford.

Nuttige aanvullingen

Naar het verpleegbed Elvido

Ontdek onze meubels voor een huiselijke hotelflair en een prettige werksfeer.



▲ Onze praktische, mooi vormgegeven nachtkastjes passen ook perfect bij lage bedden zoals de Elvido - hier ons model Credo.



▲ Elegante zitmeubels en tafels brengen een bistro-flair in de bewonerkamers en de eetkamer.



▲ De comfortabele fauteuils en banken van de Luna-serie nodigen uit tot stimulerende gesprekken in de gemeenschappelijke ruimte.



▲ Op maat gemaakt projectmeubilair en flexibele kasten uit het Adrano-assortiment verfraaien alle kamers in het verpleeghuis.

Dit zou u ook kunnen interesseren!

Uitvoeringen en opties

Beschermhoezen en beschermkussens		Valbeschermingsmatten	
Beschermhoezen  Met beschermhoezen voor de hoofdborden, de zijhekken en de centrale steun kunnen de bewoners volledig worden beschermd tegen letsel door stoten. Ook kan zo het grijpen tussen de balken door worden voorkomen.		Valbeschermingsmatten  Voor een maximale bescherming tegen valletsel wordt de valbeveiligingsmatras van 3 cm dik meerlaagse schuim aangeraden.	
Beschermhoezen  De beschermhoes voor het doorlopende zijhek kan worden neergelaten en omhoog worden getrokken met de balken.		Stootrollen  De wandstootrol beschermt het bed en de muren bij horizontale en verticale bewegingen.	
Beschermkussens  De elementen van het gedeelde zijhek kunnen afzonderlijk worden bekleed.		Wandafstandhouder  De wandafstandhouder beschermt het bed, de wand en de inrichting tegen schade door botsingen.	
Ligvlakken Hygiënisch ligvlak  Hygiënisch ligvlak - voor een gezond microklimaat en een grondige reiniging		Oprichter  De oprichter maakt het voor de bewoner gemakkelijker om een comfortabele positie in bed aan te nemen.	
Comfort-ligvlak  Comfort-ligvlak – flexibel gemonteerde vlakelementen met draaiveren			

Andere producten vindt u in onze accessoirebrochure

Modelvarianten	Elvido vervo	Elvido movo	Elvido forto	Elvido rega
Afmetingen en gewichten				
Buitenmaten (afhankelijk van de houten ombouw)	ca. 100,3 x 211 cm	ca. 100,3 x 211 cm	ca. 110,3 x 211 cm	ca. 100,3 x 211 cm
Ligvlak (matrasmaat)	90 x 200 cm of 100 x 200 cm*	90 x 200 cm of 100 x 200 cm*	100 x 200 cm*	90 x 200 cm
Ligvlakindeling (RS/zitgedeelte/BS/OS)	ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm	ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm	ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm	ca. 71 / 15 / 41 / 61 cm
Lengteaanpassing van de rugsteun	ca. 10 cm	ca. 10 cm	ca. 10 cm	–
Veilige werklast	225 kg	225 kg	260 kg	225 kg
Onderrijdbaarheid	ca. 15 cm	ca. 15 cm	ca. 18 cm	ca. 15 cm
Totaal gewicht	ca. 140 kg	ca. 140 kg	ca. 150 kg	ca. 150 kg
Aandrijvingen				
Volledig gemotoriseerd	✓	✓	✓	–
Volledig gemotoriseerde OpenBus-technologie	✓	✓	✓	–
24-volt-aandrijfsysteem met externe transformator	0	0	0	–
Elektronische componenten				
Verlichte standaardhandschakelaar incl. Trendelenburg-functie	✓	✓	✓	–
LCD-handschakelaar incl. Trendelenburg-functie	0	0	0	–
Out-of-bed-systeem Smart of Flex	0	0	0	–
Zijheksystemen				
Geïntegreerde doorlopende zijhekken met DSE Easy-Click	✓	✓	✓	✓
Geïntegreerd gecombineerd zijhek KSE Easy-Click	0	0	0	0
Gedeeld zijhek met Vario Safe	0	0	0	–
Zijpaneel zonder zijbescherming	0	0	0	0

Modelvarianten	Elvido vervo	Elvido movo	Elvido forto	Elvido rega
Ligvlakken				
Ligvlak met antropometrisch optimale maat (85/15/49/60 cm)	✓	✓	✓	–
Hygiënisch ligvlak	✓ Polypropyleen, uitneembaar	✓ Polypropyleen, uitneembaar	✓ Polypropyleen, uitneembaar	–
Comfort-ligvlak (niet bij ligvlak 100 cm)	0	0	–	–
Ligvlakbreedte 100 cm*	0	0	✓	–
Bodem met stalen rooster	–	–	–	✓
Ligvlak 4-delig	✓ elektrisch verstelbaar	✓ elektrisch verstelbaar	✓ elektrisch verstelbaar	✓ mechanisch verstelbaar
Ligvlak in anti-Trendelenburg-positie kantelbaar	✓	✓	✓	0
Ligvlak in Trendelenburgpositie kantelbaar	✓	✓	✓	0
Wielen				
Zwenkwiel	✓ dubbel wiel Ø 50 mm	✓ dubbel wiel Ø 100 mm	✓ coverwiel Ø 125 mm	✓ dubbel wiel Ø 50 mm
2x2-wielenvastzetting	✓	–	–	–
Centrale 4-wielenvastzetting	0	✓	✓	✓
Wandstootrollensysteem				
Wandstootrol in horizontale richting	0	0	0	0
Universele rol in horizontale en verticale richting	0	0	0	0
Wandafstandhouders op het onderstel	0	0	0	0
Verstelbereiken				
Hoogteverstelling	ca. 25 – 80 cm	ca. 28 – 83 cm	ca. 30 – 85 cm	ca. 39 – 80 cm
Rugsteunverstelling tot 70°	✓	✓	✓	✓
Bovenbeensteunverstelling tot 40°	✓	✓	✓	✓
Anti-Trendelenburg-positie	✓ tot 14°	✓ tot 14°	✓ tot 14°	0 tot 10°
Trendelenburg-positie	✓ tot 12°	✓ tot 12°	✓ tot 12°	0 tot 14°
Overige				
Plaats voor lifter onder bed	✓	✓	✓	✓
Bevestigingshulzen hoofdeinde	✓	✓	✓	✓
Bedverlenging	✓ geïntegreerd	✓ geïntegreerd	✓ geïntegreerd	0 vast te schroeven
Houten delen om uit te kiezen in folder	✓	✓	✓	✓
Houtdessins naar keuze volgens brochure	✓	✓	✓	✓
Metalen coating van Argentum	✓	✓	✓	✓
Automatische contouraanpassing	✓	✓	✓	–
Zijpaneel achter de zijhekken (Geen zijpaneel bij gedeeld zijhek)	✓	✓	✓	–
Extra uitrusting				
Verlichting onder het bed	0	0	0	–
Bevestigingshulzen voeteneinde	0	0	0	–
Geïntegreerde bedverlenging met telescopische veiligheidsbalken en zijpaneel	0	0	0	–
Beddengoedlade	0	0	0	0
Beits op de houten ombouw	0	0	0	0
Geïntegreerde lampaansluiting	0	0	0	–
Geïntegreerde accu	0	0	0	–

BESLIST BETER

Elvido serie – de veiligheidsnormen

- EN 14971
Risicoanalyse voor Medische hulpmiddelen
- EN 60601-1
Veiligheid voor medische elektrische apparaten
- EN 60601-1-1
Elektromagnetische compatibiliteit
- DIN EN 60601-2-52
Medische elektrische apparaten



✓ = standaarduitrusting
0 = optioneel verkrijgbaar
– = niet leverbaar

Behouder van waarden Vormgever van de toekomst

STIEGELMEYER GROUP

Behouder van waarden

Ons bedrijf werd opgericht in 1900 in Herford en is nog steeds een familiebedrijf. Respect en verantwoordelijkheid tegenover onze klanten, medewerkers en partners vormen de basis van ons dagelijks werk. Op basis van deze waarden en onze jarenlange ervaring bieden wij onze klanten over de hele wereld hoogwaardige producten, oplossingen en diensten voor de eisen van zorg en gezondheid.

Vormgever van de toekomst

Om het hoofd te kunnen bieden aan de snelle veranderingen in de zorg- en gezondheidsbranche, ontwikkelen wij onze producten allemaal zelf. Innovaties en visies op de zorg voor de toekomst zijn het doel van ons werk. Wij staan altijd in contact met onze klanten om hen te ondersteunen bij hun dagelijkse taken. Het omzetten van de trends van morgen naar het heden, is voor ons een succesvolle traditie.

Onze expertise

Ziekenhuis

Verpleeghuis

Thuiszorg

Comfortbedden

Projectmeubilair

Service



De Stiegmeyer-groep is uw internationale partner voor ziekenhuizen en zorginstellingen en met het merk Burmeier ook voor de thuiszorg. Wij ondersteunen onze klanten met praktische producten, oplossingen en diensten, die wij voortdurend verder ontwikkelen.

- Opgericht in 1900 en nog steeds in familiebezit
- Meer dan 1100 medewerkers wereldwijd
- Productie van alle kernproducten in onze eigen fabrieken
- Productontwikkeling en productie in Duitsland
- Service, training en procesoptimalisatie bij de klant op locatie
- Internationale certificering en export naar meer dan 60 landen
- Verkoopmaatschappijen in België, Finland, Frankrijk, Nederland, Polen en Zuid-Afrika

Onze merken


STIEGELMEYER


BURMEIER



STIEGELMEYERGROUP

Hoofdkantoor / Headquarters

Deutschland / Germany

Stieglmeyer GmbH & Co. KG

Ackerstraße 42

32051 Herford

Phone +49 (0) 5221 185 - 0

Fax +49 (0) 5221 185 - 252

info@stieglmeyer.com

www.stieglmeyer.com

France

Stieglmeyer SAS

16 Avenue de l'Europe

Bâtiment SXB1

67300 Schiltigheim

Phone +33 (0) 4 7238 - 5336

contact@stieglmeyer.fr

www.stieglmeyer.fr

South Africa

Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd

The Estuaries · Century City

Cape Town, 7441

Phone +27 (0) 21 555 - 1415

Fax +27 (0) 21 555 - 0639

info.southafrica@stieglmeyer.com

www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands

Stieglmeyer BV

Peppelenbos 7

6662 WB Elst

Phone +31 (0) 345 581 - 881

info@stieglmeyer.nl

www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland

Stieglmeyer Oy

Ahjokatu 4 A

15800 Lahti

Phone +358 (0) 3 7536 - 320

Fax +358 (0) 3 7536 - 330

stieglmeyer@stieglmeyer.fi

www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland

Stieglmeyer Sp. z o.o.

86-212 Stolno

Grubno 63

Phone +48 56 6771 - 400

Fax +48 56 6771 - 410

info.stolno@stieglmeyer.pl

www.stieglmeyer.pl



Vind uw plaatselijke partner op onze website:

Find your local partner at our website:

stieglmeyer.com/partner

stieglmeyer.com