


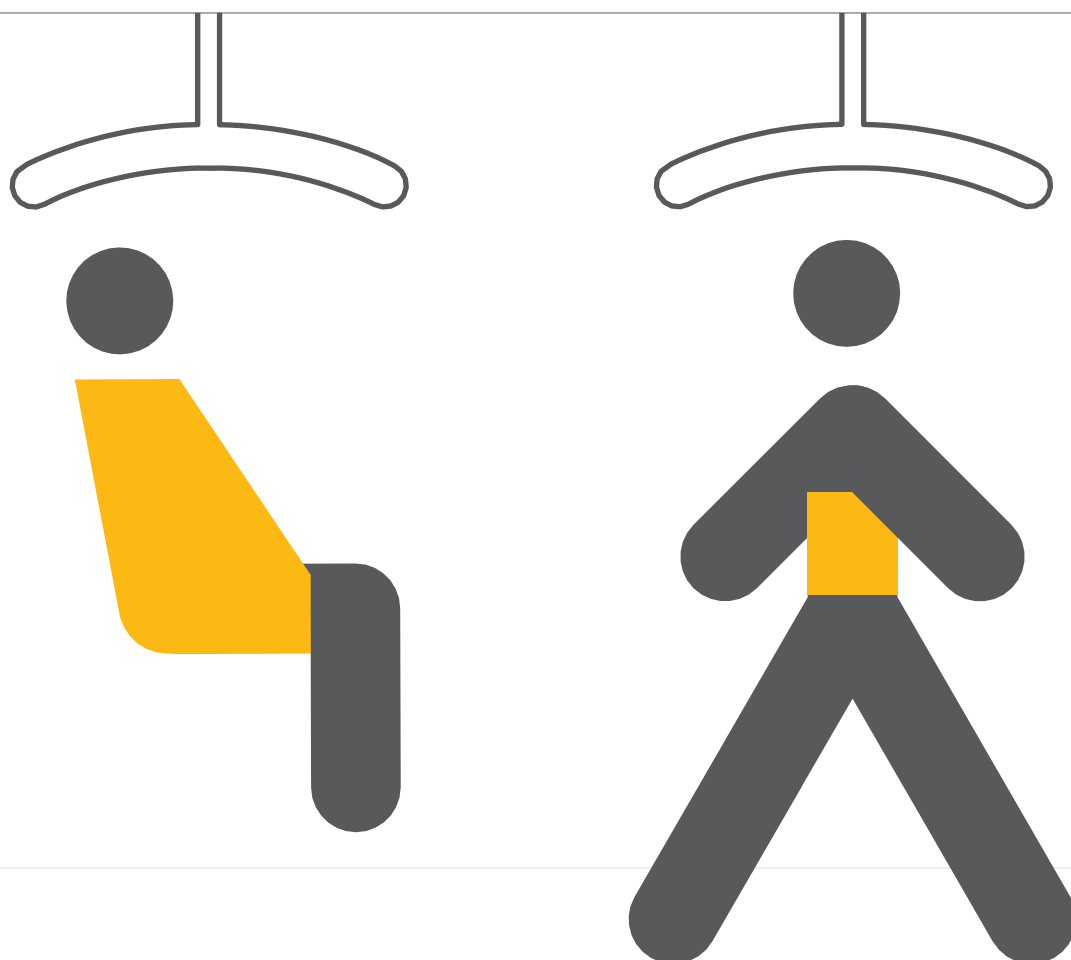

Draagbanden

ACTIVE

Active Micro	6
Active Micro Plus.....	7
Active Trainer	8
Gait Trainer	9

BASIC

Basic Basic	11
Basic Low.....	12
Basic High.....	13
Basic Shell.....	14
Basic Hammock	15
Basic Comfort High.....	16

CUSTOM

Sit-On	18
Sit-On High	19
Sit-On II	20
Sit-On High II.....	21
Custom Amputee.....	22
Sit-On Comfort.....	23
Sit-On Comfort High.....	24
Sit-On Comfort High Hygiëne	25

KIDS

Active Vest Kids	27
Basic Basic – Kids.....	28
Basic High – Kids.....	29
Sit-On – Kids.....	30
Sit-On High – Kids.....	31
Sit-On II – Kids	32
Sit-On High II – Kids	33
Sit-On Comfort – kids	34
Sit-On Comfort High – Kids	35

BARIATRIC

Basic High Bariatric	37
Gait Trainer – Bariatric.....	38
Pannus Support.....	39
Repositioning Sling – Bariatric	40
Twin Turner – Bariatric.....	41

Draaien en handelingen

Leg sling.....	43
Multi Support	44
OR Sling – Upper body	45
Positioning sling.....	46
Repositioning sling.....	47
Repositioning Sling, TENCEL®	48
Turner	49
Twin Turner.....	50



Guldmann draagbanden – een groot aantal opties

Het gebruik van de juiste draagband is essentieel voor efficiënte zorg, comfort, waardigheid en veiligheid voor zowel de patiënt als de zorgverlener.

Sinds de introductie van de eerste plafondlift in 1981, hebben we er voortdurend naar gestreefd om nieuwe toepassingen te ontwikkelen doormiddel van innovatieve initiatieven zoals nieuwe draagbanden en tilaccessoires, hetzij wanneer we een behoefte hebben ervaren of een uitdaging hebben opgelost met onze klant.

Transfer - Behandeling - Training

Voor alle til-, beweeg-, verzorging- en trainingssituaties

Draagbanden voor tillen, draaien en behandelen vormen een belangrijk onderdeel van het uitgebreide assortiment Guldmann transfer hulpmiddelen. De draagbanden van Guldmann worden gebruikt bij veel verschillende zorgtaken, die allemaal helpen bij het bereiken van een hoger comfort en een beter resultaat. Patiënten hebben baat bij tillen, positioneren, mobilisatie, activeren en training veilig en vaak uitgevoerd in samenwerking met/door de zorgverlener.

Mensen zijn er in alle soorten en maten

Dat geldt ook voor alle Guldmann draagbanden

Guldmann draagbanden zijn ontworpen met het oog op comfort, waardigheid en gebruiksgemak en kunnen worden gebruikt met zowel plafond- als mobiele tilliften.

Het kiezen van de juiste type en maat draagband heeft grote invloed op de kwaliteit van het verplaatsen van iedere gebruiker.

Daarom zijn Guldmann draagbanden verkrijgbaar in veel verschillende soorten, maten en materialen voor kinderen, volwassenen en bariatrische personen maar ook voor mensen met speciale behoeften. In het uitgebreide assortiment draagbanden en transfer hulpmiddelen vindt u voor vrijwel iedere verzorgingstaak een draagband.

Tel tot groen...

Makkelijk te gebruiken - gemakkelijk te begrijpen

De Guldmann ABC draagbanden zijn zo ontworpen dat ze zowel makkelijk te gebruiken als te begrijpen zijn. De draagbanden zijn ontworpen met een rode (actieve), groene (basis) en blauwe (aangepaste) kleurcodering op de draagbanden. De groene kleur geeft aan dat het een universele draagband is die door de meeste patiënten gebruikt kan worden. De rode kleur geeft aan dat de zorgverlener vóór gebruik meer aandacht moet besteden aan het evalueren van de mobiliteitsfunctie van de patiënt. De blauwe kleur geeft aan dat de draagband bedoeld is voor een speciaal doel.

Het uitgebreide assortiment Guldmann draagbanden is ontworpen met gekleurde lussen om het gemakkelijk en intuïtief te maken om mee te werken. De kleuren vereenvoudigen de communicatie wanneer meer zorgverleners meewerken aan een til-, transfer- of mobilisatietask. Alleen al het kiezen van de kleur van de lus bespaart tijd en voorkomt verdraaid / onregelmatig aanbrengen van de draagband bij de patiënt.

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste draagband?

U kunt hulp vinden bij het kiezen van de juiste draagband met behulp van onze "Sling Guide" op www.guldmann.com of u kunt ons bellen voor ondersteuning/advies.



BASIC Basic
max 255 kg / 560 lbs
Guldmann



Active



	
	Polyester
Maat	Artikel.
XS	284031
S	284041
M	284051
L	284061
XL	284071
2XL	284081
Maximaal gewicht.	255 kg

Functie

De Active Micro-draagband is ideaal voor het verplaatsen van personen in een zittende positie, met de nadruk op toiletgebruik en andere hygiënische handelingen.

De draagband ondersteunt het bovenlichaam (van het bekken tot net onder de schouders) en wordt vastgemaakt rond de borst en het bovenbeen, waarbij de ondersteunende lussen tijdens het tillen automatisch worden aangetrokken.


Geschied voor

Personen tillen die hun hoofd kunnen controleren, maar een beperkte functie hebben in hun bovenlichaam, heupen en dijen. Het kan ook worden gebruikt in gevallen waarin de gebruiker zich vaak overstrekt.

Zorgtaak

- Toilet/Hygiëne
- Bed naar poststoel
- Bed naar stoel

De draagband heeft een grote opening aan de onderkant, die toegang geeft tot kleding terwijl de gebruiker in de draagband blijft zitten. Het model is ontworpen voor situaties waarin het gemakkelijk moet zijn om de draagband om te doen en weer te verwijderen.

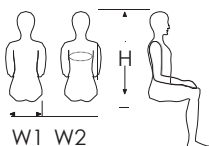

Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
W1	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58
W2	55 - 90	60 - 95	65 - 100	70 - 105	75 - 110	80 - 120	90 - 130	100 - 140	110 - 150	



		
	Polyester	Polyester Disposable
Maat	Artikel.	Artikel
Kids 4-6	281001	
Kids 6-10	281011	
Kids 10-14	281021	
XS	281531	281535
S	281541	281545
M	281551	281555
L	281561	281565
XL	281571	281575
2XL	281581	281585
Maximaal gewicht	255 kg	205 kg

Functie

De Active Micro-draagband is ideaal voor het verplaatsen van personen in een zittende positie, met de nadruk op toiletgebruik en andere hygiënische handelingen.

De draagband ondersteunt het bovenlichaam (van het bekken tot net onder de schouders) en wordt rond de borst en het bovenbeen vastgemaakt. De elastische band kan worden aangepast aan de individuele gebruiker.


De draagband heeft een grote opening aan de onderkant, die toegang geeft tot kleding terwijl de gebruiker in de draagband blijft zitten. Het model is ontworpen voor situaties waarin het gemakkelijk moet zijn om de draagband om te doen en weer te verwijderen.

Geschikt voor

Tillen van personen die hun hoofd kunnen controleren, maar een beperkte functie hebben in hun bovenlichaam, heupen en dijen.

Zorgtaak

- Toilet/Hygiëne
- Bed naar postoel
- Bed naar stoel

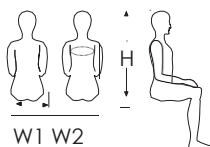

Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
W1	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58
W2	55 - 90	60 - 95	65 - 100	70 - 105	75 - 110	80 - 120	90 - 130	100 - 140	110 - 150	



		
	Polyester	Polyester Disposable
Maat	Artikel	Artikel
Kids 4-6	283001	
Kids 6-10	283011	
Kids 10-14	283021	
XS	283031	
S	283041	
M	283051	283555
L	283061	283565
XL	283071	
2XL	283081	
Maximaal gewicht	255 kg	205 kg

Functie

De Active Trainer is een loopvest voor mensen met voldoende beenkracht om rechtop te staan, maar die moeite hebben met balanceren.

De Active Trainer is een draagband om in rechtop te staan en biedt ondersteuning tijdens het lopen.

Het loopvest ondersteunt de borst en het bovenste deel van de rug, terwijl de beenriemen ondersteuning bieden rond de heupen en het risico van "uitglijden" van de gebruiker voorkomt.

Dit loopvest is ideaal voor het vroeg mobiliseren van patiënten en biedt vertrouwen en veiligheid voor zowel gebruiker als verzorger in evenwichtstraining situaties: zittend op de rand van het bed, staand of daadwerkelijk lopend.

De disposableversie (disposable) van dit loopvest "Gait Trainer Disposable" heeft exact dezelfde functie maar een iets ander ontwerp.

Geschied voor

Personen met verminderde lichaamsbalans maar in staat om gewicht op hun benen te dragen. Looptraining. Ondersteund staan en rechtopstaande houdingen. Vroege mobilisatie.

Zorgtaak

- Overgangshoudingen
- Staand: reacties, reflexen, balans
- Zittend: reacties, reflexen, balans
- Beschermende reacties
- Gewichtsverplaatsing
- Looptraining
- Traplopen
- Gewichtsondersteuning
- Door lichaamsgewicht ondersteunende loopbandtraining
- Andere dagelijkse activiteiten



W2

W2

Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4 - 6	6 - 10	10 - 14							
55 - 90	60 - 95	65 - 100	70 - 105	75 - 110	80 - 120	90 - 130	100 - 140	110 - 150	



	
	Spacer Comfort
Maat	Artikel.
S	283241
M	283251
L	283261
XL	283271
2XL	283281
Maximaal gewicht	255 kg

Function

De “Gait Trainer” (looptrainer) is een loopband voor mensen met voldoende beenkracht om rechtop te staan, maar die moeite hebben met balanceren.

De Gait Trainer biedt de nodige ondersteuning tijdens het lopen en helpt de gebruiker bij het staan.

Het loopvest ondersteunt het bovenlichaam en de beenmanchetten verhogen de veiligheid. De Gait Trainer is ideaal voor vroege mobilisatie van patiënten, balanstraining, verschillende soorten staande of zittende oefeningen en looptraining, en biedt vertrouwen en veiligheid voor zowel gebruiker als verzorger.

Het loopvest is ontworpen om in combinatie met de Guldmann Trainer Module, een optionele functie die beschikbaar is bij de GH3+ tillift, te gebruiken. De Trainermodule biedt de mogelijkheid om de lift te gebruiken als een systeem met een instelbare gewichtsondersteuning in uw revalidatie- / trainingsprogramma voor patiënten.

Geschikt voor

Personen met verminderde lichaamsbalans maar in staat om gewicht op hun benen te dragen. Looptraining, ondersteund staan en rechtopstaande houdingen en vroege mobilisatie.

Zorgtaak

- Overgangshoudingen
- Staand: reacties, reflexen, balans
- Zittend: reacties, reflexen, balans
- Beschermende reacties
- Gewichtsverplaatsing
- Looptraining
- Traplopen
- Gewichtsondersteuning
- Door lichaamsgewicht ondersteunende loopbandtraining
- Andere dagelijkse activiteiten



W2

W2



Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4 - 6	6 - 10	10 - 14							
55 - 90	60 - 95	65 - 100	70 - 105	75 - 110	80 - 120	90 - 130	100 - 140	110 - 150	

Basic



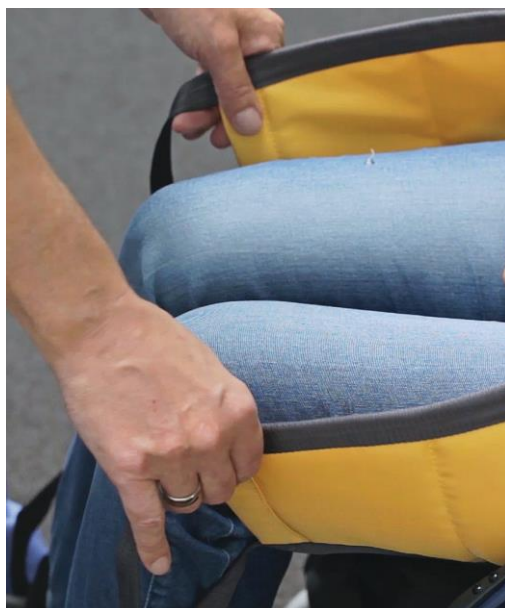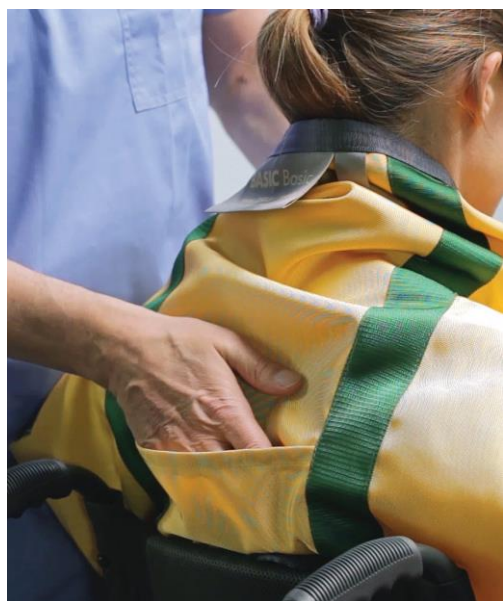

		
	Polyester	Polyester Net
Maat	Artikel	Artikel
XS	270031	270133
S	270041	270143
M	270051	270153
L	270061	270163
XL	270071	270173
2XL	270081	270183
3XL	270091 ^{*)}	
Maximaal gewicht	255 kg 500 kg ^{*)}	255 kg

Functie

De Basic Basic draagband is een algemene draagband die geschikt is voor een grote verscheidenheid aan gebruikers en tilhandelingen. De draagband ondersteunt het hele lichaam, behalve het hoofd.

De draagband is ideaal voor het tillen, verplaatsen en positioneren van gebruikers met hoofdbalans maar minder controle hebben over hun boven- of onderlichaam. Het kan worden gebruikt vanuit een zittende of liggende positie - bijvoorbeeld vanuit een bed of rolstoel - De Basic Basic draagband is ontworpen als een algemene draagband om de meeste tilsituaties te bereiken.


De Basic Basic draagband is verkrijgbaar in verschillende materialen. De netversie kan worden gebruikt als badband. Beide materialen zijn zeer duurzaam en gemakkelijk om mee te werken, waardoor de lucht door het lichaam kan circuleren en de gebruiker uitstekend comfort en ondersteuning krijgt.

Geschikt voor

Personen met hoofdcontrole maar die ondersteuning nodig hebben voor zittende transfers.

Zorgtaak

- Bed naar stoel
- Bed naar douchestoel
- Bed naar poststoel
- Tillen vanaf de vloer
- Ondersteuning in de stoel
- Zitten: Balans
- Zitten: reacties, reflexen
- Transfer naar mat, kantelafel
- Transfer in/uit de auto
- Toegang voor perineale hygiëne

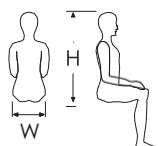

Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
W	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



		
	Polyester	Polyester Net
Maat	Artikel	Artikel
XS	271031	271133
S	271041	271143
M	271051	271153
L	271061	271163
XL	271071	271173
2XL	271081	271183
Maximaal gewicht	255 kg	255 kg

Functie


De Basic Low draagband is een algemene draagband met lage rug die geschikt is voor een breed scala aan gebruikers en tilhandelingen. De draagband ondersteunt de onderrug en heup, het ontwerp laat de armen van de gebruiker tijdens de lift buiten de draagband zodat ze kunnen deelnemen aan de transfer.

Geschikt voor

Personen met hoofd- en bovenlichaambalans, maar die ondersteuning nodig hebben bij zittende transfers..

Zorgtaak


- Bed naar stoel
- Bed naar douchestoel
- Bed naar poststoel
- Tillen vanaf de vloer
- Ondersteuning in de stoel
- Zitten: Balans
- Zitten: reacties, reflexen
- Transfer naar mat, kanteftafel
- Transfer in/uit de auto
- Aqua therapie
- Transfer training met glijplank
- Toegang voor perineale hygiëne

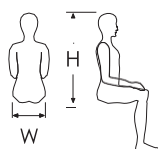

Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4 - 6	6 - 10	10 - 14							
45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

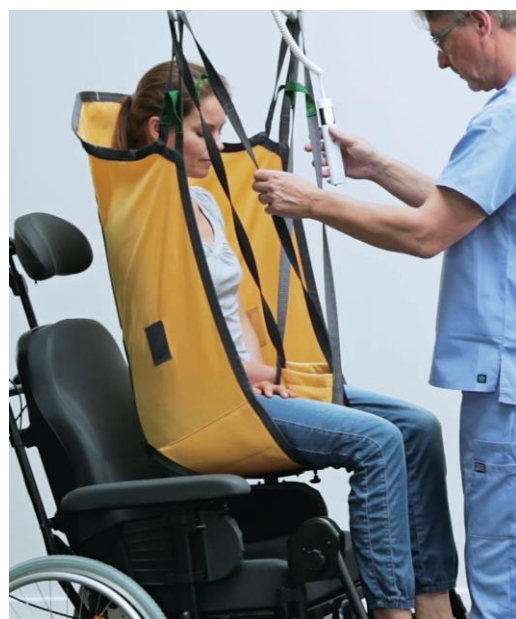

			
	Polyester	Polyester Net	Polypropylene Disposable
Maat	Artikel	Artikel	Artikel
XS	272031	272133	283631
S	272041	272143	283641
M	272051	272153	283651
L	272061	272163	283661
XL	272071	272173	283671
2XL	272081	272183	283681
Maximaal gewicht	255 kg	255 kg	205 kg

Functie

De Basic High draagband is een draagband voor het hele lichaam die geschikt is voor een breed scala aan gebruikers en tilsituaties. De draagband ondersteunt het hele lichaam inclusief het hoofd.

De draagband is ideaal voor het tillen, verplaatsen en positioneren van gebruikers met verminderde controle over hun hoofd, boven- en onderlichaam. Het kan worden gebruikt vanuit een zittende of liggende positie, bijvoorbeeld vanaf de vloer, bed of rolstoel. De Basic High is ontworpen als een algemene draagband om de meeste tilsituaties te bereiken.


De Basic High draagband is verkrijgbaar in verschillende materialen. De netversie kan worden gebruikt als badband. Beide materialen zijn zeer duurzaam en gemakkelijk om mee te werken, waardoor de lucht door het lichaam kan circuleren en de gebruiker uitstekend comfort en ondersteuning krijgt.

Geschikt voor

Personen met weinig controle over hun hoofd en lichaam en die ondersteuning nodig hebben bij zittende transfers.

Zorgtaak



- Bed naar stoel
- Bed naar douchestoel
- Bed naar poststoel
- Tillen vanaf de vloer
- Ondersteuning in de stoel
- Zitten: Balans
- Zitten: reacties, reflexen
- Transfer naar mat, kanteltafel
- Transfer in/uit de auto
- Aqua therapie
- Toegang voor perineale hygiëne

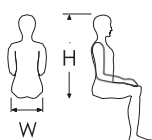

Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4 - 6	6 - 10	10 - 14							
45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

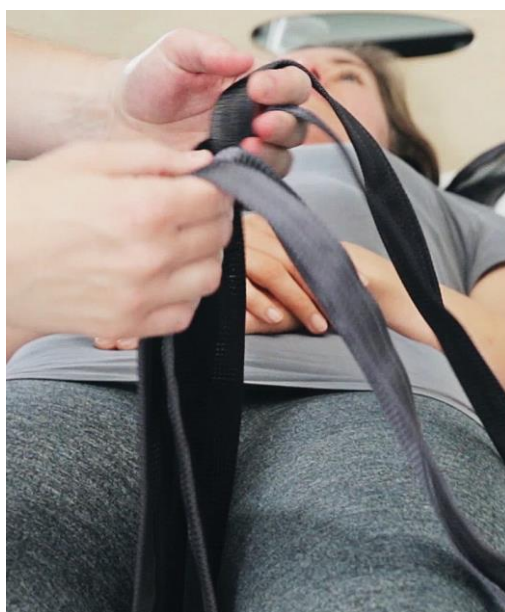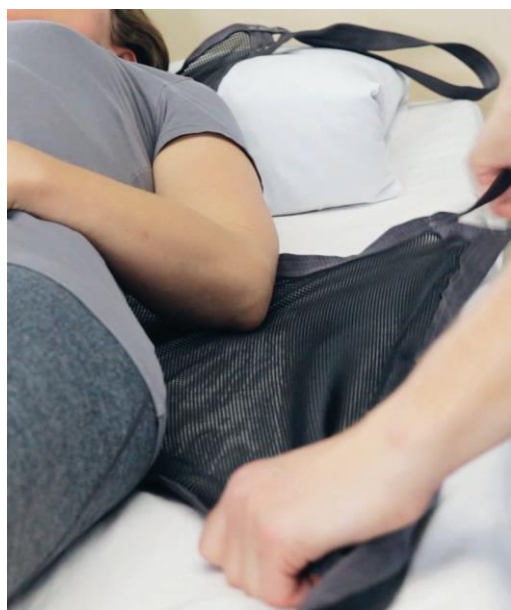

	
	Polyester Net
Maat	Artikel
XS	275032
S	275042
M	275052
L	275062
XL	275072
Maximaal gewicht	255 kg

Functie

De Basic Shell draagband is een full-body-draagband die is ontworpen voor het tillen en verplaatsen van mensen met verminderde of geen controle over hun hoofd en bovenlichaam. Het biedt ondersteuning voor het hele lichaam en het hoofd, terwijl de armen van de gebruiker buiten de draagband blijven.

De draagband kan zittend of liggend worden gebruikt - bijvoorbeeld vanaf de vloer, bed of rolstoel. De draagband kan onder de gebruiker op zijn plaats blijven terwijl hij / zij in de rolstoel zit.


De Basic Shell draagband is gemaakt van netmateriaal, dat gebruikt kan worden als een badband (bijv. Zwembad, bad, douche). Het materiaal is zeer duurzaam en gemakkelijk om mee te werken, waardoor de lucht door het lichaam kan circuleren en de gebruiker uitstekend comfort en ondersteuning krijgt.

Geschikt voor

De draagband is ideaal voor het tillen, verplaatsen en positioneren van personen met verminderde controle over hun hoofd, boven- en onderlichaam. Tillen van en naar zittende of liggende positie waarbij de draagband in de rolstoel / anatomische stoel kan blijven.

Zorgtaak

- Bed naar stoel
- Bed naar douchestoel
- Zwembad, bad, douche
- Bed naar poststoel
- Tillen vanaf de vloer
- Ondersteuning in de stoel
- Zitten: Balans
- Zitten: reacties, reflexen


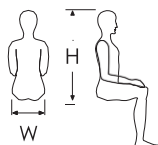


Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4 - 6	6 - 10	10 - 14							
45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

Basic Hammock

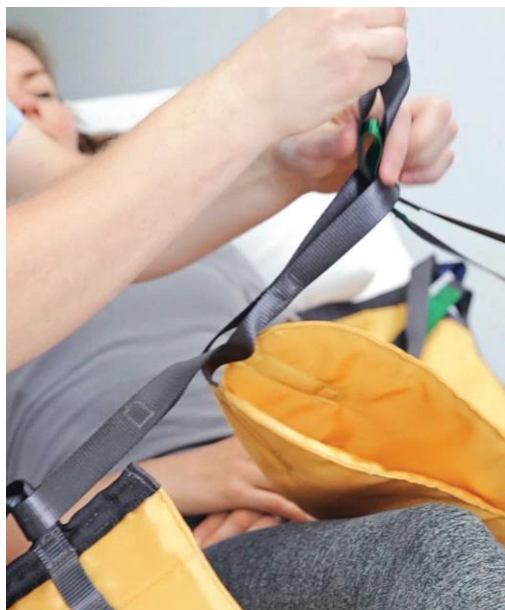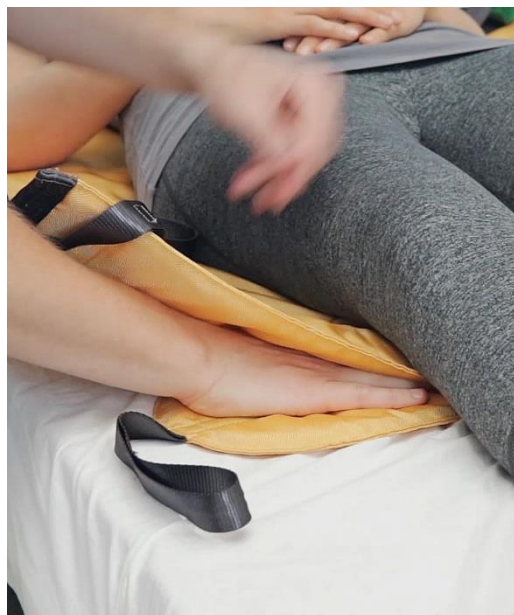

	
	Polyester
Maat	Artikel
XS	274031
S	274041
M	274051
L	274061
XL	274071
Maximaal gewicht	255 kg

Functie

De Basic Hammock draagband is ontworpen voor het tillen en verplaatsen van mensen met een verminderde motorische functie, aangezien hij het hele lichaam ondersteunt, het hoofd niet inbegrepen, en extra ondersteuning biedt rond de heupen en dijën. Als nek- / hoofdsteen nodig is, kan het hoofdsteenkussen met deze draagband worden gebruikt. De Basic Hammock is ideaal voor situaties waarin de dijën van de gebruiker in een neutrale positie moeten blijven.


De draagband wordt gebruikt voor tillen van en naar een liggende positie (in een bed, op de vloer, enz.), van en naar een zittende positie. Deze draagband is niet alleen geschikt voor de meeste gebruikers, maar kan ook gebruikt worden voor transfers waarbij de beenlussen onder beide benen overlappen bijvoorbeeld bij het optillen van enkele of dubbele geamputeerde benen of worden gebruikt om individueel / afzonderlijk steun te bieden aan patiënten die bijzonder gevoelig zijn voor druk.

Geschikt voor

Personen optillen met weinig controle over hun lichaam. Transfers van en naar een liggende of zittende positie en voor algemene transfers met extra ondersteuning aan het dijbeengebied.

Zorgtaak

- Bed naar stoel
- Bed naar douchestoel
- Bed naar poststoel
- Tillen vanaf de vloer
- Ondersteuning in de stoel
- Zitten: Balans
- Zitten: reacties, reflexen
- Transfers naar mat, Kanteltafel

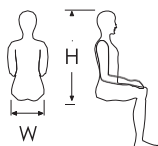

Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
W	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



			
	Polyester	Polyester Net	Polyester Disposable
Maat	Artikel	Artikel	Artikel
XS	277031	277032	277035
S	277041	277042	277045
M	277051	277052	277055
L	277041	277062	277065
XL	277051	277072	277075
2XL		277082	277085
Maximaal gewicht	255 kg	255 kg	255 kg

Functie

De Basic Comfort High draagband is ontworpen voor het tillen en verplaatsen van mensen met weinig of geen motorische functie van hun hoofd en bovenlichaam. De draagband ondersteunt het hele lichaam en het hoofd, de verstelbare hoofdsteun kan neergeklapt worden als hij niet nodig is. Het onderste deel van de draagband is gevoerd met opvulmateriaal voor extra ondersteuning rond de heupen. Aan de beenlussen zijn twee rode lussen toegevoegd, die kunnen worden gebruikt om de dijen van gebruikers in een neutrale positie te houden of om ruimte te maken voor hygiëne procedures tussen hun benen.

Dit model wordt gebruikt voor tillen van en naar een liggende positie (in een bed, op de vloer, etc.) en naar en van een zittende positie.

Deze draagband is niet alleen geschikt voor de meeste gebruikers, maar kan ook worden gebruikt voor tillen met

overlappende beenriemen onder beide benen bijvoorbeeld bij transfers van enkele of dubbele geamputeerde of wordt gebruikt om individueel / afzonderlijk steun te bieden aan patiënten die bijzonder gevoelig zijn voor druk.


De Basic Comfort High draagband gemaakt van netmateriaal kan gebruikt worden als badband.

Geschied voor

Optillen van personen met weinig controle over hun lichaam en hoofd. (met zwakte van lichaam en hoofd). Transfers van en naar een liggende of zittende positie en voor algemene transfers met extra ondersteuning aan het dijgebied.

Zorgtaak

- Bed naar stoel
- Bed naar douchestoel
- Bed naar poststoel
- Tillen vanaf de vloer
- Ondersteuning in de stoel
- Zitten: balans
- Zitten: reacties, reflexen
- Transfers naar mat, kanteltafel
- Aqua therapie

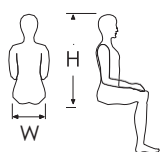

Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4 - 6	6 - 10	10 - 14							
45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



Custom



	
	Polyester Net
Maat	Artikel
XS	295031
S	295041
M	295051
L	295061
XL	295071
Maximaal gewicht	255 kg

Funcie

De Sit-On draagband is een universele draagband die is ontworpen voor het tillen en verplaatsen van gebruikers die op de draagband moeten blijven zitten. Het ondersteunt de dijen en de rug, maar laat de armen buiten de draagband. Doorlopend ontwerp uit één stuk zodat gebruikers op de draagband kunnen blijven zitten nadat de transfer is voltooid.

Geschikt voor


Personen die zittend vervoer nodig hebben en in de stoel op de draagband blijven zitten. Het is ideaal voor een rolstoel op maat of personen die vaak moeten worden getild en daarbij voldoende kracht in de armen hebben om tijdens de transfers mee te helpen.

Zorgtaak

- Bed naar stoel
- Bed naar rolstoel
- Tillen vanaf de vloer
- Transfer naar mat, kanteltafel

De draagband is ontworpen voor transfers van en naar zitpositie vanuit een bed of rolstoel, hij kan worden aangebracht terwijl de gebruiker in liggende positie is.



De Sit-On draagband is verkrijgbaar in verschillende maten en is gemaakt van een netmateriaal dat ademend is waardoor de lucht door het lichaam kan circuleren, waardoor het risico op warmte- en vochtvorming wordt verminderd.

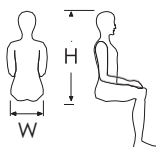

Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4 - 6	6 - 10	10 - 14							
45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

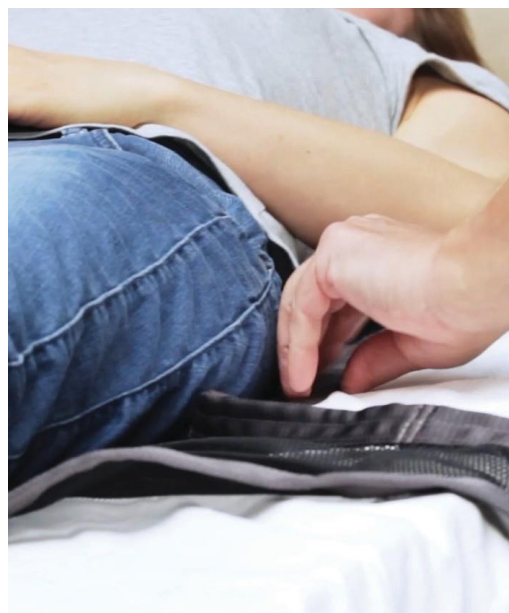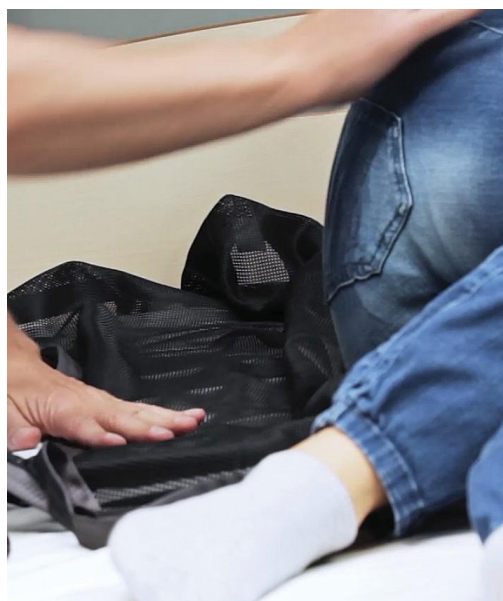

	
	Polyester Net
Maat	Artikel
XS	296031
S	296041
M	296051
L	296061
XL	296071
Maximal gewicht	255 kg

Functie

De Sit-On High draagband is ontworpen voor het tillen en verplaatsen van gebruikers die op de draagband moeten blijven zitten. Het ondersteunt de dijen, rug en hoofd, maar laat de armen buiten de draagband. Doorlopend ontwerp uit één stuk zodat gebruikers op de draagband kunnen blijven zitten nadat de transfer is voltooid.

De draagband is ontworpen voor transfers van en naar zitpositie vanuit een bed of rolstoel, hij wordt aangebracht terwijl de gebruiker in liggende positie is.


De Sit-On High draagband is verkrijgbaar in verschillende maten en is gemaakt van een netmateriaal dat ademend is waardoor de lucht door het lichaam kan circuleren, waardoor het risico op warmte- en vochtvorming wordt verminderd.

Geschikt voor

Personen die zittend vervoer nodig hebben en in de stoel op de draagband blijven zitten. Het is ideaal voor een rolstoel op maat of personen die vaak moeten worden getild en daarbij voldoende kracht in de armen hebben om tijdens de transfers mee te helpen

Zorgtaak


- Bed naar stoel
- Bed naar rolstoel
- Tillen vanaf de vloer
- Transfer naar mat, kantelafel

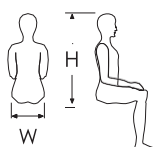

Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4 - 6	6 - 10	10 - 14							
45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

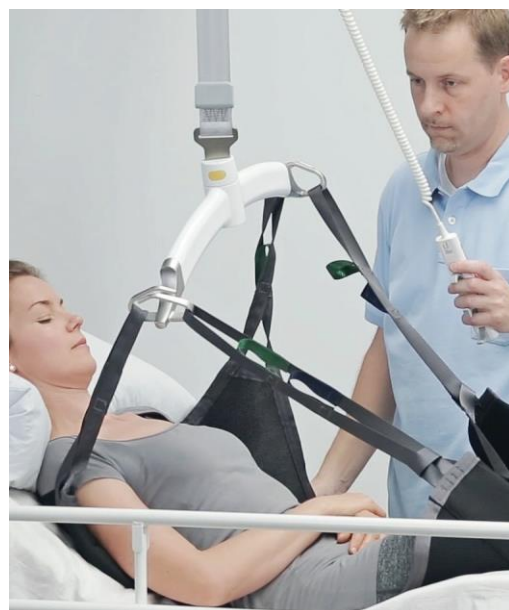

	
	Polyester Net
Maat	Artikel
XS	297031
S	297041
M	297051
L	297061
XL	297071
Maximaal gewicht	255 kg

Functie

De Sit-On II is ontworpen voor het tillen en verplaatsen van gebruikers die op de draagband moeten blijven zitten. Het ondersteunt de dijen en rug en is ontworpen om te voorkomen dat de dijen naar binnen draaien tijdens liften.

De draagband is bedoeld voor transfers van en naar zitpositie vanuit een bed of rolstoel, maar wordt aangebracht terwijl de gebruiker in liggende positie is. De draagband is geschikt om onder de gebruiker te blijven zitten.


De Sit-On II draagband is verkrijgbaar in verschillende maten en is gemaakt van een netmateriaal dat ademend is waardoor de lucht door het lichaam kan circuleren, waardoor het risico op warmte- en vochtvorming wordt verminderd.

Geschikt voor

Personen die lange tijd op de draagband blijven zitten vanwege het hoge gewicht of de aangepaste rolstoel.

Zorgtaak

- Bed naar stoel
- Bed naar rolstoel
- Tillen vanaf de vloer
- Transfer naar mat, kantelafel

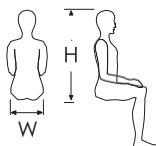

Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4 - 6	6 - 10	10 - 14							
45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

Sit-On High II



	
	Polyester Net
Maat	Artikel
XS	298031
S	298041
M	298051
L	298061
XL	298071
Maximaal gewicht	255 kg

Functie

De Sit-On High II is een draagband die is ontworpen voor het tillen en verplaatsen van gebruikers die op de draagband moeten blijven zitten. De draagband ondersteunt het hele lichaam en het hoofd, de verstelbare hoofdsteen kan neergeklapt worden als hij niet nodig is. De draagband ondersteunt de dijen, rug en hoofd en is ontworpen om te voorkomen dat de dijen naar binnen draaien tijdens het tillen. De draagband wordt gebruikt voor verplaatsen van en naar zitpositie vanuit een bed of rolstoel, maar wordt aangebracht terwijl de gebruiker in liggende positie is. De draagband is geschikt om onder de gebruiker te blijven zitten.


De Sit-On High II draagband is verkrijgbaar in verschillende maten en is gemaakt van een netmateriaal dat ademend is waardoor de lucht door het lichaam kan circuleren, waardoor het risico op warmte- en vochtvorming wordt verminderd.

Geschikt voor

Personen die lange tijd op de draagband blijven zitten vanwege het hoge gewicht of de aangepaste rolstoel.

Zorgtaak

- Bed naar stoel
- Bed naar rolstoel
- Tillen vanaf de vloer
- Transfer naar mat, kantelafel

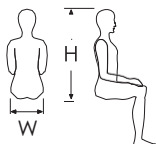

Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
W	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



	
	Polyester
Maat	Artikel
XS	290031
S	290041
M	290051
L	290061
XL	290071
Maximaal gewicht	255 kg

Functie

De Custom Amputee draagband is ontworpen voor het tillen en verplaatsen van mensen die een of beide benen boven het kniegewricht hebben geamputeerd, en voor het tillen van mensen die beide benen volledig hebben geamputeerd. Het Amputee model ondersteunt het hele lichaam tot en met de schouders, met extra ondersteuning rond het bekken.


De draagband kan worden gebruikt voor transfers vanuit een zittende of liggende positie, bijvoorbeeld vanaf een vloer, bed of rolstoel. Bij het tillen vanuit een liggende positie moet de Guldmann hoofdsteun worden gebruikt om ondersteuning te bieden aan personen met beperkte of geen hoofdbalans.

Geschikt voor

Personen met een enkel- of dubbelzijdige bovenbeenamputatie

Zorgtaak



- Zittende transfers
- Bed of stretcher naar stoel
- Bed of stretcher naar rolstoel
- Bed of stretcher naar douchestoel
- Tillen vanaf de vloer voor geamputeerden boven de knie

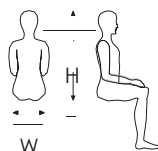

Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
W	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

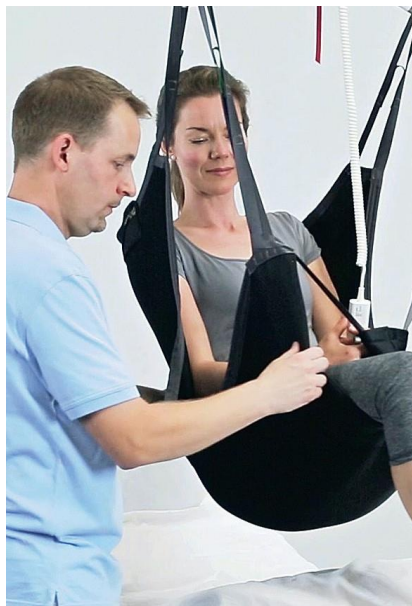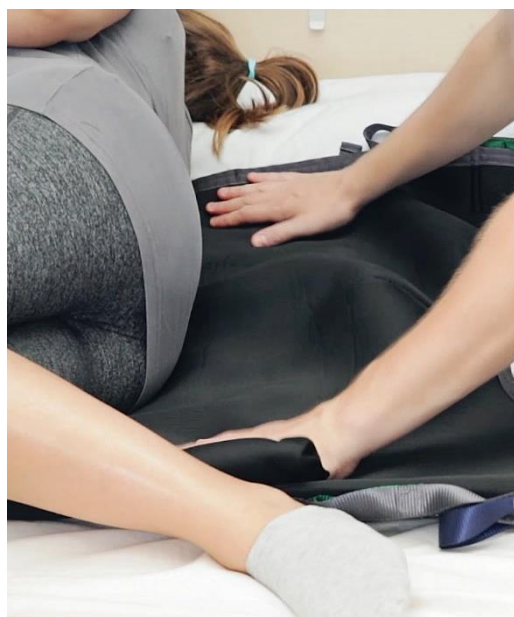

	
	Spacer Comfort
Maat	Artikel
XS	293031
S	293041
M	293051
L	293061
XL	293071
Maximaal gewicht	255 kg

Functie

De Sit-On Comfort is ontworpen voor het tillen en verplaatsen van gebruikers die op de draagband moeten blijven zitten. Het ondersteunt de dijen en rug en is ontworpen om te voorkomen dat de dijen naar binnen draaien tijdens liften.

De draagband is bedoeld voor verplaatsen van en naar zitpositie vanuit een bed of rolstoel, maar wordt aangebracht terwijl de gebruiker in liggende positie is. De draagband zorgt voor extra comfort tijdens het tillen en is geschikt om onder de gebruiker te blijven zitten.

Geschikt voor

Personen die langdurig op de draagband blijven vanwege het hoge gewicht of de aangepaste rolstoel. Het materiaal helpt bij het voorkomen van warmte ontwikkeling en kan worden gebruikt bij personen met een kwetsbare huid.

Zorgtaak

- Bed naar stoel
- Bed naar rolstoel
- Tillen vanaf de vloer
- Transfers naar mat, kanteltafel



De Sit-On Comfort is verkrijgbaar in verschillende maten en is gemaakt van spacer-polyester stof. Dit materiaal is duurzaam en gemakkelijk om mee te werken, biedt extra comfort en is ademend, waardoor de lucht om het lichaam kan circuleren, waardoor het risico op warmte- en vochtvorming wordt verminderd.

Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
W	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



	
	Spacer Comfort
Maat	Artikel
XS	294031
S	294041
M	294051
L	294061
XL	294071
Maximaal gewicht	255 kg

Funcie

De Sit-On Comfort High is een draagband die is ontworpen voor het tillen en verplaatsen van gebruikers die op de draagband moeten blijven zitten. De draagband ondersteunt het hele lichaam en het hoofd, de verstelbare hoofddeun kan neergeklapt worden als hij niet nodig is. De draagband ondersteunt de dijen, rug en hoofd en is ontworpen om te voorkomen dat de dijen naar binnen draaien tijdens het tillen.

Geschikt voor


Personen die langdurig op de draagband blijven vanwege het hoge gewicht of de aangepaste rolstoel. Het materiaal helpt bij het voorkomen van warmte ontwikkeling en kan worden gebruikt bij personen met een kwetsbare huid.

Zorgtaak

- Bed naar stoel
- Bed naar rolstoel
- Tillen vanaf de vloer
- Transfers naar mat, kantelafel

De draagband is bedoeld voor verplaatsen van en naar zitpositie vanuit een bed of rolstoel, maar wordt aangebracht terwijl de gebruiker in liggende positie is. De draagband zorgt voor extra comfort tijdens het tillen en is geschikt om onder de gebruiker te blijven zitten.

De Sit-On Comfort High draagband is verkrijgbaar in verschillende maten en is gemaakt van Spacer-schuim materiaal. Dit materiaal is duurzaam en gemakkelijk om mee te werken, biedt extra comfort en is ademend. De lucht circuleert om het lichaam, waardoor het risico op warmte- en vochtvorming wordt verminderd.

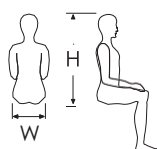

Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4 - 6	6 - 10	10 - 14							
45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



	
	Spacer Comfort
Maat	Artikel
XS	294131
S	294141
M	294151
L	294161
XL	294171
Maximaal gewicht	255 kg

Functie

De Sit-On Comfort High Hygië draagband is ontworpen met een open zitvlak om toiletbezoeken en andere hygiëneprocedures te vergemakkelijken.

De draagband ondersteunt de dijen, rug en hoofd en voorkomt dat de dijen tijdens het tillen naar binnen draaien. De verstelbare hoofdsteun kan naar wens worden gebruikt.

Geschikt voor


Transfer van bed naar toilet of posttoel. Het is geschikt om onder de gebruiker te laten in verband met toiletbezoeken. Het wordt NIET aanbevolen om de draagband op zijn plaats te laten onder gebruikers in rolstoelen vanwege het risico van drukproblemen rond het open zitvlak.

Zorgtaak

- Bed naar posttoel / toilet

De hygiëne draagband wordt gebruikt voor transfers van en naar zitpositie vanuit een bed of rolstoel, maar wordt aangebracht terwijl de gebruiker in liggende positie is.

De Sit-On Comfort High Hygië draagband is verkrijgbaar in verschillende maten en is gemaakt van Spacer-schuim materiaal. Dit materiaal is duurzaam en gemakkelijk om mee te werken, biedt extra comfort en is ademend, waardoor de lucht om het lichaam kan circuleren, waardoor het risico op warmte- en vochtvorming wordt verminderd.

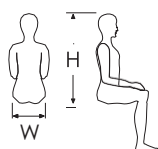

Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
W	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

Kids





Functie

Het Active Vest - Kids is een draagband om in te blijven staan en ondersteuning te bieden tijdens het lopen.

De draagband voor kinderen ondersteunt het bovenlichaam en het bekkengebied van het kind en helpt bij, lopen en staan, evenals bij balanstraining en spelen. Helpt vertrouwen en veiligheid te bieden voor zowel kind als verzorger.

Geschied voor

Kinderen met een redelijke hoofdbalans, maar met beperkte sta-balans en rompbalans. Het kind moet gewicht op de benen kunnen dragen. Werkt goed voor ondersteuning bij rechtopstaande houdingen, staande balansoefeningen en zelfstandig lopen.

Zorgtaak

- Overgangshoudingen
- Staande balans
- Staan: reacties, reflexen
- Beschermende reacties
- Gewichtsverdeling
- Looptraining
- Trappen, treden, stoepranden
- Gedeeltelijke belasting
- Door lichaamsgewicht ondersteunde loopbandtraining
- Spelen

	
	Polyester
Maat	Artikel
2-4	2831000
4-6	283101
6-10	283111
10-16	283121
Maximaal gewicht	100 kg



W2

W2

Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

Kids	Kids	Kids	Kids
2 - 4	4 - 6	6 - 10	10 - 16
46 - 54	50 - 65	51 - 72	56 - 75



		
	Polyester	Polyester Net
Maat	Artikel	Artikel
4-6	270001	270103
6-10	270011	270113
10-14	270021	270123
Maximaal gewicht	255 kg	255 kg

Functie

De Basic Basic kids draagband is een algemene draagband die geschikt is voor een grote verscheidenheid aan gebruikers en transfers. De draagband ondersteunt het hele lichaam, behalve het hoofd. De interne riem zorgt voor extra ondersteuning en veiligheid.

Deze draagband voor kinderen is ideaal voor het tillen, verplaatsen en positioneren van kinderen die hun hoofd kunnen beheersen, maar minder controle hebben over hun bovenlichaam. Het kan worden gebruikt voor de meeste soorten transfers en voor verplaatsingen van en naar een zittende en liggende positie - bijvoorbeeld vanuit een bed of rolstoel - waar het niet nodig is om de gebruiker te helpen zijn / haar hoofd te ondersteunen.


De Basic Basic kids draagband is verkrijgbaar in verschillende maten en twee verschillende materialen. De netversie kan ook worden gebruikt als badmat. Beide materialen zijn zeer duurzaam en gemakkelijk om mee te werken, waardoor de lucht om het lichaam kan circuleren en de gebruiker uitstekend comfort en ondersteuning biedt

Geschikt voor

Kinderen met hoofdbalans maar die ondersteuning nodig hebben bij zittende transfers.

Zorgtaak

- Bed naar stoel
- Bed naar douchestoel
- Bed naar poststoel
- Tillen vanaf de vloer
- Ondersteuning bij zitten
- Zitten:: balans
- Zitten: reactie, reflexen
- Transfers naar mat, kantelafel
- Transfers in/uit de auto
- Toegang voor perineale hygiëne

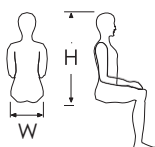

Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
W	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



			
	Polyester	Polyester Net	Polypropylene Disposable
Maat	Artikel	Artikel	Artikel
4-6	272001	272103	
6-10	272011	272113	283611
10-14	272021	272123	
Maximaal gewicht	255 kg	255 kg	205 kg

Functie

De Basic High kids draagband is een algemene draagband die geschikt is voor een grote verscheidenheid aan gebruikers en transfers. De draagband ondersteunt het hele lichaam inclusief het hoofd. De interne riem zorgt voor extra ondersteuning en veiligheid.

Deze draagband voor kinderen is ideaal voor het tillen, verplaatsen en positioneren van kinderen met verminderde controle over hun hoofd, boven- en onderlichaam. Het kan zowel zittend als liggend worden gebruikt - bijvoorbeeld vanaf de vloer, bed of rolstoel.

Geschikt voor

Kinderen met weinig controle over hun hoofd en lichaam en die ondersteuning nodig hebben bij zittende transfers.

Zorgtaak

- Bed naar stoel
- Bed naar douchestoel
- Bed naar poststoel
- Tillen vanaf de vloer
- Ondersteuning bij zitten
- Zitten: balans
- Zitten: reactie, reflex
- Transfers naar mat, kantelafel
- Transfers in/uit de auto
- Aqua therapie



De Basic High kids draagband is verkrijgbaar in verschillende maten en verschillende materialen. De netversie kan ook worden gebruikt als badmat. Alle materialen zijn zeer duurzaam en gemakkelijk om mee te werken, waardoor de lucht rond het lichaam kan circuleren en de gebruiker uitstekend comfort en ondersteuning biedt.


Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4 - 6	6 - 10	10 - 14							
45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



	
	Polyester Net
Mat	Artikel
4-6	295001
6-10	295011
Maximaal gewicht	255 kg

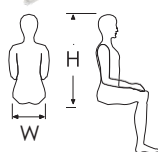

Functie

De Sit-On kids draagband is ontworpen voor het tillen en verplaatsen van kinderen die op de draagband moeten blijven zitten. Het ondersteunt de dijen en de rug, maar laat de armen buiten de draagband. Doorlopend ontwerp uit één stuk zodat kinderen op de draagband kunnen zitten nadat de transfer is voltooid.

De kinderdraagband is gemaakt voor transfers van en naar zitpositie vanuit een bed of rolstoel. Het wordt toegepast terwijl het kind in liggende positie is en kan onder het kind blijven liggen.

De Sit-On High – Kids is gemaakt van een netmateriaal wat luchtdoorlatend is. Dit zorgt voor minder warmte en transpiratie van het lichaam.

Geschikt voor

Kinderen die een zittende transfer nodig hebben en die in de stoel op de draagband blijven zitten. Het is ideaal voor een rolstoel op maat of voor kinderen die vaak moeten worden opgetild en daarbij voldoende kracht in de armen hebben om tijdens de transfers mee te helpen.

Zorgtaak

- Bed naar stoel
- Bed naar rolstoel
- Tillen vanaf de vloer
- Transfer naar mat, kanteettafel

Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

alle afmetingen in cm

Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4 - 6	6 - 10	10 - 14							
45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



	
	Polyester Net
Size	Item no .
4-6	296001
6-10	296011
Max lifting capacity	255 kg

Functie

De Sit-On kids draagband is ontworpen voor het tillen en verplaatsen van kinderen die op de draagband moeten blijven zitten. Het ondersteunt de dijen de rug en hoofd, maar laat de armen buiten de draagband. Dit ontwerp is uit één stuk zodat kinderen op de draagband kunnen zitten nadat de transfer is voltooid.

De kinderdraagband is ontworpen voor het tillen van en naar een zittende positie van het bed of de rolstoel. Het wordt toegepast terwijl het kind in een liggende positie is en kan onder het kind blijven liggen terwijl het zit.


De Sit-On High – Kids is gemaakt van een netmateriaal wat ervoor zorgt dat dit luchtdoorlatend, dit zorgt voor minder warmte en transpiratie

Geschikt voor:

Kinderen die op de draagband blijven zitten voor een langere periode vanwege het hoge gewicht of speciale rolstoel

Zorgtaak

- Bed naar stoel
- Bed naar rolstoel
- Tillen vanaf de vloer
- Verplaatsen naar mat, kanteltafel

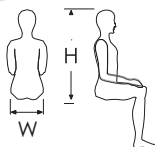

Guidelines on choosing the size of a sling

All dimensions in cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
W	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



	
	Polyester Net
Maat	Item no .
4-6	297001
6-10	297011
Max tilcapaciteit	255 kg

Functie

De Sit-On II kids draagband is ontworpen voor het tillen en verplaatsen van kinderen die op de draagband moeten blijven zitten. Het ondersteunt de dijen de rug en is zorgt ervoor dat de dijen niet naar binnen draaien tijdens het tillen.

Deze draagband is ontworpen voor het tillen van en naar een zittende positie van het bed of de rolstoel. Het wordt toegepast terwijl het kind in een liggende positie is en kan onder het kind blijven liggen terwijl het zit.


Deze kinder draagband is gemaakt van een netmateriaal wat ervoor zorgt dat dit luchtdoorlatend is, dit zorgt voor minder warmte en transpiratie.

Geschikt voor

Kinderen die op de draagband blijven zitten voor een langere periode vanwege het hoge gewicht of speciale rolstoel..

Zorgtaak

- Bed naar stoel
- Bed naar rolstoel
- Tillen vanaf de vloer
- Transfer naar mat of kantelafel

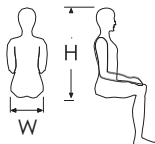

Guidelines on choosing the size of a sling

All dimensions in cm

Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H 45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
W 25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



	
	Polyester Net
Maat	Item no .
4-6	298001
6-10	298011
Max til capaciteit	255 kg

Functie

De Sit-On high II kids draagband is ontworpen voor het tillen en verplaatsen van kinderen die op de draagband moeten blijven zitten. De hoofd ondersteuning kan worden aangepast zoals gewenst en weg geklapt worden wanneer de gebruiker in de rolstoel zit.. De draagband ondersteunt de dijen, rug en hoofd en zorgt ervoor dat de dijen niet draaien tijdens het tillen..

Geschied voor


Kinderen die op de draagband blijven zitten voor een langere periode vanwege het hoge gewicht of speciale rolstoel.

Zorgtaak

- Bed naar stoel
- Bed naar rolstoel
- Tillen vanaf de vloer
- Transfer naar mat of kantelafel

Deze draagband is ontworpen voor het tillen van en naar een zittende positie van het bed of de rolstoel. Het wordt toegepast terwijl het kind in een liggende positie is en kan onder het kind blijven liggen terwijl het zit.

Deze kinder-draagband is gemaakt van een netmateriaal wat ervoor zorgt dat dit luchtdoorlatend is, dit zorgt voor minder warmte en transpiratie.

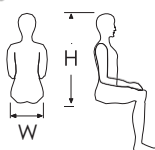

Guidelines on choosing the size of a sling

All dimensions in cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
W	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



	
	Spacer Comfort
Maat	Item no .
4-6	293001
6-10	293011
Max til capaciteit	255 kg

Function

The Sit-On Comfort draagband is ontworpen voor het tillen en verplaatsen van kinderen die op de draagband moeten blijven zitten. De hoofd ondersteuning kan worden aangepast zoals gewenst en weg geklapt worden wanneer de gebruiker in de rolstoel zit.. De draagband ondersteunt de dijen, rug en hoofd en zorgt ervoor dat de dijen niet draaien tijdens het tillen

Deze draagband is ontworpen voor het tillen van en naar een zittende positie van het bed of de rolstoel. Het wordt toegepast terwijl het kind in een liggende positie is en kan onder het kind blijven liggen terwijl het zit.


The Sit-On Comfort – Kids model is beschikbaar in diverse maten en is gemaakt van spacer materiaal . Duurzaam en makkelijk om mee te werken.dit materiaal geeft extra comfort en is luchtdoorlatend zodat de lucht kan circuleren rond het lichaam, zodat het warmte en transpiratie reduceert..

Geschikt voor

Kinderen die een lange tijd op de draagband moeten zitten in bijvoorbeeld een speciale rolstoel. Materiaal zorgt ervoor dat het niet te warm wordt zodat ook kinderen met een fragiele huid deze kunnen gebruiken..

Zorg taak

- Bed naar stoel
- Bed naar rolstoel
- Tillen vanaf de vloer
- Transfers naar mat of kantel tafel

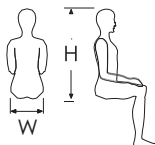

Guidelines on choosing the size of a sling

All dimensions in cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
W	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

Sit-On Comfort High – Kids



	
	Spacer Comfort
Maat	Item no .
4-6	294001
6-10	294011
Max tilcapaciteit	255 kg

Functie

De Sit-On Comfort High – Kids draagband is ontworpen voor het tillen en verplaatsen van kinderen die op de draagband moeten blijven zitten. Het ondersteunt de dijen de rug en hoofd, en zorgt ervoor dat de dijen niet naar binnen draaien tijdens het tillen... De hoofd ondersteuning kan worden aangepast zoals gewenst en weg geklapt worden wanneer de gebruiker in de rolstoel zit

Deze kinder draagband is ontworpen voor het tillen van en naar een zittende positie van het bed of de rolstoel. Het wordt toegepast terwijl het kind in een liggende positie is en kan onder het kind blijven liggen terwijl het zit in de rolstoel zit.


De Sit-On Comfort high – Kids model is beschikbaar in diverse maten en is gemaakt van spacer materiaal . Duurzaam en makkelijk om mee te werken. Dit materiaal geeft extra comfort en is luchtdoorlatend zodat de lucht kan circuleren rond het lichaam, zodat het warmte en transpiratie reduceert.

Geschikt voor

Kinderen die een lange tijd op de draagband moeten zitten in bijvoorbeeld een speciale rolstoel. Materiaal zorgt ervoor dat het niet te warm wordt zodat ook kinderen met een fragiele huid deze kunnen gebruiken..

Zorgtaak


- Bed naar stoel
- Bed naar rolstoel
- Tillen vanaf de vloer
- Transfers naar mat, kantelafel

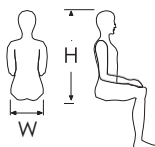


Guidelines on choosing the size of a sling

All dimensions in cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
W	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

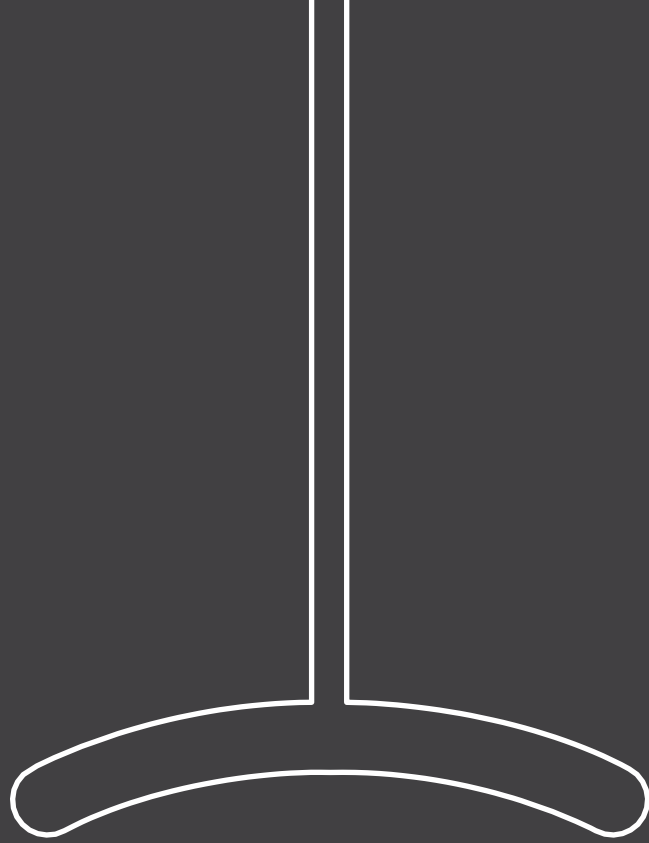

Bariatric

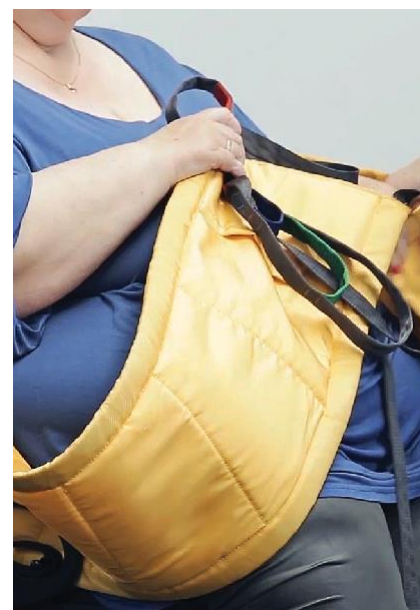

		
	Polyester	Polyester/Cotton Disposale
Maat	Item no .	Item no .
L/XL		283672
XL/2XL		283682
2XL/3XL		283692
3XL	2720913	
4XL	2720914	
5XL	2720916	
Max. tilcapaciteit	500 kg	350 kg

Functie

De Basic High Bariatric draagband is een algemene draagband geschikt voor bariatrische patiënten. De draagband ondersteunt het hele lichaam incl het hoofd.

De draagband is een voortzetting op de Basic High van de ABC groep en het gebruik van deze band is voor Bariatrische personen. Naast een verhoogd tilvermogen heeft de bariatrische draagband langere en bredere beenbanden en heeft bredere afmetingen voor het boven- en onderlichaam. Naast het positioneringszakje op de rug is er ook een positioneringszakje aan de binnen kant van de beenband die met behulp van een balein het makkelijk maakt om de draagband goed aan te leggen.

Geschikt voor

Tillen, verplaatsen en positioneren van personen die weinig controle hebben over het hoofd, boven- en onderlichaam. Het kan gebruikt worden voor een zittende of liggende positie, bijv van de vloer bed of rolstoel. De Basic High Bariatric is ontworpen als universele draagband voor de meest voorkomende tilhandelingen.

Zorgtaak

- Bed naar stoel
- Bed naar douche stoel
- Bed po
- Tillen vanaf de vloer
- Ondersteuning voor het zitten
- Zitten: balans
- Zitten: reacties, reflex
- Transfers naar mat of kantelafel
- Transfers in/uit de auto
- Toegang voor hygiënische handelingen





	
	Polyester
Maat	Item no .
One size	283100
Max tilcapaciteit	500 kg

Functie

De Gait Trainer – Bariatric is een draagband om te helpen met opstaan en geeft ondersteuning bij het lopen.

De draagband ziet er uit als een soort broek om de gebruiker te ondersteunen rond het bekken en de maagstreek. Het ontwerp voorkomt het “samenknijpen” van de de maag en zorgt er ook voor dat de patiënt niet wegglipt uit de draagband. Het is bedoelt om de patiënt te ondersteunen bij het staan met een optimaal comfort.

Geschikt voor



Looptraining en vroege mobilisatie van personen met een hoger gewicht. Het geeft het vertrouwen een boost en zorgt voor veiligheid voor gebruiker en verzorger bij een balanstreining, zitten, staan en lopen.

Zorgtaak

- Overgangshoudingen
- Staand: balans
- Staand: reacties, reflex
- Bescherming
- Gewichtsverplaatsing
- Looptraining
- Traplopen, opstap , afstap
- Gedeeltelijk belasten
- Door lichaamsgewicht ondersteunende loopbandtraining



Pannus Support

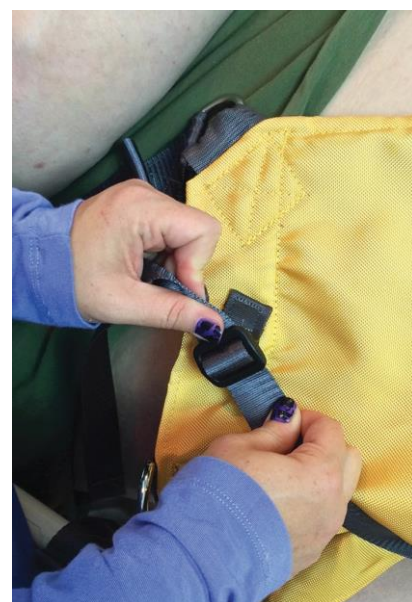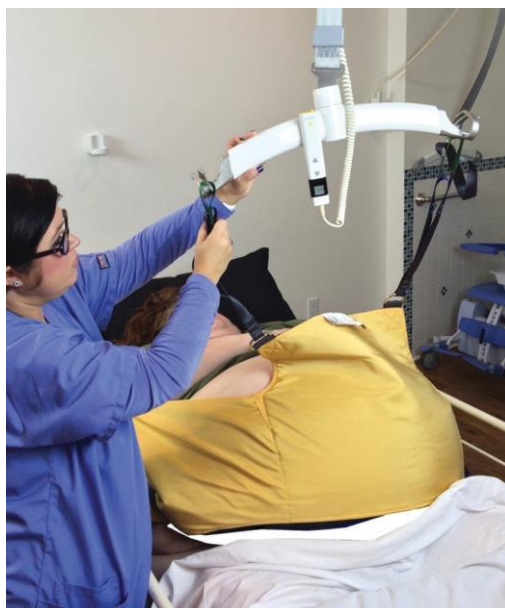

Functie

De Pannus Support is een ondersteunende draagband die gebruikt wordt met een plafondlift voor hulp bij persoonlijke hygiëne en huidverzorgings handelingen. De Pannus Support helpt met ondersteunen van de buik zo dat het eenvoudig is te onderzoeken, behandelen en verzorgen van de huid van de patiënt.

De draagband is ontworpen om er voor te zorgen dat de verzorger niet zwaar handmatig de buik hoeft te tillen ,zodat de verzorger geen zware lichamelijke kracht hoeft uit te oefenen. Er is ook minder personeel nodig om deze procedure uit te voeren.

Geschikt voor


Hygiëne taken bij zware patiënten. Houd en ondersteunt de buik in een liggende positie.

Zorgtaak

- Persoonlijke hygiëne
- Huid verzorging
- Wond verzorging



	
	Polyester
Maat	Item no .
One size	28660
Max til capaciteit	255 kg

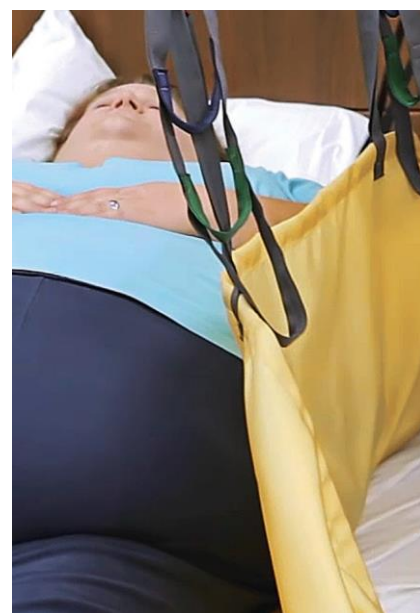

	
	Polyester
Maat	Item no .
One size Lengte: 1900 mm Breedte: 1630 mm	284656
Max til capaciteit	500 kg

Functie

De Bariatric Repositioning draagband is ideaal om te draaien, transferen repositioneren van een patiënt met een grotere omvang in bed.


De draagband ondersteunt het hele lichaam incl het hoofd, en tilt de patiënt in een liggende positie van en naar het bed, stretcher of vloer.

Geschikt voor

Verschoenen van bed, draaien van de patiënt om hygiënische taken uit te voeren of om de patiënt te verleggen in

- Repositioneren – bed opschudden
- Draaien of omrollen
- Röntgen apparaat voor bij het bed
- CT Scan
- MRI
- Liggende transfer
- Tillen vanaf de vloer
- Transfer van kanteltafel



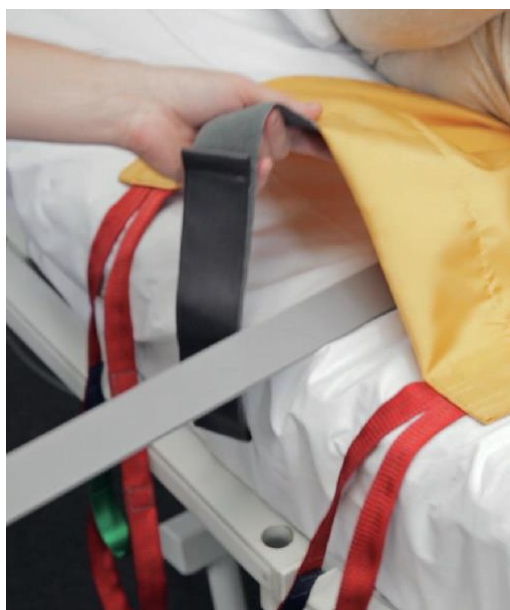

	
	Polyester
Maat	Item no .
One size	28760
Max til capaciteit	500 kg

Functie

De Twin Turner Bariatric wordt gebruikt samen met de plafondlift, om de patiënt te draaien op de zijde zonder enige kracht van de verzorger.

De draagband maakt het mogelijk om de patiënt van de ene zijde op de andere te draaien zonder de draagband onder de patiënt te verwijderen. Het kan helpen om een andere draagband te passen zonder handmatig de patiënt te verplaatsen of draaien. De draai draagband heeft een relatief smal oppervlak, wat ruimte geeft om te onderzoeken, verzorgen en onderhouden van de huid van de patiënt.

Deze versie van de Twin Turner is ontworpen voor bariatrische patiënten

Geschikt voor


Draaien en positioneren van patiënten naar een positie in zijlig; elimineert de gevaren voor verzorgers van lang in eenzelfde houding staan en geeft comfort bij hygiënische handelingen, wondverzorging en behandeling van de patiënt.

Zorgtaak

- Initiëren van de draaibeweging
- Draaien op de zijde
- Toegang voor hygiëne
- Inspectie van de huid
- Zijligging functionele taken
- Therapeutische handelingen



Draaien en handelingen

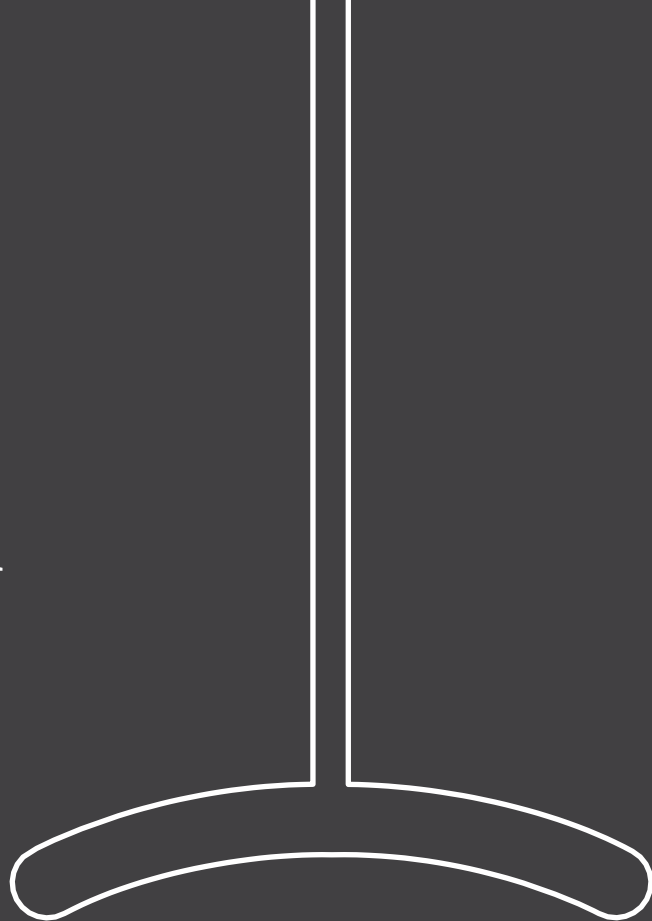

Leg sling



Functie

De beenband ondersteunt en tilt ledematen, zonder dat dit veel kracht kost van de verzorger.

De beenband wordt gebruikt om armen en benen te tillen en het ondersteunen van ledematen om wonden te verzorgen, verband aan te leggen of voor hygiënische doeleinden. Ondersteunen van benen bij het aanbrengen van therapeutische sokken of voor ondersteuning/tillen van het been.

Geschikt voor

Situaties waarbij de armen of benen getild moeten worden of in een bepaalde positie moeten blijven.

Zorgtaak

- Ledematen tillen / hoog houden/ positioneren
- Diabetische voetverzorging
- Liften van ledematen

		
	Polyester	Polypropylene Disposable
Maat	Item no .	Item no .
One size	28650	286501
Max tilcapaciteit	255 kg	205 kg



Multi Support



Functie

The Multi Support draagband, ondersteunt en tilt ledematen, zonder onnodige kracht van de verzorger.

De draagband is gemaakt om specifieke delen van het lichaam te tillen of ondersteunen, zoals de romp, bekken, armen of benen. Therapeutische procedures en taken kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld, het plaatsen van wiggers onder de patiënt, het plaatsen van een röntgencassette . ondersteunen van de benen om bijv. Wonden te verzorgen, verband aanleggen of hygiëne handelingen. Het kan ook gebruikt worden voor vroege mobilisatie.

Geschikt voor

Situaties waarbij delen van het lichaam getild of ondersteund moeten worden.


Zorgtaak

- Tillen / vasthouden / positioneren van specifieke delen van het lichaam
- Toegang voor perineale hygiëne
- Tot stand brengen van houdingen
- Positioneren op de operatietafel
- Revalidatie- en trainingsdoeleinden

		
	Polyester	Polyester Disposable
Maat	Item no .	Item no .
One size	28467	284223
Max til capaciteit	255 kg	255 kg



OK Sling – Bovenlichaam

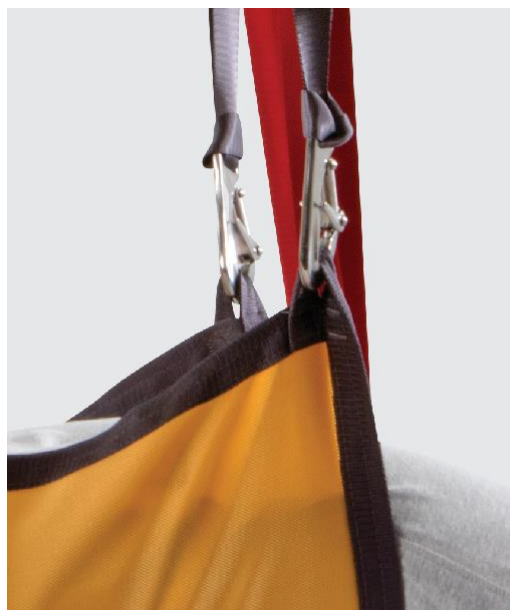

	
	Polyester
Maat	Item no .
Medium	284851
Large	284861
Tilriem incl karabijnhaak	284801
Max til capaciteit	255 kg

Functie

De OK draagband wordt gebruikt in combinatie met de Guldmann Cross Hanger (250 kg) om bovenlichaam van de patiënt in een horizontale positie op de OK-tafel te plaatsen.

De lengte en het ontwerp van de draagband maakt deze erg handig voor operaties aan het onderste gedeelte van het lichaam, zoals bijv. gynaecologische zorghandelingen.

De OK draagband wordt gebruikt met zes tilriemen met karabijnhaak. De tilriemen met karabijnhaak kunnen worden gebruikt voor diverse OK draagbanden. Ongeacht welke maat. De tilriemen kunnen makkelijk worden verwijderd van de draagband, zowel voor als na het verplaatsen van de patiënt.

Het gebruik van de OK draagband met een plafondlift voorkomt wrijving van de huid en schuren aan het weefsel van de patiënt. De OK draagband voorkomt ook onnodige kracht van het personeel en zorgt voor grotere veiligheid van de patiënt.

Geschikt voor

Horizontaal tillen en verplaatsen tussen de operatietafel en de stretcher of bed. Dit kan met 2 personen.

Zorg taak

- Horizontaal tillen /verplaatsen
- Positioneren / bovenlichaam omhoog houden
- Operatieve procedures



Positioning sling



		Polyester Disposable
Maat	Item no .	
One size	284225	Prone positioning package
One size	284226	Side positioning sling
Max tilcapaciteit	255 kg	

Functie

De Positioning draagband is een oplossing om patiënten te draaien. Het is ontworpen om het makkelijk te maken om de patiënt te draaien van rug- naar buiklig en vice versa. Deze procedure wordt vaak gedaan bij een operatie aan de wervelkolom of soortgelijke procedures.

De draagband voorkomt wrijving aan de huid en weefsel van de patiënt.

Het gebruik van de Positioning draagband verbetert de werkomgeving en zorgt ervoor dat er minder medewerkers nodig zijn voor de procedure.

Het gehele OK pakket voor rug- naar builgging en vice versa bestaat uit:

- 2 x Positioning draagband
- 2 x Multi Support
- 1 x Veiligheidsband

Geschikt voor


Ideaal voor onderzoek en operatie bij afhankelijke of verdoofde patiënten bij een zijligging of buik/lig positie op een smal oppervlak,

Zorgtaak

- Zijligging
- Buikligging
- Bovenlichaam tillen
- Tillen van ledematen
- Tillen van het bekken
- Tillen van benen na verdoving van de wervelkolom



Repositioningsling

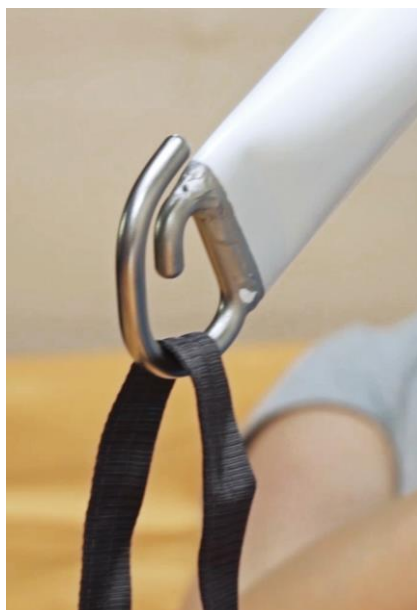

			
	Polyester	Polyester Net	Polyester Disposale
Maat	Item no .	Item no .	Item no .
Standard: 1830 mm	28465	284658	284655
Short: 1350 mm	284653		
Long: 2130 mm		284651	
Max tilcapaciteit	500 kg	500 kg	500 kg

Functie

De Repositioning draagband is ideaal om de patiënt te draaien, horizontaal te verplaatsen en te verleggen in bed.

De draagband draagt het hele lichaam incl. het hoofd en tilt de patiënt in een liggende houding van bed naar ander bed, stretcher of vloer. Het wordt vaak gebruikt bij het wisselen van bedlinnen, het wassen van de patiënt of om de patiënt te verleggen

De draagband kan onder de patiënt blijven liggen, klaar voor gebruik voor hygiëne doeleinden .


Geschied voor

Draaien naar zijlig, hogerop/ zijwaarts verplaatsen van patiënt in bed, liggende transfers naar bed of stretcher.

Zorgtaak

- Verplaatsen in bed (hogerop verplaatsen)
- Stabiele zijligging, hygiëne doeleinden
- Plaatsen van rontgenplaat
- CT Scan
- MRI
- Horizontale zijwaartse transfer naar een ander bed, stretcher
- Tillen vanaf de vloer



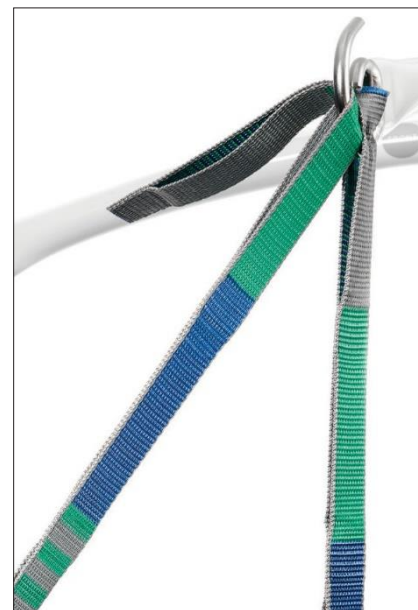

Platte lussen

	
	TENCEL® Antibacterieel
Maat	Item no .
Standard: 2130 mm	284657
Max tilcapaciteit	375 kg

Functie

De Repositioning draagband gemaakt van TENCEL® materiaal is ideaal om de patiënt te draaien, verplaatsen en verleggen in bed..

De draagband ondersteunt het hele lichaam incl. het hoofd, en tilt de patiënt in een liggende positie naar en van het bed, stretcher of vloer . Deze wordt vaak gebruikt bij het verschonen van het bed, de patiënt te draaien voor hygiëne doeleinden of om de patiënt te verleggen..

Deze repositioning draagband is gemaakt van een mix van polyester en TENCEL®. TENCEL® is een organisch materiaal met belangrijke anti-bacteriële, en temperatuur regulerende kenmerken . De speciale TENCEL® vezels zijn ook bijzonder zacht en geven extra comfort bij patiënten met bijzonder gevoelige huid.

De draagband is bedoeld om onder de patiënt te laten liggen klaar om zorgtaken uit te voeren.


Geschikt voor

Draaien naar zijlig, hogerop/ zijwaarts verplaatsen van patiënt in bed, liggende transfers naar bed of stretcher.

Zorgtaak

- Verplaatsen in bed (hogerop verplaatsen)
- Stabiele zijligging en huygiëne doeleinden
- Plaatsen van röntgen plaat
- CT Scan
- MRI
- Horizontale zijwaartse transfer naar ander bed of stretcher
- Tillen vanaf de vloer



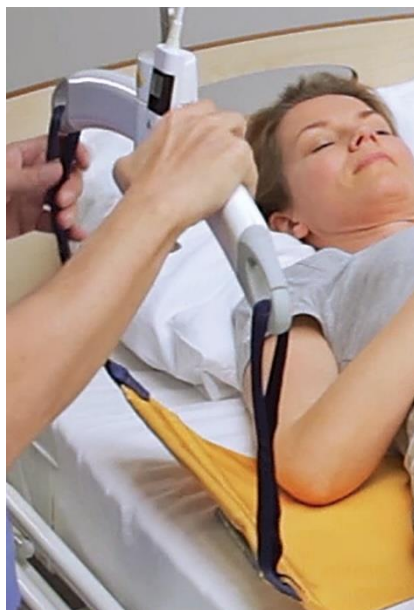

	
	Polyester
Maat	Item no .
Een maat	28700
Max til capaciteit	255 kg

Functie

De Turner draagband wordt gebruikt om de patiënt op de zij te leggen zonder te veel fysieke belasting voor de verzorger.

De draagband maakt het mogelijk om de de patiënt op de zij te draaien. Het kan tevens gebruikt worden om een andere band aan te leggen zonder handmatig de patiënt te draaien of te verplaatsen. Het wordt ook gebruikt om de patiënt te wisselen van de ene zijde op de andere om drukplekken te voorkomen bij langere lig periodes.


Geschikt voor

Het plaatsen van een draagband zonder de patiënt handmatig te draaien of te verplaatsen . Het smalle oppervlak geeft de mogelijkheid om de huid van de patiënt te kunnen controleren , behandelen of verzorgen.

Zorgtaak

- Draaien naar zijlig
- Toegang voor hygiëne doeleinden
- Huid inspectie
- Verzorgen/ behandelen van de huis
- Aanbrengen van een draagband
- Therapeutische oefeningen



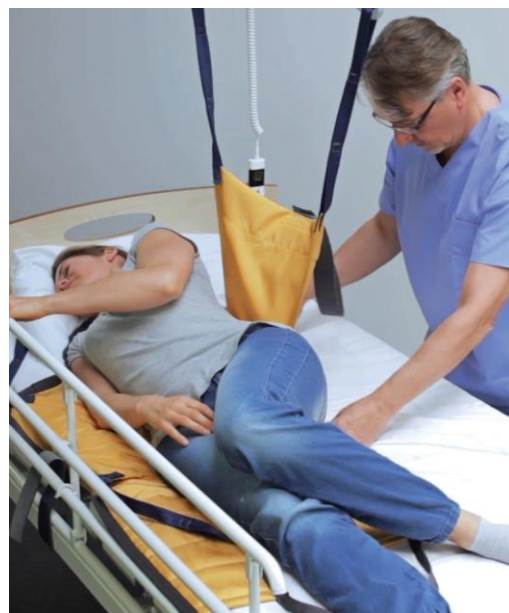

		
	Polyester	Polypropylene Disposable
Maat	Item no .	Item no .
Standard	28750	287501
Large	28751	287511
Max tilcapaciteit	255 kg	205 kg

Functie

De Twin Turner wordt gebruikt om de patiënt te draaien op de zij zonder teveel onnodige belasting voor de verzorgende. .

De draagband maakt het mogelijk om de patiënt van de ene op de andere zij te draaien zonder de draagband te verwijderen. Het kan je helpen om een ander draagband aan te leggen zonder de patiënt handmatig te draaien of te verplaatsen. De draaiende draagband heeft een relatief smal oppervlak, waardoor onderzoek, verzorging en behandeling van de huid makkelijk is uit te voeren.

Geschikt voor


Draaien van een patiënt naar zijlig: neemt moeilijkheden weg voor de verzorgster om de patiënt comfortabel te kunnen wassen, de huid te inspecteren te behandelen. Helpt bij het verwisselen van het beddengoed.

Zorgtaak

- Draai naar zijlig
- Toegang voor hygiëne doeleinden
- Huidinspectie
- Verzorgen/behandelen van de huid
- Aanbrengen van een draagband
- Therapeutische oefeningen



ABC draagbanden – Kenmerken

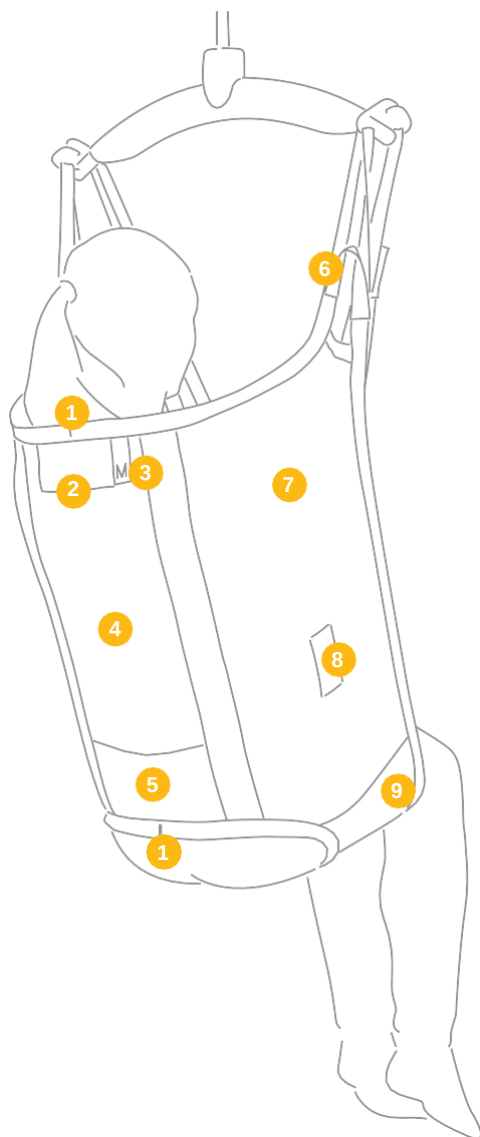

1. Midden van de draagband

2. Informatie-label

Geeft aan wat de verzorger moet weten

3. Label met maatvoering

Maakt het makkelijk en eenvoudig om de juiste maat van de band te vinden

4. Zacht gedeelte aan de rugzijde

Voor extra comfort op modellen met een smal rug oppervlak.

5. Positie zakje

Alle Basic draagbanden zijn voorzien van een zakje om gemakkelijk de band op de juiste plaats te krijgen.

6. Gekleurde lussen

De gekleurde lussen zorgen voor symmetrie bij de tilhandeling.

7. Materiaal

Vuil afstotend, sterk en elastisch polyester.

8. Extra banden

Het is mogelijk extra banden te gebruiken.

9. Zacht gedeelte

Alle draagbanden met afzonderlijke beenondersteuning hebben zachte polstering bij de benen.
Makkelijker aan te brengen – zacht in gebruik

Materiaal

						
Polyester	Polyester gaas	Spacer Comfort	Polyester Disposable	Polypropylene Disposable	Polyester/Cotton Disposable bariatric	TENCEL® Antibacterieel

Wasvoorschriften

			
Normaal wassen op aangegeven temperatuur.	Niet bleken	Drogen op lage temperatuur (= max 50 graden)	Niet strijken

Platte lussen

Draagband met platte lussen technologie. Hier wordt gebruik gemaakt van een slimme en innovatieve weeftechniek zodat de hele draagband in één geheel wordt geproduceerd. Het vereenvoudigde design bestaat uit één strakke gladde band zonder extra toegevoegde lussen. Een kleur zorgt ervoor dat de draagband makkelijk op de juiste plek aan het juk kan worden gehangen.



Standaard draagband lussen

Standaard draagband lussen ontworpen met gekleurde lussen om eenvoudig en intuïtief mee te kunnen werken. De gekleurde lussen maakt het mogelijk om eenvoudig te communiceren wanneer er meerdere verzorgers samenwerken met het tillen, verplaatsen of mobiliseren van een patiënt. De standaard draagband lussen worden op vele draagbanden van Guldmann gebruikt.



Meetlint voor de Guldmann draagbanden— om de maat makkelijker te kiezen

Het meetlint is dubbelzijdig en meet de breedte of de hoogte.



Breedte

Meet de breedte van de heupen van de gebruiker—en vind de maat van de draagband
Meet een rechte lijn—en **niet** om de heupen in een bocht.




Item no
559997



Hoogte

Meet de zithoogte van de gebruiker

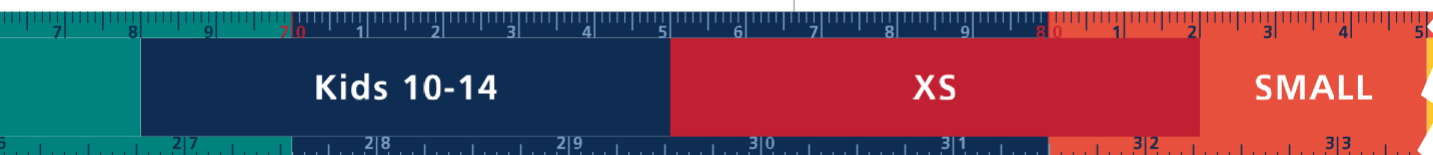

Disposable draagbanden



Voor efficiënt en hygiënisch tillen

Guldmann disposable draagbanden zijn uitermate geschikt wanneer men met extra hygiëne rekening moet houden, in geval van infectie risico's. De draagbanden zijn bedoeld om te gebruiken voor 1 patiënt gedurende een korte periode of kort verblijf. Gooi de band direct weg nadat de patiënt is ontslagen, of direct nadat de band nat of vies is geworden.

Alle draagbanden hebben een label met "DO NOT WASH"(niet wassen), dit label krijgt een waarschuwing "DO NOT USE"(niet gerbuiken) wanneer de band in contact komt met water.(als extra veiligheids maatregel). Disposable banden worden gebruikt wanneer de hygiëne heel belangrijk is en om het gevaar van kruisinfectie te minimaliseren.


Ergocare heeft een groot aanbod op gebied van disposable banden voor zowel volwassenen als kinderen en voor gebruik in bariatrische zorg omgevingen..

Voor meer informatie www.ergocare.nl



Active Micro	Active Micro Plus	Active Trainer	Gait Trainer	Basic Basic	Basic Basic – net
					
Basic Low	Basic Low – net	Basic High	Basic High – net	Basic Shell	Basic Hammock
					
Basic Comfort High	Basic Comfort High – net	Sit-On	Sit-On High	Sit-On II	Sit-On High II
					
Custom Amputee	Sit-On Comfort	Sit-On Comfort High	Sit-On Comfort High Hygiène	Active Vest – Kids	Basic Basic – Kids
					
Basic High – Kids	Sit-On Comfort – Kids	Sit-On Comfort High – Kids	Sit-On – Kids	Sit-On High – Kids	Sit-On II – Kids
					

Sit-On High II – Kids	Basic High –Bariatric	Gait Trainer – Bariatric	Pannus Support	Repositioning Sling – Bariatric	Twin Turner – Bariatric
					
Been band	Multi Support	OR Sling – Upper body	Positioning Sling	Repositioning Sling	Repositioning Sling – Tencel®
					
Turner	Twin Turner	Disposable High II	Disposable High II – Bariatric	Disposable High II – Kids	Disposable Comfort High
					
Disposable Repositioning Sling	Disposable draagband	Disposable Multi Support	Disposable Twin Turner II	Disposable Gait Trainer	Headsupport
					
Schapenvacht hoes	Verlengbanden	Markerings clips	Tranings set Positioning lock		
					

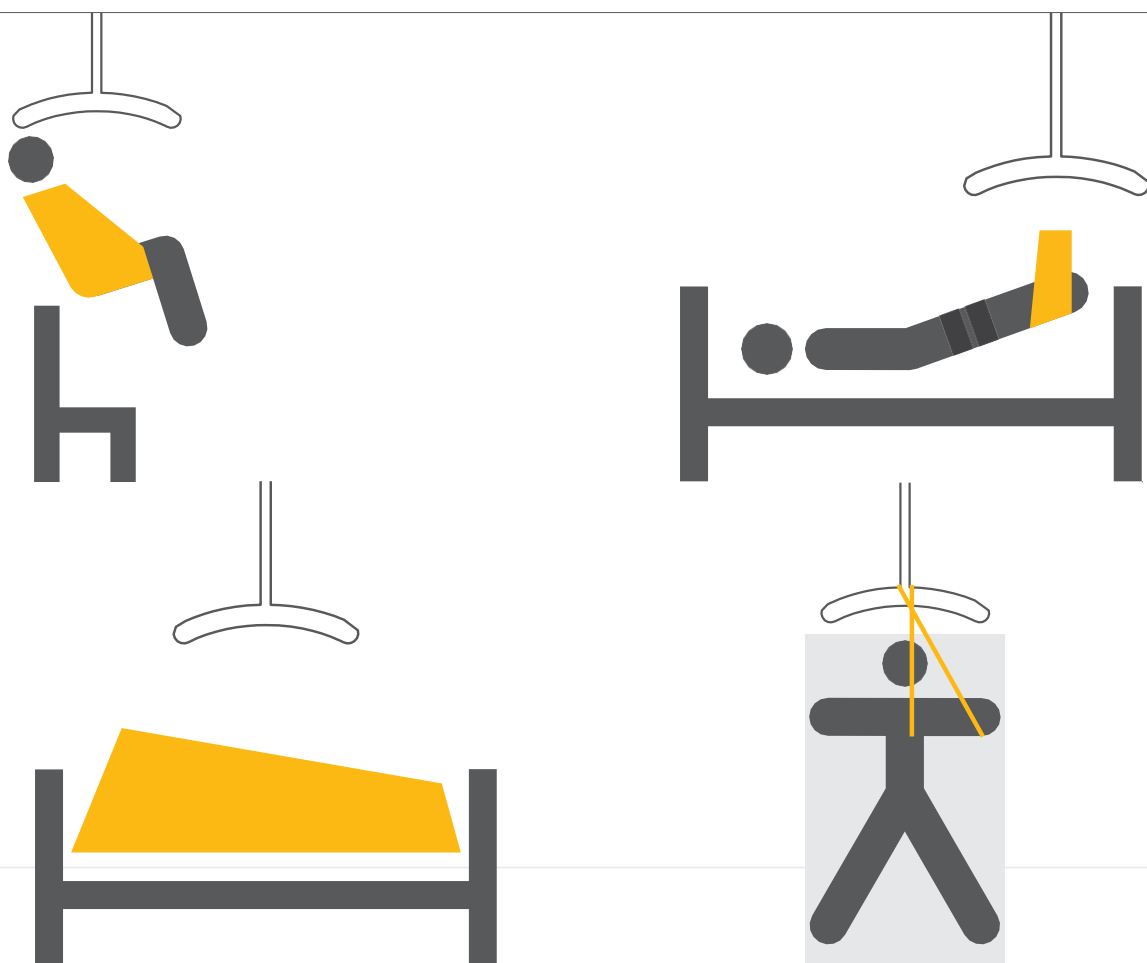

V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com



© Guldmann GB-2625/03/2020

Guldmann™

GB