



**Anatomic
SITT**™

Invented for a better life ♥



Zitzi

DELFI PRO





Principes van dynamisch ondersteund zitten


Stap 1. Positionering van het bekken en de benen

Een geïntegreerde ergonomische zitting biedt een actievere zitpositie, een verbeterde rompbalans en vermindert schuifkrachten. Andere zitsystemen met een vlakke zitting leiden tot achterwaartse verkanteling van het bekken. Om een optimale balans in het bekken en een goede basispositie te bewerkstelligen moet het mogelijk zijn om de beendelen te verstellen in adductie/ abductie richting of zelfs naar windswept. Stel eerst de zitdiepte in en daarna de drempel van de ergonomische zitting.




Stap 2. Kies de juiste heupgordel

4-puntsheupgordels zijn geschikt voor alle gebruikers van onze zitsystemen en worden gebruikt om het bekken optimaal te positioneren en te fixeren. Er bestaan 4 verschillende maten en de gordels onderscheiden zich door de breedte en lengte van de banden en de polstering van de gordel. Om de juiste heupgordel te kiezen meet u de heupbreedte van de gebruiker op.

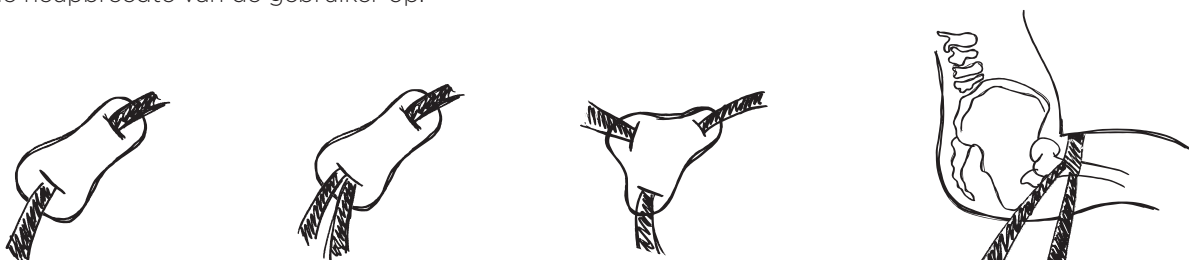

Stap 3. Positionering van de romp

De meervoudig instelbare romppelotten verbeteren de rompstabiliteit, verkleinen de kans op vergroeiingen van de romp en leiden tot een betere hoofdpositie waardoor meer activiteiten mogelijk zijn en de alertheid toeneemt. Met deze rugleuning is het mogelijk om een afwijkende romppositie te corrigeren of te compenseren om een zo optimaal mogelijke zithouding te creëren en te handhaven.

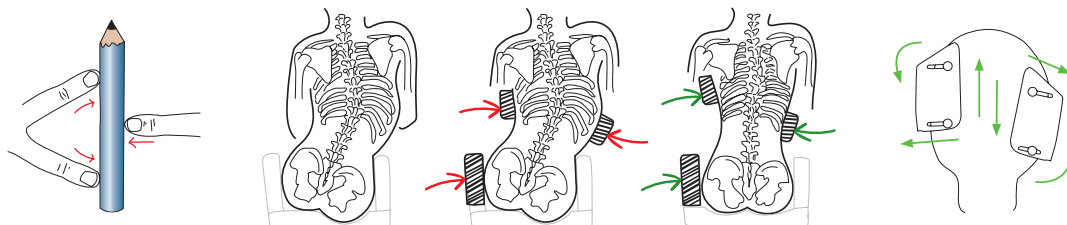


Er bestaan 2 soorten fixatievesten, de sternumsupport en de H-fixatie. De sternumsupport geeft vooral steun op het borstbeen. De H-fixatie grijpt meer aan op de schouders en romp en wordt gebruikt bij neiging tot rotatie en bij gebruikers die behoefte hebben aan meer druk bij schouders. Ook vaak gebruikt bij kinderen met PEG-sonde.



Sternumsupport


- Steun op borstbeen
- Voorkomt wegzakken

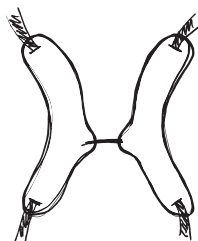

H-fixatie

- Voorkomt rotatie
- Geschikt voor gebruikers met PEG-sonde

Stap 4. Meeverende rugleuning

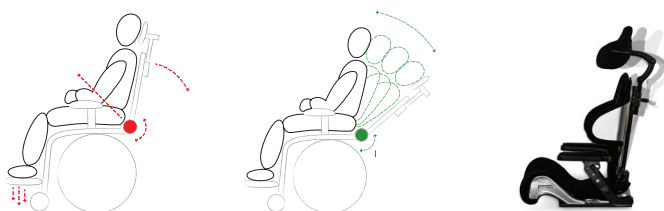

Een starre ondersteuning is noodzakelijk om een functionele zitpositie mogelijk te maken. Een dynamische ondersteuning biedt de mogelijkheid tot bewegen, variatie en dempt het effect van strekspasmes. Delfi pro is uitgerust met een meeverende rugleuning om strekspasmes te remmen en een dynamische zithouding te bieden.

Stap 5. Positionering van het hoofd/voorbeelden



Hoofdsteen met voorhoofdsbandje



HeadActive



Heads Up



Pro Serie

Meeverende rugleuning

Dempt het effect van strekspasme

Crash getest en gecertificeerd


In combinatie met de Anatomic SITT onderstellen

Instelbare rugleuning

Kan gemakkelijk aan de gewenste positie worden aangepast terwijl de gebruiker in de stoel zit

Instelbare rugleuning

Maakt het mogelijk de houding te stabiliseren door middel van een driepuntsondersteuning

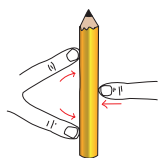

Eenvoudig in te stellen

De rugleuning en armleuningen zijn uitgerust met draaiknoppen

Abductie/Adductie/Asymmetrie

De zitting is eenvoudig aan de wensen van de gebruiker aan te passen

Zitdiepte

Ergonomische zitting

Handige kleurcode

Maakt het makkelijker de zitting in te stellen

Bekleding kleur



Benodigd gereedschap

Er is slechts 1 maat inbussleutel nodig

Zitzi Delfi Pro

Het zitsysteem biedt uitgebreide mogelijkheden als het aankomt op instellingen. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om de stoel uitgebreid mee te laten groeien. Speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren met uitgebreide ondersteuningsbehoeften.

Maten 5 st
Abductie -9/+18°
Gebruikerslengte 170 cm
Zithoek 90 kg


Okselhoogte 17-40 cm
Borstbreedte 14-31 cm
Zitbreedte 24-38 cm
Zitdiepte 14-45 cm






De Zitzi Delfi Pro is de onbetwiste leider van de flexibele zitsystemen. Samen met uitgebreide instelmogelijkheden in zitting en rugleuning, biedt de rugleuning, uitgerust met gasveer, strekmogelijkheden voor mensen met een strekspasme.


Naast de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, kunnen aanpassingen ook individueel op maat worden gemaakt. Voor advies kunt u altijd contact opnemen met één van onze adviseurs, die u graag met hun kennis terzijde staan.

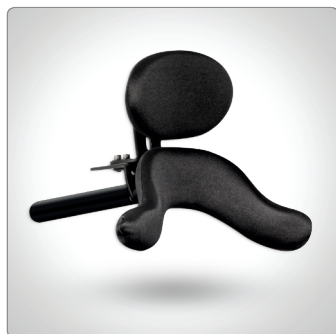


ProSerie doorlopende neksteun

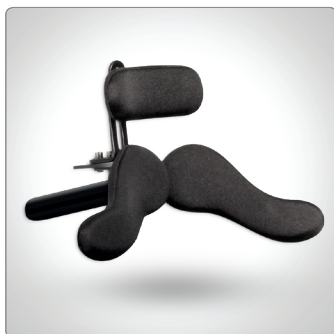


ProSerie Junior

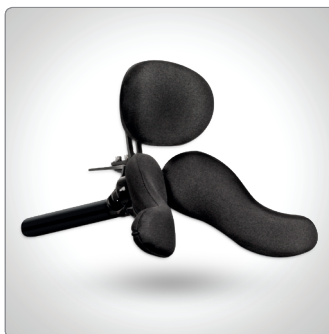

ProSerie Volwassene

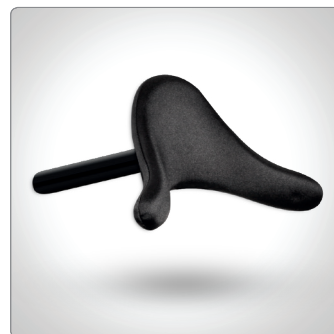

ProSerie Mini

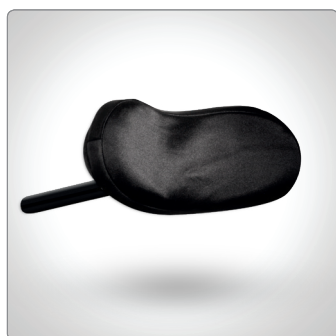

ProSerie Plush



Standaard hoofdsteun




Rompfixatievest Pro




H-fixatie Pro



Anti-rotatie heupgordel

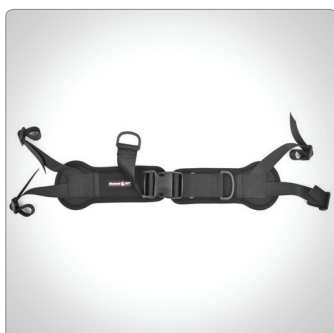

Heupgordel

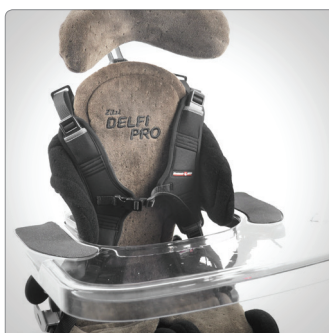

Werkblad



Onderarmsteun



Elleboogsteun



Armsteun



Bekkensteun



Bovenbeensteun



Voetenplaat



Gedeelde voetenplaat



Verstelbare voetenplaat



Gedeelde verstelbaar
voetenplaat



Verende voetenplaat



Polstering (voetenplaat)



Kuitplaat



Voetenplaat



Polstering (kuitplaat)




Enkelfixatie



Wreefband



Polsfixatieband

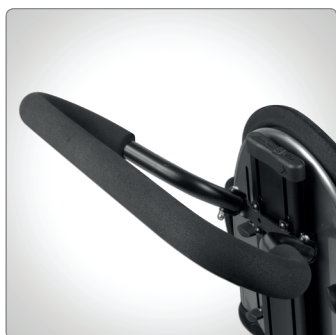

Duwbeugel



Adapterplaat



Bevestigingsplaat



Speelboog

Zitzi Delfi Pro past

Zitzi Delfi Pro maat 0 past op onderstel

Zitzi Delfi Pro maat 1 past op onderstel

Zitzi Delfi Pro maat 2 past op onderstel

Zitzi Delfi Pro maat 3 past op onderstel

Zitzi Delfi Pro maat 4 past op onderstel

Guppy, Flipper Pro 1, Flipper Pro Flex, Sulky

Guppy, Flipper Pro 1, Flipper Pro Flex, Sulky

Guppy, Flipper Pro 2, Flipper Pro Flex, Sulky

Guppy, Flipper Pro 3, Flipper Pro Flex

Seabass Pro, Flipper Pro 3, Flipper Pro Flex

TECHNISCHE GEGEVENS DELFI PRO

Zitzi Delfi Pro	Maat 0	Maat 1	Maat 2	Maat 3	Maat 4
Gebruikerslengte, ong:	60-80 cm	70-100	90-130	120-160	140-170
Zitbreedte cm:	24, 27, 30	24, 27, 30	28, 31, 34	32, 35, 38	32, 35, 38
Zitdiepte cm:	14 - 20	17 - 26	24 - 33	31 - 40	36 - 45
Rughoogte tot oksel:	17 - 27	17 - 27	24 - 34	30 - 40	30 - 40

Heup hoek alle maat -10° tot +30°

ARMSTEUN

A x B

Maat 1 230 x 75 mm

Maat 2 230 x 75 mm

Maat 3 230 x 75 mm

Maat 4 330 x 75 mm

C

Maat 1 140-205 mm


Maat 2 140-205 mm

Maat 3 190-280 mm

Maat 4 190-280 mm

Gemeten vanaf de bovenkant van de zitting.

BEKKENSTEUNEN

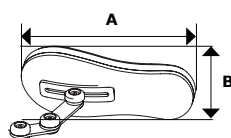


A x B

Maat 1 - 150 x 70 mm

Maat 2 - 200 x 100 mm

BOVENBEENSTEUN

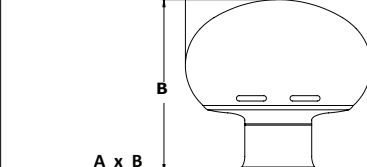


A x B

Maat 1 - 160 x 130 mm


Maat 2 - 175 x 160 mm

ZITTING


Windswept

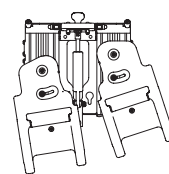

Abductie/Adductie

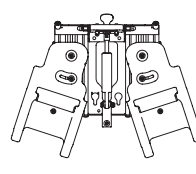

Beenlengteverschil

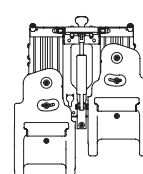

Windswept:

Windswept mogelijkheid 9°


Abductie:

Alle maat 0° to +18°

Adductie:

Alle maat 0° to -9°

VOETENPLAAT

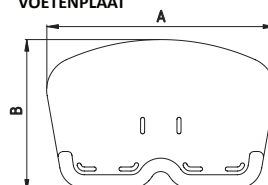

A x B

Voetenplaat maat 0 320 x 260 mm

Voetenplaat maat 1 315 x 195 mm

Voetenplaat maat 2 345 x 225 mm

Voetenplaat maat 3 380 x 260 mm

Voetenplaat maat 4 380 x 310 mm

Verstelbare maat 1 155 x 190 mm

Verstelbare maat 2 160 x 220 mm

Verstelbare maat 3 180 x 255 mm

Gedeelde maat 1 155 x 190 mm

Gedeelde maat 2 160 x 220 mm


Gedeelde maat 3 180 x 255 mm

Gedeelde instelb.* 1 155 x 190 mm


Gedeelde instelb.* 2 160 x 220 mm

Gedeelde instelb.* 3 180 x 255 mm

* Gedeeld meervoudig instelbaar

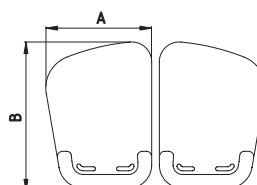


HOOFDSTEUN

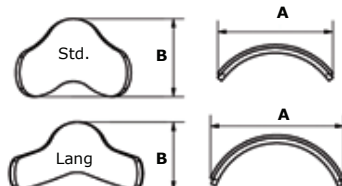

Hoofdsteen maat 1	A B
Hoofdsteen maat 1 lang	220 x 150 mm
Hoofdsteen maat 2	280 x 160 mm
Hoofdsteen maat 2 lang	240 x 190 mm
	280 x 210 mm

INSTELBARE RUGLEUNING

Alle afmetingen zijn inclusief bekleding

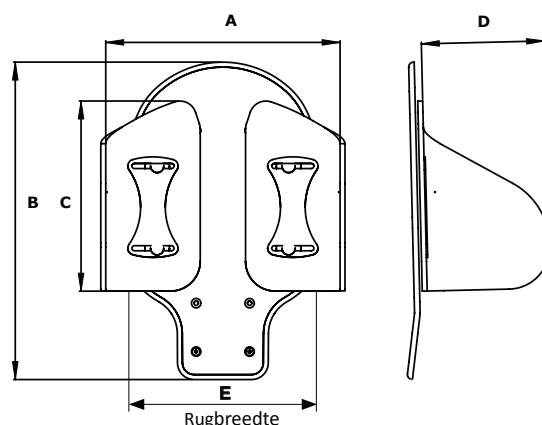

A

Rug maat 0 160 - 230 mm

Rug maat 1 170 - 260 mm

Rug maat 2 190 - 280 mm

Rug maat 3 220 - 310 mm

Rug maat 4 220 - 310 mm

B x C

Rug maat 0 340 x 160 mm

Rug maat 1 340 x 195 mm

Rug maat 2 385 x 230 mm

Rug maat 3 450 x 245 mm

Rug maat 4 450 x 245 mm

D E

Rug maat 0 120 210 mm

Rug maat 1 125 210 mm

Rug maat 2 150 260 mm

Rug maat 3 175 290 mm

Rug maat 4 175 290 mm

WERKBLAD

Afmetingen

Werkblad maat 1

Werkblad maat 2

Werkblad maat 3

A x B

480 x 450 mm

540 x 515 mm


570 x 570 mm

C x D

240 x 250 mm

260 x 290 mm

280 x 340 mm

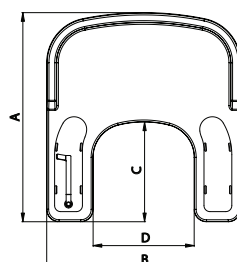



Anatomic SITT Nederland BV
Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands
Tel +31 344 63 45 40
Email informatie@anatomicsitt.com
Web www.anatomicsitt.com