



**Etac**

ADL

Slimme ergonomische hulpmiddelen

 **etac**<sup>®</sup>

# Samen op zoek naar de beste oplossing

Etac is één van 's werelds toonaangevende ontwikkelaars van ergonomische hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen. Met onze verschillende productmerken bieden we kwalitatieve producten voor een breed scala aan dagelijkse behoeften en zorgomgevingen, voor alle levensfasen. Denk hierbij aan douche- en toiletvoorzieningen, zitkussens, rolstoelen, tilliften en transferhulpmiddelen.

Samen met onze klant op zoek gaan naar de beste oplossing voor ieders persoonlijke situatie, dat is onze missie. Waarbij we de cliënt zoveel mogelijk gebruiksgemak en comfort willen laten ervaren en de zorgverleners zoveel mogelijk ontzorgen.

- ✓ Slim ontworpen hulpmiddelen
- ✓ Altijd samen op zoek naar de beste oplossing
- ✓ Oprechte en persoonlijke service

## ADL hulpmiddelen

Etac ontwikkelt en produceert een breed assortiment kwalitatieve hulpmiddelen die zorgvuldig uitgebalanceerd zijn om maximale kracht te leveren, met minimale inspanning en belasting van handen, armen en schouders.






## Hulpmiddelen voor alledag

Onze hulpmiddelen voor het dagelijks leven verminderen stress en belasting van spieren en gewrichten. Hierdoor wordt het voor de gebruiker gemakkelijker wordt om deze belangrijke taken zelfstandig uit te voeren.




# Etac Aktiv reachers

Aktiv Reachers vergemakkelijken het reiken en grijpen voor mensen met een verminderde arm- en handfunctie, dankzij hun lichtgewicht en ergonomisch ontworpen handgrepen. De klem kan zowel een grote ruimte omspannen als het kleinste voorwerp pakken. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende modellen, aangepast aan verschillende behoeften. Alle modellen hebben een handgreep met magneet waarmee u kleine metalen voorwerpen kunt oprapen.

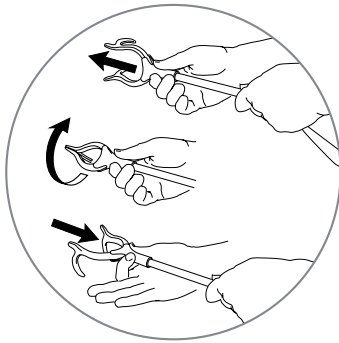

De klem kan in twee verschillende standen gedraaid worden.

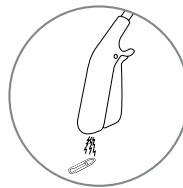

Alle modellen hebben een handgreep met magneet waarmee u kleine metalen voorwerpen kunt oprapen.

## Etac Aktiv reacher, kort en lang

De gebogen handgreep benut de kracht in de hand en zorgt voor een effectieve grip. De wijsvingersteun op de handgreep zorgt voor extra precisie. Het hele oppervlak van de grijparm is voorzien van een duurzame rubberen coating die voldoende stroefheid garandeert, waardoor minder kracht nodig is. De grijparmen van de Reacher kunnen in twee standen worden gezet. Hierdoor kan hij zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt. De Reacher is verkrijgbaar in verschillende lengtes.

Activ reacher is er in 5 verschillende lengtes. De langere versie wordt aanbevolen bij staand gebruik.



Activ reacher 45 cm geeft een goed bereik tot de vloer in een zittende positie.

## Etac Aktiv reacher met sterke greep en haak

Deze Reacher heeft een 90° gehoekte handgreep en een instelbare onderarmsteun voor meer gebruikscomfort voor mensen met heel weinig tilvermogen en zwakke handen. De grijp-arm heeft haken waarmee de gebruiker voorwerpen naar zich toe kan trekken of weg kan duwen. De grijp-armen zijn erstelbaar in twee standen, waardoor de Reacher zowel horizontaal als verticaal kan worden gebruikt.



Aktiv reacher met sterke grip en haak.

Door de hoek wordt de kracht van de hand optimaal benut.

## Etac Aktiv reacher met haak

Deze Reacher combineert een groot aantal functies waardoor hij heel geschikt is als hulp bij het aan- en uitkleden. De grijp-arm is voorzien van haken die het aan- en uitkleden vergemakkelijken. Ze kunnen gedraaid worden en zijn aan de binnenzijde voorzien van een rubberen profiel voor een veilige grip. Deze Reacher heeft een gebogen handgreep waardoor de kracht in de hand beter kan worden benut. De beperkte lengte van 45 cm maakt hem extra flexibel.



Aktiv reacher met haak is een perfect hulpmiddel bij het aankleden.



Het rubberen profiel aan de binnenzijde van de haak zorgt voor voldoende grip.

### Omschrijving

Omschrijving	Artikelno.
Aktiv reacher, 45 cm	e80505004
Aktiv reacher 60 cm	e80505007
Aktiv reacher, 70 cm	e80505003
Aktiv reacher 80 cm	e80505008
Aktiv reacher 90 cm	e80505009
Aktiv reacher met sterke grip en haak, 60 cm	e80505005
Aktiv reacher met haak, 45 cm	e80505006

### Hefvermogen

De Reachers zijn niet bedoeld voor het optillen van voorwerpen zwaarder dan 2 kg

### Gewicht

Reacher, 45 cm: 111 g  
 Reacher, 70 cm: 128 g  
 Reacher met sterke grip en haak: 139 g  
 Reacher net haak: 117 g

### Materiaal

Handgreep, klem en grijp-arm: polycarbonaat /ABS  
 Onderarmsteun en grijp-armsteun: polyamide  
 Buis: aluminium

### Ontwerp

Ergonomiedesign







# Etac Socky kousenhulp

## Etac Butler knopenhulp

Het reiken tot aan de voeten of kleine knopen of ritsen vastmaken kan vervelend zijn wanneer pijn de mobiliteit beperkt of de fijne motoriek verminderd is. Deze problemen kunnen complex zijn en één model is mogelijk niet voor iedereen geschikt. Hier is keuze uit drie kousenhulpmiddelen en twee knopenhulpen.

### Etac Socky kousenhulp, kort

De korte Socky kousenhulp kan worden gebruikt om lange of korte kousen of sokken aan te trekken. Hij is klein en flexibel dus gemakkelijk mee te nemen. De kous glijdt over het nylon weefsel dat daarna gemakkelijk langs de voet kan worden weggetrokken.

#### Hoe gebruik ik een Etac Socky kort

De kous wordt eenvoudig over de Socky-stof getrokken totdat de bovenkant van de kous over de haken reikt. Leg het touwtje achter de kuit en trek eraan. Socky kort glijdt gemakkelijk rond je voet en onderbeen, waardoor de kous gemakkelijk kan worden opgetrokken.



De plastic haken onder de nylon stof houden de kous op zijn plaats en maakt aantrekken eenvoudiger.

### Etac Socky kousenhulp, lang

De lange Socky kousenhulp vergemakkelijkt het aantrekken van lange of korte kousen, sokken of panty's. Voor panty's gebruikt u twee Socky kousenhulpen die met het verbindingsstuk aan elkaar zijn gekoppeld. De plastic strook glijdt gemakkelijk op alle typen ondergrond en biedt goed houvast waardoor de kous gemakkelijker kan worden opgetrokken.

#### Hoe gebruik ik een Etac Socky lang

De sok wordt eenvoudig om de Socky-stof gelegd en naar boven getrokken. Het handvat wordt gebruikt om Socky lang omhoog te trekken, terwijl het plastic glijdeel over de vloer schuift en ervoor zorgt dat de kous op zijn plaats blijft.



Het handvat bij Socky lang maakt het gebruik eenvoudig, om bij verminderde mobiliteit om zelf kousen aan te trekken.



## Etac Socky kousenhulp voor steun- en drukkousen

Deze kousenhulp is ontworpen voor het aantrekken van steunkousen van diverse lengtes en typen. Hij heeft grote lussen die het aantrekken voor zowel gebruiker als verzorger vergemakkelijken.

### Hoe gebruik ik een Etac Kousenhulp voor steun- en drukkousen


Plaats de steunkous op de Socky. De stoffen delen splitsen zich wanneer je de kous optrekt. Het vergemakkelijkt ook voor een verzorger om te helpen.



Dit Socky-model maakt het ook mogelijk voor een verzorger om te helpen bij het aantrekken van steun- en drukkousen.

## Etac Butler knopenhulp

De knopenhulp is beschikbaar in twee modellen. Een knopenhulp met een bolvormige greep voor kleine knoopsgaten en ritsen. Het andere model heeft een lang handvat en kan voor andere knopen gebruikt worden (zelfs jeans-knopen).

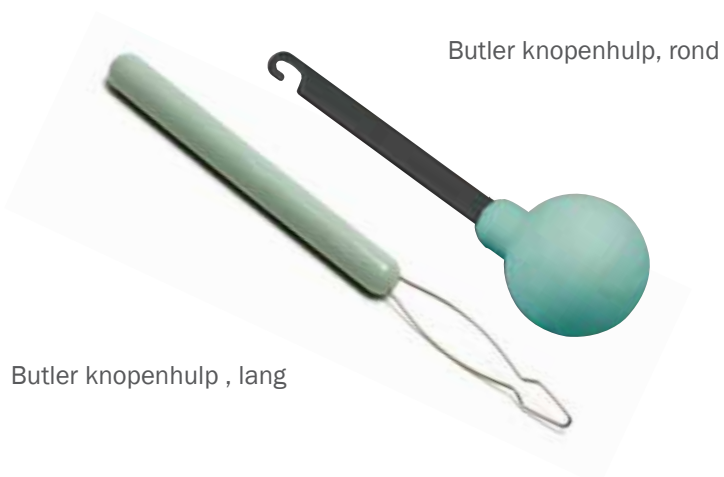

Butler knopenhulp, rond

Butler knopenhulp, lang

### Omschrijving

Omschrijving	Artikelno.
Socky kousenhulp, kort	e80601002-2
Socky kousenhulp, lang	e80601001-2
Socky kousenhulp voor steun- en drukkousen	e80601003-2
Butler knopenhulp, rond	e80602001
Butler knopenhulp, lang	e80602004

### Lengte

Socky short, 40 cm  
 Socky lang, 60 cm  
 Socky kousenhulp voor steun- en drukkousen: 100 cm  
 Butler, rond: 13 cm  
 Butler, lang: 22 cm

### Ontwerp

Socky kort en Socky lang zijn een gepatenteerd ontwerp.

### Gewicht

Socky kort: 94 g  
 Socky lang: 146 g  
 Socky kousenhulp voor steun- en drukkousen: 90 g  
 Butler, rond: 25 g  
 Butler, lang: 18 g

### Materiaal

Socky kousenhulp:  
 Polyamide  
 Plastic onderdelen: Polypropyleen  
 Butler knopenhulp:  
 Handvat: Polystyrene  
 Butler rond, handgreep: Epoxy-gecoat metaal  
 Butler lang, oog: Galvaniseerd metaaldraad

### Ontwerp

HM Center



# Etac Contour pen en Uni knoppenhulp

We moeten allemaal op zijn tijd een notitie maken of een document ondertekenen. Er zijn knoppen en hendels die opengemaakt moeten worden of lampen die aan- en uitgezet moeten worden.

## Etac Contour pen

De Contour pen is speciaal ontworpen voor mensen met een verminderde handfunctie. Hij is mooi afgerond en ligt prettig en comfortabel in de hand. De pen rust comfortabel op de duimbasis. De duim stabiliseert de grip en maakt schrijven met minder inspanning mogelijk.




De Contour pen ligt comfortabel op de duimbasis.



## Etac Uni knoppenhulp

Uni knoppenhulp maakt kleine, dagelijkse taken gemakkelijker, zoals het opendraaien van kranen en het draaien van kleine knoppen en handgrepen. Het heeft een ergonomische en comfortabele handgreep die het gemakkelijker maakt om op de knop te drukken voordat u draait. De rode zeshoekige pinnen zorgen voor een goede grip rond de knop.

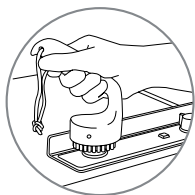

De Uni knoppenhulp biedt een stevige en comfortabele grip voor de pols en ontlast de vingergewrichten tijdens het gebruik.



Omschrijving	Artikelno.	Gewicht
Contour pen	e80701001	Contour Pen: 26 g
Uni knoppenhulp	e80503003	Uni knoppenhulp: 84 g
Lengte		Materiaal
Countour pen, 14,5 cm		Contour pen: Handvat ABS
Uni knoppenhulp, 10-11 cm		Uni knoppenhulp: ABS
		Pennen: Polyamide
		Ontwerp
		Contour Pen: Designkonsulterna
		Uni knoppenhulp: Ergonomidesign



# Etac Relieve ergonomische messen

Relieve-messen hebben een gebogen handvat en een scherp mes dat het snijden gemakkelijker maakt. De hoek van het handvat kan de gebruiker de pols recht houden. De ovale vorm zorgt voor een stabiele grip. De bovenkant van het handvat is soepel gebogen om een comfortabele positie voor de duim mogelijk te maken. Het mes is zeer scherp om het snijden te vergemakkelijken. Het mes is lager dan het handvat om het risico te minimaliseren dat de hand het voedsel aanraakt.

## Etac Relieve gehoekt broodmes

Het lemmet is lang genoeg voor het snijden van groente of brood. Door de hoek van het heft kan de gebruiker zijn pols recht houden,



Relieve gehoekt broodmes

## Etac Relieve gehoekte messen

Deze tafelmessen zijn beschikbaar in twee varianten: voor handen van normale afmeting en voor kleine handen. De messen zijn ontworpen voor mensen met verminderde mobiliteit in de handen en armen.



Relieve gehoekte messen

### Omschrijving

Relieve gehoekt broodmes

Relieve gehoekt mes

Relieve gehoekt mes, klein

### Artikelno.

e80501101

e80402101

e80402102

### Gewicht

Relieve gehoekt broodmes: 75 g

Relieve gehoekt mes: 72 g

Relieve gehoekt mes, klein: 37 g

### Materiaal

Lemmet: Stainless steel

Relieve gehoekt broodmes: Polyamide handvat

Relieve gehoekte messen: Polyamide plastic handvat

### Reinigen

Vaatwasmachine-bestendig

### Ontwerp

Ergonomidesign







# Etac Fixeerplank en snijplank

Deze hulpmiddelen houden de etenswaren goed op hun plek zodat deze eenvoudig met één hand bereid kunnen worden.

## Etac Fixeerplank

De Fixeerplank is een nuttig hulpmiddel voor iedereen die maar één hand kan gebruiken of die weinig kracht in de handen heeft. Met de klemsteunen kan een schaal, een rasp of een voedingsmiddel gemakkelijk op zijn plaats worden gehouden. De Fixeerplank heeft een speciaal gedeelte met punten voor kleine voedingsmiddelen. Wanneer een vlakke werkplank nodig is, kan dit gedeelte worden verwijderd of met de punten naar beneden worden aangebracht.

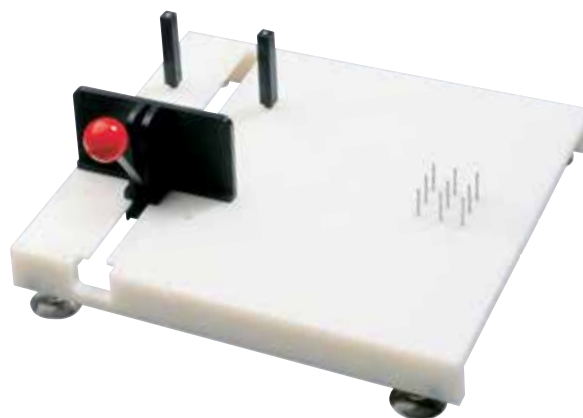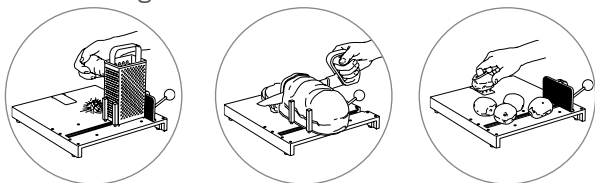

## Etac Snijplank

De Snijplank is een functionele snijhulp die het werk in de keuken vergemakkelijkt. Door zijn stabiele voet staat hij stevig en voorkomt schuiven of glijden. De dikte van de plakken is eenvoudig instelbaar. Het mes past in de geleiders zodat ook gebruikers met tremor of verminderd gezichtsvermogen recht kunnen snijden – en veilig!



### Omschrijving

Fixeerplank  
Snijplank

### Artikelno.

e80501004  
e80501005

### Gewicht

Fixeerbord: 1.3 kg  
Snijplank: 415 g

### Materiaal

Fixeerplank: Werkblad: Polystyreen  
Metalen onderdelen: Roestvast staal  
Steunen: PC/ABS  
Snijplank: Polystyreen

### Reiniging

Vaatwasmachine-bestendig

### Ontwerp

Ergonomisch design  
De Fixeerplank is een gepatenteerd ontwerp





# Etac Light bestek

Etac Light bestek en Tasty bord en glazen vergemakkelijken bij het eten bij verminderde mobiliteit in de handen en armen. Er zijn verschillende modellen beschikbaar en natuurlijk zijn ze allemaal lichtgewicht.

Gemeenschappelijk aan alle Light bestek is een functioneel ontwerp van het handvat en een vorm die de grip stabiel en comfortabel maakt. Elk bestek heeft zijn eigen unieke vorm en ontwerp in overeenstemming met het specifieke gebruik om de verminderde handfunctie te compenseren.

## Etac Light bestek, dikke steel

Light bestek met dikke handvatten ligt stevig in de hand. Het lichte bestek met dikke steel ontziet de gewrichten en verlaagt de druk op de vingers.

De soep lepel heeft een langere dunnere steel. Dit vergemakkelijkt het aangrijpen van de lepel in de holte tussen duim en wijsvinger, dit is de meest gebruikelijke manier is om een soeplepel te vast te houden. Om het snijden gemakkelijker te maken heeft de handgreep van het mes een helling om de wijsvinger te ontlasten en het scherpe mes is speciaal ontworpen.



## Etac Light lepel, gehoekt

De gehoekte lepels zijn ontworpen voor mensen met verminderde mobiliteit in armen en handen. Deze lepels zijn licht en de steel is zo ontworpen dat ze stevig in de hand ligt.

De gehoekte lepels zijn zowel voor rechtshandigen als voor linkshandigen verkrijgbaar.



### Omschrijving

Light vork, dikke steel	e80402002
Light lepel, dikke steel	e80402004
Light mes, dikke steel	e80402006
Light dessertlepel, dikke steel	e80402007
Light lepel, gehoekt	
- rechtshandig	e80403201
- linkshandig	e80403202

### Afmetingen

Vork: 18 cm  
 Lepel: 22 cm  
 Mes: 21 cm  
 Dessertlepel: 18 cm  
 Lepel, gehoekt: 19 cm

### Artikelno.

### Gewicht

Vork: 27 g  
 Lepel: 37 g  
 Mes: 23 g  
 Dessertlepel: 30 g  
 Lepel, gehoekt: 35 g

### Materiaal

Metalen gedeeltdte: Roestvast staal  
 Staal: ABS plastic

### Reiniging

Vaatwasmachine-bestendig

### Ontwerp


Ergonomidesign



## Etac Light bestek, dunne steel

Dit bestek is bedoeld voor personen met verminderde spierkracht, die hand en onderarm moeten steunen en vaak het bestek als een pen vasthouden. Het bestek is licht en heeft een dunne, relatief lange steel. Het bestek wordt tussen de vingers gehouden en er is slechts minimale inspanning en beweging nodig. Ter voorkoming van plaatselijke druk is de onderkant van de steel vloeiend afgerond.


Een functioneel bestek voor personen met verminderde spierkracht.

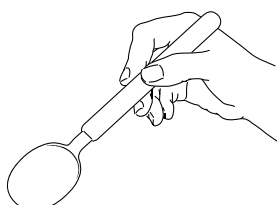

De dunne handvatten vergemakkelijken het eten, wanneer de grijpfunctie verminderd is.

## Etac Light, gecombineerd bestek

Dit gecombineerde bestek bestaat uit de combinaties mes/vork en mes/lepel, en is ontworpen voor mensen die slechts één hand kunnen gebruiken. De steel zorgt door zijn afgeronde onderkant en vlakke bovenkant voor stevig houvast. De combinatie mes/vork is zowel in rechter- als linkerhandversie verkrijgbaar, de combinatie mes/lepel is geschikt voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers. De snede bevindt zich aan de onderkant van het bestek om letsel aan de mondhoeken te voorkomen.

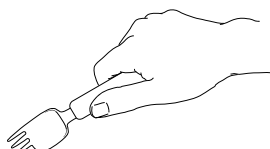

### Omschrijving

Omschrijving	Artikelno.
Light vork, dunne steel	e80401003
Light lepel, dunne steel	e80401005
Light mes, dunne steel	e80401001
Light dessertlepel, dunne steel	e80401007
Gecombineerd bestek	
Light mes/lepel	e80403001
Light mes/vork, rechtshandig	e80403002
Light mes/vork, linkshandig	e80403003

### Afmetingen

Vork: 21 cm  
 Lepel: 21 cm  
 Mes: 22 cm  
 Dessertlepel: 20 cm  
 Gecombineerd bestek:  
 Mes/vork: 18 cm  
 Mes/lepel: 20 cm

### Gewicht

Vork: 24 g  
 Lepel: 34 g  
 Mes: 21 g Dessertlepel: 26 g  
 Gecombineerd bestek:  
 Mes/vork: 25 g  
 Mes/lepel: 35 g

### Materiaal

Metalen gedeelte: Roestvast staal  
 Staal: ABS plastic

### Reiniging

Vaatwasmachine-bestendig

### Ontwerp

Ergonomidesign



# Etac Tasty glas, beker en bord

Tasty is een serie producten die het eten en drinken vergemakkelijken. Ze hebben een functioneel ontwerp voor iedere gedekte tafel.

## Etac Tasty glas

Het Tasty glas met een dikke hals vergemakkelijkt het optillen. Doordat het glas weinig weegt en de kelk op de hand kan rusten, is slechts weinig grijpkracht nodig om het glas op te tillen.

## Etac Tasty bord

Eén rand van het Tasty bord is verhoogd, waardoor het voedsel vanaf de andere kant gemakkelijker bereikbaar is en bovendien beter met een lepel of vork kan worden opgeschept. De onderkant is voorzien van een rubber strip zodat het bord veilig blijft staan. Dit bord is ook heel geschikt om iemand te voeren.



## Etac Tasty beker

Deze beker is geschikt voor mensen met beperkt gevoel of coördinatie. Isolerende houder met diverse aangrijppunten. De rand geeft steun waardoor de beker met twee handen vastgehouden kan worden. De brede voet maakt dat hij stevig staat. Geleverd incl. houder en drinktuit.



### Omschrijving

Tasty glass	e80404001
Tasty plate with raised edge	e80404005
Tasty beaker	e80404042

### Inhoud

Glas: 2 dl  
Beker: 3 dl

### Gewicht

Glas: 75 g  
Bord: 160 g  
Beker inclusief houder en tuitdeksel: 125 g  
Beker: 50 g  
Houder: 60 g  
Tuitdeksel: 15 g

### Artikelno.

### Materiaal

Glas: Polycarbonaat  
Bord: Wit, warmtebestendig melamine Beker: Polycarbonaat  
Houder/tuitdeksel: Polypropyleen

### Reiniging

Vaatwasmachine-bestendig. Door wassen met de hand behoudt het bord zijn glans.NB. Tasty bord niet geschikt voor magnetron. shwasher-safe.

### Ontwerp

Ergonomidesign



# Etac Feed bestek

Ons Feed bestek is functioneel voor zowel voor de gebruiker als verzorger. Het speciale bestek en de doseerbeker zijn geschikt voor zowel volwassenen als kinderen die behoefte hebben aan wat extra hulp bij de maaltijd.

## Etac Feed bestek

Het bestek is gemaakt van plastic en heeft zachte afgeronde randen die in de mond prettig aanvoelen. De vorm vergemakkelijkt het voeren van mensen die moeilijk de mond kunnen openen. De steel is zo ontworpen dat de verzorger een goede grip heeft en het voedsel comfortabel kan toedienen. De lengte van de steel maakt dat degene die gevoerd wordt het bestek ook nog zelf kan vasthouden.



## Etac Feed lepel, instelbaar

Feed lepel is speciaal ontworpen voor kinderen die zelfstandig willen eten. De wig steunt op het bord en voorkomt dat de hand van het kind in het eten valt. De lus is erg nuttig voor kinderen met verminderde grijpfunctie.



De instelbare gebogen lepel is zowel voor links- als voor rechtshandige kinderen verkrijgbaar.

## Etac Feed doseerbeker

De doseerbeker is ontworpen voor mensen die hulp nodig hebben bij het drinken. De tuitvorm stelt de gebruiker in staat te drinken zonder zijn of haar hoofd te hoeven buigen. Deze beker zorgt ook voor goed contact met de lippen wat de veiligheid bij het gieten bevordert. De beker heeft maatstreepjes voor 1/2 dl en 1 dl.



### Omschrijving

Omschrijving	Artikelno.
Feed lepel	e80403101
Feed lepel, klein	e80403102
Feed vork	e80403103
Feed lepel, instelbaar en gebogen	
Gebogen voor rechtshandigen:	e80403301
Gebogen voor linkshandigen:	e80403302
Feed doseerbeker	e80404101

### Inhoud

Doseerbeker: 1 dl

### Afmetingen

Feed lepel: 22 cm  
Feed lepel, klein: 20 cm  
Feed vork: 22 cm  
Feed lepel, instelbaar: 16 cm  
Feed Doseerbeker: Hoogte excl. tuit: 7 cm

### Gewicht

Feed lepel: 37 g  
Feed lepel, klein: 31 g  
Feed vork: 34 g  
Feed lepel, instelbaar: 40 g  
Feed Doseerbeker: 40 g

### Materiaal

Feed vork en lepel: Thermoplastic polyester  
Feed lepel instelbaar: Witte polyamide  
Feed Doseerbeker: Polycarbonaat

### Reiniging

Vaatwasmachine-bestendig

### Ontwerp

Ergonomiedesign




# Etac Beauty body care

Het gebruik van de Beauty producten maakt niet alleen het wassen van het lichaam makkelijker, ze bieden ook een soepele massage van de huid en de hoofdhuid.

## Etac Beauty rug- en lichaamsspons

De Beauty rugsspons en lichaamsspons zijn ontworpen om het lichaam eenvoudig te bereiken en te reinigen. De sponzen zijn effectief zonder te veel water te absorberen waardoor ze licht en in balans blijven. De handvatten zijn ovaal en bieden met hun oppervlak goede grip. De bekleding van de spons is afneembaar en vervangbaar.

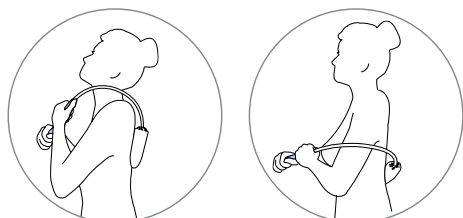

Etac Beauty rugsspons is ontworpen met ovale handvatten.

Etac Beauty lichaamsspons heeft een gebogen ontwerp.

## Etac Beauty Haar- wasborstel

De haar-wasborstel vervangt de vingers bij het aanbrengen en inmasseren van shampoo. Het ontwerp van de handgreep voorkomt een hoge belasting van handen, armen of schouders.

### Omschrijving

Beauty lichaamsspons
Losse sponsbekleding 2/pak
Beauty rugsspons
Losse sponsbekleding
Beauty haar/wasborstel

### Artikelno.

e80210076
e80210103
e80210080
e80210104
e80210078

### Gewicht

Beauty lichaamsspons: 112 g
Beauty rugsspons: 203 g
Beauty haar/wasborstel: 112 g



### Materiaal

Polypropyleen and TPE  
sponsbekleding: Katoen met polythene vulling

### Ontwerp

Ergonomidesign  
The Beauty product designs zijn geregistreerd

### Lengte

Beauty lichaamsspons: 38 cm
Beauty rugsspons: 77 cm
Beauty haar/wasborstel: 36 cm

## Etac Beauty kam en haarborstel

De beauty kam en haarborstel zijn er in twee lengtes. De kortere versie wordt aanbevolen wanneer de gebruiker zonder problemen het oor kan aanraken. De langere versie is geschikt voor gebruikers die alleen bij de schouder kunnen. Zowel de kam als de borstel zijn gebogen voor het beste comfort en controle bij het kammen/borstelen van het haar.



## Etac Beauty universeel handvat

Een nagelvijl is bijna onmogelijk te hanteren met zwakke of stijve vingers. Plaats de nagelvijl in een Etac Universeel Handvat en het zal veel eenvoudiger gaan. Het brede einde van het handvat kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een tandenborstel of scheermes. Het handvat ligt goed in de gehele hand en is daardoor eenvoudig in gebruik.



### Omschrijving

Omschrijving	Artikelno.
Beauty haarborstel	e80210072
Beauty haarborstel, lang	e80210074
Beauty kam	e80210068
Beauty kam, lang	e80210070
Beauty universeel handvat	e80210082

### Lengte

Beauty haarborstel: 29/37 cm  
Beauty kam: 30/37 cm  
Beauty universeel handvat: 11 cm

### Gewicht

Beauty haarborstel 102/112 g  
Beauty kam 80/90 g  
Beauty universeel handvat: 45 g

### Materiaal

Polypropyleen and TPE  
Nagelvijl: Amaryl

### Ontwerp

Ergonomidesign  
The Beauty product designs zijn geregistreerd






# Etac Torkel toiletpapierhouder

De Etac Torkel is een handig en functioneel hulpmiddel.

## Eenvoudig in gebruik

In geval van beperkte handfunctie kan deze klem gebruikt worden voor toiletpapier, vochtige doekjes en washandjes. Dankzij de materiaalkeuze kan de Torkel gereinigd worden door middel van uitkoken.


Wijze van gebruik:

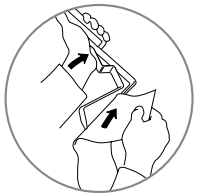

1. Scheur een stuk WC-papier af (ca. 40 cm). Open de klem door in het handvat te knijpen en breng het WC-papier aan in de Torkel.



2. Wikkel het WC-papier losjes om de Torkel, zodanig dat het ook de punt bedekt.

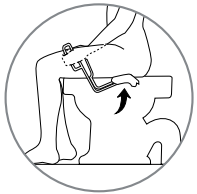

3. Breng de Torkel tussen de benen en maak een vegende beweging.



4. Open de klem en schud het WC-papier van de Torkel in het toilet. Spoel vervolgens de Torkel af.



### Omschrijving

Torkel toilet toiletpapierhouder

### Artikelno.

e80304001

### Materiaal

Polyamide

### Afmetingen

Lengte: 33 cm

### Ontwerp

Designkonsulterna

### Gewicht

100 g

### Reinigen



Reinig het product met een oplosmiddelvrij schoonmaakmiddel (zuurgraad pH 6-9), of met een 70% oplossing met desinfectant. Kan ontsmet worden op max. 100 °C







## Samen op zoek naar de beste oplossing

Etac is één van 's werelds toonaangevende ontwikkelaars van ergonomische hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen. Met onze verschillende productmerken bieden we kwalitatieve producten voor een breed scala aan dagelijkse behoeften en zorgomgevingen, voor alle levensfasen. Denk hierbij aan douche- en toiletvoorzieningen, zitkussens, rolstoelen, tilliften en transferhulpmiddelen. Samen met onze klant op zoek gaan naar de beste oplossing voor ieders persoonlijke situatie, dat is onze missie.

- ✓ Slim ontworpen hulpmiddelen
- ✓ Altijd samen op zoek naar de beste oplossing
- ✓ Oprechte en persoonlijke service

Kijk ook op [www.etac.nl](http://www.etac.nl)

Etac B.V.  
Tinweg 8  
8445 PD Heerenveen  
T: 0513 681 686  
E: [contact.nl@etac.com](mailto:contact.nl@etac.com)  
W: [Etac.nl](http://Etac.nl)

  
Creating Possibilities