

# Fusion



## Relax \

Fusion ... mobility meets comfort and design  
 Uit de nood naar 'mobily' in versmelting met extreem ergonomisch comfort en high- end design ontstond 'Fusion ... mobility meets comfort and design'. Een verrijdbare relaxzetel die dankzij een discreet verwerkte en extern oplaadbare wisselbatterij eenvoudig kan worden verplaatst.

Niet langer bepaalt de positie van de zetel waar de gebruiker gaat zitten, maar bepaalt de gebruiker eenvoudig waar hij met de zetel wil gaan zitten. Niet langer is een zetel bedacht voor een zorgomgeving en geschikt voor een thuisomgeving, of omgekeerd. Fusion is de letterlijke versmelting van 2 werelden!

Fusion is een mee evoluerende zetel; heeft de gebruiker (in een zorginstelling of thuisomgeving) nood aan extra's, dan kan hij/ zij deze eenvoudig toevoegen op het bestaande basisconcept. Vb. wielen toevoegen voor extra mobiliteit of zorgaccessoires zoals een serumhouder, een zuurstoffeshouder of gewoon een handige koffietafel.

## Wat maakt de Fusion Relax zo uniek? \

- \ \ Zeer comfortabel
- \ \ Ergonomische werking
- \ \ Grote 'zorg'hendels
- \ \ Gebruiksvriendelijk
- \ \ Onderhoudsvriendelijk
- \ \ Modulaire constructie - aanpasbaar op elk moment
- \ \ Manoeuvrerbaarheid en beweeglijkheid - bedoeld om te bewegen
- \ \ Diverse zithoogtes
- \ \ Standaard geïntegreerde handmatige hoofdsteunverstelling
- \ \ Extreme stabiliteit en sterkte
- \ \ Tilliftoegankelijk (actieve, passieve en return tillift)
- \ \ Optioneel als slaapzetel verkrijgbaar
- \ \ Luxueuze uitvoering, mogelijkheid tot bekleding

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2021-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

## OVERZICHT FUSION RELAX



### Armen

Beschikbaar met 7 verschillende armen, zowel open als gesloten en in verschillende soorten materialen.

Meer info op pagina 6

### Verstelmechaniek

5 verschillende verstelmechanieken mogelijk, zowel manueel als elektrisch. De versie Zero Gravity is bovendien beschikbaar met een relaxpositie en slaappositie.

Meer info op pagina 3-5

### Frame & wielen

Beschikbaar met 5 verschillende soorten onderstellen, afhankelijk van frame, grootte van de wielen en remtechniek.

Meer info op pagina 6


### Opties & accessoires

De Fusion Relax bevat een hele hoop opties en accessoires om de care relax aan te passen aan de noden van de gebruiker.


Meer info op pagina 7

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2021-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie


## VERSTELMECHANIEKEN

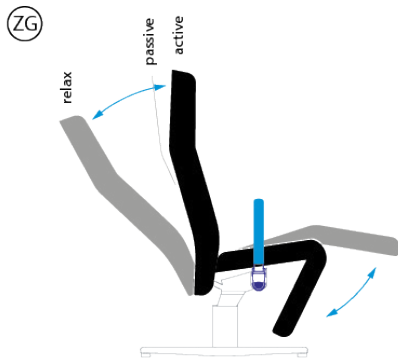


**ZERO GRAVITY 130°**

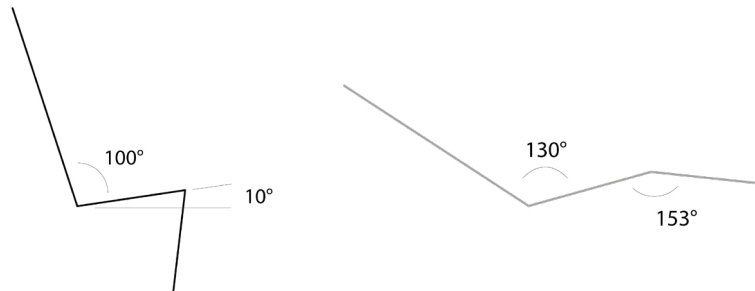

Pure eenvoud. Rug en beensteun zijn synchroon traploos verstelbaar d.m.v. een gasveer. Van een actieve of passieve zithouding tot een uitstekende relaxpositie. De maximale hoek tussen rug en zit bedraagt 130° in relaxpositie.

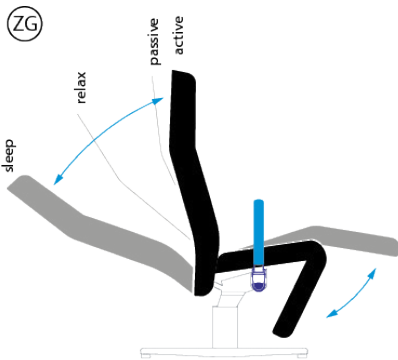


**ZERO GRAVITY 140°**

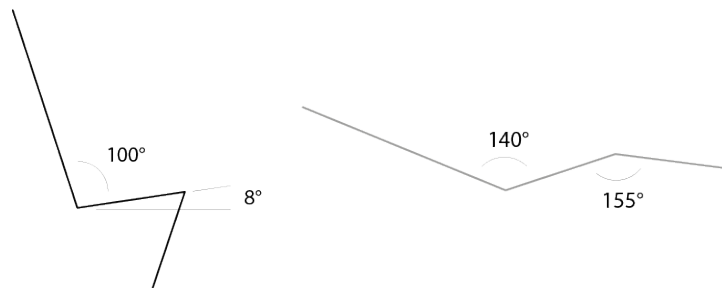


Pure eenvoud. Rug en beensteun zijn synchroon traploos verstelbaar d.m.v. een gasveer. Van een actieve of passieve zithouding tot een uitstekende slaappositie. De maximale hoek tussen rug en zit bedraagt 130° in relaxpositie en 140° in slaappositie.

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2021-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie


## VERSTELMECHANIEKEN

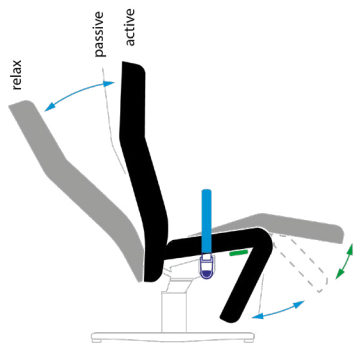


**DUO COMFORT  
SYNCHRO 130°**

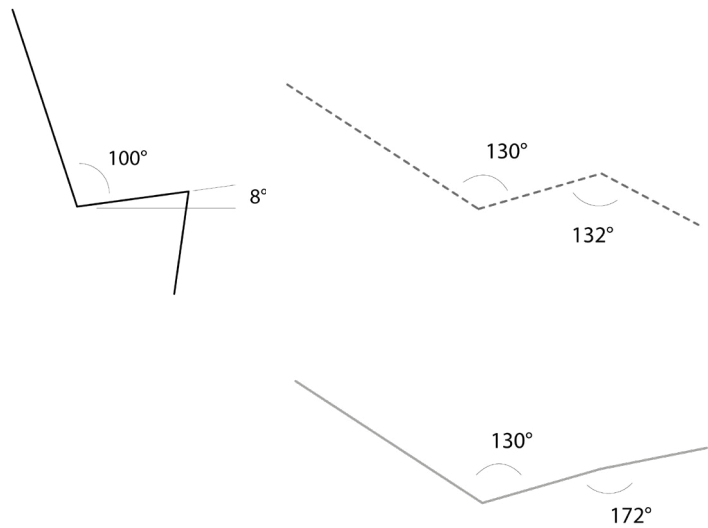

Ergonomie. Duo comfort synchro staat voor tal van zit- & relaxposities. Rug en beensteun zijn synchroon traploos verstelbaar d.m.v. een gasveer. Daarenboven kan de beensteun apart bijgesteld worden met een tweede gasveer. Van een actieve en passieve zithouding tot een uitstekende relaxpositie. De maximale hoek tussen rug en zit bedraagt 130° in relaxpositie.

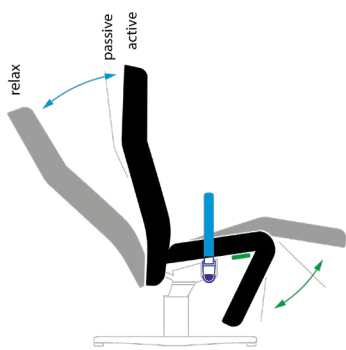


**DUO COMFORT  
SOLO 130°**

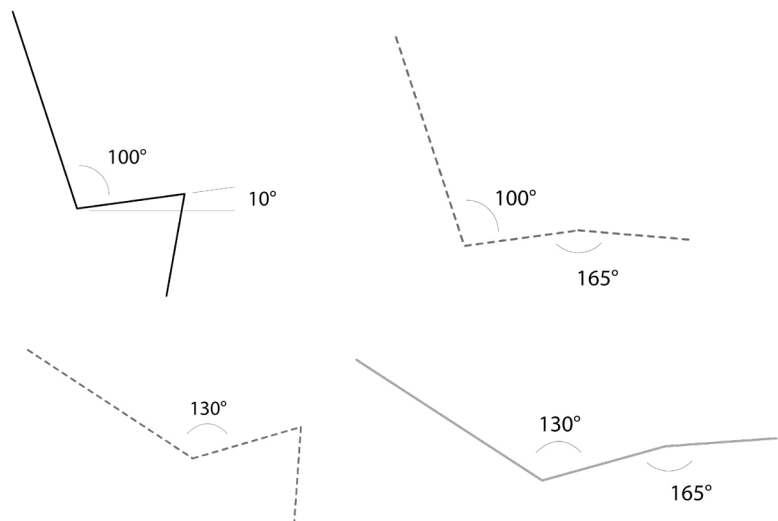


Gemakkelijk in gebruik. Zit, rug en beensteun zijn apart traploos verstelbaar d.m.v. 2 gasveren. Van een actieve en passieve zithouding tot een uitstekende relaxpositie, en alles ertussenin. De maximale hoek tussen rug en zit bedraagt 130° in relaxpositie.

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2021-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

## VERSTELMECHANIEKEN

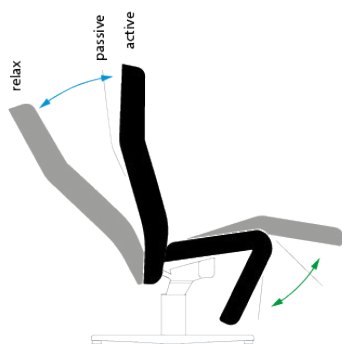

**ELEKTRISCH 125°**

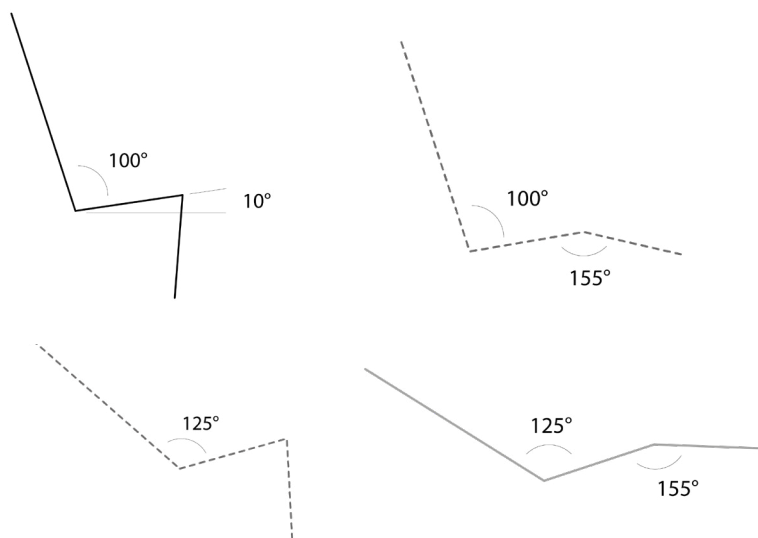

Gemakkelijk in gebruik. Zit, rug en beensteun zijn apart of synchroon elektrisch verstelbaar d.m.v. 2 motoren. Van een actieve en passieve zithouding tot een uitstekende relaxpositie, en alles ertussenin.


De maximale hoek tussen rug en zit bedraagt 125° in relaxpositie.

Mogelijkheid tot uitneembare en oplaadbare batterij.


Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2021-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

## ARMEN


De Fusion Relax kan van verschillende armen voorzien worden; van een comfortabele volledig gestoffeerde arm tot een neerschuifbare arm. Naargelang het type armen is het al dan niet mogelijk om een eettafel op de arm te schuiven.

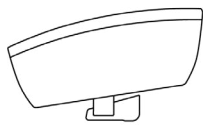


HOME

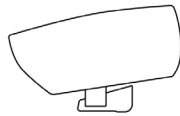


OI

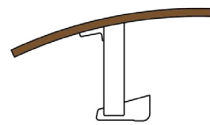


CURA WOOD

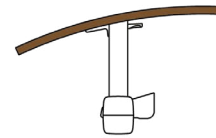


CURA NS WOOD

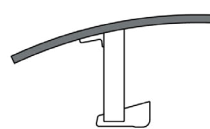


CURA POLYURETHANE

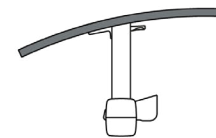

CURA NS POLYURETHANE

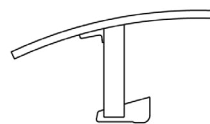


CURA XL UPHOLSTERED

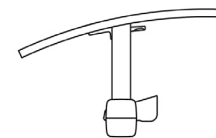


CURA NS XL UPHOLSTERED

## FRAME EN WIELEN


Aluminium kruispoot met aluminium kolom, geëpoxeerd. Alle versies met wielen Ø 125 mm zijn standaard voorzien van een ergonomisch gevormde kunststof duwbeugel en een voetensteun. Er zijn volgende uitvoeringen mogelijk:

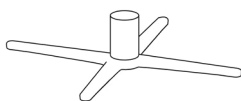


Vast, niet verrijdbaar

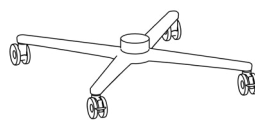


Wielen Ø75

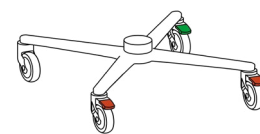


Wielen Ø125

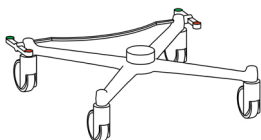

Wielen Ø125 centraal geremd, achterzijde

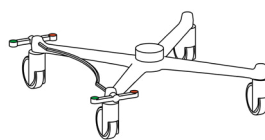




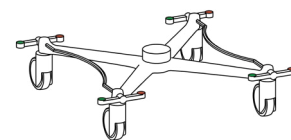





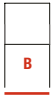


Wielen Ø125 centraal geremd, zijdelings (links, rechts of beide)



Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2021-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

# TECHNISCHE KENMERKEN

## AFMETINGEN

TYPE												
<b>Fusion</b>	69-93	74-86	119-125	50	46	48 / 50 / 52 / 54 / 56* / 58*	81	65-74	35-40	ja	★ ★ ★	

★ = huishoudelijk gebruik / ★ ★ = projectmatig gebruik / ★ ★ ★ = intensief projectmatig gebruik

### (\*) Zithoogte

Elke Fusion relax is beschikbaar in 4 zithoogtes: 48 – 50 – 52 en 54 cm. Op ieder moment kan de zithoogte, dankzij de modulaire opbouw van de Fusion, aangepast worden. \*Bij Fusion met wielen Ø75 en Ø125 is een zithoogte van 56 of 58 cm beschikbaar.

### (\*\*) Zitbreedte

Gemeten tussen de armen en de zitting: vooraan 50 cm – achteraan 48 cm

### Armleggerhoogte

20 cm – gemeten vanaf de zitting

## ZIT, RUG EN BEENSTEUN

Gestoffeerd. Ergonomisch gevormd.

Bijzonder comfortabel zitcomfort door de combinatie van een stalen buisframe overspannen met elastisch web en volledig ingeschuimd. Het hoge dichtheid geïnjecteerd schuim is brandvertragend.

De onderkant van de zitting is standaard afgewerkt met een elastisch, vochtafstotend en afwasbaar materiaal. Elke zetel heeft standaard een manueel verstelbaar hoofdgedeelte.

Door de geïntegreerde beensteun zijn er geen hinderlijke randen en openingen tussen zitting en beensteun. Voorzien van een functioneel vormgegeven minimale opening tussen zit en rug, t.b.v het gemakkelijk reinigen.

Bij versie met wielen Ø125 standaard voorzien van een ergonomisch gevormde kunststof duwbeugel.


## OPTIES EN ACCESSOIRES

Er zijn tal van opties en accessoires beschikbaar voor de Fusion Relax, waaronder een eettafel, serumhouder, koffietafeltje,... Bekijk onze technische fiches en brochure voor alle mogelijkheden.

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2021-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

## BEDIENING

Fusion Zero Gravity en Fusion Duo Comfort zijn telkens voorzien van 2 ergonomisch gevormde kunststof bedieningshendels. De verstelmechaniek wordt eenvoudig bediend door deze hendels naar voor (push) of naar achter (pull) te bewegen, hierdoor ontgrendelt de gasveer en is de relax soepel te verstellen naar elke gewenste zit- of ligpositie. Het is mogelijk om de relax zowel in elke gewenste zit- of ligpositie te vergrendelen, als de relax juist vrij te laten bewegen.

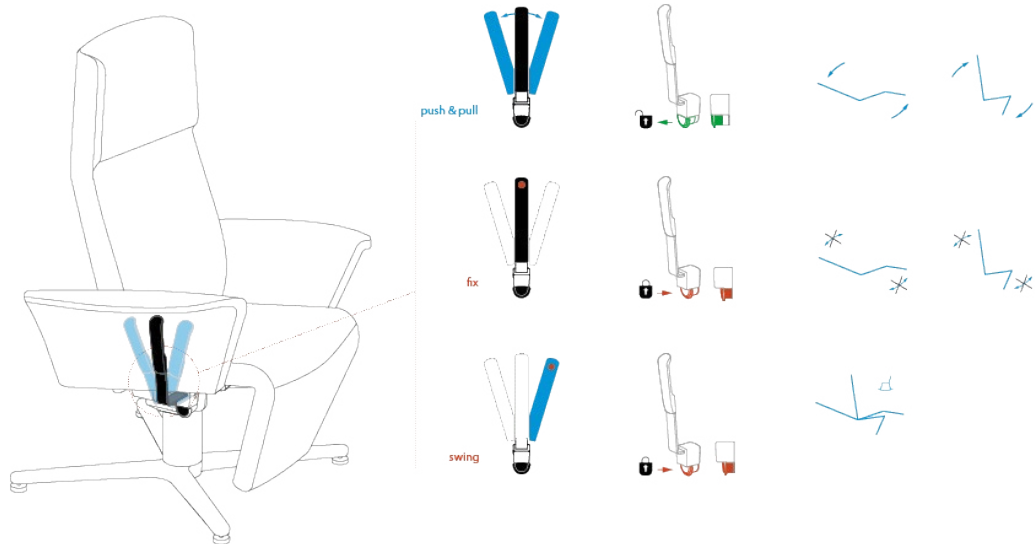

De Fusion elektrisch is standaard voorzien van een vaste batterij (via kabelvoeding). Via de eenvoudige handbediening kan de Fusion gemakkelijk in de gewenste relax-, of slaapposities geplaatst worden. Om meer bewegingsvrijheid te hebben binnen de ruimte, kan er geopteerd worden om te werken met een uitneembare en oplaadbare batterij.

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2021-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie



## OVERZICHT MODELLEN



FUSION HOME VAST



FUSION HOME  
WIELEN Ø 75



FUSION HOME  
WIELEN Ø 125



FUSION HOME  
WIELEN Ø 125  
CENTRAAL GEREMD

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2021-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie