

DYNAMISCHE POSITIONERING ORTHESE (DPO)

De DPO van REBACARE® biedt drukverlaging en pijnreductie. De DPO is voor preventief en curatief gebruik en biedt comfort voor patiënten met een verhoogd risico op decubitus, spierspanning en contracturen waardoor wisselhouding nodig is. Door juist te positioneren en met de hand te strijken tussen patiënt en het kussen kan het overtollige lucht door de filters eruit worden gestreken. Daarna sluit het filter zich automatisch. Hierdoor wordt een individuele mal gecreëerd van het lichaam. De patiënt wordt comfortabel en volledig ondersteund zonder overdruk. Door deze handelwijze wordt pijn, decubitus, contracturen, spierspanning- en verslapping tegen gegaan.

DE DPO VAN REBACARE®


- De naden zijn volledig gelast en daardoor vocht- en bacteriëndicht

- Helpt kruisinfectie voorkomen
- Het ademend filter is vochtafstotend en luchtdoorlatend
- Helpt op juiste wijze positioneren zonder allerlei losse steunen
- Het lichaam wordt ontzien van druk
- Helpt eenvoudig obese patiënten te draaien voor het geven van zorg
- Voldoet aan de EPUAP-Norm
- Voorzien van CE-Keurmerk
- Kan gereinigd worden met 1000 ppm Chlorine, 70% alcohol, OxyFoam, OxyWipe of detergent.
- Past binnen de WIP richtlijnen
- Comfortabele zachte hoes
- Er zijn 3 soorten hoezen leverbaar

DE DPO VAN REBACARE® IS INZETBAAR VOOR:

- Alle ziekenhuisafdelingen, onder andere afdeling Intensive Care (IC)
- Verpleeg- en verzorgingshuizen
- Revalidatiecentra
- Particulier / thuis

Het ademend filter is vochtafstotend en luchtdoorlatend

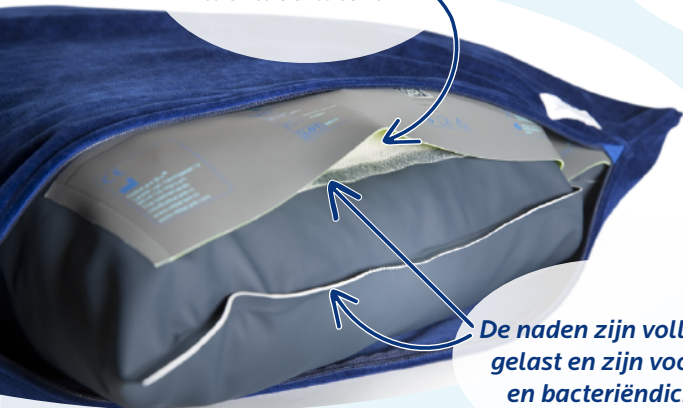

De naden zijn volledig gelast en zijn vocht- en bacteriëndicht

BIJPASSENDE HOEZEN ZIJN LEVERBAAR IN 3 VARIANTEN:

- 1 100% **katoenen hoezen beschikbaar** (krimpvrij en op 95 graden te wassen)
- 2 100% **katoenen stretch hoezen** (krimpvrij en op 60 graden te wassen)
- 3 **Standaard Nicky hoezen** (80% katoen en 20% polyester en op 60 graden te wassen)

DIVERSE SOORTEN VULLINGEN 1 2 3

1 GESILICONISEERDE HOLLE VEZEL EN EPS (PARELS)

Een zeer goede kwaliteit met behoud van volume en vorm. Het heeft een hoog veerkrachtig vermogen. Een combinatie van twee soorten (2 3) vullingen. Het biedt ondersteuning en kan goed druk reduceren.



2 GESILICONISEERDE HOLLE VEZEL

De vezel is veerkrachtig, hol en licht. Voelt comfortabel aan en vervormt niet. Door de veerkrachtigheid is het zeer geschikt om goed druk op te vangen en biedt het goede ondersteuning.



3 EPS (PARELS)

Deze identieke EPS parels (1 millimeter groot) zorgen ervoor dat de cliënt optimaal wordt ondersteund. Door de combinatie van lucht en parels wordt er drukreductie gecreëerd. Een lichaamsaf-druk wordt gemaakt, waar-door perfect aangesloten ondersteuning wordt geboden.



MINIMA-MAATJE

Is een klein en multifunctioneel kussen. Geschikt voor onder het hoofd, tussen de knieën en tegengesteld steunen in zijligging.

Omschrijving: Mini-Maatje
Maten: breed 35 cm x hoog 30 cm
Artikelnummer: 77711
CE: NL-CA002-2014-33425



HOOFDKUSSEN MAXIMA

Ervaar ondersteuning en ultiem comfort met het hoofdkussen Maxima.

Omschrijving: hoofdkussen Maxima
Maten: breed 70 cm x hoog 60 cm
Artikelnummer: 7777
CE: NL-CA002-2014-33425



SUPPORT

Support zorgt voor een 30 graden zijligging en wordt samen met Mini-Maatje toegepast. Ook een goede hulp bij 15 graden buikligging.

Omschrijving: Support
Maten: breed 205 cm x hoog 35 cm
Artikelnummer: 7779
CE: NL-CA002-2014-33425



FORMA

Voor goede ondersteuning langs het hele lichaam. Het lichaam wordt niet gecorrigeerd, maar geaccepteerd.

Omschrijving: Forma
Maten: breed 200 cm x hoog 35 cm
Artikelnummer: 77716
CE: NL-CA002-2014-33425



TWISTER

Legt stuit, wervelkolom en hielen vrij.
Handig in gebruik op de Intensive Care.
Twister wordt met minimaal draaien
onder de cliënt gebracht. Vaak wordt
Twister gebruikt in combinatie met Luna.
Bij vlakke buikligging wordt het scrotum
vrij gelegd.

Omschrijving: Twister

Maten: breed 235 cm x hoog 16 cm

Artikelnummer: 77715

CE: NL-CA002-2014-33425



LUNA

Te gebruiken als hoofdkussen en is
geschikt voor het tegengesteld steunen
onder de knie. In combinatie met Role
als abductiekussen tussen de benen.
Luna is een handige hulp voor de 15
graden buikligging. Het legt het scrotum
en de borst vrij. En als ondersteuning bij
de enkels in rugligging.

Omschrijving: Luna

Maten: breed 70 cm x hoog 30 cm

Artikelnummer: 77717

CE: NL-CA002-2014-33425



LUNA PEARL

(CVA) hemiplegie armlegger voor in bed
of stoel. Ook een goede
anti-spitsvoetsteun bij rugligging.
Handig in gebruik onder de ellebogen
bij zwaar leunen ten gevolge van
bijvoorbeeld benauwdheid (COPD).
Geschikt voor onderarm ondersteuning
bij schouderfractuur of cuff ruptuur.

Omschrijving: Luna Pearl

Maten: breed 70 cm x hoog 30 cm

Artikelnummer: 77721

CE: NL-CA002-2014-33425



COMFORT EN COMFORT XL

Comfort legt achterhoofd, schouders en
ellenbogen vrij. Comfort XL legt daar-
naast ook de wervelkolom en stuit vrij.
Beiden zijn tegengesteld te gebruiken
om onderuitzakken tegen te gaan.

Omschrijving: Comfort en Comfort XL

Maten Comfort: br 100 cm x hg 35 cm

Maten Comfort XL: br 150 cm x hg 35 cm

Artikelnummer: 77710(L) en 77710(XL)

CE: NL-CA002-2014-33425



FREE EAR® OORKUSSEN

Legt het oor vrij. Door A op B te plaatsen
(eventueel vast zetten) ligt het achter-
hoofd vrij.

Omschrijving: Free Ear® Oorkussen

Maten: breed 65 cm x hoog 50 cm

Artikelnummer: 7776

CE: NL-CA002-2014-33425



FREE EAR® TUBE BUIKLIGGING KUSSEN

Legt het oor vrij en is geschikt voor buik-
ligging. Geeft ruimte voor de Tube. Legt
het oor vrij en voorkomt oor decubitus.
Plaatst het hoofd exact vlak voor goede
houding. Free Ear® is gepatenteerd.

Omschrijving: Free Ear® Tube Buikligging
kussen

Maten: breed 65 cm x hoog 50 cm

Artikelnummer: 7776 T

CE: NL-CA002-2014-33425



ROLE

Role is geschikt voor onder de knieën (fowler) en tegen het door- en terug rollen. Role is in combinatie met de Luna tussen de benen een flexie abductiekussens. Role is te gebruiken onder de ellebogen bij (zwaar) ondersteunen ten gevolge van bijvoorbeeld benauwdheid (COPD).

Omschrijving: Role

Maten: breed 95 cm x hoog 35 cm

Artikelnummer: 7778

CE: NL-CA002-2014-33425



DUOROLE

Duorole is geschikt voor het vrijleggen van de hielen. Ter voorkoming van wrijfdecubitus. Samen met de fowler haalt het druk weg van de stuit en zitbeenderen. Zorgt voor een betere spiertonus, helpt bij het doorbreken van spasmen en voorkomt contractuurvorming.

Omschrijving: Duorole

Maten: (2x) breed 95 cm x hoog 35 cm

Artikelnummer: 7778

CE: NL-CA002-2014-33425



CRESCENT

Te gebruiken als nekondersteuning en is geschikt als voorhoofd kussen in de buikligging. En als ondersteuning bij de enkels in rugligging.

Omschrijving: Crescent

Maten: breed 50 cm x hoog 25 cm

Artikelnummer: 77718

CE: NL-CA002-2014-33425



FLEXIE ABDUCTIE

Is bestemd voor preventief en curatief gebruik voor patiënten met decubitus aan stuit, zijbeenderen of tussen de knieën. Het bovenste deel van Flexie Abductie kan worden gevuld met Luna Pearl. Flexie Abductie is geschikt voor patiënten met contracturen (dwangstand). Bij deze dwangstand heeft het aangedane gewricht zijn soepelheid verloren en is stijf geworden. Spieren en pezen zijn verkort en hierdoor kan een gewricht in een bepaalde stand blijven staan.

Omschrijving: Flexie Abductie

Maten: breed 90 cm x hoog 40 cm

Artikelnummer: 77727

CE: NL-CA002-2014-33425



MULTI 54 EN MULTI 64

Voor ondersteuning van het been in een beenlade van een rolstoel. Ook handig om te gebruiken voor armondersteuning in bed of rolstoel met werkblad. Multi 54 en Multi 64 neemt druk ter plaatse weg en houdt de arm op zijn positie. Handig om de arm van patiënt op te leggen als deze steeds naast het bed valt. Ze zijn geschikt om in te zetten bij spierverslapping of verstijving. Elleboog decubitus wordt hierdoor voorkomen. Ook zijn ze geschikt om de heup te ondersteunen. Dit kan eventueel gebeuren in combinatie met Stabilo.

Omschrijving: Multi 54 en Multi 64

Maten Multi 54: breed 54 cm x hoog 35 cm

Artikelnummer: 77725

CE: NL-CA002-2014-33425

Maten Multi 64: breed 64 cm x hoog 35 cm

Artikelnummer: 77726

CE: NL-CA002-2014-33425



DEKENBLOK

Is bestemd voor preventief en curatief gebruik. Voor patiënten met een verhoogd risico op teen- en hieldecubitus. Voor patiënten met een verhoogd risico op spitsvoeten ten gevolge van druk, immobiliteit en spasmen.

- Kan gereinigd worden met 1000 ppm Chlorine, 70% alcohol, OxyFoam, OxyWipe of detergent
- Makkelijk opbergbaar
- Beschadigt geen bedden en matrassen
- Voorzien van CE-Keurmerk

Omschrijving: Dekenblok

Artikelnummer : 7774

Maten: breed 75 cm x hoog 18 cm

CE: NL-CA002-2013-29284



STABILO

Is bestemd voor preventief en curatief gebruik. Voorkomt omklappen voor patiënten met een verhoogd risico op endo- en exorotatie. Samen in gebruik met Dekenblok wordt de spitsvoet voorkomen. Hierdoor wordt een verhoogd risico op spitsvoeten ten gevolge van omklappen tegengegaan (bv. na CVA, dwarslaesie gips en geriatrie).

Omschrijving: Stabilo

Artikelnummer : 7773

Maten: breed 20 cm x hoog 12 cm

CE: NL-CA002-2013-29283



VERBANDSCHOEN

Is bestemd voor preventief en curatief gebruik voor patiënten met of kans op hieldecubitus.

- Unieke samengestelde vulling, die een ideale drukverdeling creëert
- Legt de hiel, malleolus en de achillespees volledig vrij
- Voorkomt hieldecubitus
- Neemt pijn ter plaatse weg
- Veilige anti-slipzool
- Stabiliseert het been in gebruik met de Stabilo (voorkomt omklappen)
- Voldoet aan de EPUAP norm
- Past in het val preventie beleid
- Voorzien van CE keurmerk
- Wasbaar van 60 tot maximaal 95 graden

Omschrijving: Verbandschoen

Artikelnummer: 7771

Maten: breed 30 cm x hoog 25 cm

CE: NL-CA002-2011-21717



**REBACARE® GEEFT 2 JAAR
PRODUCTGARANTIE OP DE DPO**
**REBACARE® GEEFT 6 MAANDEN
PRODUCTGARANTIE OP DE
VERBANDSCHOEN**