

GLIDECOMFORT GLIJLAKEN

Zorgvragers herpositioneren en verplaatsen op een zeer efficiënte manier.



De GlideComfort is een ergonomisch en economisch verantwoord hulpmiddel voor verplegend personeel waarbij de zorgvrager op een zeer comfortabele en veilige manier verplaatst kan worden.

De GlideComfort kan eveneens ingezet worden als trauma transfer-materiaal van de brancard naar de RX-tafel en de OK-tafel. Dit trauma transfer-hulpmiddel geeft geen hinder bij RX-opnames (examen protocol test mat radiopaque RZ H. Hartziekenhuis Tienen).

De GlideComfort is tevens een incontinentielaken met een absorberende kracht tot 3 liter.

Voordelen:

- Vermindert de fysieke belasting van hulpverleners.
- Efficiënter werken.
- Ergonomisch: besparend voor de rug.
- Economisch: kostenbesparend. Er zijn geen inco-onderleggers of andere onderlagen meer nodig.
- Tijdswinst.
- Kan tot 3 liter absorberen.
- Door zijn structuur zal de zorgvrager niet wegglijden wanneer de rugleuning omhoog staat.
- De zorgvrager zal minder pijn ervaren door verminderde wrijving en druk tijdens transfers.
- De zorgvrager kan op een comfortabele en veilige manier verplaatst worden.

Kenmerken:

- Een beschermstof bestaande uit meerdere lagen voor het absorberen van vloeistof/urine in combinatie met een glijzeil en handvaten om handelingen uit te voeren.
- Tot 200 kg draagkracht.
- Zes handvaten aan elke kant voor een stevige en veilige grip.
- De zilveren, satijnen kant langs onder, het groene protectiemateriaal langs boven.
- De zorgvrager ligt rechtstreeks op het groene beschermingsmateriaal.
- De GlideComfort wordt rechtstreeks op het hoeslaken van de matras gelegd.
- De GlideComfort wordt geplaatst voorbij de schouders wat inhoudt dat de zorgvrager op elk moment kan verschoven worden of klaar is voor transfer.

Wasinstructies:

- Aangewezen temperatuur 70° C – maximumtemperatuur is 90° C.
- Niet wassen met ritsen of velcromaterialen.
- Geen bleekmiddelen, wasverzachters of andere chemische additieven gebruiken.
- Drogen kan op 70° C, maximum 80° C.

Opgepast:

- Niet te gebruiken bij schade.
- Maximumgewicht: 200 kg.
- Bij voorkeur met twee zorgverleners werken.
- Niet gebruiken met tilliften.