

INSTRUCTIEKAART

Clinicare 100 HF




MATRASSEN AANSLUITEN

Het matras is aangesloten op een compressor aan één kant (System Control Unit - systeembesturingseenheid) en op de matrasaansluitingen aan de andere kant.

Sluit het matras aan op de SCU:

- Druk de connector in onder een hoek van 45°, totdat hij vastklikt. 1.

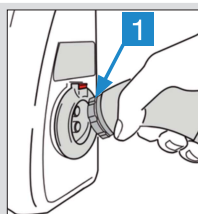

Sluit de luchtleidingen aan op het matras zonder de MCM-modus:

- Open de vergrendelingen van de matrasaansluitingen 2.
- Duw de luchtleidingen 3 op de matrasaansluitingen.

Beide kleppen ondersteunen de Statische Modus en de Alternierende Druktherapie-Modus. De volgorde van de aansluiting van de luchtleidingen is niet belangrijk.



Sluit de luchtleidingen aan op het matras in de MCM-modus:


- Open de vergrendelingen van de matrasaansluitingen 2.
- Duw de luchtleidingen 3 op de matrasaansluitingen.

Het grotere ventiel ondersteunt de MCM-functie. Kleinere kleppen ondersteunen de Statische Modus en de Alternierende Druktherapie-Modus. De volgorde van de aansluiting van de luchtleidingen is niet belangrijk.




SCU (SYSTEEMBESTURINGSEENHEID)

CliniCare 100 HF

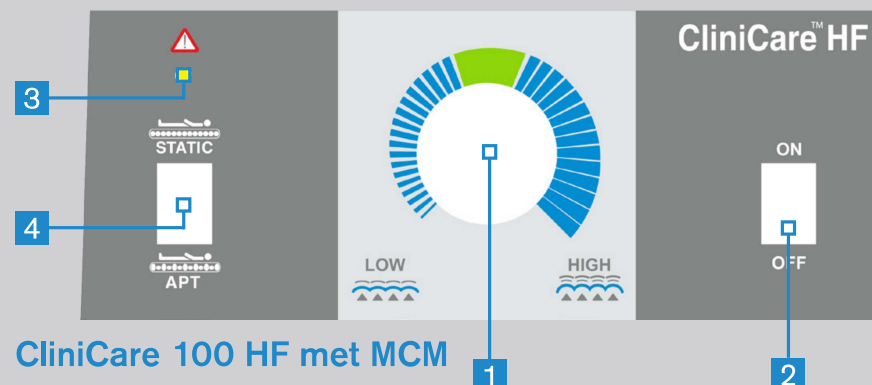

CliniCare 100 HF met MCM

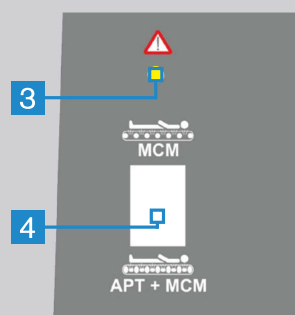

Pos.	Functie / Indicator	Functiebeschrijving
1	Drukregeling	Drukaanpassing
2	Hoofdschakelaar	AAN
		UIT
3	Indicator - foutcodes	Geeft een systeemfout aan (zie de gebruikershandleiding).
4	Modusselectieknop	Geeft de gekozen modus aan

MODUSSELECTIE

Modus kiezen:

Zet de knop voor de modusselectie 4 op de stand van de gewenste modus.

wissner-bosserhoff Nederland B. V.,
Keerweer 42, 3316 KA Dordrecht
Tel.: +31 (0)78 6521850
Fax: +31 (0)78 6521855
e-mail: sales@wi-bo.eu, www.wi-bo.nl

INSTRUCTIEKAART

Clinicare 100 HF



D9R003VC0-0207_01

SCU (SYSTEEMBESTURINGSEENHEID)



STATIC

Statische Modus

De Statische Modus past de druk in het reactieve matras aan, bepaalt de stevigheid van het oppervlak en zorgt voor een stabiel matrasoppervlak. Deze modus helpt de patiënt bij het in of uit het bed stappen en bij de uitvoering van verpleegkundige procedures. Het is mogelijk om de druk aan te passen met handmatige besturing van het drukniveau.



APT

Alternierende Druktherapie-Modus

CliniCare 100 HF werkt met wisselende druk in een 2-cellensysteem in een cyclus met intervallen van 12 minuten, die de natuurlijke beweging van de patiënt imiteert. Tijdens de intervallen verandert de alternierende modus en de klinische effectiviteit van het matras wordt sterker vergroot dan in de Statische Modus of in de toestand zonder een aangesloten compressor.



MCM

MCM-modus

Deze modus behoort tot de versie van dit matras die MCM ondersteunt. Deze modus omvat tevens de Statische Modus met MCM-functie. De Statische Modus past de druk in het reactieve matras aan, bepaalt de stevigheid van het oppervlak en biedt een stabiel matrasoppervlak. Deze modus helpt de patiënt bij het in of uit het bed stappen en bij de uitvoering van verpleegkundige procedures. Het is mogelijk om de druk aan te passen met handmatige besturing van het drukniveau.



APT + MCM

Wisselende Druktherapiemodus en

MCM-modus

CliniCare 100 HF werkt met wisselende druk in een 2-cellensysteem in een cyclus met intervallen van 12 minuten, die de natuurlijke beweging van de patiënt imiteert. De versie van het matras met MCM-modus omvat Micro-klimaatregeling. Tijdens de intervallen wijzigt de alternierende modus zich en stijgt de klinische effectiviteit van de matras sterker dan in de Statische Modus of in de toestand zonder aangesloten compressor.

DRUKAANPASSING EN GEBRUIK VAN DE COMPRESSOR

Het reactieve matras Clinicare 100 HF verhoogt de effectiviteit, afhankelijk van de behoeften van de patiënt.

Matras zonder compressor:

Het klinische effect wordt bereikt door drukverdeling in het matras, deze bestaat uit wisseling van de druk in een 2-cellensysteem. Deze wisseling is afhankelijk van de belasting van het matras. Als een cel meer belast wordt (bv. in het sacrale gebied van de patiënt of het bovenste gedeelte van de borstkas), wordt de lucht door deze cel automatisch overgebracht naar een andere cel. De druk wordt daarom van meer kritische gebieden naar minder kritische gebieden verplaatst en er wordt een ideale drukverlichting bereikt.

- In deze toestand biedt het matras geen MCM-functie.

Matras met compressor:

Als het klinische effect van het matras zonder compressor niet voldoende is, kan de compressor op het matras worden aangesloten. Op deze manier verkrijgt het matras in de versie met MCM de MCM-functie en de mogelijkheid van alternierende druk.

- Als een patiënt minder mobiel is, is de MCM-functie voor hem geschikt, omdat deze functie actief vocht verwijdt. Vochtontwikkeling is een van de oorzaken van bedproblemen.
- Voor patiënten in meer kritieke toestand moet het matras worden overgeschakeld naar de Alternierende Druktherapie-Modus om het klinische effect te vergroten.
- In de Alternierende Druktherapie-Modus is het klinische effect groter dan in de:
 - MCM-modus (Clinicare 100 HF met MCM)
 - Statische modus (Clinicare 100 HF zonder MCM)
 - Modus zonder compressor
- Als het ondersteuningsniveau goed is, maar de patiënt een groter comfort nodig heeft, kan het drukniveau worden verlaagd door de roterende kiesschijf voor drukregeling naar links te draaien.

Om de druk aan te passen:

- Draai de roterende kiesschijf naar links om de druk te verlagen.
- of -
- Draai de roterende kiesschijf naar rechts om de druk te verhogen.

  **wissner-
bosserhoff**