

Q-SERIE

SEDEO PRO ZITSYSTEEM

ZITSYSTEEM MET UITGEBREIDE
CONFIGURATIE- EN
VERSTELMOGELIJKHEDEN

SEDEO
SEATING & POSITIONING



Q300 M Mini
SEDEO PRO



Q400
SEDEO PRO



Q500
SEDEO PRO



Q700
SEDEO PRO
SEDEO PRO HD



Q700
SEDEO PRO
ADVANCED



Q700 UP
SEDEO PRO
ADVANCED

ROLSTOELPROFESSIONALS OVER

Q Serie

'ALS JE MET ÉÉN MODEL HEBT GEWERKT, KEN JE ZE ALLEMAAL!'



Q-SERIE

ALTIJD EEN OPLOSSING

DE ELEKTRISCHE ROLSTOELN UIT DE Q-SERIE ZIJN ZO VEELZIJDIG ALS DE MENSEN DIE ZE GEBRUIKEN, MET KEUZE UIT DIVERSE ONDERSTELLEN EN AANDRIJVINGEN, UITGEBREIDE ELEKTRONICA-OPTIES EN POSITIONERINGSSYSTEMEN SEDEO PRO ADVANCED, UP SEDEO PRO ADVANCED EN SEDEO PRO.

ONTDEK HIER DE NIEUWSTE SEDEO PRO ZITOPLOSSINGEN, GEHEEL AFGESTEMD OP DE Q-SERIE, ELEGANT, EFFICIËNT EN EFFECTIEF.



SEDEO PRO ZITSYSTEEM

INLEIDING

SEDEO PRO zitsysteem – Individuele behoeften beantwoord	4
Van wetenschap naar praktijk – Zithouding	6
Van wetenschap naar praktijk – Zitstabiliteit	7

SEDEO PRO ZITSYSTEEM

Snel en eenvoudig instelbaar	8
Uitgebreide configuratiemogelijkheden	12

SEDEO PRO ZIT- & RUGKUSSENS

Overzicht rugleuningen	18
Overzicht zittingen	28

SEDEO PRO ACCESSOIRES

Hoofdsteunen	34
Positionering & ondersteuning	35
Overige accessoires	37
Bekleding en reiniging	39

SEDEO PRO COMBINEREN MET JAY & WHITMYER ACCESSOIRES

WHITMYER hoofdsteunen	41
JAY zit- en rugkussens	42

MEER OVER Q-SERIE & SEDEO PRO

Switch-It & Link-It	44
Nieuwste Sedeo Pro ook voor Ibis en 20/40	45
Meer Q-Serie zitoplossingen – SEDEO PRO ADVANCED zitsysteem	46
Meer Q-Serie zitoplossingen – UP SEDEO PRO ADVANCED zitsysteem	47
Built-4-Me	48
CE-verklaring	49
Hoe wij meten	50
Specificatie-overzicht	51

SEDEO PRO ZITSYSTEEM

INDIVIDUELE BEHOEFTE BEANTWOORD

HET SEDEO PRO ZITSYSTEEM VERHOOGT HET COMFORT EN DE ZELFREDZAAMHEID IN HET DAGELIJKSE LEVEN. HET GEAVANCEERDE HIGH-TECH ZITFRAME IS VOLLEDIG INSTELBAAR EN CONFIGUREERBAAR.

Het ontwerpen van een zitsysteem betekent het ontwerpen van mogelijkheden. Mogelijkheden voor het creëren van individuele zitoplossingen. Zitoplossingen die complexe persoonlijke behoeften beantwoorden.

De behoeften van een rolstoelgebruiker omvatten complexe klinische eisen voor een optimale ondersteuning van het lichaam. Maar ook zelfredzaamheid bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en allerlei andere praktische en sociale aspecten spelen een rol.

Vanuit die behoeften aan persoonlijke zitoplossingen en mogelijkheden is het SEDEO PRO zitsysteem ontworpen. Daarom heeft SEDEO PRO uitgebreide instel- en configuratiemogelijkheden met een breed assortiment:

- Zittingen & rugleuningen
- Beensteunen, knie- en dijbeensteunen
- Armsteunen, zijschilden & rugpelotten
- Hoofdsteunen
- Accessoires



**SEDEO PRO IS TE COMBINEREN MET VERSCHILLENDE
ONDERSTELLEN EN AANDRIJVINGEN UIT DE Q-SERIE**

KLINISCHE BEHOEFTE



Q300 M Mini

AANDRIJVINGEN
MWD



Q400

AANDRIJVINGEN
RWD
MWD
FWD



Q500

AANDRIJVINGEN
RWD
MWD
FWD
HWD



Q700

AANDRIJVINGEN
RWD
MWD
FWD

Q Serie

RWD: Achterwielaandrijving
MWD: Midwielaandrijving
FWD: Voorwielaandrijving

PRESTATIES

SEDEO PRO ontwikkelt zich voortdurend verder. Er zijn vele configuraties en combinaties mogelijk: met Q-Serie of handbewogen Ibis onderstellen (zie pagina 45).

Voor nog meer geavanceerde mogelijkheden is SEDEO PRO voortaan ook eenvoudig te combineren met JAY™ zit- en rugelementen en met het uitgebreide WHITMYER™ hoofdondersteuningsprogramma.

Door ontwikkelingen op gebied van modulariteit, functionaliteit, comfort en design kunnen persoonlijke wensen en behoeften telkens eenvoudiger en beter beantwoord worden en zijn ook snelle aanpassingen mogelijk bij veranderende behoeften.

JAY[®]
Superior Clinical Seating.

WHITMYER[®]




VAN WETENSCHAP NAAR PRAKTIJK

ZITHOUDING


EEN GOEDE ZITHOUDING VERGT MINIMALE ENERGIE EN BELAST PEZEN, BOTTEN EN GEWRICHTEN ZO MIN MOGELIJK. HET GEWICHT IS VERDEELD OVER ZITVLAK, VOETEN, ARMEN EN RUG.

EEN GOEDE ZITHOUDING IN VIER EENVOUDIGE STAPPEN:

- Neem de doelstellingen van de individuele rolstoelgebruiker als uitgangspunt.
- Bepaal welke zithouding (of zithoudingen) qua posturale uitlijning, stabiliteit en balans (een toestand waarin het lichaam in dynamisch evenwicht is) het beste aan de doelstellingen voldoet.
- Kies de ondersteuning die hierbij het beste past (de juiste mate van steun op de juiste plekken) en positioneer de gebruiker als volgt: begin bij bekken, dijën en voeten, en werk daarna naar boven via wervelkolom en thorax richting hoofd.
- Zorg voor een goede drukverdeling, gebruik het oppervlak van zitting en rugleuning optimaal en vermijd piekdrukken en schuifkrachten.

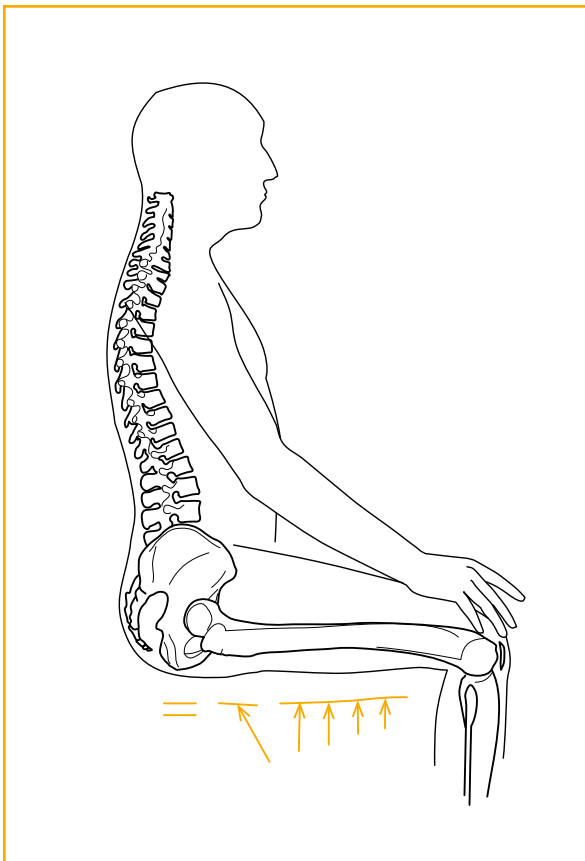

Druk optimaal verdelen over het zitvlak

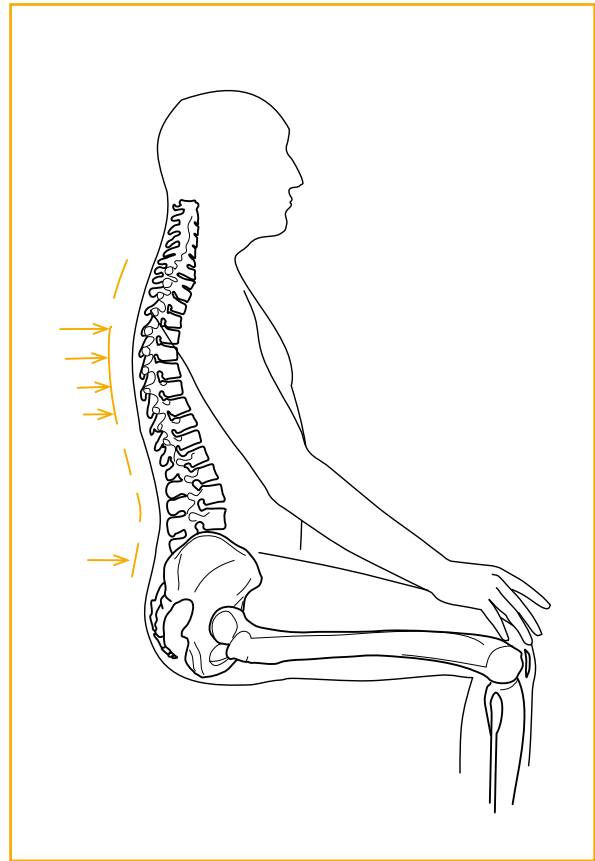

Druk optimaal verdelen over het rugvlak

VAN WETENSCHAP NAAR PRAKTIJK

ZITSTABILITEIT

EEN GELIJKMATIGE DRUKVERDELING EN STABILITEIT IN TWEE RICHTINGEN:
KLINISCHE TOEPASSING VAN WETENSCHAPPELIJKE (ERGONOMISCHE)
ZITPRINCIPES.

Een effectief werkende zitting en rugleuning zorgen voor een goede drukverdeling en bieden de gebruiker voldoende stabiliteit om elke gewenste activiteit in een daarbij passende zithouding uit te voeren.

De behoefte aan stabilisering verschilt per gebruiker.

Het bekken is een complexe botstructuur die in alle richtingen (driedimensionaal) kan kantelen en bewegen. Zitten zonder enige vorm van ondersteuning betekent 'balanceren op de zitbenen' (tubers). Die balans vergt continu aanspannen van spieren voor de juiste bekkenstand: het zwaartepunt wordt beïnvloed door de samenwerking van buig- en strekspieren in heup en wervelkolom.

STABILISERING VAN HET BEKKEN IN TWEE RICHTINGEN:

Stabiliteit in de rijrichting

Contour en opbouw van een zitting helpen om het bekken te stabiliseren en onderuitzakken te voorkomen. Dit kan door het aanbrengen van een taludvormig profiel, een gesingelde uitsparing of extra ondersteuning van de heup- en dijbenen. De rugleuning moet daarbij voldoende steun bieden om de wervelkolom te ontlasten en achteroverkantelen van het bekken te voorkomen.

Stabiliteit in zijwaarts richting


Naast stabiliteit in de rijrichting is ook zijwaartse stabilisering van belang. Het verbetert de zithouding en het activiteitsniveau van de gebruiker. Steunname van de trochanters ontlast bovendien de tubers en vermindert daarmee de kans op doorzitten.

GELIJKMATIGE DRUKVERDELING:


Drukverdeling

Het gewicht van de gebruiker veroorzaakt druk op botten, huid en zachte weefsels. Het zitsysteem spreidt deze belasting zo goed mogelijk, helpt de meest kritische zones te ontlasten, voorkomt piekdrukken en schuifkrachten en vermindert de kans op decubitus. Contouren en opbouw van zitting en rugleuning kunnen helpen om de huid optimaal te beschermen:


- Het gebruikersgewicht wordt verdeeld over een zo groot mogelijk oppervlak
- De piekdruk op uitstekende botdelen zoals de tubers wordt verminderd door ondersteuning via minder kritische zones
- Vervorming van huid- en onderliggende weefsels wordt tot een minimum beperkt.

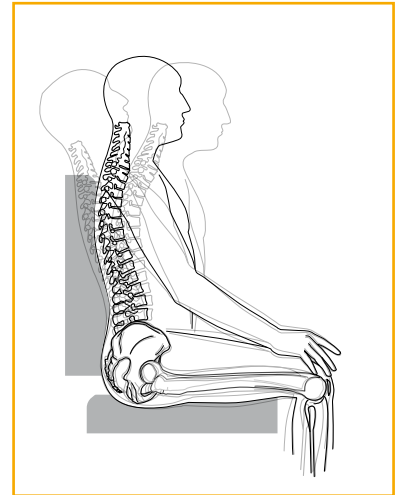

Stabilisering van het bekken in de rijrichting

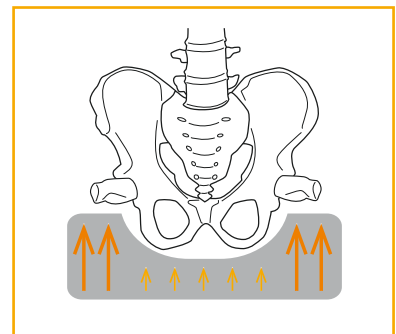

Steunname van de trochanters verbetert de zijwaartse stabiliteit

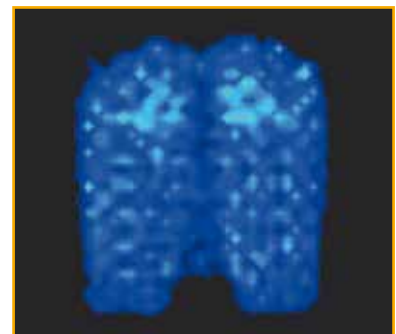

Ontlasting van kritische zones door drukverdeling naar andere zones

SEDEO PRO

SNEL EN EENVOUDIG INSTELBAAR

DE JUISTE ZITHOUDING VOOR ELKE GEBRUIKER DOOR EEN PROFESSIONAL EENVOUDIG IN TE STELLEN

- Grote flexibiliteit in gebruik / volledig instelbaar
- Intuïtieve instellingen. Met één sleutel instelbaar (inbussleutel 5 mm) / één eenvoudige werkwijze / merktekens en schaalverdelingen wijzen zichzelf / geen extra onderdelen nodig
- Onderdelen zijn traploos in te stellen, te positioneren, te draaien, breder te maken om de juiste ondersteuning te kunnen bieden precies daar waar nodig
- Wel zo handig: onderdelen of schroefjes met drop-out bescherming vallen er niet zomaar uit
- Instellingen uitvoerbaar terwijl de gebruiker in de rolstoel zit, instelpunten vanaf de zijkant eenvoudig bereikbaar. Handig voor de cliënt die tijdens het verstellen kan blijven zitten.



**EEN RUIM INSTELBEREIK VOOR ZITBREEDTE EN ZITDIEPTE MAAKT
SEDEO PRO EEN IDEALE KEUZE VOOR HERVERSTREKKING.
PAST ALTIJD, ALTIJD HET JUISTE FRAME.**

Zitbreedte Traploos instelbaar 380 – 560 mm door verschuiven van de zitplaten.



Noot Aanvullende fijnafstelling van de zitbreedte mogelijk door instellen van de armlegger + 20 mm tot - 20 mm aan beide kanten.

Zitdiepte Traploos instelbaar 400 – 600 mm.



Noot Door gebruik te maken van alternatieve bevestigingsgaten in de zitkussens kan de zitdiepte met een extra + 20 mm vergroot worden.

Zithoogte 410 tot 490 mm



MAKKELIJK ONDERRIJDEN

Natuurlijk is ook de zithoogte instelbaar. De minimale zithoogte is belangrijk om makkelijk onder een tafel- of aanrechtblad te kunnen rijden.

SEDEO PRO

SNEL EN EENVOUDIG INSTELBAAR

ZELFSTANDIGHEID EN COMFORT VERGROTEN

Een lift/kantelmodule vergroot de zelfredzaamheid aanzienlijk. Makkelijkere transfers, voorwerpen in kastjes pakken, op ooghoogte met mensen kunnen praten: dat zijn zaken die er toe doen voor veel mensen met een elektrische rolstoel.


Hoog-laagbereik

300 mm (in combinatie met kantelverstelling 0° tot 30°)



Kantelbereik

0° tot 30° | -5° tot 25° | 0° tot 50° | -5° tot 45°

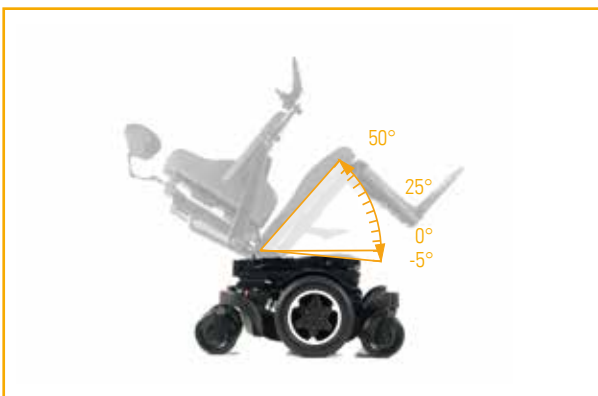

Afhankelijk van de klinische behoeften en persoonlijke voorkeuren kan gekozen worden voor een hoog/laag module met 0 tot 30 kantelverstelling, een hoog/laag module met 0 tot 50 kantelverstelling of alleen één van de aangeboden kantelverstellingen.

VOOR GROTE EN KLEINE MENSEN

Sedeo Pro wordt gebruikt door mensen groot of klein en met uiteenlopende klinische behoeften. Een eenvoudige en nauwkeurige verstelling van de rughoogte is daarbij belangrijk. Het railsysteem achterop de rugkussens maakt een snelle hoogteverstelling mogelijk over een groot bereik (niet i.c.m. mechanische rugverstelling).

Rughoogte 440 tot 620 mm



Eenvoudige traploze
instelling rughoogte
d.m.v. rails




Rugkussens in drie hoogtes:
440, 500 en 560 mm

ZITPOSITIE WISSELEN OM DE RUG TE ONTLASTEN

De ideale rughoek bestaat niet: die verschilt per persoon en moment. Bovendien is het vaak gewenst om de rughoek te kunnen wisselen en aanpassen aan activiteiten.

Rughoek 90 tot 120° (mechanisch)

90 tot 130° (gasveer of elektrisch) of **90 tot 150°** (biomechanisch)

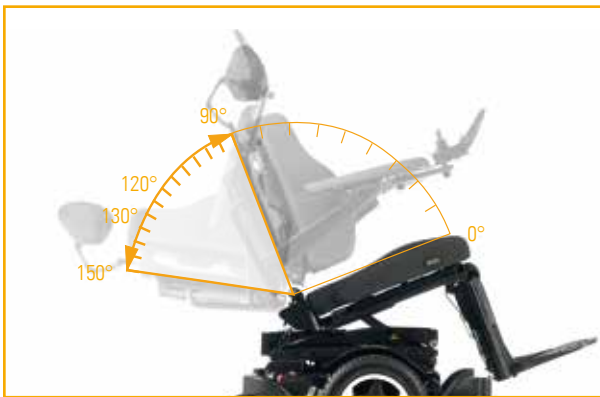

Noot Optioneel ook uit te voeren met neerklapbare rugleuning door middel van quick release

VERDEROP IN DEZE BROCHURE VINDT U MEER INFORMATIE
OVER INSTELMOGELIJKHEDEN EN INSTELBEREIK VAN
ARMSTEUNEN, BEENSTEUNEN, ETC.



Onderdelen ontwikkeld en
getest samen met experts
uit de praktijk



Mechanische rughoekinstelling:
handige merktekens en met één
sleutelbeweging handmatig
instelbaar.



Eenvoudige zitdiepteinstelling
voorzien van maatstrepen.

UITGEBREIDE CONFIGURATIEMOGELIJKHEDEN

**MAAK EEN KEUZE UIT DE VELE OPTIES EN STEL VOOR ELKE
GEBRUIKER DE JUISTE ZITOPLOSSING SAMEN.
ZONDER CONCESSIONS – PERFECT PASSEND.**

- Bovendien zijn veel elementen eenvoudig wegklapbaar of afneembaar ten behoeve van transfers en dergelijke.
- Verstellingen en bedieningen zijn gebruiksvriendelijk en duidelijk herkenbaar.

4 KEUZE UIT VIER RUGHOEKVERSTELLINGEN



Mechanische rughoekinstelling,
90°-120° Traploos en eenvoudig instelbaar
terwijl de gebruiker in de stoel zit.



**Gasveer rughoekverstelling, bedien-
baar door gebruiker,** 90°-130° Voor
gebruikers in staat om hun lichaamsgewicht
te verplaatsen. Rughoek verstellen via een
lichte druk van het lichaam.
Bedieningshendel onder de armsteun.



Elektrische rughoekverstelling,
90°-130° Makkelijk en comfortabel de
rughoek verstellen met een druk op de
knop.



**Biomechanische elektrische
rughoekverstelling met 100 mm
schuifkrachtreductie,** 90°-150° Het
unieke gepatenteerde mechanisme
verbetert de huidbescherming en zorgt dat
positioneringssteunen (inclusief kinarm)
over het hele verstelbereik van de rughoek
hun positie behouden.



6

KEUZE UIT ZES ZITVERSTELLINGEN



● **Combinatie elektrische kantel & hooglaagverstelling**

0 – 30° kantel met 0-300 mm hoog/laag

0 – 5° kantel met 0-300 mm hoog/laag



● **Mechanische kantelinstelling**

Instelbaar 0° | 3° | 6° | 9°

● **Elektrische kantelverstelling**

0° tot 30°

● **Elektrische kantelverstelling**

-5° tot 25°

● **Elektrische kantelverstelling**

0° tot 50°

● **Elektrische kantelverstelling**

-5° tot 45°




2

KEUZE UIT TWEE ZITRAILS



Zitrail kort Zitdiepte 400 - 520 - 560 mm

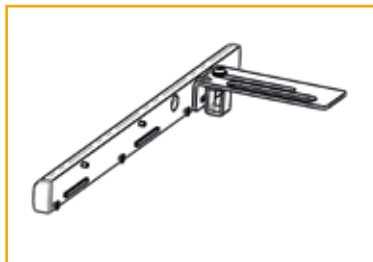

Zitrail lang Zitdiepte 460 - 560 mm

UITGEBREIDE CONFIGURATIEMOGELIJKHEDEN

OOK DE SEDEO PRO BEENSTEUNEN EN BEENSTEUN-ACCESSOIRES BIEDEN
VELE CONFIGURATIEMOGELIJKHEDEN

3 DRIE CENTRALE BEENSTEUNEN



Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 180 mm, automatisch lengte compenserend.
Onderbeenlengte 210 - 470 mm.
Beensteunhoek 90 - 180°. Enkelhoek +35 tot -15°.
Lengtecompensatie tot 180 mm.



Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 180 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer.
Onderbeenlengte 210 - 470 mm. Beensteunhoek 90 - 180°. Enkelhoek +35 tot -15°. Lengtecompensatie tot 180 mm.



Centrale beensteun, instelbaar, opklapbare en in hoek verstelbare voetplaat.
Onderbeenlengte 305 - 460 mm.
Beensteunhoek 70 - 120°. Enkelhoek +20 tot -40°.

TIP Lengtecompenserende beensteunen hebben het voordeel dat de knieën niet extra omhoog komen en de druk onder de voeten niet toeneemt.

2 TWEE ACCESSOIRES VOOR DE CENTRALE BEENSTEUNEN



Centrale kuitsteun, PU
Breedte: 300 mm
Hoogte: 215 mm



Kuitsteunen, PU
Breedte: 130 mm
Hoogte: 180 mm

3 DRIE WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN (MET DIVERSE ACCESSOIRES)



Beensteunen 70°, wegzwenkbaar.
Onderbeenlengte 350 - 510 mm.
Vaste kniehoek 70°.



Beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar.
Onderbeenlengte 350 - 510 mm.
Kniehoek 0 - 70°.



Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar.
Onderbeenlengte 350 - 510 mm.
Kniehoek 0 - 70°.

TIPS voor makkelijke transfers:

Terug naar ingeprogrammeerde transferhouding met één druk op de knop (lengte en hoek)

Motor stopt zodra de voetplaat op de grond staat dankzij extra inhibit.

8 ACHT ACCESSOIRES VOOR DE WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN



Voetplaten, gekoppeld
Enkelhoek onbeperkt.



Voetplaten, in hoek verstelbaar
Enkelhoek onbeperkt.

TIP Kies de juiste voetplaten:

Zitbreedte 380 - 400 mm
Zitbreedte 420 - 460 mm
Zitbreedte 480 - 520 mm
Zitbreedte 540 - 560 mm



Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar Breedte: 180 mm
Hoogte: 230 mm Diepte: 35 mm



Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar Breedte: 180 mm
Hoogte: 230 mm Diepte: 35 mm

TIP De standaard kuitplaatverdieper is traploos in diepte en breedte instelbaar



Amputatiesteun
Breedte: 180 mm
Hoogte: 230 mm Diepte: 35 mm



Kniekussens, PU
Breedte: 100 mm
Hoogte: 100 mm Diepte: 15 mm



Hielbanden



Kuitband

UITGEBREIDE CONFIGURATIEMOGELIJKHEDEN

3

KEUZE UIT DRIE ARMSTEUNEN EN DRIE TYPEN ZIJSCHOTTEN



Opklapbare single post armsteun.
Ideaal voor zijwaartse transfers



Afneembare single post armsteun



Single post armsteun SEDEO LITE
Volledig met sleutel instelbaar (dus niet door gebruiker)



Zijschotten. Biedt de meeste ruimte bij een zijwaartse transfer.
Lengte: 215 mm Dikte: 5-10 mm
Hoogte: 135 mm
Hoogte-instelbereik: 65 mm



Zijkanten, PU. Dikker dan het zijschot (+20 mm), te compenseren met de armlegger breedteverstelling.
Lengte: 270 mm Dikte: 20 mm
Hoogte: 140 mm
Hoogte-instelbereik: 65 mm




Zijkanten, wigvormig gepolsterd.
Inzetbaar bij abductie van de knieën. Omkeerbaar (dikste deel voor of achter).
Lengte: 450 mm Dikte: 35-70 mm
Hoogte: 120 mm
Hoogte-instelbereik: 65 mm



OF KIES VOOR EEN HORIZONTAAL BIJVENDE ARMSTEUN



Opklapbare horizontaal blijvende armsteun Ideaal voor zijwaartse transfers. Hoogteverstelling in 2 stappen: armsteun in hoogte en armlegger in hoek verstelbaar.

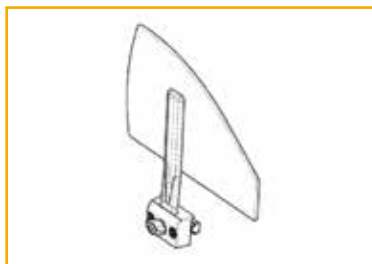

Zijschotten. Gemonteerd aan de zitrail.
Breedte: 235 mm
Hoogte: 145 mm
Hoogte-instelbereik: 190-215 mm (zitplaat tot hoogste punt)

TIP De horizontaal blijvende armsteunen (en bijbehorende optionele zijschotten) bieden de meeste ruimte bij een zijwaartse transfer.

4

VIER VERSCHILLENDE ARMLEGGERS



Armlegger PU 300 mm. Korte armlegger, handig bij het onderrijden van een tafel of bureau.

Armlegger PU 400 mm. Comfortabele P-vorm. Met extra ruimte aan de binnenzijde om de arm op te laten rusten.



Armlegger PU 450 mm. Extra breed



Comfort armlegger 400 mm.
Gepolsterde armlegger voor extra comfort



Hemi armsteun Komvormige PU hemioplegie armsteun



Armlegger diepteverstelling
100 mm (op single post armsteun)
140 mm (op hor. blijvende armsteun)



Armsteun diepteverstelling
250 mm (op zitrail kort)



Armlegger breedteverstelling
- 20 mm (op armsteun)



Armsteun breedteverstelling
- 20 mm | + 20 mm
(single post armsteun op zitrail)



Armlegger hoogteverstelling
(zitplaat tot bovenkant armlegger)
260 - 380 mm (op single post armsteun)
250 - 400 mm (op hor. blijvende armsteun)



Armlegger hoekverstelling
0 - 15° (op armsteun)

TIP Als de joystick en Ctrl-5-switch box aan dezelfde zijde worden gemonteerd, kies dan voor een kortere armlegger.

TIP Een P-vorm armlegger biedt extra oppervlak om de arm op te laten rusten. De opklapbare armsteun is zo ontworpen dat de armlegger bij het opklappen de rugleuning niet raakt.

TIP Plaats de naar achter wegklapbare armsteunen verder naar achteren om meer ruimte te krijgen voor een zijwaartse transfer. Plaats de armsteun verder naar voren om meer steun voor een voorwaartse transfer te krijgen.

TIP Het polsterdeel kan in 2 verschillende gootjes geplaatst worden, eventueel zelfs scheef zodat het elke arm goed kan ondersteunen.

SEDEO PRO

OVERZICHT RUGLEUNINGEN

	POSITIONERINGSBEHOEFTE			
	INZETBEREIK	Bewegings- vrijheid	Helpt onder- uitzakken voorkomen	Bevorderen laterale stabiliteit
GEPROFILEERD		● ● ●	●	●
GEPROFILEERD NASPANBAAR		● ●	● ●	● ●
PASSIEF DIEP CONTOUR		●	●	● ●
PASSIEF FLEXIBEL DIEP CONTOUR NASPANBAAR		●	● ● ●	● ● ●
ACTIEF FLEXIBEL DIEP CONTOUR NASPANBAAR		● ●	● ● ●	● ● ●
ACTIEF FLEXIBEL EXTRA DIEP NASPANBAAR		●	● ● ●	● ● ●

SEDEO PRO RUGKUSSEN GEPROFILEERD	P. 19
SEDEO PRO RUGKUSSEN GEPROFILEERD, NASPANBAAR	P. 20
SEDEO PRO RUGKUSSEN DIEP CONTOUR, PASSIEF	P. 21
SEDEO PRO RUGKUSSEN PASSIEF FLEXIBEL, DIEP CONTOUR, NASPANBAAR	P. 22
SEDEO PRO RUGKUSSEN ACTIEF FLEXIBEL, DIEP CONTOUR, NASPANBAAR	P. 23
SEDEO PRO RUGKUSSEN ACTIEF FLEXIBEL, EXTRA DIEPE CONTOUR, NASPANBAAR	P. 24

RUGKUSSEN GEPROFILEERD

COMFORTABEL ZITTEN



VOORGEVORMDE BASIS



Kenmerken:

- Voorgevormde basis, met lichte zijwaartse ondersteuning en comfortfoam vulling
- Ook te gebruiken in combinatie met wegzwenkbare laterale rompondersteuning
- Comforthoes of incontinentiehoes

Klinische toepassingen:

- Gebruiker heeft een stabiele zithouding
- Gebruiker heeft enige mate van bewegingsvrijheid nodig



BESCHIKBARE MATEN

HOOGTE	BREEDTE									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
44										
50										
56										

RUGKUSSEN GEPROFILEERD NASPANBAAR

VOORGEVORMDE BASIS MET VERSTELBARE SPANBANDEN DIE DE
RUGCONTOUR VOLGEN




Kenmerken:

- Voorgevormde basis, met lichte zijwaartse ondersteuning en verstelbare spanbanden die de rugcontour volgen
- Individueel instelbaar
- Comfortfoam vulling
- Ook te gebruiken in combinatie met wegzwenkbare laterale rompondersteuning
- Comforthoes of incontinentiehoes

Klinische toepassingen:

- Gebruiker heeft een stabiele zithouding
- Gebruiker heeft instelbare ondersteuning van de rugcontour of van het bekken

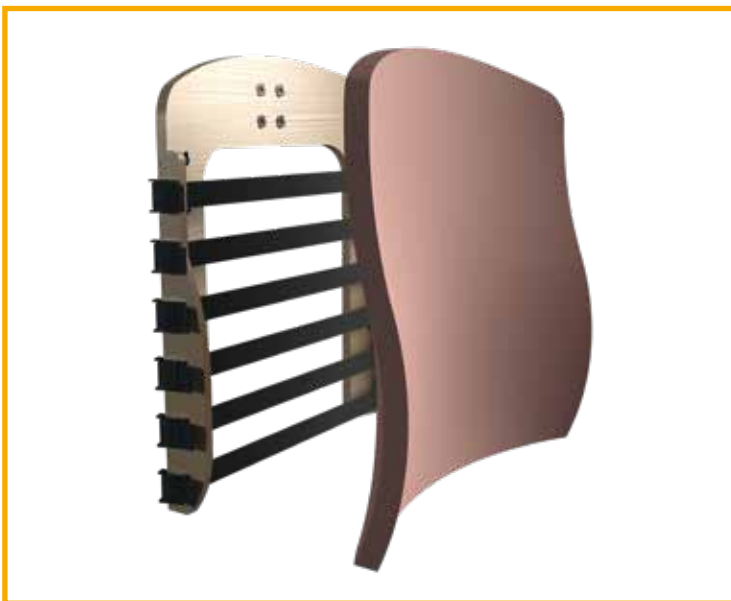

BESCHIKBARE MATEN

HOOGTE	BREEDTE									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
44										
50										
56										

RUGKUSSEN PASSIEF

DIEP CONTOUR

VOORGEVORMDE BASIS MET DIEPE ZIJWANGEN




Kenmerken:

- Diepe zijwangen bieden zijwaartse ondersteuning over de volledige hoogte van het rugkussen
- Comfortfoam vulling
- Geïntegreerde laterale ondersteuning in plaats van losse rugpelotten / rompondersteuning
- Comforthoes of incontinentiehoes

Klinische toepassingen:

- Voor passieve gebruiker met een lagere zitbalans die veel zijwaartse stabiliteit nodig heeft over de volledige hoogte van het rugkussen

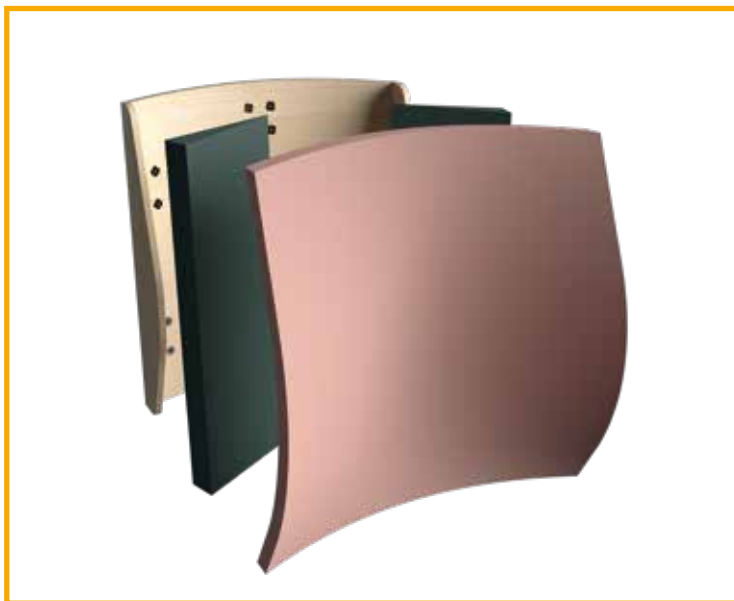

BESCHIKBARE MATEN

HOOGTE	BREEDTE									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
44										
50										
56										

RUGKUSSEN PASSIEF FLEXIBEL

DIEP CONTOUR, NASPANBAAR

FLEXIBELE BASIS MET VERSTELBARE SPANBANDEN, MET UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN OM DE RUGCONTOUR TE VOLGEN EN ONDERSTEUNEN



Kenmerken:

- Flexibele basis met verstelbare spanbanden, met uitgebreide mogelijkheden om de rugcontour te volgen en ondersteunen
- Stabilisering van het bekken mogelijk
- In hoek verstelbare zijwangen kunnen naar binnen of naar buiten gedraaid worden
- Diepe zijwangen tot bovenaan het rugkussen
- Individueel instelbaar
- Geïntegreerde laterale ondersteuning in plaats van losse rugpelotten / rompondersteuning
- Comforthoes of incontinentiehoes



Klinische toepassingen:

- Gebruiker heeft een in hoek en diepte instelbare ondersteuning van de rugcontour voor een stabiele en ergonomische zithouding
- Voor passieve gebruiker met een lagere zitbalans die veel zijwaartse stabiliteit nodig heeft over de volledige hoogte van het rugkussen
- Individueel instelbare spanbanden voor een optimale zitstabiliteit en correctie van / aanpassing aan lichte of matige houdingsdefect

BESCHIKBARE MATEN

HOOGTE	BREEDTE									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
44										
50										
56										

RUGKUSSEN ACTIEF FLEXIBEL

DIEP CONTOUR, NASPANBAAR

FLEXIBELE BASIS MET VERSTELBARE SPANBANDEN, MET UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN OM DE RUGCONTOUR TE VOLGEN EN ONDERSTEUNEN



Kenmerken:

- Flexibele basis met verstelbare spanbanden, met uitgebreide mogelijkheden om de rugcontour te volgen en ondersteunen
- Stabilisering van het bekken mogelijk
- In hoek verstelbare zijwangen kunnen naar binnen of naar buiten gedraaid worden
- Diepe zijwangen tot halverwege de rugleuning geven bewegingsvrijheid aan de schouderbladen
- Individueel instelbaar
- Geïntegreerde laterale ondersteuning in plaats van losse rugpelotten / rompondersteuning
- Comforthoes of incontinentiehoes



Klinische toepassingen:

- Gebruiker heeft een in hoek en diepte instelbare ondersteuning van de rugcontour voor een stabiele en ergonomische zithouding
- Voor actieve gebruiker die veel zijwaartse stabiliteit nodig heeft maar ook bewegingsvrijheid voor de schouderbladen
- Individueel instelbare spanbanden voor een optimale zitstabiliteit en correctie van / aanpassing aan lichte of matige houdingsdefect

BESCHIKBARE MATEN

HOOGTE	BREEDTE									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
44										
50										
56										

RUGKUSSEN ACTIEF FLEXIBEL

EXTRA DIEP, NASPANBAAR

FLEXIBELE BASIS MET VERSTELBARE SPANBANDEN, MET UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN OM DE RUGCONTOUR TE VOLGEN EN ONDERSTEUNEN



Kenmerken:

- Flexibele basis met verstelbare spanbanden, met uitgebreide mogelijkheden om de rugcontour te volgen en ondersteunen
- Stabilisering van het bekken mogelijk
- In hoek verstelbare zijwangen kunnen naar binnen of naar buiten gedraaid worden
- Extra diepe zijwangen tot halverwege de rugleuning geven maximale laterale steun in combinatie met bewegingsvrijheid van de schouderbladen
- Individueel instelbaar
- Geïntegreerde laterale ondersteuning in plaats van losse rugpelotten / rompondersteuning
- Comforthoes of incontinentiehoes



Klinische toepassingen:

- Gebruiker heeft een in hoek en diepte instelbare ondersteuning van de rugcontour voor een stabiele en ergonomische zithouding
- Voor actieve gebruiker die veel zijwaartse stabiliteit nodig heeft maar ook bewegingsvrijheid voor de schouderbladen
- Individueel instelbare spanbanden voor een optimale zitstabiliteit en correctie van / aanpassing aan lichte of matige houdingsdefect

BESCHIKBARE MATEN

HOOGTE	BREEDTE									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
44										
50										
56										

INSTELLEN RUGKUSSEN FLEXIBEL

SEDEO PRO



Rugkussen instellen:

1. Stel het rugkussen in op de juiste hoogte. Controleer of het kussen de bovenkant van het bekken voldoende ondersteunt.
2. Stel de hoek van de zijwangen in voor de juiste mate van zijwaartse ondersteuning.
3. Maak alle spanbanden los en laat de gebruiker tegen het rugkussen zitten.
4. Breng de spanbanden op spanning, begin bij het bekken. Ondersteun het bekken om onderuitzakken te voorkomen.
5. Stel de overige spanbanden in zodat ze de wervelkolom ondersteunen.

EN U KUNT UITERAARD GEBRUIK MAKEN
VAN HET JAY ASSORTIMENT, ZIE P. 44-45

 **JAY**[®]
Superior Clinical Seating.

SEDEO PRO

OVERZICHT ZITTINGEN

	POSITIONERINGSBEHOEFTE				DECUBITUSRISICO		
	INZETBEREIK	Bewegings-vrijheid	Helpt onder-uitzakken voorkomen	Bevorderen laterale stabiliteit	Goede drukverdeling	Beperken van de risico's van schuifkrachten	Anti-decubitus
GEPROFILEERD		● ●	● ●	● ●	●	●	●
TRAAGSCHUIM		●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
SUPPORT		●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ●
SUPPORT TR		●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●
FORMSEAT		●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●
STABILIZER		● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●

SEDEO PRO ZITKUSSEN GEPROFILEERD

P. 27

SEDEO PRO ZITKUSSEN TRAAGSCHUIM

P. 28

SEDEO PRO ZITKUSSEN SUPPORT

P. 29

SEDEO PRO ZITKUSSEN SUPPORT TR

P. 30

SEDEO PRO ZITKUSSEN FORMSEAT

P. 31

SEDEO PRO ZITKUSSEN STABILIZER

P. 32



Labels aan kussens en hoezen
vermelden maat en type

ZITKUSSEN GEPROFILEERD

COMFORTABEL ZITTEN

MET LICHTE ZIJWAARTSE ONDERSTEUNING




Kenmerken:

- Comfortabel geprofileerde zitting met lichte zijwaartse ondersteuning en een stevige vlakke basis
- Comforthoes of incontinentiehoes

Klinische toepassingen:

- Gebruiker heeft een stabiele zithouding
- Gebruiker heeft comfort en een lichte zijwaartse ondersteuning
- Laag risico op decubitus of schuifkrachten
- Gebruiker heeft voldoende bewegingsvrijheid nodig om zelfstandig te gaan verzitten en/of transfers te maken.

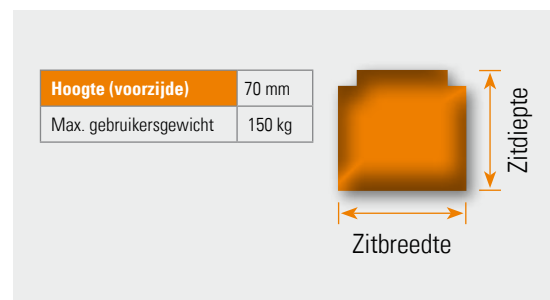

Noot Het zitkussen zit met klittenband vast op het frame. Zo blijft het kussen beter zitten en kan het ook makkelijk verwijderd worden.

BESCHIKBARE MATEN

DIEPTE	BREEDTE									
	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
46										
50										
56										

ZITKUSSEN TRAAGSCHUIM

GOEDE DRUKVERDELING

TRAAGSCHUIM TOPLAAG VOOR EEN GELIJKMATIGE DRUKVERDELING
EN ONTLASTING VAN DE TUBERS




Kenmerken:


- Comfortabele geprofileerde zitting met lichte zijwaartse ondersteuning
- Traagschuim toplaag voor een diepe zit en ontlasting van de tubers door gelijkmatige drukverdeling
- Comfortfoamlaag voorkomt bottoming-out
- Stevige vlakke basis
- Incontinentiehoes

Klinische toepassingen:

- Gebruiker heeft comfort en een lichte zijwaartse ondersteuning
- Matig decubitusrisico
- Vervorming van zachte weefsels helpen voorkomen

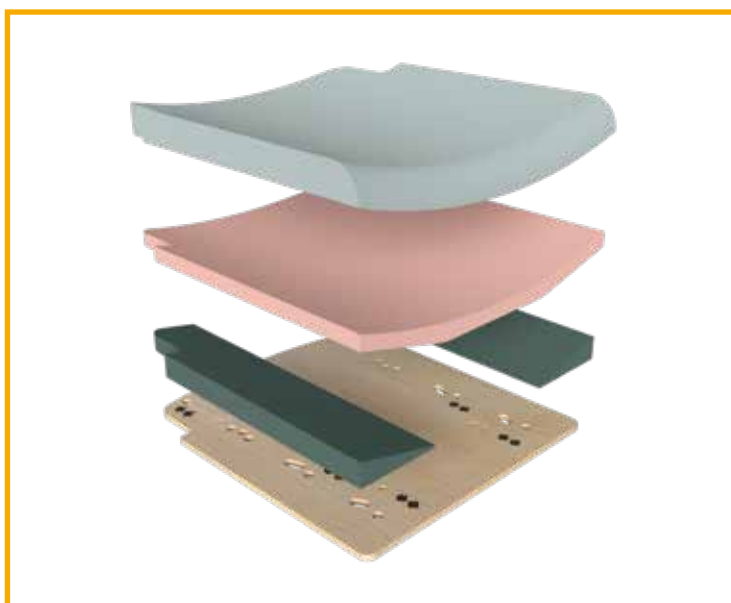

Hoogte (voorzijde)	70 mm
Max. gebruikersgewicht	150 kg

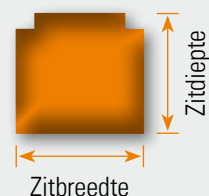

BESCHIKBARE MATEN

DIEPTE	BREEDTE									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
46										
50										
56										

ZITKUSSEN SUPPORT

ANATOMISCHE GEVORMD

ANATOMISCHE GEVORMDE CONTOUR
MET SOFTFOAM TOPLAAG



Kenmerken:

- Anatomisch gevormde contour met softfoam toplaag
- Ondersteuning van de dijbenen in zijwaartse richting en in de rijrichting voor optimale positionering
- Stevige basis met gesingelde uitsparing voor de tubers die bottoming-out voorkomt
- Comforthoes of incontinentiehoes

Klinische toepassingen:

- Gebruiker heeft gemiddelde stabiliteit in de rijrichting om onderuitzakken te voorkomen
- Matig decubitusrisico
- Vervorming van zachte weefsels helpen voorkomen



BESCHIKBARE MATEN

DIEPTE	BREEDTE									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
46										
50										
56										

ZITKUSSEN SUPPORT TR

ANATOMISCH GEVORMDE CONTOUR

ANATOMISCH GEVORMDE CONTOUR
MET TRAAGSCHUIM TOPLAAGDEEL ONDER DE TUBERS



Kenmerken:


- Anatomisch gevormde contour met traagschuim toplaagdeel onder de tubers
- Traagschuim zorgt voor een diepe zit en optimale drukverdeling
- Combinatie van traagschuim en comfortfoam helpt onderuitzakken voorkomen
- Ondersteuning van de dijbenen in alle richtingen biedt goede stabiliteit
- Stevige vlakke basis
- Incontinentiehoes

Klinische toepassingen:

- Gebruiker met instabiele zithouding
- Behoeft hoge stabiliteit in de rijrichting om onderuitzakken te voorkomen
- Behoeft ook hoge stabiliteit in zijwaartse richting
- Matig decubitusrisico
- Vervorming van zachte weefsels helpen voorkomen



Hoogte (voorzijde)	90 mm
Max. gebruikersgewicht	150 kg

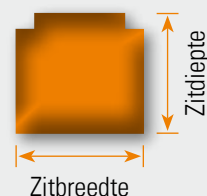

BESCHIKBARE MATEN

DIEPTE	BREEDTE									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
46										
50										
56										

ZITKUSSEN FORMSEAT

ANATOMISCH GEVORMDE CONTOUR

UITGESPROKEN ANATOMISCH GEVORMDE CONTOUR
MET COMFORTFOAM TOPLAAG




Kenmerken:

- Hoog stabiliserend vermogen door diepe zit en extra steun in zowel zijwaartse richting als in de rijrichting
- Stevige basis met gesingelde uitsparing die bottoming-out helpt voorkomen
- Incontinentiehoes

Klinische toepassingen:

- Gebruiker heeft extra steun in de rijrichting om onderuitzakken te voorkomen
- Gebruiker heeft extra zijwaartse ondersteuning
- Medium decubitusrisico
- Vervorming van zachte weefsels helpen voorkomen

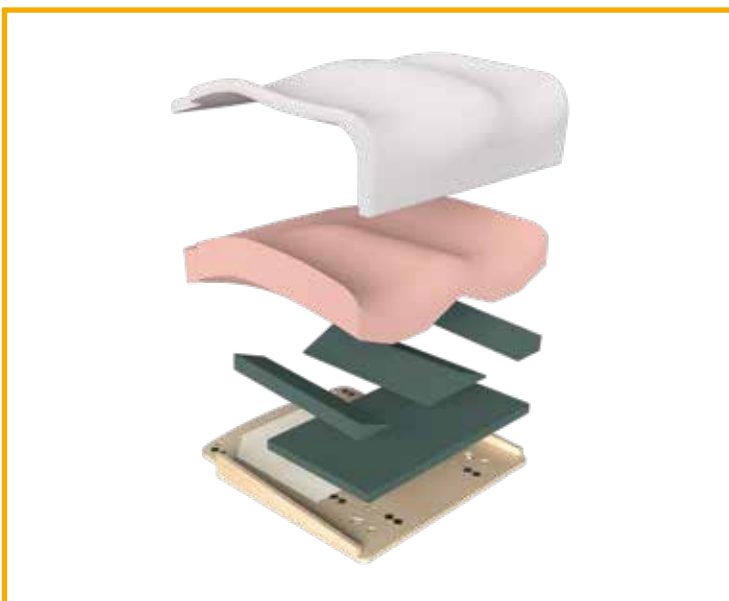

BESCHIKBARE MATEN

DIEPTE	BREEDTE									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
46										
50										
56										

ZITKUSSEN STABILIZER

UITSTEKENDE ZIJWAARTSE STABILITEIT

HOGE ZIJWAARTSE STABILITEIT

DRUKVERSCHUIVING NAAR TROCHANTERS HELPT OM DECUBITUSRISICO TE VERKLEINEN



Kenmerken:

- Inwendige steunranden voor extra zijwaartse steun aan dijbenen en trochanters
- De uitsparing in het schuim (middenachter) zorgt voor een diepe zit en ontlasting van de tubers door gelijkmatige drukverdeling
- Stevige basis met gesingelde uitsparing die bottoming-out helpt voorkomen
- Comforthoes of incontinentiehoes


Klinische toepassingen:

- Gebruiker heeft een stabiele zithouding
- Gebruiker heeft voldoende bewegingsvrijheid nodig om zelfstandig te gaan verzitten en/of transfers te maken
- Behoeft een lichte steun in de rijrichting om onderuitzakken te voorkomen
- Behoeft extra steun in zijwaartse richting
- Matig risico op decubitus of schuifkrachten
- Vervorming van zachte weefsels helpen voorkomen



Hoogte (voorzijde)	90 mm
Max. gebruikersgewicht	150 kg

Wij adviseren de stabilizerzitting een maat groter te nemen dan bij andere zittingen

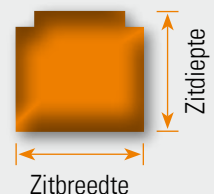

BESCHIKBARE MATEN

DIEPTE	BREEDTE									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
46										
50										
56										

UNIVERSELE OPLOSSINGEN

DREMPELZITTINGEN EN MEER

BINNEN HET SEDEO PRO AANBOD VINDT U OOK DREMPELZITTINGEN VOOR TOEPASSING VAN ANTI-DECUBITUS KUSSENS. DAARNAAST IS SEDEO PRO GESCHIKT VOOR VELE ORTHESSES EN ZITELEMENTEN ZOALS NUAGE EN DYNA.




Kenmerken:

- Drempelzittingen, instelbaar, inclusief achterdrempel
- Keuze uit drempel van 50 mm of 75 mm

Klinische toepassingen:

- Wanneer een kussen van een derde partij wordt geplaatst, houdt een drempelzitting deze effectief op de juiste plaats.

Hoogte (voorzijde)	50 of 75 mm
Max. gebruikersgewicht	150 kg

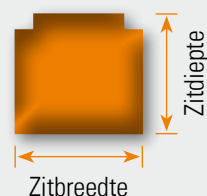

BESCHIKBARE MATEN

DIEPTE	BREEDTE									
cm	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
46										
50										
56										

EN U KUNT UITERAARD GEBRUIK MAKEN
VAN HET JAY ASSORTIMENT, ZIE P. 44-45

JAY[®]
Superior Clinical Seating.

SEDEO PRO HOOFDSTEUNEN

OF KIES VOOR EEN WHITMYER
HOOFDSTEUN, ZIE PAGINA 40

 WHITMYER®

IN HOOGTE, BREEDTE EN DIEPTE INSTELBARE HOOFDSTEUNEN. EENVOUDIG TE
MONTEREN MET HET SEDEO PRO LAMELLENSYSTEEM.

SEDEO HOOFDSTEUNKUSSEN, KLEIN PU



- 240 x 150 mm
- Ook verkrijgbaar inclusief gepolsterde hoes

SEDEO HOOFDSTEUNKUSSEN, FLEXIBEL



- 400 x 110 mm

SEDEO PRO HOOFDSTEUN MONTAGE



- Extreem sterk en eenvoudig in allerlei posities te fixeren
- Instelbaar 20 mm naar links en 20 mm naar rechts
- Standaardmontage op het rugframe



Snel terug naar de basisinstelling dankzij instelbare geheugenstand




Met extra lamellen (90 mm) wordt de hoofdsteun verder naar voren, onder of boven geplaatst.

SEDEO PRO HOOFDSTEUN MONTAGE, QUICK RELEASE



- Snelverstelling met vleugelbout

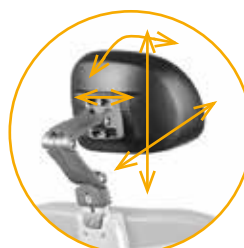

Diepte-instelling: 200 mm
Hoogte-instelling: 170 mm
Breedte: -20 mm | +20 mm
Hoekinstelling: -45° | +45°

SEDEO PRO

POSITIONERING & ONDERSTEUNING

LATERALE ROMPONDERSTEUNING



- In diepte, breedte en hoogte verstelbaar (B 90 mm | H 170 mm | D 45 mm)
- Geïntegreerd wegzwenkmechanisme met ontgrendelknop voor eenvoudig wegklappen tijdens zorg of transfer



KLINISCHE TOEPASSINGEN/TIP:

Voor gebruikers met een beperkte rompstabiliteit en/of asymmetrische zithouding, bijvoorbeeld door een beroerte.

Door de hoogte-instelling is het mogelijk om een mantelzorgondersteuning aan te bieden voor het ondersteunen of corrigeren van orthopedische deformiteiten zoals bijvoorbeeld een scoliose. Een alternatief is gebruik van één van de flexibele rugleuningen met hoekinstelbare zijwangen.

Afmetingen polstering:

- Kort: 90 x 120 mm
- Lang: 150 x 130 mm

KNIE- & DIJBEENONDERSTEUNING



- In diepte, breedte en hoogte verstelbaar
- Wegzwenkbaar

Afmetingen polstering:

- Klein: 120 x 120 mm
- Groot: 180 x 120 mm

SEDEO PRO

POSITIONERING & ONDERSTEUNING

ABDUCTIEKLOS



- In diepte en hoogte verstelbaar
- Diepteverstelling 65 mm
- Hoogteverstelling 170 - 250 mm (van zitplaat tot bovenzijde abductiekussen)
- Wegklapbaar

Afmetingen klos:

- Kussen: 70 x 190 x 100 mm

POSITIONERINGSGORDEL



- Heupgordel met druksluiting

Afmetingen:

- Kort: 50 x 1700 mm
- Verlengd: 50 x 2700 mm

ZIE OOK DE JAY
POSITIONERINGSELEMENTEN

 **JAY**[®]
Superior Clinical Seating.

TRANSFER STEUN



- Handvat biedt steun bij het maken van transfers.

SEDEO PRO

OVERIGE ACCESSOIRES

WERKBLAD



- Wegzwenkbaar
 - Hoge breukveiligheid en laag gewicht
- Breedte: 650 mm Lengte: 500 mm

COLLEGE WERKBLAD




- Wegzwenkbaar
 - Hoge breukveiligheid en laag gewicht
- Breedte: 300 mm Lengte: 470 mm



Werkbladuitsparingen voor alle typen joysticks

JOYSTICKHOUDER VAST

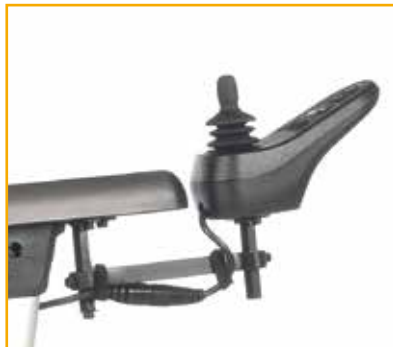

JOYSTICKHOUDER ZWENKBAAR



- In diepte en hoogte verstelbaar

TIP Werkbladen kunnen optioneel ook worden geleverd in een variant voorzien van opstaande acrylaatranden.




Wegzwenkbare joystickhouder ontlast de pols door de joystick naar binnen te zwenken

SEDEO PRO

OVERIGE ACCESSOIRES

SPIEGEL

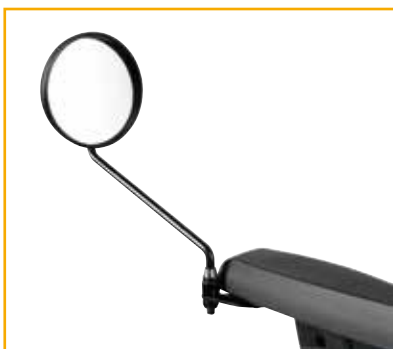

DUWHANDVATTEN



- In hoogte verstelbaar (140 mm)

BEUGELS VOOR RUGZAK OP RUGFRAME



- Om een rugzak aan te hangen

TAS VOOR ARMSTEUN



- Handige toegankelijke tas met ritssluiting rondom

KRUKHOUDER



SEDEO PRO

BEKLEDING EN REINIGING

ZITKUSSEN- EN RUGKUSSENHOEZEN



- **Incontinentiehoes:** comfortabele, sterke, waterafstotende stretchrubberhoes.
- **Comforthoes:** sterke éénlaags stretchstofhoes voor optimaal comfort en hoog ademend vermogen.



Labels aan kussens en hoezen vermelden maat en type

REINIGING

Controleer en reinig kussens en polsterdelen geregeld. Slijtage kan leiden tot een slechte houding, verminderd comfort en verminderde drukverlichting.

Bij hergebruik moeten alle oppervlaktes waarmee de gebruiker in aanraking komt worden behandeld met een desinfecterende spray. Reinig bekleding die niet kan worden verwijderd met een vochtige doek met schoonmaakmiddel of een desinfecterend middel (volgens instructies van de fabrikant). Na reinigen met schoon water afnemen en grondig drogen.

Als er aan de binnenzijde van de kussenhoes een wasetiket aanwezig is, kunt u de hoes wassen. Volg de instructies op het wasetiket. Neem voor het wassen de schuim inlegdelen eruit en sluit de ritssluiting.

TIP Volg de instructies op het wasetiket. Gebruik geen organische oplosmiddelen, geen chemische reiniging, niet strijken en niet drogen in de droogmachine.



VOLLEDIGE INTEGRATIE VAN SEDEO PRO, JAY EN WHITMYER

ALLE KLINISCHE BEHOEFTEEN BEANTWOORD EN DE BESTE ZITHOUDING VOOR IEDEREEN
DANKZIJ DE INTEGRATIE VAN JAY ZIT- EN RUGKUSSENS EN WHITMYER HOOFDSTEUNEN.
EENVOUDIG VERKRIJGBAAR BIJ HET SEDEO PRO ZITSYSTEEM. VOOR COMFORT,
STABILITEIT EN HOGE HUIDBESCHERMING ZONDER COMPROMIS.

SEDEO
PRO

JAY®
Superior Clinical Seating.

WHITMYER®



WHITMYER HOOFDSTEUNEN

ZOVEEL KEUZE

EEN BREED ASSORTIMENT WHITMYER ROLSTOELHOOFDSTEUNEN,
EENVOUDIG VERKRIJGBAAR BIJ HET SEDEO PRO ZITSYSTEEM.



AXYS



AXYS Offset



LINX2



Cobra XTRA Flip Back



PLUSH PADS

- Veel instel- en uitbreidingsmogelijkheden
- Verschillende maatvoeringen met breedtes van 150 tot 480 mm



EXTRA GROTE A-PLUSH PADS
MET INSTELBARE ZIJWANGEN

- Veel instel- en uitbreidingsmogelijkheden, inclusief instelbare zijwangen
- Extra brede maatvoeringen met breedtes van 300 tot 480 mm



Naast de Plush en Speciale Plush zijn ook de overige Whitmyer oplossingen snel en gemakkelijk te plaatsen op Sedeo Pro.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE DE
BROCHURE **WHITMYER HOOFDSTEUNEN**
TE DOWNLOADEN OP ONZE WEBSITE

 **WHITMYER®**

JAY J3 RUGLEUNING OPTIES

OP SEDEO PRO

DEZE JAY J3 RUGLEUNINGEN ZIJN EENVOUDIG TE BESTELLEN SAMEN MET EEN SEDEO PRO ZITSYSTEEM. VOOR MEER INFORMATIE OVER DE KLINISCHE TOEPASSINGEN VAN DEZE RUGLEUNINGEN, ZIE DE JAY BROCHURE.

De comfortabele J3 rugleuningen bieden vele mogelijkheden voor een optimale positionering en stabiliteit. J3 is bijzonder geschikt voor gebruikers met zeer specifieke ondersteuningsopties.

Er is keuze uit vele maatvoeringen en vier contourdieptes voor een beperkte (SC), gemiddelde (MC) of volledige laterale ondersteuning (DC of MDC).

- Gebruik van een standaard J3 rugleuning met hoogte-, diepte- en hoekverstelling op een Sedeo Pro zitframe
- Een ruim zitdieptebereik en geen verlies van zitdiepte
- Geïntegreerde bevestiging voor laterale inzetstukken
- Elegante afwerking d.m.v. kap op de achterzijde van het zitframe
- Door speciaal ontwikkelde montageplaten kunnen de bestaande J3 rugleuningen gebruikt worden in combinatie met Sedeo Pro

4 KEUZE UIT VIER CONTOURDIEPTES



VOOR MEER INFORMATIE OVER JAY RUGLEUNINGEN
ZIE ONZE WEBSITE

JAY KUSSENS

EENVOUDIG TE BESTELLEN

DEZE JAY KUSSENS ZIJN EENVOUDIG TE BESTELLEN SAMEN MET EEN SEDEO PRO ZITSYSTEEM.

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE KLINISCHE TOEPASSINGEN VAN DEZE KUSSENS, ZIE DE JAY BROCHURE.

6

KEUZE UIT ZES TYPEN JAY KUSSENS



JAY Easy



JAY Balance



JAY Xtreme Active



JAY J2 Deep Contour



JAY J2



JAY Soft Combi P

VOOR MEER INFORMATIE OVER JAY ZITKUSSENS ZIE
ONZE WEBSITE EN JAY BROCHURES

 **JAY**[®]
Superior Clinical Seating.

SWITCH-IT

INNOVATIEVE CONTROLS

EEN BREED SCALA VAN SWITCH-IT SPECIALE INPUT DEVICES BIEDT GEBRUIKERS OPTIMALE CONTROLE OVER HUN ROLSTOEL.

Speciale joysticks, schakelaars, kin- of hoofdbesturing... ook het besturingssysteem is volledig aanpasbaar aan de wensen en behoeften van de gebruiker.



LINK-IT

MONTAGESYSTEEM

MET DE BESCHIKBARE MODULES EN STAAFJES KUN JE EINDELOOS VEEL COMBINATIES SAMENSTELLEN EN OPLOSSINGEN CREËREN DIE NODIG ZIJN.

Link-IT is niet alleen sterk en makkelijk in alle richtingen en hoeken te positioneren; het zorgt er ook voor dat het minimalistische, strakke design van de rolstoel behouden blijft. Dus of het nu om een extra controller op de armsteun gaat of een schakelaar het zitframe of op de hoofdsteen? Just Link-IT!



VOOR MEER INFORMATIE ZIE DE BROCHURE Q-SERIE ELEKTRONICA

UITWISSELBAARHEID SEDEO PRO Q-SERIE, IBIS EN PUMA 20-40*

DE NIEUWSTE SEDEO PRO ZITTINGEN, RUGLEUNINGEN EN KUSSENHOEZEN ZIJN GEHEEL AFGESTEMD OP DE Q-SERIE. DAARNAAST ZIJN ZE OOK TOEPASBAAR OP 20/40 ELEKTRISCHE ROLSTOELN EN IBIS HANDBEWOGEN ROLSTOELN. DAT WERKT PRETTIG, MET ÉÉN VERTROUWD SYSTEEM EN MINIMALE VOORRADEN.

De nieuwste Sedeo Pro kussens zijn backwards compatibel met eerdere versies van Sedeo Pro en zelfs met Sedeo Original. Dat betekent dat u met een voorraad van deze zit- en rugkussens alle Sedeo-producten kunt servicen. Klemmen voor montage op Ibis en Puma 20/40 met Sedeo Pro wordt standaard meegeleverd.



TOEPASSING OP EEN IBIS OF PUMA 20/40 MET SEDEO PRO ZITSYSTEEM



* De Puma 20-40 in uitgefaseerd. Onderdelen zijn nog wel verkrijgbaar.

MEER Q-SERIE ZITOPLOSSINGEN

SEDEO PRO ADVANCED ZITSYSTEEM

SEDEO PRO ADVANCED IS EEN BIOMECHANISCHE ZITSYSTEEM VOOR DE ALLERBESTE ONAFHANKELIJKE HERPOSITIONERING. SEDEO PRO ADVANCED BIEDT EEN VOLLEDIG ASSORTIMENT PROGRAMMEERBARE ZITPOSITIES EN IS GESCHIKT VOOR DE MEEST VEELEISENDE KLINISCHE BEHOEFTE.

SEDEO PRO HEAVY DUTY IS EEN ZITSYSTEEM WAT GESCHIKT IS VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS DIE TOEGEWEZEN ZIJN TOT EEN HEAVY DUTY ROLSTOEL.



Q700 MWD



Q700 FWD



Q700 HD

SEDEO PRO ADVANCED ondersteunt effectief bij drukontlasting en zorgt gedurende de hele dag voor een goede positionering. Daarnaast heeft het een herinneringsfunctie voor drukontlasting. De biomechanische rug i.c.m. de herinneringsfunctie voorkomt het risico op onderuit schuiven tijdens het tot zitkomen.

SEDEO PRO HEAVY DUTY zitsysteem met specifieke heavy duties opties waaronder groter zitbreedte en zitdiepte, versterkte zitplaten armsteunen en posterdelen die qua maat aansluiten bij datgenen wat nodig is. Ideaal gecombineerd met het midwiel onderstel zodat maximale tractie en controle tijdens het rijden bewerkstelligd wordt.

	SEDEO PRO ADVANCED	SEDEO PRO HEAVY DUTY
Klinische behoefte gebruiker	Gemiddeld tot hoog	Gemiddeld tot hoog
JAY & WHITMYER opties	Ja	Ja
Programmeerbare zitposities	Ja	-
Sta op - functie	-	-
Lig-functie	Ja	-
Remote Seating App	Ja	-
Drukontlastingsherinnering	Ja	-
Zithoogte	430 - 480 mm	415 - 490 mm
Zitbreedte	380 - 560 mm	500 - 660 mm
Zitdiepte	400 - 560 mm	460 - 560 mm
Rughoogte	510 - 760 mm	530 - 720 mm
Rughoekverstelling elektrisch	85 / 175°	90 / 150°
Kantelhoek	30° tot 50°	30° tot 50°
Hoog/laag bereik	300 mm	-
Max. belastbaarheid	0 - 160 kg	205 kg

MEER Q-SERIE ZITOPLOSSINGEN

UP SEDEO PRO ADVANCED ZITSYSTEEM

UP SEDEO PRO ADVANCED BIEDT ALLE VOORDELEN VAN HET SEDEO PRO ADVANCED ZITSYSTEEM MET ALS AANVULLING EEN SOLIDE STA-OP FUNCTIE MET EEN STA-HOEK TOT 85°. DE STA-OP FUNCTIE VERMINDERT HET RISICO OP DECUBITUS, VERGROOT HET BEREIK VAN DE GEBRUIKER EN BIEDT VOORDELEN VOOR DE GEZONDHEID EN DE DAGELIJKSE ACTIVITEITEN.



Q700 UP MWD



Q700 UP FWD

De UP SEDEO PRO ADVANCED sta-op functie:

- vermindert het risico op decubitus
- vergemakkelijkt deelname aan sociale activiteiten
- vergroot de bewegingsvrijheid en vermindert het risico op spierverspellingen
- verbetert de functie van de vitale organen
- bevordert de gezondheid van de botten en voorkomt deformiteiten van het skelet door de staande positie
- vermindert de abnormale spiertonus en spasticiteit

UP SEDEO PRO ADVANCED

Klinische behoefte gebruiker	Hoog / Staand
JAY & WHITMYER opties	Ja
Programmeerbare zitposities	Ja
Sta op - functie	Ja
Lig-functie	Ja
Remote Seating App	Ja
Drukontlastingsherinnering	Ja
Zithoogte	450 - 480 mm
Zitbreedte	380 - 560 mm
Zitdiepte	400 - 540 mm
Rughoogte	510 - 760 mm
Rughoekverstelling elektrisch	85 / 175°
Kantelhoek	22°
Hoog/laag bereik	200 mm
Max. belastbaarheid	0 - 120 kg

BUILT-4-ME

MAATWERKOPLOSSINGEN

DE BUILT-4-ME SPECIALISTEN VAN SUNRISE MEDICAL ZIJN EXPERTS IN HET CREËREN VAN INDIVIDUELE PRODUCTAANPASSINGEN. DE BUILT-4-ME SERVICE IS EEN BELANGRIJKE AANVULLING OP DE VELE MOGELIJKHEDEN DIE REEDS ALS STANDAARD OPTIE WORDEN AANGEBODEN.


Een team van gespecialiseerde Built-4-Me engineers, inkopers en technici hebben hun kennis en ervaring gebundeld om snel en effectief tot perfecte maatwerkoplossingen te komen. Ze proberen alle rolstoelwensen te vervullen, of het nu gaat om:

- een persoonlijke look (bijvoorbeeld customized framekleuren of bekleding),
- handige extra's (een houder voor mobiele apparaten, werkblad op maat, enz.)
- of functionele aanpassingen (gepersonaliseerde besturingsopties bijvoorbeeld).

Het Built-4-Me orderproces is volledig gestructureerd en geïntegreerd binnen de bestaande productprocessen. Dat heeft voordelen voor rolstoelgebruiker en dealer. Het stelt ons in staat om snel te reageren op aanvragen en geïntegreerde oplossingen aan te bieden.

Van orderformulier tot offerte en/of levering is duidelijk waar u aan toe bent.

En alle aanvragen krijgen een risicoanalyse, om ervoor te zorgen dat de aanpassing veilig is.

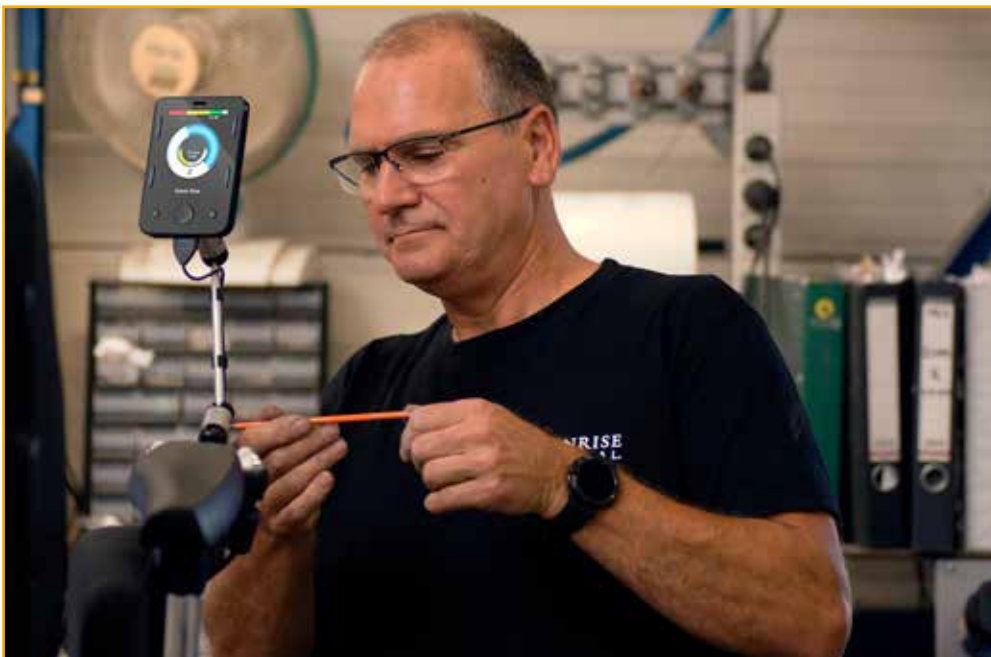

SEDEO PRO

CE-VERKLARING

SEDEO PRO VOLDOET AAN DE REGELGEVING EN RICHTLIJNEN VOOR
MEDISCHE HULPMIDDELEN EN IS VOORZIEN VAN EEN CE-SYMBOL.



Het product voldoet aan onderstaande eisen en standaarden. Deze zijn door onafhankelijke instituties gecontroleerd:

EU Richtlijn 93/42 EEG	Toepasselijk zoals vermeld in de gebruikershandleiding.
EN 12182 (2014) Klasse B	De vereisten volgens EN 12182 (2014) zoals beschreven in EN 12184 (2014): Ondersteunende producten voor mensen met een handicap - algemene vereisten en testmethodes
EN 12184 (2014) Klasse B	Elektrisch aangedreven rolstoelen, scootmobielen en hun opladers - Vereisten en testmethodes
ISO 7176-8: 2014	Vereisten en testmethodes voor botskrachten, statische krachten en materiaalmoetheid
ISO 7176-9	Klimaattesten voor elektrisch aangedreven rolstoelen
ISO 7176-14	Vereisten en testmethodes voor bedieningssystemen voor elektrisch aangedreven rolstoelen 1997
ISO 7176-16: 2012	Vereisten voor ontstekingsweerstand van beklede delen
ISO 7176-19 (2008)	Rolstoelen - Deel 19: Mobiliteitshulpmiddelen op wielen voor gebruik als zitplaatsen in gemotoriseerde voertuigen Sedeo Pro voldoet aan de crashtest-vereisten zoals omschreven in ISO 7176-19 Ook getest met Dahl-Docking-systeem
EN-ISO 10993-5 (2009)	Biologische evaluatie van medische apparatuur.
EN 1021 1&2	Beoordeling van de ontbrandbaarheid van gestoffeerde meubelen. Ontstekingsbron: smeulende sigaret/vlam lucifer of equivalent.

SEDEO PRO

HOE WIJ METEN

ZO LEEST U DE AFMETINGEN EN INSTELWAARDEN VERMELD IN DE BROCHURE EN IN DE PRODUCTDOCUMENTATIE OP ONZE WEBSITE.
NOG VRAGEN? NEEM CONTACT OP MET SUNRISE MEDICAL.



Zithoogte

Grond tot bovenkant zitplaat (zonder zitkussen) in onbelaste toestand.



Zitbreedte

Afstand tussen de armsteunen (armpads).



Zitdiepte

Afstand tussen voorkant zitplaat en voorkant standaard rugleuning, gemeten in het midden.



Rughoogte

Hoogte bovenkant zitplaat tot bovenkant rugkussen.



Onderbeenlengte

Van bovenkant voetplaat tot bovenkant zitplaat.



Armleggerhoogte

Van bovenkant zitplaat tot bovenkant armlegger.




Zijschothoogte

Van bovenkant zitplaat tot hoogste punt zijschot.




Hoogte abductieklos


Van bovenkant zitplaat tot bovenkant abductiekussen.

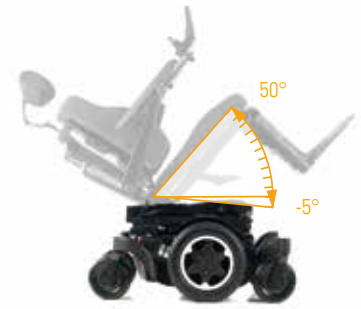


Hoek kantelverstelling

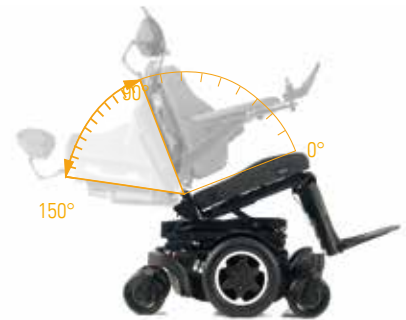

Rughoek

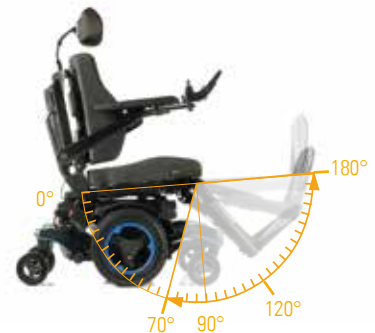

Beensteunhoek centrale beensteun

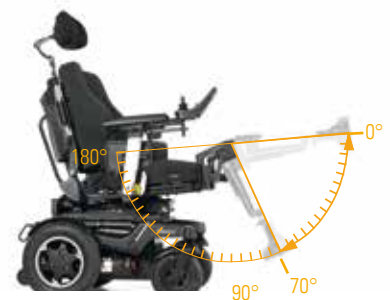

Knieshoek wegzwenkbare beensteunen



Enkelhoek

VOOR MEER INFORMATIE OF EEN DEMO VAN HET SEDEO PRO ZITSYSTEEM NEEM CONTACT OP MET EEN VAN ONZE PRODUCTSPECIALISTEN.

SEDEO PRO

SPECIFICATIES

DE BELANGRIJKSTE SEDEO PRO SPECIFICATIES OP EEN RIJ.
NEEM BIJ VRAGEN CONTACT OP MET SUNRISE MEDICAL.

SEDEO PRO	
Configureren en positioneren	● ● ● ●
Integratie speciale bedieningen	● ● ● ●
Max. belastbaarheid	0 - 160 kg
Zithoogte	415 - 490 mm
Zitbreedte	380 - 560 mm
Zitdiepte	400 - 560 mm
Rughoogte	530 - 720 mm
Onderbeenlengte	360 - 540 mm
Armleggerhoogte	Single post 260 - 380 mm Hor. armsteun 260 - 400 mm
Hoog/laag bereik (in combinatie met kantelverstelling 0° tot 30°)	300 mm
Kantelhoek	Mechanisch 0°, 3°, 6°, 9° Elektrisch 0° tot 30° Elektrisch -5° tot 25° Elektrisch 0° tot 50° Elektrisch 5° tot 45°
Rughoek	Mechanisch 90 tot 120° Gasveer 90 tot 130° Elektrisch 90 tot 130° Biomechanisch 90 tot 150°
Beensteunhoek	0-70°
Kniehoek	70-180°

Er zijn diverse Convenanten Samengesteld Product beschikbaar. Het actuele overzicht staat op Firevaned website
(link naar <https://www.eengoedhulpmiddel.nl/firevaned/ce-stroomdiagram-convenant-en-crashtest>)

Q Serie

☐ modellen ☐ elektronica ☒ zitsystemen

