



Gebruiksaanwijzing Posey valmatten 6020, 6023 en 6027R



Fabrikant:
J.T. Posey Company
5635 Peck Road
91006-0020 Arcadia
California, USA

Eenvoudige voorzorgsmaatregelen kunnen een veiligere omgeving helpen creëren.
De Posey valmat helpt letsel bij vallen te minimaliseren.

Maximale bescherming

De Posey valmatten absorberen 85% van de krachten die ontstaan bij een val*. Het 3 cm dikke EVA foam zorgt ervoor dat bewoners/patiënten de valmat gemakkelijk kunnen betreden en verlaten. Het antislip-materiaal aan de onderzijde helpt verschuiven voorkomen bij het betreden van de valmat. Twee valmatten kunnen aan elkaar worden gekoppeld met het bijgeleverde klittenband, om een groter oppervlak te kunnen beslaan. Valmatten met afgeschuinde randen zorgen ervoor dat men minder gemakkelijk over de rand van de valmat kan struikelen. Daarnaast kan men gemakkelijker met een rolstoel of rollator de valmat betreden.

6020 Standaard vloermat (170x66x3cm)

6023 Valmat met afgeschuinde randen (178x97x3cm)

6027R Valmat met afgeschuinde randen en lichtgevende striping (178x97x3cm)

Gebruiksaanwijzingen

Maak de klittenbandsluiting los en vouw de valmat uit. Zorg ervoor dat het "This Side Down" label naar de vloer is gericht. Positioneer de valmat met de rechte (niet afgeschuinde) kant richting het bed. Om twee valmatten te koppelen, kan het bijgeleverde klittenband gebruikt worden. Verwijder hiervoor de papieren strip en plaats het klittenband op de rechte (niet afgeschuinde) kanten van de valmatten.

Gemakkelijk reinigen en opbergen

De bekleding van vinyl kan gemakkelijk worden gereinigd met een vloeibaar desinfecterend reinigingsmiddel en een zachte doek. Wanneer de valmat niet wordt gebruikt, kan deze in drieën worden gevouwen. De valmat is dan slechts 8 cm dik. Gebruik de klittenbandsluiting als handvat.

WAARSCHUWINGEN

- Informeer de bewoner/patiënt en de medewerkers om extra op te letten bij het betreden of verlaten van de valmat, zodat struikelen wordt voorkomen. Volg de procedures van de instelling betreffende het reinigen van gemorste vloeistoffen. Plaats de valmat niet in vochtige ruimten. Vloeistoffen op of onder de valmat zouden een valincident kunnen veroorzaken.
- Wanneer de valmat wordt gebruikt in combinatie met een extra laag bed, zorg er dan voor dat er genoeg ruimte wordt gelaten tussen de valmat en het bed, zodat door de bewegende delen van het bed de valmat niet beschadigd raakt.
- De lichtintensiteit van de Posey lichtgevende striping van artikel 6027R zal na twee uur afnemen, tenzij de valmat voordien minimaal 20 minuten aan licht wordt blootgesteld.

Opmerking: Door het onvoorspelbare karakter van vallen, kan Posey Company in geen zin de garantie geven dat de gebruiker van de valmat te allen tijde is beschermd tegen heupletsel.

*Alle modellen zijn getest volgens ASTM protocollen voor schokabsorptievermogen.



Algemene veiligheids- en wasinstructies



Veiligheidsinstructies

- De toepassing van vrijheidsbeperkende interventies moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
- Pas vrijheidsbeperking enkel als laatste redmiddel toe en doe dit weloverwogen en multidisciplinair.
- Kies voor het minst beperkende en meest geschikte hulpmiddel in relatie tot het doel. Bovendien moet de duur en omvang van de toepassing in redelijke verhouding tot de aanleiding staan.
- Het toepassen van vrijheidsbeperking is nooit 100% veilig. Continue monitoring is een vereiste. Het gedrag van patiënten kan per seconde veranderen.
- Volg de richtlijnen en protocollen over vrijheidsbeperkende interventies binnen uw instelling.
- Breng zelf geen wijzigingen aan het product aan.
- Controleer het materiaal altijd op gebreken voordat u het gaat gebruiken. Verwijder afgekeurd materiaal direct.

Wasinstructies

- Was het materiaal bij voorkeur in een waszak en indien van toepassing met gesloten klittenband.
- Stop het materiaal bij voorkeur **NIET** in de droger! Veel materiaal is hier niet of slecht tegen bestand. Onderdelen kunnen smelten. Wanneer de droger toch gebruikt wordt, droog dan alleen op lage temperatuur.
- Materialen die onderdelen bevatten zoals ritsen, zeilringen of metalen sloten, mogen beslist **NIET** onder persplaten gelegd worden.
- In geval van een disposable product verdient het de voorkeur het product direct na gebruik te verwijderen en vernietigen. Om kostentechnische redenen kan de instelling ervoor kiezen het disposable product na reiniging opnieuw te gebruiken. De Wet op de medische hulpmiddelen verbiedt het hergebruik van disposables niet expliciet. **Let wel:** indien de instelling besluit een disposable product te hergebruiken is de fabrikant niet langer productverantwoordelijk! *

*Bron: www.rivm.nl