

MOBIELE PASSIEVE TILLIFT VOOR OBESE ZORGVRAGERS

Tenor®



De Tenor is een verrijdbare tillift en is speciaal ontworpen om obese zorgvragers op te tillen en te verplaatsen.

MOBILITEITSWIJZER VAN ARJO



D



E

© Arjo 2019

D. Niet in staat het eigen gewicht op de voeten te dragen. Kan zitten met goede ondersteuning.

E. Heeft het moeilijk om te blijven zitten en blijft dus soms in bed liggen (volledig of half liggend), en kan soms alleen zitten in een speciale ondersteunende stoel.

Neem contact op met Arjo voor meer informatie.

- **Tilcapaciteit**

In het ontwerp zijn functies geïntegreerd die voor kracht en stabiliteit zorgen. De lichte aluminium constructie biedt een veilige tilbelasting van 320 kg.

- **Assortiment tilbanden**

De tilbanden zijn ontworpen met het oog op het comfort en de ondersteuning van afhankelijke obese zorgvragers.

- **Weegunit (optioneel)**

De optionele hangende weegunit stelt zorgverleners in staat om de zorgvrager tijdens transfers te wegen.

- **Geïntegreerde oplossing**

De verbinding tussen het tiljuk en de tilbandbevestiging maakt het mogelijk om de zorgvrager bij het verplaatsen en positioneren 360 graden te draaien.

- **Herkenbaar ontwerp**

De herkenbare boogtillift met afstandsbediening stelt de zorgverlener in staat om tijdens de transfer dicht bij de zorgvrager te blijven.

Belangrijkste kenmerken

KRACHTIGE CONSTRUCTIE

Gebogen tilarmontwerp met een tilvermogen van 320 kg. Het gebogen ontwerp biedt maximale tilruimte en is belangrijk voor een 360°-rotatie wanneer de zorgvrager wordt getild.

WEEGUNIT (OPTIONEEL)

De optionele hangende weegunit ondersteunt een efficiënte weegroutine.

VERDELING VAN HET GEWICHT

Bij het 4-punts tiljuk voor obese zorgvragers zijn de schouder- en beenbevestigingspunten verder uit elkaar geplaatst. Dat zorgt ervoor dat het gewicht van de zorgvrager gelijkmatig wordt verdeeld en de tilband niet knelt.



ERGONOMISCHE HANDGREEP

De ergonomisch gevormde, gebogen handgreep stelt de zorgverlener in staat om het tiljuk te draaien en nauwkeurig te manoeuvreren in de zorgomgeving.

DUBBELE BEDIENING

De Tenor kan worden bediend via het bedieningspaneel op de mast of met de afstandsbediening, zodat de zorgverlener tijdens het bedienen van de tillift dicht bij de zorgvrager kan blijven.

PRODUCTINFORMATIE

Max. veilige tilbelasting	320 kg
Gewicht tillift (met tiljuk en batterij)	69,1 kg
Maximale tilhoogte	1860 mm
Minimale tilhoogte	600 mm
Bereik bij tillen	1260 mm
Min. hoogte bij opslag	1470 mm
Breedte onderstel bij gesloten poten	745 mm
Breedte onderstel bij open poten	1250 mm
Breedte poten gesloten	625 mm
Breedte poten open	1160 mm
Vrije beenruimte (vloer tot bovenkant benen)	105 mm
Vrije ruimte onder het onderstel (van vloer tot onderkant onderstel)	20 mm
Lengte tillift	1485 mm
Draaicirkel	1650 mm
Beschermingsklasse tillift	IPX4
Beschermingsklasse afstandsbediening	IPX7
Batterij	24 V, 4 Ah
Batterijlaadindicator	
Service-indicator - geeft de totale gebruikstijd (uren) aan	
Noodstop en schakelaar voor omlaag brengen bij systeemuitval	
Automatische uitschakeling indien de lift bij het omlaag brengen een obstakel raakt	
Zwenkwielen met lage frictie, de achterste twee voorzien van rem	


ACCESSOIRES

Een assortiment tilbanden voor obese zorgvragers

Optioneel: hangende weegunit

Arjo-desinfectiemiddelen

BENODIGDE RUIMTE

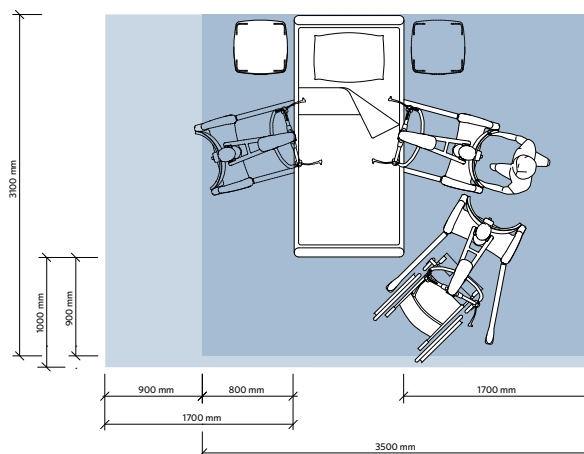

- Het blauwe gebied markeert de minimale werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om op een ergonomisch verantwoorde manier vanaf één kant met de verrijdbare tillift te werken.
- Het lichtblauwe gebied markeert de benodigde extra werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om aan beide zijden te kunnen werken met de verrijdbare tillift en de zorgvrager goed te kunnen bereiken.