

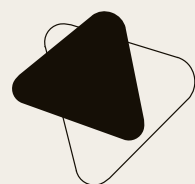


WELL Communications



# Vico Care

by Haelvoet



HAEVOET NV  
L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM  
T +32 (0) 51 48 66 95 F +32 (0) 51 48 73 19  
INFO@HAEVOET.BE WWW.HAEVOET.BE

HOSPITAL - NURSING HOME FURNITURE EQUIPEMENT HOSPITALIER - MAISON DE REPOS ZIEKENHUIS- EN RUSTHUISUITRUSTING

# Vico

techniek die presteert



Haelvoet nv  
Uitgave 2010  
Haelvoet behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen.  
Geringe kleurafwijkingen zijn mogelijk.

|     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001 | <b>Ligvlak • Comfortabel liggen</b>                                                                                                                                                                                                     |
|     | Naar keuze worden er 2 verschillende ligvlakken aangeboden. Standaard is het ligvlak uitgerust met goed ventilerende metalen ligvlakprofielen. De optionele volkunststof ligvlakdelen (*) zijn uitneembaar en gemakkelijk in onderhoud. |
| 002 | <b>Matrashouders • Doelgericht aanwezig</b>                                                                                                                                                                                             |
|     | De matrashouders belemmeren een zijdelingse verschuiving van de matras. Deze doen eveneens dienst als handvat om de rug en kniesteun manueel te verstellen.                                                                             |
| 003 | <b>Onrusthekkens (*) • Veiligheid kent geen prijs</b>                                                                                                                                                                                   |
|     | De Atmosphère onrusthekkens beschermen de patiënt over 2/3 van de lengte van het bed, terwijl de doorlopende Pollux en Trix onrusthekkens een volledige bescherming bieden.                                                             |
| 004 | <b>Hulzen • Optimale verzorging</b>                                                                                                                                                                                                     |
|     | Twee hulzen aan het hoofdeinde voor serumhouder, bedgalg of accessoires zorgen ervoor dat het bed optimaal en volgens de behoeften uitgerust kan worden.                                                                                |
| 005 | <b>Houten ombouw ligkader (*) • Extra uitstraling</b>                                                                                                                                                                                   |
|     | De houten afwerkingslat aan het ligkader draagt bij tot de huiselijke uitstraling van het bed.                                                                                                                                          |
| 006 | <b>Bedieningshendel • Centraal en binnen handbereik</b>                                                                                                                                                                                 |
|     | De bedieningshendel activeert een gasveer teneinde het gewenste ligvakdeel te kunnen verstellen.                                                                                                                                        |
| 007 | <b>Afdekkap (*) • Hygiënisch</b>                                                                                                                                                                                                        |
|     | De verwijderbare afgeronde kunststof afdekkap vereenvoudigt het reinigen van de onderwagen.                                                                                                                                             |
| 008 | <b>Hoog/laag systeem • Uiterst stabiel</b>                                                                                                                                                                                              |
|     | De hoog/laag draagarmen garanderen een uiterst stabiel bed op alle ligvakhoogtes. De grote verstelmogelijkheid van 41 cm tot 80 cm (bij wielen ø 125 mm) vereenvoudigt het uit bed stappen en vergemakkelijkt de verzorging.            |
| 009 | <b>Hoog/laag voetpedaal • Eenvoudig te bedienen</b>                                                                                                                                                                                     |
|     | De hoog/laag verstelling gebeurt aan de hand van een hydraulische pomp instelbaar door middel van een voetpedaal.                                                                                                                       |
| 010 | <b>Centrale rem (*) • Activatie in één beweging</b>                                                                                                                                                                                     |
|     | Centraal geremde wielen, met een goed bereikbare pedaal, vergemakkelijken het gebruik van het Vico bed voor het verzorgend personeel.                                                                                                   |
| 011 | <b>Wielen • Grote wendbaarheid</b>                                                                                                                                                                                                      |
|     | Een ruime waaier aan hoogwaardige designwielen garandeert een uiterst mobiel en wendbaar bed.                                                                                                                                           |
| 012 | <b>Bedpanelen • Een harmonieus geheel</b>                                                                                                                                                                                               |
|     | Voor het hoofd- en voetpaneel zijn 4 verschillende designvarianten in fraaie houtdecors mogelijk.                                                                                                                                       |

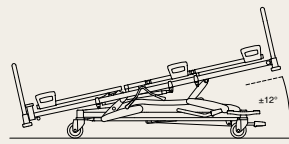
\* optie bij Vico Care

## Comfort voor ieder

Het comfort van een eenvoudige bediening en een efficiënt gebruik van het bed ondersteunen het verplegend personeel bij het dagelijkse werk.


### • Bedieningen

De bedieningshendel is gebruiksvriendelijk en eenvoudig bedienbaar. Het hoog/laag voetpedaal is gemakkelijk bereikbaar aan beide zijden van het bed.




#### (anti-) Trendelenburgpositie

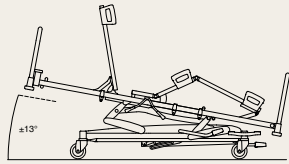De (anti-) Trendelenburgpositie (\*) kan uitgevoerd worden via het rode voetpedaal aan het voeteneinde van het bed. Wanneer het pedaal is ingedrukt, inclineert het bed in een zacht vloeiende beweging tot de gewenste positie.



#### Zit- of relaxpositie

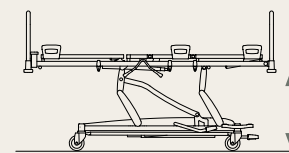Het drie- of vierdelige (\*) ligvlak biedt veelvoudige verstelmogelijkheden en beschikt over een eenvoudig te bereiken bediening aan beide zijden van het bed. Op deze manier kan gemakkelijk de gewenste zitpositie - of bij een vierdelig ligvlak een relaxpositie (\*) - verkregen worden.



#### Hoog/laag positie

Met de hoog/laag pompbediening kan men handenvrij de gewenste bedhoogte aan beide zijden van het bed instellen. De hoogste positie van het bed bedraagt 80 cm (wielen  $\varnothing$  125 mm). De dagelijkse verzorging en behandeling kunnen hierdoor uitgevoerd worden zonder belasting van de rug.



### • Virtueel draaipunt

Een virtueel draaipunt verhoogt aanzienlijk het ligcomfort voor de resident. Bij het omhoog inclineren van de rugsteun schuift de rugsteun automatisch mee naar achteren. Hierdoor ontstaat er een drukontlasting van de bekkenzone en wordt het decubitusrisico gereduceerd.

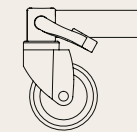


## Mobiel en flexibel


Het dagelijkse gebruik wordt vereenvoudigd dankzij een gemakkelijk verplaatsbaar en wendbaar bed.

### • Centrale rem

Aan beide zijden van het voeteneinde is het Vico bed voorzien van een design rempedaal (\*). Het pedaal bedient simultaan de 4 wielen en kan in 3 standen geplaatst worden.




#### 4 wielen geremd

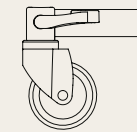

#### 4 wielen vrijstaand

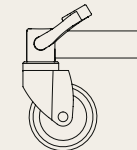Deze positie laat toe het bed in alle richtingen te bewegen.



#### 1 gefixeerd richtingswiel

Dit vergemakkelijkt het besturen van het bed bij een rechtlijnig traject.



### • Bedverlenging

Een verpleegbed moet aan ieders wensen kunnen voldoen, onafhankelijk van de grootte van de bewoner. De geïntegreerde bedverlenging laat toe om het bed met 20 cm te verlengen.

Twee verschillende methoden voor de bedverlenging zijn naar keuze beschikbaar: een telescopische bedverlenging in combinatie met de verlengbare Trix onrusthekkens of een permanente bedverlenging (van 10 of 20 cm) bij gebruik van lange Pollux onrusthekkens.

Samen met de optionele voetverlenging (\*) wordt zo een volledige functionaliteit van het ligvlak gegarandeerd.

### • Stroomloos

Het Vico Care bed is volledig mechanisch en zorgt ervoor dat dit bed overal vlot inzetbaar is.

## Gebruiksvriendelijk

### • Mechanisch

#### Minimaal in onderhoud

Een onderhoudsvrije hydraulische pomp en onderhoudsvrije gasveren maken dit bed tot een duurzame investering.

### • Verwijderbare afdekkap

#### Hygiënisch

Dankzij de afgeronde kunststof afdekkap (\*) zijn de moeilijk bereikbare oppervlakken gemakkelijk te reinigen en krijgt vuilophoping geen kans.



001 De bedieningshendel.

002 Het hoog/laag voetpedaal bevindt zich aan beide zijden van het bed, en is vlot bereikbaar voor het verplegend personeel.

003 Het Trend- en anti-Trendelenburgpedaal (\*).

004 Het telescopische Trix onrusthekkens (\*) zorgt wanneer het bed verlengd is, voor een complete bescherming over de volledige lengte van het bed.

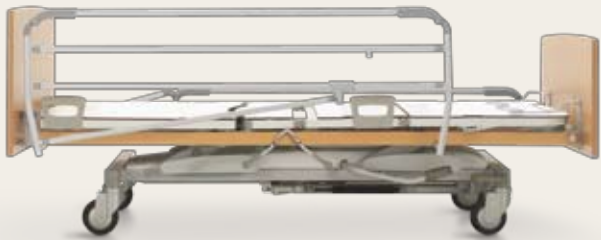
005 Indien men opteert voor een centrale rembediening (\*), wordt standaard het enkelvoudige rempedaal zonder richtingswiel aangeboden. Het dubbele rempedaal en richtingswiel is hierbij optioneel.

006 De verwijderbare afdekkap (\*) zorgt voor een gemakkelijke reiniging.

\* optie bij Vico Care

# Veiligheid troef


Onze verschillende onrusthekkens bieden de bewoner een optimale veiligheid in elke bedpositie. Elk type onrusthekken heeft zijn specifieke voordelen voor gebruiker en resident. We laten u graag de vrije keuze.



De Atmosphère onrusthekkens (\*) bestaan uit één geheel en zijn neerklapbaar met een eenvoudig vergrendelsysteem.



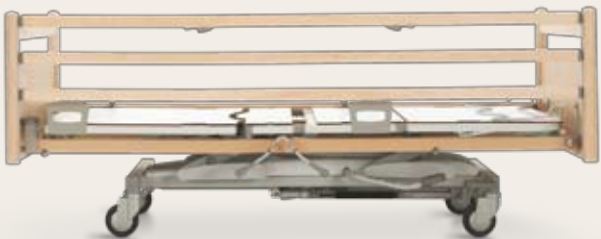De Pollux onrusthekkens (\*) bestaan uit 2 stevige houten latten. Een gewaarborgde afstand tussen de twee latten zorgt ervoor dat de Pollux onrusthekkens probleemloos aan de strengste normen beantwoorden. De tweedelige handbediening beschikt over een veiligheidsfunctie die het onbedoeld neerhalen van het onrusthekken verhindert.



De Trix onrusthekkens (\*) bieden met hun 3 latten veiligheid over de volledige lengte van het bed. Een geïntegreerd telescopisch systeem zorgt ervoor dat het Trix onrusthekken, ook wanneer het bed wordt verlengd, de zijkant van het bed over de volle lengte afsluit.

007 Bij gebruik van dikkere anti-decubitus matrassen kan een optionele 4de lat (\*) 13 cm extra bescherming bieden. Deze bescherming is volledig geïntegreerd in het Trix onrusthekken zodat geen extra losse opzetstukken nodig zijn.

008 De tweehandbediening beschikt over een veiligheidsfunctie die het onbedoeld neerhalen van het onrusthekken verhindert.

\* optie bij Vico Care



008

# Accessoires

De bijhorende accessoires zijn optimaal afgestemd op de bestaande bedhulzen en accessoirehouders. Bij Haelvoet stellen wij aan de accessoires dezelfde strenge kwaliteitseisen als aan onze verpleegbedden, zodat u altijd de zekerheid hebt daadwerkelijk met een kwalitatief hoogstaand product te werken.

|     |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001 | Bedgalg                                                                                                                                                                         | 006 | Serumhouder                                                                                                                                                                                           |
|     | De bedgalg bestaat uit een geplooid dikwandige stalen buis. De bedgalg is voorzien van een handgreep met lint: manueel aanpasbaar of optioneel met automatisch oprolsysteem.    |     | De serumhouder bestaat uit een vast gedeelte en een verstelbaar gedeelte, voorzien van vier serumhaken. De serumhouder kan eveneens verkregen worden in een niet-verstelbare versie met 2 serumhaken. |
| 002 | Serumhouder voor bedgalg                                                                                                                                                        | 007 | Opstahulp                                                                                                                                                                                             |
|     | De serumhouder voor de bedgalg heeft 4 haken en is eenvoudig op de bedgalg te plaatsen.                                                                                         |     | De opstahulp biedt de resident een optimale steun bij het uit- en instappen. De vormgeving maakt een ergonomische uit- en instapbeweging mogelijk.                                                    |
| 003 | Eettafel voor onrusthekkens                                                                                                                                                     | 008 | Urinefleshouder                                                                                                                                                                                       |
|     | De houten eettafel kan geplaatst worden op alle types onrusthekkens en kan eenvoudig worden opgehangen aan het voetpaneel.                                                      |     | De urinefleshouder wordt gemonteerd in de 2 kunststof accessoirehaken die optioneel aanwezig zijn op het Vico bed. Er kan gekozen worden uit 2 modellen.                                              |
| 004 | Accessoirebeugel                                                                                                                                                                | 009 | Hoes voor onrusthekkens                                                                                                                                                                               |
|     | De accessoirebeugel kan gebruikt worden wanneer klantspecifieke wensen zich opdringen. De beugel met 4 haken is 310 mm lang en wordt geplaatst in de optionele accessoirehaken. |     | De afneembare hoes bestaat uit kunstleder en kan op een zeer eenvoudige manier rond het onrusthekken gemonteerd worden. Deze biedt voornamelijk bescherming voor de onrustige bewoners.               |
| 005 | Bokaalhouder                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                       |
|     | De bokaalhouder is voorzien voor het plaatsen van twee bokalen. De houder wordt geplaatst in de optionele accessoirehaken.                                                      |     |                                                                                                                                                                                                       |

# Fraaie vormgeving

Iedereen is bekommerd om het welzijn van de bewoner. Zelfredzaamheid en vormgeving zijn dé omgevingsfactoren die hierbij een belangrijke rol spelen. Net daarom werden voor het Vico Care bed de modernste techniek en een vooruitstrevende functionaliteit in een fraai design verpakt.

- **Bedpanelen**

Onze bedopbouw maakt het mogelijk om te kiezen uit 4 types. Elk paneel wordt gekenmerkt door zijn specifieke lijnvoering en oog voor detail. Dankzij de afwezigheid van zichtbare bevestigingsbouten oogt het paneel niet alleen stijlvol, maar is dit tevens gemakkelijk te onderhouden.



009 Op elkaar afgestemde kleuren, huiselijke materialen en een functioneel design vormen een geheel dat het welzijn van de bewoner bevordert.



**Type 1:** Het standaard bedpaneel **Midea** heeft een moderne uitstraling.



**Type 2:** Het tijdloze bedpaneel **Hypnos (\*)** is door zijn ronde massieve stijlen in vele interieurs inzetbaar.




**Type 3:** Het fraai vormgegeven bedpaneel **Felina (\*)** wordt getypeerd door een licht gebogen handgreep.



**Type 4:** Een strakkere lijnvoering kenmerkt het bedpaneel **Valentino (\*)**.

- **Afwerking en kwaliteit**

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Dankzij de ruime kleurkeuze uit onze standaardcollectie wordt u de mogelijkheid geboden om dit bed volledig te integreren in het interieur van uw instelling.



metaalkleur  
code RAL **9006** Alu

**Melamine**



melamine natuur  
code **925**



melamine perelaar  
code **935**

**Massief hout en finer (\*)**



wit vernis  
code **41**



natuur vernis  
code **25**



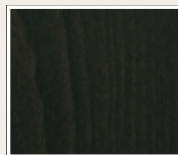
perelaar  
code **135**



noten  
code **120**



donkergrijs  
code **140**



wengé  
code **150**

**U kunt steeds stalen van onze beitskleuren bij Haelvoet opvragen. Indien gewenst zijn oplossingen mogelijk passend bij de totale inrichting van uw zorgomgeving.**



Dit PEFC-certificaat is een waarborg dat het door Haelvoet gebruikte hout afkomstig is van een duurzaam beheerd bos. Een duurzaam bosbeheer is een beheer dat tegelijk economisch leefbaar, milieuvriendelijk en sociaal gunstig is. Door onze PEFC-producten te kopen, draagt u ook bij tot het voortbestaan van onze bossen en een beter leefmilieu.

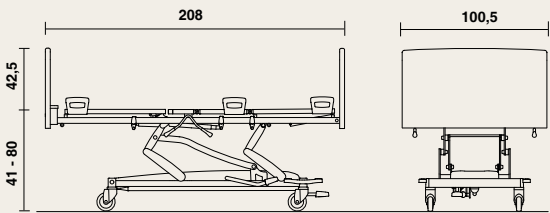
*Hout is een natuurproduct, geringe kleurafwijkingen zijn mogelijk.*

\* optie bij Vico Care

# Vico Care

## Samenvatting

Afmetingen prestaties (bij standaard bed)



- breedte: 100,5 cm, lengte: 208 cm;
- hoogtevariatie ligvlak:
  - ± 41 cm - ± 80 cm (bij wielen Ø 125 mm),
  - ± 40 cm - ± 79 cm (bij verborgen wielen);
- vrije ruimte onderwagen: 100 à 150 mm (i.f.v. hoogte-instelling ligvlak);
- veilig gewicht: 200 kg;
- gewicht (excl. uitbreidingen): 115 kg;
- matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm.



Een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding gaat bij Haelvoet niet ten koste van het milieu, want Haelvoet draagt duurzaamheid – in beide betekenissen van het woord – hoog in het vaandel. Al onze producten hebben een lange levensduur en worden geleverd met 10 jaar garantie op constructiefouten.



























Dankzij onze moderne milieuvriendelijke productieprocessen, een maximaal gebruik van recycleerbare materialen en ons PEFC-certificaat betekent kiezen voor Haelvoet, kiezen voor een eerlijk product.

**CE** Het Vico verpleegbed wordt vervaardigd volgens ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016 en is in overeenstemming met de Europese Medische Hulpmiddelen Verordening EU 2017/745 en alle van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen:

**EN 60601-1** Medische elektrische toestellen - Deel 1: Algemene eisen voor veiligheid, met uitzondering van de elektrische bepalingen.

**EN 60601-2-52** Medische elektrische toestellen - Deel 2-52: Bijzondere eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties van medische bedden, met uitzondering van de elektrische bepalingen.

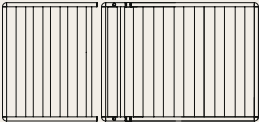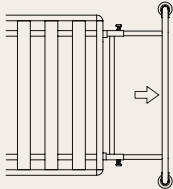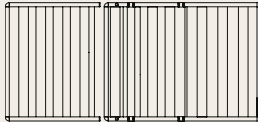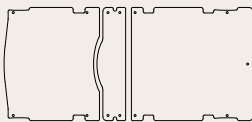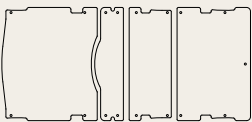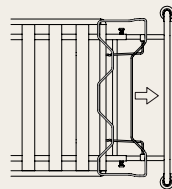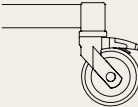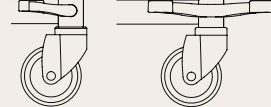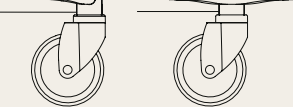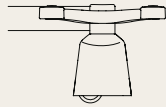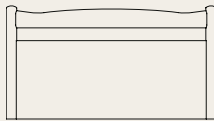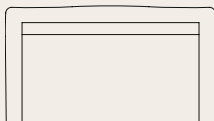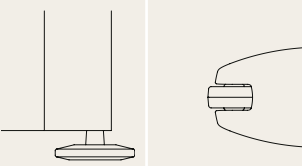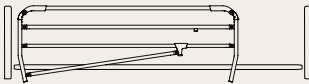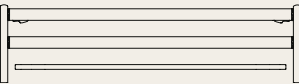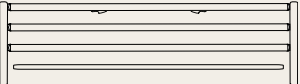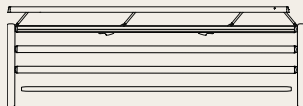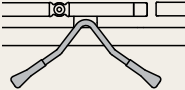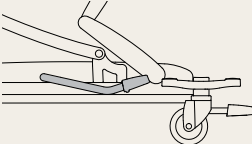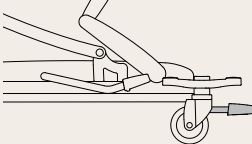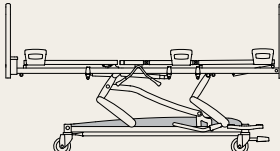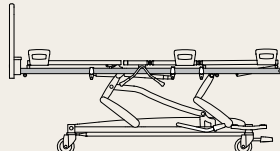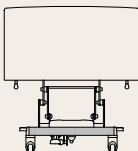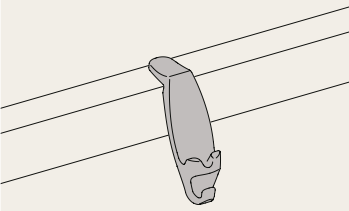**EN ISO 14971** Toepassing van risicomanagement op medische hulpmiddelen.

|               | Standaard Vico                                                                                                                                        |                                                                                                                                | Opties Vico                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIGVLAK       | <br>• 3-delig stalen ligvlak                                        | <br>• Telescopische bedverlenging tot 20 cm | <br>• 4-delig stalen ligvlak                                                     | <br>• 3-delig ligvlak met uitneembare volkunststof platen              | <br>• 4-delig ligvlak met uitneembare volkunststofplaten           | <br>• Voetverlenging tot 20 cm                                       |
| WIELEN        | <br>• Levina wielen Ø 125 mm, individueel geremd                     |                                                                                                                                | <br>• Cover design wielen Ø 125 mm, centraal geremd, met of zonder richtingswiel | <br>• Cover design wielen Ø 150 mm, centraal geremd, met richtingswiel | <br>• Integral wielen Ø 150 mm, centraal geremd, met richtingswiel | <br>• Verborgen wielen Ø 50 mm, centraal geremd                      |
| PANEELTYPE    | <br>• Midea paneel (enkel met Atmosphère- en Pollux onrusthekkens) |                                                                                                                                | <br>• Hypnos paneel                                                             | <br>• Felina paneel                                                   | <br>• Valentino paneel                                            | <br>• Stootwielen (niet op het Mideapaneel)<br>• Muurafstand houder |
| ONRUSTHEKKENS |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | <br>• Atmosphère onrusthekkens                                                 | <br>• Pollux onrusthekkens                                           | <br>• Trix onrusthekkens                                         | <br>• Trix onrusthekkens met 4de lat                               |
| BEDIENING     | <br>• Bedieningshendel                                            | <br>• Hoog/laag voetpedaal                | <br>• (anti-) Trendelenburgpedaal                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |
| EXTRA'S       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | <br>• Afdekkap onderwagen                                                      | <br>• Houten ombouw aan ligkader                                     | <br>• Decoratiestrip (voor- en achterprofiel van onderwagen)     | <br>• 6 kunststof accessoirehaakjes                                |